

RESMED

AutoSet CS™

POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE



Welcome Guide

Italiano

S9[™] | Series
More. Comfort.

Benvenuti

Grazie per aver scelto l'AutoSet CS. Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere interamente la guida introduttiva e informativa.




L'AutoSet CS in sintesi

L'AutoSet CS comprende i seguenti elementi:

- Apparecchio AutoSet CS
- Circuito respiratorio
- Alimentatore elettrico da 90 W
- Borsa da viaggio dell'S9
- Scheda SD
- Busta protettiva per scheda SD dell'S9.

I componenti opzionali comprendono:

- Umidificatore riscaldato H5i
- Circuito respiratorio standard
- Circuito respiratorio 3 m
- Circuito respiratorio SlimLine
- Circuito respiratorio riscaldato ClimateLine
- Circuito respiratorio riscaldato ClimateLine^{MAX}
- Alimentatore elettrico da 30 W (non supporta H5i)
- Pacco batteria Power Station II
- Convertitore CC/CC 24 V/90 W.

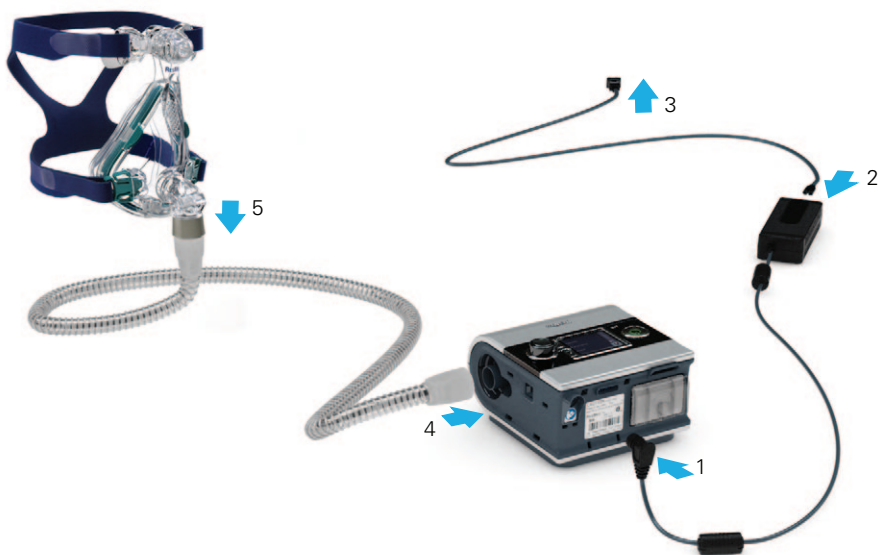

Configurazione

1. Connettere lo spinotto CC dell'alimentatore elettrico sul retro dell'AutoSet CS.
2. Connettere il cavo di alimentazione all'alimentatore elettrico.
3. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa di corrente.
4. Connettere un'estremità del circuito respiratorio all'uscita dell'aria.
5. Connettere la maschera assemblata all'estremità libera del circuito respiratorio.

Note:

- Per maggiori informazioni sull'assemblaggio della maschera, vedere la sua guida per l'utente.
- L'elenco delle maschere consigliate è disponibile sul sito www.resmed.com nella sezione Products (prodotti) alla voce Service & Support (assistenza e supporto).

AutoSet CS

Display a cristalli liquidi
Mostra i menu, le
schermate terapeutiche e
i promemoria.


**Pulsante di
avvio/stop**
Avvia o
interrompe la
terapia.


**Menu
Informazioni**
Consente di
visualizzare le
statistiche o di
uscire dal menu.


**Menu
Configurazione**
Consente di
apportare
modifiche alle
impostazioni
o di uscire dal
menu.


Selettore a pulsante
Ruotare il selettore
permette di scorrere i
menu e modificare le
impostazioni. Premere
il selettore consente di
entrare in un menu e
confermare la propria
scelta.


Legenda:


Schermata iniziale 


Livello
d'umidità 


Rampa 

Circuito
riscaldato 

Climate
Control 

Avvio/stop 

Selettore a
pulsante 

Menu
Configurazione 

Menu
Informazioni 


Presentazione dell'AutoSet CS

Il pannello di controllo dell'apparecchio AutoSet CS comprende un display a cristalli liquidi come pure un pulsante di avvio/stop, un selettore di regolazione a pulsante e i tasti di menu d'informazione e configurazione.


Regolazione della rampa

La rampa è il tempo che l'apparecchio deve impiegare per raggiungere la pressione terapeutica impostata rendendo più confortevoli le fasi iniziali del trattamento. Per impostare la rampa, procedere come segue:




1. Nella schermata iniziale (HOME), ruotare  fino a che viene visualizzata in blu la pagina RAMPA.




2. Premere . La selezione è evidenziata in arancione.




3. Ruotare  fino a che viene visualizzata la rampa desiderata.






4. Premere  per confermare la scelta.

Utilizzo della funzione di controllo della tenuta della maschera

La funzione di verifica della tenuta della maschera consente di accertare che la maschera sia stata indossata in modo corretto. Questa funzione eroga una pressione per un periodo di tre minuti prima dell'inizio della terapia, in modo che si possa verificare la tenuta della maschera ed eventualmente riposizionarla meglio in modo da ridurre al minimo le perdite d'aria.


1. Indossare la maschera come descritto nella sua guida per l'utente.
2. Nella schermata iniziale (Home), tenere premuto  per tre secondi. Sarà mostrata una delle seguenti schermate:

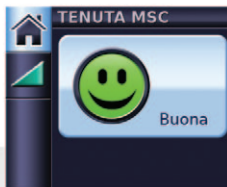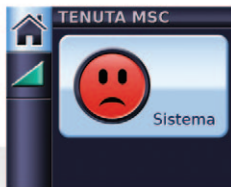

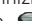
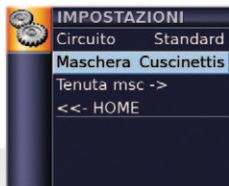
3. Se necessario, regolare maschera, cuscinetto della maschera e copricapo fino ad avere ottenuto una buona tenuta. Dopo tre minuti la pressione scenderà al valore impostato e la terapia avrà inizio. La verifica della tenuta della maschera può essere interrotta in qualsiasi momento premendo .


Selezione del tipo di maschera


Per selezionare il tipo di maschera, procedere come segue:

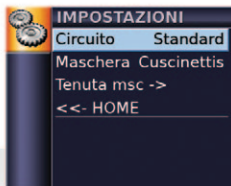


1. Premere . Verrà visualizzata la schermata IMPOSTAZIONI.



2. Ruotare  fino a che l'impostazione Maschera viene evidenziata in blu.

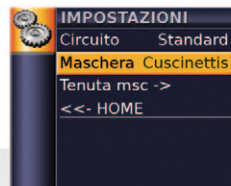


3. Premere . La selezione è evidenziata in arancione.




4. Ruotare  fino a che viene visualizzata la maschera desiderata.



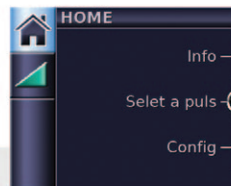

5. Premere  per confermare la scelta.



6. Premere  per tornare alla schermata iniziale (Home).



Per cominciare

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia connesso alla rete elettrica.
2. Regolare se necessario la durata della rampa.
3. Indossare la maschera come descritto nella sua guida per l'utente.
4. Per avviare la terapia basta respirare nella maschera e/o premere .
5. Coricarsi e sistemare il circuito respiratorio in modo che sia libero di muoversi durante i movimenti nel sonno.
6. Per interrompere in qualsiasi momento il trattamento, togliersi la maschera e/o premere .

Note:

- Se il medico ha abilitato la funzione SmartStart, l'apparecchio entra automaticamente in funzione non appena si respira nella maschera, e smette di funzionare non appena la maschera viene tolta.
- In caso d'interruzione dell'erogazione di potenza durante il trattamento, il dispositivo riavvia automaticamente la terapia appena viene ripristinata la corrente.

Visualizzazione delle schermate di trattamento

In base alla configurazione del sistema, dopo l'avvio della terapia sarà visualizzata una delle seguenti schermate di esempio:



- ✓ Umidificatore H5i



- ✓ Umidificatore H5i
- ✓ Circuito respiratorio riscaldato ClimateLine o ClimateLine^{MAX}
- ✓ Climate Control – Auto



- ✓ Umidificatore H5i
- ✓ Circuito respiratorio riscaldato ClimateLine o ClimateLine^{MAX}
- ✓ Climate Control – Manuale



- ✓ AutoSet CS standard senza accessori opzionali





- ✓ Dati ossimetrici tramite adattatore per ossimetro

In modalità ASV, le linee fisse sulla barra della pressione indicano la pressione minima e quella massima. In modalità CPAP, appare solo la pressione impostata.

Visualizzazione del menu Info

Il menu Info comprende una serie di schermate che mostrano la qualità del sonno, il report del sonno e le informazioni di assistenza.

Per visualizzare il menu Info, premere  nella schermata iniziale (HOME).

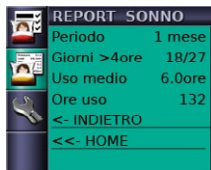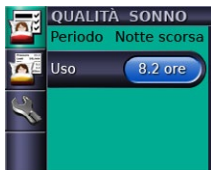

- ✓ Nella schermata Qualità sonno è sempre possibile visualizzare le ore di utilizzo durante l'ultima seduta e — se il medico ha abilitato l'opzione — i dati relativi alla tenuta della maschera e all'AHI.
- ✓ Per il Report del sonno, solo il periodo può essere modificato, gli altri valori sono di sola lettura.
- ✓ Nelle informazioni di Manutenzione sono visualizzate le ore di funzionamento dell'apparecchio (compresi i tempi di riscaldamento/raffreddamento per l'umidificatore) e le identificazioni del software.

Per ritornare alla schermata iniziale (HOME), premere .

Pulizia e manutenzione

Consultare le guide per l'utente della maschera e dell'umidificatore per istruzioni dettagliate sulla cura di questi componenti.

Operazioni quotidiane

Rimuovere il circuito respiratorio facendo presa sugli incavi per le dita sul manicotto. Appendere in luogo pulito e asciutto fino all'uso successivo.

Operazioni settimanali

1. Rimuovere il circuito respiratorio dall'apparecchio AutoSet CS e dalla maschera.
2. Lavare il circuito respiratorio in acqua tiepida utilizzando un detergente delicato.
3. Sciacquare bene ed appendere ad asciugare.
4. Prima dell'uso successivo, ricollegare il circuito respiratorio all'uscita dell'aria dell'apparecchio e alla maschera.

Operazioni mensili

1. Pulire la superficie esterna dell'AutoSet CS con un panno umido e un detergente delicato.
2. Verificare che il filtro dell'aria non sia forato o ostruito da sporcizia o polvere. Sostituire il filtro dell'aria se necessario.

Sostituzione del filtro dell'aria

Sostituire il filtro dell'aria ogni sei mesi (o più spesso se necessario).

1. Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria situato sul retro dell'AutoSet CS.
2. Rimuovere e gettare il vecchio filtro.
3. Inserire un nuovo filtro dell'aria ResMed assicurandosi che sia disteso nel coperchio del filtro dell'aria.
4. Riposizionare il coperchio del filtro dell'aria.

Coperchio del filtro dell'aria

Filtro dell'aria



Scheda SD

La dotazione comprende una scheda SD che consente di raccogliere i dati terapeutici dell'apparecchio AutoSet CS e trasferire le modifiche delle impostazioni decise dal medico.

Quando richiesto, disinserire l'apparecchio AutoSet CS dalla rete elettrica, rimuovere la scheda SD, inserirla nella sua busta protettiva e inviarla al proprio medico.

Estrazione della scheda

1. Premere la scheda SD per disinserirla.
2. Estrarre la scheda.
3. Inserire la scheda nella busta protettiva.
4. Recapitare la busta protettiva al medico attenendosi alle istruzioni.

Per istruzioni sulla rimozione e l'inserimento della scheda SD, vedere la busta protettiva per scheda SD dell'S9 in dotazione con l'apparecchio. Si prega di conservare la busta protettiva della scheda SD dell'S9 per un riutilizzo futuro.



Note:

- Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, si rimanda alla Guida informativa.
- Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, visitare il sito www.resmed.com.

368712/1 2012-02
S9 AutoSet CS

WELCOME
EURO



Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. **Distributed by:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **EC|REP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

S9 AutoSet CS, H5i, ClimateLine, SlimLine and SmartStart are trademarks of ResMed Ltd and and S9, ClimateLine and SmartStart are registered in U.S. Patent and Trademark Office.

© 2012 ResMed Ltd.

