

SIEMENS



Motion binax™

Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax
Istruzioni d'uso

www.bestsound-technology.com



Life sounds brilliant.

Indice

Benvenuti	4
<hr/>	
Gli apparecchi acustici	5
<hr/>	
Tipo di apparecchio	5
Imparare a conoscere gli apparecchi acustici	5
Componenti e nomi	6
Comandi	9
Impostazioni	11
Batterie	13
<hr/>	
Formato della batteria e consigli per l'uso	13
Sostituzione delle batterie	14
Ricarica delle batterie ricaricabili	15
Uso giornaliero	16
<hr/>	
Accensione e spegnimento	16
Inserimento e rimozione degli apparecchi acustici	18
Regolazione del volume	21
Cambio del programma di ascolto	22
Ulteriori regolazioni (opzionale)	23
Blocco dei comandi (opzionale)	23

Situazioni di ascolto particolari	24
Focalizzazione (opzionale)	24
Al telefono	26
Sistemi a loop induttivo per audiolesi	28
Ingresso audio (sistema FM)	29
Manutenzione e cura	31
Apparecchi acustici	31
Auricolari e tubicini	32
Manutenzione professionale	34
Ulteriori informazioni	35
Informazioni sulla sicurezza	35
Funzionalità wireless	35
Accessori	35
Simboli utilizzati in questo documento	36
Individuazione e risoluzione di problemi	36
Informazioni di assistenza tecnica	38
Informazioni specifiche del Paese	39

Benvenuti

Grazie per aver scelto i nostri apparecchi acustici come compagni di tutti i giorni. Come con ogni nuovo strumento, occorrerà qualche tempo per familiarizzarsi.

Unitamente al supporto fornito dall'audioprotesista, questa guida aiuta a comprendere i vantaggi che gli apparecchi acustici possono offrire nel migliorare la qualità della vita.

Per sfruttare al meglio questi vantaggi, si consiglia di indossare gli apparecchi acustici tutto il giorno, ogni giorno. Così facendo ci si abituerà rapidamente.



ATTENZIONE

È importante leggere attentamente queste istruzioni d'uso e il manuale per la sicurezza.

Rispettare le istruzioni di sicurezza per evitare danni o lesioni.

Gli apparecchi acustici

i

Queste Istruzioni d'uso descrivono le caratteristiche opzionali eventualmente presenti sugli apparecchi acustici.

Chiedere all'audioprotesista di indicare le funzionalità che si applicano al proprio modello di apparecchio acustico.

Tipo di apparecchio

Gli apparecchi acustici sono modelli retroauricolari (BTE, Behind-The-Ear). Un tubicino trasmette il suono dall'apparecchio acustico all'orecchio. Si tratta di apparecchi non destinati a bambini piccoli o persone mentalmente disabili.

Imparare a conoscere gli apparecchi acustici

È importante acquisire una certa dimestichezza con gli apparecchi acustici che si utilizzano. Tenere in mano gli strumenti e provare a usare i comandi per apprenderne l'ubicazione sullo strumento. Ciò permette di riconoscere al tatto i comandi da premere quando si indossa l'apparecchio acustico.

i

Se si incontrano difficoltà nel premere i comandi dell'apparecchio acustico mentre lo si porta, consultare l'audioprotesista per un eventuale uso del telecomando opzionale.

Componenti e nomi

Queste Istruzioni d'uso descrivono diversi tipi di apparecchi acustici. Servirsi delle figure seguenti per identificare il tipo di apparecchio acustico utilizzato.

Gli apparecchi acustici sono collegati a un gancio per l'orecchio e a un auricolare personalizzato oppure a un tubicino standard (LifeTube, ThinTube) e a un auricolare standard (LifeTip).

Motion SX, Motion SA



-
- | | |
|------------------------------------|--|
| ① Auricolare (LifeTip) | ⑥ Interruttore a bilanciere (comando) |
| ② Elemento di ritenuta (opzionale) | ⑦ Alloggiamento batteria (interruttore on/off) |
| ③ Tubicino (ThinTube) | ⑧ Contatto di carica (solo Motion SX) |
| ④ Gancio per l'orecchio | |
| ⑤ Fessure microfono | |
-

Motion PX



-
- | | |
|------------------------------------|--|
| ① Auricolare (LifeTip) | ⑥ Pulsante (comando) |
| ② Elemento di ritenuta (opzionale) | ⑦ Interruttore a bilanciere (comando) |
| ③ Tubicino (LifeTube) | ⑧ Contatto di carica (opzionale) |
| ④ Gancio per l'orecchio | ⑨ Alloggiamento batteria (interruttore on/off) |
| ⑤ Fessure microfono | |
-

È possibile utilizzare auricolari standard con un tubicino standard (LifeTube, ThinTube) o auricolari personalizzati con un gancio per l'orecchio e un tubicino.

Auricolari standard	Dimensioni
<input type="checkbox"/>  LifeTip aperto o chiuso	
<input type="checkbox"/>  LifeTip semiaperto	
<input type="checkbox"/>  LifeTip doppio	


La procedura di sostituzione degli auricolari standard e di pulizia del tubicino standard è semplice. Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Manutenzione e cura".

Auricolari personalizzati
<input type="checkbox"/> Esempi: 

Comandi

I comandi permettono ad esempio di regolare il volume o cambiare i programmi di ascolto. Gli apparecchi acustici dispongono di un interruttore a bilanciere oppure di un interruttore a bilanciere e di un pulsante.

È l'audioprotesista che provvede a programmare i comandi con le funzioni desiderate.

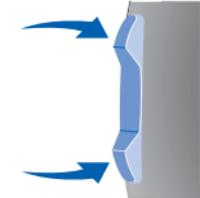Elemento di comando		Sinistra	Destra
Pulsante	 A diagram showing a hand with a finger pressing a blue button on the side of a grey hearing aid.	<input data-bbox="702 583 755 627" type="checkbox"/>	<input data-bbox="831 583 884 627" type="checkbox"/>
Interruttore a bilanciere	 A diagram showing a blue slider switch on the side of a grey hearing aid, with two blue arrows indicating its range of movement.	<input data-bbox="702 810 755 854" type="checkbox"/>	<input data-bbox="831 810 884 854" type="checkbox"/>



Gli apparecchi possono essere comandati anche tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone.

Funzione dell'interruttore a bilanciere	Sx	Dx
Premere brevemente:		
Programma su/giù	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volume alto/basso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livello generatore di suoni per acufene alto/basso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bilanciamento audio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selezione del fuoco (configuratore spaziale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mixer del suono (ingresso audio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pressione prolungata:		
Standby/accensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programma su/giù	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pressione molto prolungata:		
Standby/accensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sx = sinistra, Dx = destra

Funzione del pulsante	Sx	Dx
Premere brevemente:		
Cambio programma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pressione prolungata:		
Standby/accensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sx = sinistra, Dx = destra

Funzione del pulsante e interruttore a leva	Sx	Dx
Blocca / sblocca i comandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Blocco dei comandi".		

Sx = sinistra, Dx = destra

Impostazioni

Programmi di ascolto
1
2
3
4
5
6
Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Cambio del programma di ascolto".

Caratteristiche

- Ritardo di accensione** permette di inserire gli apparecchi acustici senza produrre fischi di interferenza.
Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Accensione e spegnimento".

- AutoPhone™** commuta automaticamente sul programma telefonico quando si avvicina all'orecchio il ricevitore del telefono.
Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Al telefono".

- Il **generatore di suoni per acufene** produce un rumore attenuato per rendere meno fastidioso il fenomeno dell'acufene.

- Per ricaricare le batterie negli apparecchi acustici tramite i **contatti di carica**, collocarli semplicemente nel caricatore. A ricarica ultimata, il caricatore provvede a deumidificare gli apparecchi acustici.

- La funzionalità **e2e wireless** permette di comandare contemporaneamente entrambi gli apparecchi acustici.
Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Funzionalità wireless".

Batterie

Quando la batteria inizia a scaricarsi, il suono si attenua o risuona un segnale di allarme. L'autonomia residua prima di dover sostituire o ricaricare la batteria dipende dal tipo di batteria.

Formato della batteria e consigli per l'uso

Contattare l'audioprotesista per chiedere il tipo di batterie consigliato.

Formato batteria:	13
-------------------	----

- Utilizzare sempre il formato di batteria corretto per gli apparecchi acustici.
- Rimuovere le batterie se non si intende utilizzare l'apparecchio acustico per diversi giorni.
- Portare sempre con sé delle batterie di ricambio.
- Rimuovere subito le batterie scariche e attenersi alle disposizioni locali in materia di smaltimento.

Sostituzione delle batterie

Rimozione della batteria:

- ▶ Aprire l'alloggiamento della batteria.



- ▶ Utilizzare il bastoncino magnetico per estrarre la batteria. Il bastoncino magnetico è un accessorio ordinabile separatamente.



Inserimento della batteria:

- ▶ Se la batteria presenta una pellicola protettiva, rimuoverla solo al momento di utilizzarla.



- ▶ Inserire la batteria con il simbolo "+" rivolto verso l'alto (fare riferimento alla figura).



- ▶ Chiudere con attenzione l'alloggiamento della batteria. Se si avverte resistenza, significa che la batteria non è stata inserita correttamente.

Non forzare la chiusura dell'alloggiamento in quanto potrebbe danneggiarsi.

Ricarica delle batterie ricaricabili

Caricare le batterie ricaricabili prima di utilizzarle per la prima volta.

- ▶ Attenersi alle istruzioni d'uso del caricatore per caricare le batterie.

Dopo molti cicli di carica, la durata delle batterie può ridursi. In questo caso, sostituire la batteria ricaricabile con una nuova. Seguire a tal fine le istruzioni di sostituzione per le batterie.

Uso giornaliero

Accensione e spegnimento

Per accendere o spegnere l'apparecchio acustico vi sono le opzioni seguenti.

Tramite alloggiamento batteria:

- ▶ Accensione: Chiudere l'alloggiamento della batteria. Vengono impostati il volume e il programma acustico **predefiniti**.
- ▶ Spegnimento: Aprire l'alloggiamento batteria fino al primo arresto.

Tramite pulsante o interruttore a bilanciere:

- ▶ Spegnimento o accensione: tenere premuto per qualche secondo il pulsante o l'interruttore a bilanciere. Fare riferimento alla sezione "Comandi" per le impostazioni dei comandi.

Dopo l'accensione restano impostati il volume e il programma di ascolto utilizzati **in precedenza**.

Tramite telecomando:

- ▶ Seguire le istruzioni nella guida utente del telecomando.

Dopo l'accensione restano impostati il volume e il programma di ascolto utilizzati **in precedenza**.

Quando si porta un apparecchio acustico, un segnale di avviso può indicare se un apparecchio viene acceso o spento.

Quando è attivato il **ritardo di accensione**, l'apparecchio acustico si accende dopo diversi secondi. Durante questo intervallo di tempo è possibile inserire nell'orecchio l'apparecchio acustico senza avvertire dei fischi fastidiosi.

Il "ritardo di accensione" può essere attivato dall'audioprotesista.

Inserimento e rimozione degli apparecchi acustici

L'apparecchio acustico è stato finemente regolato per l'orecchio sinistro e l'orecchio destro. Appositi indicatori colorati indicano il lato:

- rosso = orecchio destro
- blu = orecchio sinistro




Motion SX, Motion SA



Motion PX

Inserimento dell'apparecchio acustico:

- ▶ Mantenere il tubicino vicino all'auricolare.
- ▶ Introdurre delicatamente l'auricolare nel canale uditivo ①.
- ▶ Muovere leggermente l'auricolare su e giù affinché risulti posizionato correttamente nell'orecchio. Aprire e chiudere la bocca per evitare l'accumulo di aria nel canale uditivo.
- ▶ Sollevare l'apparecchio acustico e passarlo sopra la parte superiore dell'orecchio ②.

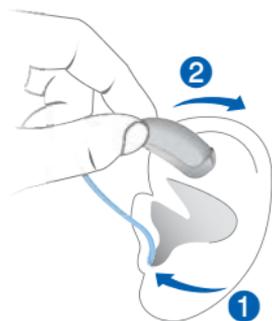



ATTENZIONE

Rischio di lesione!

- ▶ Inserire l'auricolare con cura e non troppo in profondità.



- Può essere utile inserire l'apparecchio acustico di **destra** con la mano **destra** e l'apparecchio di **sinistra** con la mano **sinistra**.
- Se sorgono difficoltà nell'inserimento dell'auricolare, usare l'altra mano per tirare leggermente verso il basso il lobo dell'orecchio. Questo movimento permette di aprire meglio il canale uditivo facilitando l'inserimento dell'auricolare.


Il gancio opzionale per la conca dell'orecchio permette di mantenere stabilmente in posizione l'auricolare. Per posizionare il gancio per la conca dell'orecchio:

- ▶ piegare il gancio e posizionarlo con attenzione sul fondo del padiglione auricolare (fare riferimento alla figura).



Rimozione di un apparecchio acustico:

- ▶ Sollevare l'apparecchio acustico e passarlo sopra la parte superiore dell'orecchio ①.
- ▶ Mantenendo fermo il tubicino vicino all'auricolare, estrarre delicatamente l'auricolare ②.

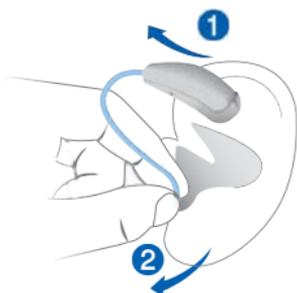

ATTENZIONE

Rischio di lesione!

- ▶ In casi rarissimi, l'auricolare potrebbe non levarsi dall'orecchio quando si toglie l'apparecchio acustico. Se si verifica questo, l'auricolare deve essere rimosso da un medico o da un audioprotesista.

Pulire e asciugare l'apparecchio acustico dopo l'uso.
Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Manutenzione e cura".

Regolazione del volume

Gli apparecchi acustici regolano automaticamente il volume in base alle condizioni di ascolto.

- ▶ Se si preferisce regolare il volume manualmente, premere l'interruttore a bilanciere oppure servirsi di un telecomando.

Fare riferimento alla sezione "Comandi" per l'impostazione dell'interruttore a bilanciere.

Un segnale acustico opzionale può indicare il cambiamento di volume. Una volta raggiunto il valore massimo o minimo, può essere emesso un segnale acustico opzionale.

Cambio del programma di ascolto

Gli apparecchi acustici regolano automaticamente il suono in base alle condizioni di ascolto.

Essi possono inoltre disporre di svariati programmi di ascolto che permettono di modificare il suono, se lo si desidera. Un segnale opzionale può indicare il cambiamento di programma.

- Per cambiare il programma acustico, premere il pulsante o l'interruttore a bilanciere, oppure servirsi del telecomando.

Fare riferimento alla sezione "Comandi" per l'impostazione dei comandi. Fare riferimento alla sezione "Impostazioni" per un elenco dei programmi di ascolto utilizzati.



Se è attivata la funzione AutoPhone, il programma acustico passa automaticamente al programma telefonico quando si avvicina il ricevitore all'orecchio.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Informazioni sul telefono".

Ulteriori regolazioni (opzionale)

I comandi degli apparecchi acustici permettono anche di modificare, ad esempio, il bilanciamento audio o il livello del generatore di suono per acufene. Il bilanciamento audio regola a piacere il livello delle frequenze alte e basse.

Fare riferimento alla sezione "Comandi" per l'impostazione dei comandi.

Blocco dei comandi (opzionale)

È possibile bloccare i comandi per evitare il rischio di operazioni accidentali. Quando si bloccano i comandi vengono disattivati sia il pulsante che l'interruttore a bilanciere.

- ▶ Per **bloccare** i comandi, tenere premuta la parte **superiore** dell'interruttore a bilanciere. Premere contemporaneamente il pulsante sullo stesso apparecchio acustico per 3 secondi.
- ▶ Per **sbloccare** i comandi, tenere premuta la parte **inferiore** dell'interruttore a bilanciere. Premere contemporaneamente il pulsante sullo stesso apparecchio acustico per 3 secondi.

Nella sezione "Comandi" è indicato se questa funzione è configurata o meno per gli apparecchi acustici.

Situazioni di ascolto particolari

Focalizzazione (opzionale)

Il configuratore spaziale consente di regolare le preferenze di ascolto quando si desidera focalizzarsi più direttamente sulla conversazione dell'interlocutore oppure quando si vuole prestare attenzione a uno spazio ambientale più ampio.

Si possono scegliere differenti livelli – dal "fuoco puntato in posizione frontale" (figura di sinistra) alla "posizione centrale" (figura al centro), fino alla posizione di "ascolto a 360° (figura di destra).



Prerequisiti:

- È necessario indossare due apparecchi acustici.
- Su uno degli apparecchi acustici l'interruttore a bilanciere deve essere impostato per il configuratore spaziale.

Fare riferimento alla sezione "Comandi" per l'impostazione dell'interruttore a bilanciere.

Con un adeguato telecomando e una app per smartphone si avranno ancora più opzioni di controllo.

Impostazione manuale della focalizzazione:

- ▶ Se si dispone di diversi programmi di ascolto, passare al programma di ascolto 1.
- ▶ Premere l'interruttore a bilanciere impostato per questa funzione.
Come impostazione predefinita è attivo il livello centrale.
- ▶ Premere l'interruttore a bilanciere superiore per concentrare il fuoco più davanti a sé, oppure quello inferiore per allargarlo all'ambiente circostante.

Questa funzione è prevista per situazioni di ascolto particolari e temporanee. Gli apparecchi acustici tornano automaticamente all'impostazione automatica del programma 1 se l'ambiente acustico cambia in modo significativo oppure dopo che sono trascorsi 45 minuti. È anche possibile uscire dalla modalità del configuratore spaziale.

Per uscire dalla modalità del configuratore spaziale:

- ▶ Impostare alternativamente il livello minimo o massimo.
Un segnale acustico opzionale può indicare il livello minimo e massimo.
- ▶ Impostare un ulteriore livello.
Viene emesso lo stesso segnale acustico del cambiamento di programma, per indicare che si è usciti dalla modalità del configuratore spaziale.

Al telefono

Quando si telefona, mantenere il ricevitore leggermente sopra l'orecchio. L'apparecchio acustico e il ricevitore del telefono devono essere allineati. Girare leggermente il ricevitore in modo che l'orecchio non sia completamente coperto.



Programma telefonico

Quando si usa il telefono può essere preferibile impostare un volume ben preciso. Richiedere all'audioprotesista di configurare un programma per l'uso del telefono.

- ▶ Attivare il programma telefonico ogniqualvolta si parla al telefono oppure la commutazione automatica di programma.

Nella sezione "Impostazioni" è indicato se il programma telefonico o la commutazione automatica di programma sono configurati o meno per gli apparecchi acustici.

Commutazione automatica del programma (AutoPhone)

L'apparecchio acustico può selezionare **automaticamente** il programma telefonico quando si avvicina all'orecchio il ricevitore del telefono. Al termine della conversazione, allontanare il telefono dall'apparecchio acustico e la modalità microfono verrà ripristinata automaticamente.

Se si desidera utilizzare questa funzione, chiedere all'audioprotesista di:

- Attivare la funzione di AutoPhone.
- Controllare il campo magnetico prodotto dal ricevitore del telefono.

Per commutare automaticamente il programma, l'apparecchio acustico rileva il campo magnetico del ricevitore del telefono. Non tutti i telefoni producono un campo magnetico abbastanza intenso da attivare la funzione AutoPhone. In questo caso si può ricorrere al magnete Siemens AutoPhone, disponibile come accessorio, e avvicinarlo al ricevitore del telefono.

Vedere le istruzioni d'uso del magnete AutoPhone per istruzioni inerenti il posizionamento del magnete.



NOTA

Utilizzare solo il magnete AutoPhone approvato.
Richiedere questo accessorio all'audioprotesista.

Sistemi a loop induttivo per audiolesi

Alcuni telefoni e luoghi pubblici, come i teatri, propongono il segnale audio (musica e voce) tramite un sistema a loop induttivo. Con questo sistema, l'apparecchio acustico può ricevere direttamente il segnale desiderato senza i disturbi e il rumore di fondo ambientale.

È possibile riconoscere i sistemi a loop induttivo perché sono segnalati con appositi pannelli.



Richiedere all'audioprotesista di configurare un programma telecoil.

- ▶ Attivare il programma telecoil qualora ci si trovi in un ambiente che dispone di un sistema ad induzione magnetica.

Nella sezione "Impostazioni" è indicato se per gli apparecchi acustici è configurato un programma telecoil.

Programma telecoil e telecomando



NOTA

Per gli strumenti con connettività wireless: quando il programma telecoil è attivo, il telecomando può causare un rumore pulsante.

- ▶ Utilizzare il telecomando ad una distanza superiore a 10 cm (4 inches).

Ingresso audio (sistema FM)

Tramite un ingresso audio è possibile collegare l'apparecchio acustico a un sistema FM. Un sistema FM è costituito da un trasmettitore e un ricevitore. Esso capta il parlato alla fonte della voce (tramite un microfono separato) e trasmette direttamente il suono all'apparecchio acustico.

Il segnale risulta più chiaro e non risente della cattiva acustica dell'ambiente. Questo può rivelarsi utile per le persone adulte in situazioni di ascolto difficili, nonché per i bambini nelle aule scolastiche.

La maggior parte dei sistemi FM sono in grado di abbinarsi a dispositivi audio come i lettori MP3.

Note:

- L'alloggiamento batteria con ingresso audio è disponibile come accessorio solo per gli apparecchi acustici Motion SA.
In alternativa si può usare un dispositivo di streaming audio (accessorio) dotato di un connettore per ricevitori FM.
- Chiedere all'audioprotesista di configurare gli apparecchi acustici, ad esempio:
 - Regolare il mixing del segnale audio in ingresso con i suoni circostanti.
 - Configurare l'interruttore a bilanciere in modo da poter scegliere tra solo segnale di ingresso audio, solo suoni ambientali oppure una combinazione dei due segnali.



AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica!

Per prevenire i rarissimi casi di scossa elettrica:

- ▶ utilizzare l'ingresso audio solo con dispositivi che funzionano a batteria o con sistemi FM.



AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica!

- ▶ Connettere l'ingresso audio solo a dispositivi conformi agli standard IEC 60065 (norma IEC per dispositivi audio, video e altre apparecchiature elettroniche).

Manutenzione e cura

Per evitare i danni, è importante avere cura degli apparecchi acustici e seguire alcune regole di base, che entreranno rapidamente a far parte della routine quotidiana.

Apparecchi acustici

Asciugatura e conservazione

- ▶ Asciugare l'apparecchio durante la notte.
- ▶ Richiedere all'audioprotesista i prodotti di asciugatura consigliati.
- ▶ Durante periodi prolungati di non utilizzo, conservare in un luogo asciutto gli apparecchi acustici con il compartimento batteria aperto e le batterie rimosse per evitare i danni dovuti all'umidità.

Pulizia

Gli apparecchi acustici presentano un rivestimento protettivo. Tuttavia, se non vengono puliti regolarmente, possono danneggiarsi o anche provocare lesioni.

- ▶ Pulire quotidianamente gli apparecchi acustici con un tessuto morbido e asciutto.
- ▶ Non usare mai acqua ed evitare di immergerli.
- ▶ Non esercitare mai pressione durante la pulizia.
- ▶ Rivolgersi all'audioprotesista per i prodotti di pulizia consigliati, kit di manutenzione particolari e ulteriori informazioni su come mantenere gli apparecchi acustici in eccellenti condizioni operative.



Auricolari e tubicini

Negli auricolari può accumularsi il cerume. L'effetto sarà un peggioramento della qualità sonora.

- Per gli apparecchi acustici con un tubicino standard (LifeTube, ThinTube):

Pulire gli auricolari ogni giorno e i tubicini quando necessario.

Sostituire gli auricolari e i tubicini ogni 3 - 6 mesi circa o anche prima se si notano danni o altre variazioni.

- Per gli apparecchi acustici con gancio per l'orecchio:

Pulire gli auricolari ogni giorno.


Richiedere all'audioprotesista di pulire i tubicini o di sostituire gli auricolari e i tubicini quando necessario.

Pulizia degli auricolari

- ▶ Pulire l'auricolare con un panno morbido e asciutto subito dopo averlo tolto dall'orecchio.

Ciò impedisce che il cerume secchi e si indurisca.

- ▶ Non utilizzare acqua corrente e non immergere l'auricolare in acqua.

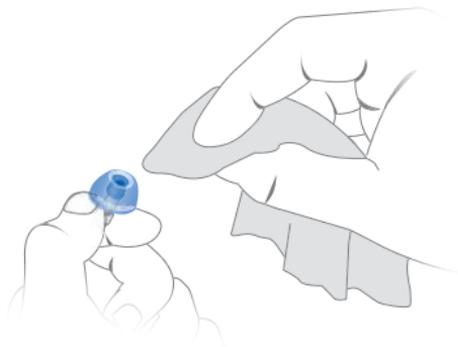


Pulizia dei tubicini

Non utilizzare acqua corrente e non immergere il tubicino in acqua.

Per pulire i tubicini standard (LifeTube, ThinTube) si può usare un filo di pulizia speciale. Richiedere questo accessorio all'audioprotesista.

- ▶ Svitare il tubicino.
- ▶ Inserire con cautela il filo di pulizia nel tubicino ①.
- ▶ Far passare il filo di pulizia lungo tutta la lunghezza del tubicino ②.

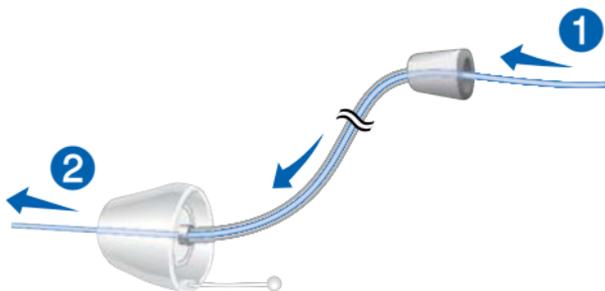

- ▶ Rimuovere tutti i residui di cerume o altra materia che fuoriesce dal tubicino.
- ▶ Estrarre il filo di pulizia dal tubicino.
- ▶ Avvitare il tubicino sull'apparecchio acustico.



ATTENZIONE

Rischi di danni al canale uditivo e al timpano.

- ▶ Non dimenticare di rimuovere il filo di puliziaLife dal tubicino prima di ricollegare quest'ultimo all'apparecchio acustico.


Sostituzione degli auricolari standard (LifeTip)

- ▶ Estrarre l'auricolare usato e innestare il nuovo.



Sostituzione dei tubicini standard (LifeTube, ThinTube)

- ▶ Svitare il tubicino usato e avvitare il nuovo.

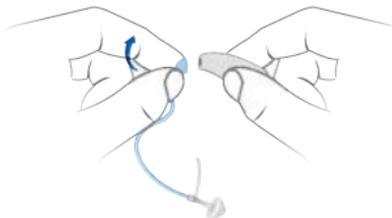

Manutenzione professionale

L'audioprotesista può effettuare un ciclo di pulizia e manutenzione professionale.

Gli auricolari personalizzati e i filtri paracerume devono essere sostituiti da un professionista.

Chiedere all'audioprotesista un consiglio personalizzato riguardo alla frequenza della manutenzione.

Ulteriori informazioni

Informazioni sulla sicurezza

Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni di sicurezza fornite con il dispositivo.

Funzionalità wireless

Gli apparecchi acustici sono dotati di funzionalità wireless. Ciò consente di sincronizzarli tra loro:

- se si modifica il volume o il programma in un apparecchio, l'altro viene modificato automaticamente.
- Entrambi gli apparecchi si adattano automaticamente e simultaneamente alla condizione di ascolto.

La funzionalità wireless permette di utilizzare un telecomando.

Accessori

Il tipo di accessori disponibili dipende dal tipo di apparecchio. Esempi possibili: un telecomando, un dispositivo per lo streaming audio o una app per smartphone da usare come telecomando.

Consultare l'audioprotesista per ulteriori informazioni.

Simboli utilizzati in questo documento



Indica una situazione che potrebbe causare lesioni lievi, moderate o gravi.



Indica possibili danni materiali.



Avvisi e suggerimenti su come gestire al meglio il dispositivo.

Individuazione e risoluzione di problemi

Problema e soluzioni possibili

Suono debole.

- Aumentare il volume.
 - Sostituire o ricaricare la batteria esaurita (a seconda del tipo di batteria).
 - Pulire o sostituire il tubicino e l'auricolare.
-

L'apparecchio acustico emette fischi.

- Reinscrivere l'auricolare fino a posizionarlo correttamente.
 - Diminuire il volume.
 - Pulire o sostituire l'auricolare.
-

Suono distorto.

- Diminuire il volume.
 - Sostituire o ricaricare la batteria esaurita (a seconda del tipo di batteria).
 - Pulire o sostituire il tubicino e l'auricolare.
-

Problema e soluzioni possibili

L'apparecchio acustico emette toni di segnalazione.

- Sostituire o ricaricare la batteria esaurita (a seconda del tipo di batteria).
-

L'apparecchio acustico non funziona.

- Accendere l'apparecchio acustico.
 - Chiudere completamente con delicatezza l'alloggiamento della batteria.
 - Sostituire o ricaricare la batteria esaurita (a seconda del tipo di batteria).
 - Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente.
 - Il ritardo di accensione è attivo. Attendere alcuni secondi e riprovare.
-

Consultare l'audioprotesista in caso di ulteriori problemi.

Informazioni di assistenza tecnica

Numeri di serie

Sinistra:

Destra:

Date interventi

1:

2:

3:

4:

5:

6:

Audioprotesista.

Data di acquisto:

Informazioni specifiche del Paese

Manufactured by Sivantos GmbH
under Trademark License of Siemens AG.



Legal Manufacturer

Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany
Phone +49 9131 308 0

Document No. A91SAT-02508-99T01-7200 IT
Order/Item No. 109 313 90 | Master Rev01, 12.2014
© Siemens AG, 02.2015

www.bestsound-technology.com