

müster
PROFESSIONAL

BEAUTY DIVISION

VI EDITION

MÜSTER & DIKSON S.p.A.

Un'azienda dinamica da più di 40 anni al costante servizio della bellezza, che studia, produce ed agisce per offrire un servizio sempre migliore ed una gamma di prodotti di qualità superiore.

Forte di una moderna struttura produttiva, sviluppata in 6 stabilimenti per un'area coperta di 50.000 mq. (s.c.), MÜSTER & DIKSON S.p.A. può garantire la serietà e la prontezza di un'organizzazione articolata, attiva e caratterizzata da una gestione capillare del lavoro.

L'azienda, che è nata e risiede in Italia dove raccoglie ampi consensi dalla clientela, opera anche internazionalmente, esportando in più di 60 Paesi nel mondo. Queste prerogative, unite a una dinamica organizzazione commerciale ed alla capillare distribuzione, rendono MÜSTER & DIKSON S.p.A. un vero e proprio punto di riferimento per il settore.



FACE young and luminous

Beauty Oxygen	2	Comby 8	14
Face Studio + Unique	6	Accessori	17
H.F. Synthesis	11		
iFace	12		

DEPY sweet and delicate

Polaris	22	Flash-Bend	37
X-Pulsar	26	Complex	38
Follow Me	30	Mixing Advantage	40
Epylab	34	Accessori	41
Quickly Plus	36		

BODY beauty and harmony

Optima 800 kHz	44	Reducer	72
Body Kiss	47	Tone Up	73
Soft & Solve	49	Slim Press	74
Optima Total Cavity	52	Press Light	76
Modeling	54	In Shape	78
Benexere	56	Power Tone	80
Beauty Reducer	59	Fisiosaune	82
Beauty Partner	62	Termocoperte	84
Perfect Beauty	65	Accessori	85
Check In	68		

EQUIPMENT new look for professional Institutes

Cerette	91	Manitù	108
Sterilizzatori	98	Pododense	109
Fornetti unghie	99	Nails	110
Lenti	101	Lettini	112
Vaporizzatori	105	Carrelli	123
Frese	107	Seggiolini	125
Rotax	107	Cromoterapia	126

Beauty Oxygen

Elisir di Giovinezza

Ossigeno

Radio Frequenza

Soft Peeling (Micro Dermoabrasione)

L'ossigeno è ciò che ci permette di vivere. Se si pensa a questo si può immediatamente intuire l'importanza che ha l'ossigeno per un corpo sano. Ogni cellula del nostro corpo ha bisogno di ossigeno. Il processo di invecchiamento della pelle dipende anche dal livello di ossigeno che essa contiene. Il Trattamento all'ossigeno si basa sull'applicazione di ossigeno puro nella pelle; col passare degli anni infatti i depositi di ossigeno nel derma diminuiscono.

Beauty Oxygen favorisce il recupero dell'elasticità, rallenta l'invecchiamento e stimola la rigenerazione del collagene, che impedisce la flaccidezza e dà tono, compattezza e luminosità all'epidermide: EFFETTO BENESSERE.

Beauty Oxygen: un innovativo sistema per trattamenti specifici viso, collo e décolleté che contrasta quelli che sono più comunemente definiti i "segni" dell'invecchiamento e consente di eseguire trattamenti personalizzati per favorire il ringiovanimento e la corretta idratazione della pelle.

Con l'età, l'ossigeno diminuisce soprattutto nelle cellule del viso, che subisce un calo maggiore dei suoi livelli, causando una pelle grinzosa e pallida. L'uso di Beauty Oxygen attraverso un sistema di flusso, abbinato a specifici prodotti, dà alla pelle una nuova vita.

Beauty Oxygen: un'apparecchiatura da sogno che impiega la sinergia di TRE differenti tecnologie:

- Ossigeno
- Radio Frequenza
- Soft Micro Dermoabrasione

Facile da utilizzare: ottimi risultati in breve tempo. Dopo l'applicazione, la pelle appare subito distesa e nutrita, riduzione dei tipici segni dell'età, degli effetti negativi di prolungate esposizioni al sole e delle aggressioni degli agenti atmosferici.

Beauty Oxygen permette di intervenire su casi fino ad oggi giudicati difficili anche per l'estetista. Un mix di delicati trattamenti, non invasivi, che dosati nel modo corretto regalano al viso una nuova giovinezza.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Beauty Oxygen

Elisir di Giovinezza

Per i trattamenti di ringiovanimento e di benessere vengono impiegati metodi quali: nuovissimo sistema di **Micro Dermoabrasione - Ossigeno - Radio Frequenza**.

Soft Micro dermoabrasione - Questa nuova metodica, priva di controindicazioni, è facilmente eseguibile dall'operatore estetico senza essere invasiva e traumatica. Tale metodologia è riconosciuta come efficace dai principali centri estetici e i risultati raggiunti ne fanno un sistema notevolmente evoluto rispetto ai tradizionali metodi. L'azione del suo manipolo permette un lavoro uniforme e garantisce l'asportazione degli strati epidermici superficiali, favorendo l'aumento del ricambio cellulare del tessuto trattato e una migliore permeabilità della cute stessa ed il conseguente maggior assorbimento dei prodotti cosmetici che vengono utilizzati durante il trattamento.

Radio Frequenza: utilizzando un'onda diatermica stimola alcuni processi naturali quali la produzione di Collagene, Elastina e Acido Jaluronico incrementando la loro azione per ottenere un riequilibrio di tutte le zone trattate.

L'Ossigeno è un trattamento non invasivo, privo di effetti collaterali e assolutamente indolore che ha un grande effetto rigenerante, rinvigorente e rassodante. Grazie alle sue proprietà, stimola la respirazione cellulare, per cui la pelle appare subito più tonica, compatta e luminosa. Riduce le irritazioni, ottimo lenitivo e antibatterico.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 230 Vca 50 - 60 Hz.
Assorbimento: MAX. 50 WATT



MECCANISMO D'AZIONE

OSSIGENO

L'impiego di ossigeno puro favorisce la microcircolazione ed il metabolismo cutaneo. In termini pratici, invecchiamento, stress, inquinamento, malattie, sono tutti fattori che agiscono negativamente sui microcapillari avviando un processo di degradazione del collagene e dell'elastina: ossigenare la pelle vuol quindi dire "rivascolarizzarla" rendendola più sana, tonica, luminosa e morbida. Se ne deduce che il grande successo che questa tecnica sta riscuotendo in tutto il mondo è legato sia al potere dell'ossigeno stesso che all'azione dei prodotti specifici impiegati.

Effetti Radio Frequenza a livello dermico:

Miglioramento della microcircolazione cutanea con incremento dell'ossigenazione tissutale.

Incremento della permeabilità delle membrane citoplasmatiche, delle cellule dello strato basale con conseguente incremento delle reazioni biochimiche in generale.

Incremento dell'idratazione, grazie ai fenomeni osmotici attivati dall'effetto di compressione e decompressione dei liquidi interstiziali.

Micromassaggio: effetto meccanico

Termico: modificazione della temperatura

Chimico: migrazione di sostanze collagene, eliminazione di gas, distruzione di batteri.

Trattamento delle rughe

La cute mantiene la sua elasticità grazie a particolari proteine adibite a questo scopo. Con l'avanzare dell'età o in condizioni di non perfetto benessere possono comparire fenomeni depressivi cutanei che prendono il nome di RUGHE.

La causa principale è da attribuirsi ad una riduzione del metabolismo di mantenimento cutaneo ove le cellule tendono a stratificarsi sull'epidermide impedendo la trasformazione e lo sviluppo di nuove cellule. Un tempestivo intervento con la RADIO FREQUENZA può limitare questo fenomeno e ritardare, se non impedire, la sua ingravescenza.

MEMORY CARD

Beauty Oxygen memorizza su Memory Card una serie di programmi e trattamenti.

MERCHANDISING

Supporti pubblicitari per la vendita



Art. 99177
Roto-Banner
80x210 cm



Kit lifty antiage

Art. 40000589

Il kit contiene un trattamento completo per
6 APPLICAZIONI IN ISTITUTO
+ IL PRODOTTO DOMICILIARE:

- n. 6 Siero Ossigeno Attivo Effetto Antiage – 9ml
- n. 1 Maschera Antiage – 150ml
- n. 1 Crema Viso Antiage - Autocura – 50ml

Kit nutritive - iperidratante

Art. 40000590

Il kit contiene un trattamento completo per
6 APPLICAZIONI IN ISTITUTO
+ IL PRODOTTO DOMICILIARE:

- n. 6 Siero Ossigeno Attivo Effetto Idratante – 9ml
- n. 1 Maschera Nutritiva Iperidratante – 150ml
- n. 1 Crema Viso Nutritiva Iperidratante - Autocura – 50ml

Accessori [pag. 17-21]

- n. 1 art. 9935 – Manipolo porta testina abrasiva (Solo manipolo).
- n. 1 art. 9936S – Testina abrasiva, finitura leggera, completa di filtro.
- n. 1 art. 9937S – Testina abrasiva, finitura media, completa di filtro.
- n. 1 art. 9938S – Testina abrasiva, finitura grossa, completa di filtro.
- n. 1 art. 9939S – Testina in gomma per massaggio.
- n. 1 art. 9727 – Interruttore a pedale completo di cavo e spinotto.
- n. 1 art. 99153 – Penna Touch Screen
- n. 1 art. 9941 – Tubetto di connessione aspirazione dermoabrasione, con attacco rapido.
- n. 1 art. 9714 – Tubo per funzione spray.
- n. 1 art. 99176 – Aero-Beauty Oxygen
- n. 1 art. 99186 – Manipolo Bipolare Radio Frequenza Viso, aree piccole
- n. 10 art. 99200 – Memory Card
- n. 1 art. 40000589 – Kit Lifty antiage
- n. 1 art. 40000590 – Kit nutritive - iperidratante

antiage treatments

SIERO OSSIGENO ATTIVO

Specifico siero Antiage con Argilene Peptide, dall'azione simile al botulino, miscelata con Plancton Marino sviluppatore di Ossigeno Attivo, unita al flusso generato dall'apparecchio, producono un effetto lifting e rassodante riducendo la formazione di linee sottili d'espressione e rughe causate dalla contrazione continua dei muscoli del viso. L'Allantoina inoltre svolge un'importante azione dermoprotettiva e lenitiva.



9ml

MASCHERA ANTIAGE ELASTICIZZANTE RESTITUTIVA

La maschera, con complesso a base di Fucosio per un trattamento idratante ed elasticizzante "Long Lasting", tonifica l'epidermide grazie ad oli trattati ed ingredienti attivi che rallentano i fenomeni di invecchiamento cutaneo.



150 ml

CREMA VISO ANTIAGE - AUTOCURA

La Crema Viso Antiage a base di Cellule Staminali, complesso a base di Fucosio e con Vitamina E, è di importante supporto al trattamento eseguito in Istituto. Contrasta attivamente i segni d'invecchiamento e la formazione delle rughe grazie ad una profonda azione energizzante e anti radicali liberi.



50 ml

nutritive treatments

SIERO OSSIGENO ATTIVO

Specifico siero Nutriente e Iperidratante con Aosaine, complesso derivante dalle alghe Marine che, miscelata con Plancton Marino sviluppatore di Ossigeno Attivo, unita al flusso generato dall'apparecchio, producono un effetto Iperidratante e Nutriente generando idratazione profonda con un effetto conseguente di maggior tonicità e luminosità. L'Allantoina inoltre svolge un'importante azione dermoprotettiva e lenitiva.



9ml

MASCHERA ANTI-STRESS

La maschera, con Mirtillo, Hamamelis e Zinco Micronizzato, attenua le irritazioni della cute, lasciando la pelle luminosa e decongestionata.



150 ml

CREMA VISO IPERIDRATANTE - AUTOCURA

La Crema Viso Iperidratante con estratto di geranio Rosa e Olio di Crusca di Riso, è un vero e proprio concentrato di sostanze funzionali, atte a proteggere ed idratare la pelle, nutrendola profondamente.



50 ml

Face Progress Unique e Face Studio



Art. 9075 Face Studio

2 “riuniti viso” che mettono a disposizione dell'operatore estetico un'ampissima gamma di trattamenti.



Art. 9089 Unique



Predisposizione per lampada a lente autoilluminante.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presca di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Face Progress Unique

Ultrasuono 25KHz con applicatore a lama (solo Unique)

Sfruttando l'azione pulsata degli Ultrasuoni, si favorisce l'aumento nutritivo dei capillari interessati dal trattamento (iperemia) stimolandone la circolazione localizzata. Contribuisce al "turn over" cellulare, apportando un benefico contributo all'azione idratante della pelle che apparirà visibilmente tonificata, luminosa e dall'effetto setoso al tatto.

Invertendo il flusso della corrente biodinamica integrata favorisce l'assorbimento e la corretta distribuzione di opportuni prodotti cosmetici.

10 programmi suddivisi in 3 fasi di lavoro e 4 trattamenti specifici elaborati per facilitare la selezione del trattamento più idoneo:

PROGR. 1 Pulizia viso: peeling profondo + massaggio iperdistensivo e veicolazione + vibromassaggio.

PROGR. 2 Pelle disidratata: peeling medio + massaggio iperdistensivo e veicolazione + vibromassaggio stimolante.

PROGR. 3 Pelle grassa: peeling + massaggio iperdistensivo e veicolazione + vibromassaggio drenante.

PROGR. 4 Pelle secca (asfittica): peeling profondo + vibro-massaggio stimolante + massaggio iperdistensivo.

PROGR. 5 Pelle senescente (iperemia): peeling profondo + vibro-massaggio stimolante + massaggio iperdistensivo.

PROGR. 6 Decollète: peeling medio + massaggio iperdistensivo + veicolazione.

PROGR. 7 Macchie cutanee: peeling medio + massaggio iperdistensivo e veicolazione + vibro-massaggio stimolante e veicolazione.

PROGR. 8 Rassodamento bio-dinamico tissutale: peeling medio + massaggio iperdistensivo + massaggio vibro-stimolante e veicolazione.

PROGR. 9 Rassodamento tissutale: peeling intensivo + elettrostimolazione + drenaggio.

PROGR. 10 Stimolazione drenante: peeling intenso + leafing + drenaggio.

Trattamenti specifici

- Peeling leggero.
- Peeling medio.
- Peeling intenso.
- Correnti galvaniche (veicolazione).

Ultrasuono 3MHz con applicatore cilindrico (solo Unique)

Mediante l'applicazione degli ultrasuoni a 3MHz, a livello del derma, si favorisce:

- miglioramento della microcircolazione cutanea con incremento dell'ossigenazione tissutale;
- incremento della permeabilità cellulare per favorire l'attivazione delle reazioni chimiche ed enzimatiche;
- aumento dell'idratazione grazie ai fenomeni osmotici attivati dall'effetto di positivo dell'onda ultrasonica;
- effetto meccanico del micro-massaggio;
- effetto termico per la modificazione della temperatura;
- effetto chimico per la migrazione di sostanze nutritive e la conseguente eliminazione di sostanze in eccesso (trattamento).




Micro Dermo Abrasione - Soft Scrub (solo Unique)

La funzione Soft Scrub, o peeling meccanico, è un innovativo metodo semplice e sicuro per effettuare trattamenti di:

- rimozione delle cellule morte;
- riduzione dell'ispessimento cutaneo, migliorando l'assorbimento di opportuni prodotti cosmetici;
- asportazione piccoli comedoni superficiali;
- schiarire macchie cutanee non eccessivamente profonde o causate dall'acne;
- levigare la cute eliminando piccoli solchi superficiali, preparare la pelle colpita da smagliature a veicolare l'attivo specifico per migliorare l'inestetismo.

Per mezzo di un apposito manipolo, sul quale vengono applicati gli opportune testine realizzate con tre differenti gradienti di abrasione, si procede al trattamento applicando una leggera pressione in considerazione al trattamento da effettuare.

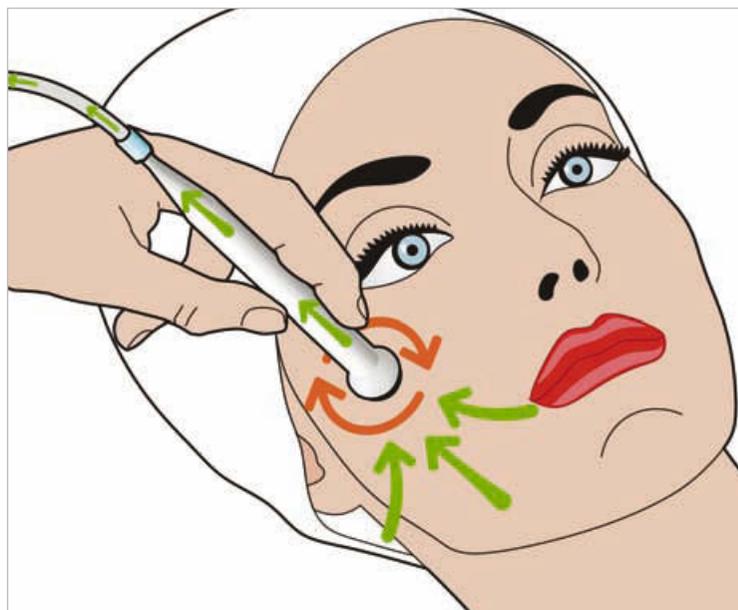

Face Progress Unique e Face Studio

Brush

Elimina le impurità e le cellule morte, le disperde e libera l'epidermide lasciandola immediatamente e visibilmente più liscia e luminosa. Possibilità di impostare 3 differenti sistemi di rotazione delle spazzole: - rotazione in senso orario - rotazione in senso anti-orario - rotazione automatica nei due sensi



Thermo

Sfruttando l'azione positiva del calore crea una leggera e locale iperemia che favorisce l'assorbimento di opportune sostanze cosmetiche.



Air Massage

È una successione ritmica e rapida d'aspirazioni e compressioni che, attraverso l'impiego di apposite coppette in cristallo, permettono di elaborare un micromassaggio drenante migliorando la circolazione superficiale dell'epidermide.



Micro-Jono

Accelera l'azione delle sostanze cosmetiche applicate, migliorandone la penetrazione e l'efficacia.



Alta Frequenza

Effettua un micromassaggio riattivante che, grazie alle micropulsioni prodotte dall'apparecchiatura, svolge un benefico massaggio riattivando la circolazione superficiale cutanea producendo un'azione antisettica.



Disincrostante

Estrae le impurità trattenute dall'epidermide lasciando la pelle più chiara e setosa, preparandola per accogliere eventuali prodotti cosmetici, aumentandone l'efficacia.



Controllo Idratazione

Test per identificare lo stato di idratazione della pelle.



Face Progress Unique e Face Studio

Stimol

Riattiva le fasce muscolari impiegando molteplici forme d'onda per ottimizzare il risultato evitando l'accomodamento muscolare. L'azione elettrostimolante differenziata, agisce sulla muscolatura del viso laddove è necessario tonificare e recuperare la forma muscolare unitamente al miglioramento dell'aspetto dell'epidermide. Quest'effetto è coadiuvato dal drenaggio elettro-linfatico che, associato alla contrazione involontaria delle fasce muscolari, permette di ottenere un visibile miglioramento dell'aspetto della pelle, effetto Lifting, coadiuvato da un maggior tono muscolare.



Face Progress Face Studio

Spray (solo Face Studio)

Nebulizzatore per prodotti tonici o similari.



Vacuum (solo Face Studio)

Aspira i comedoni evitando l'azione meccanica eseguita manualmente.



Optional per Unique e Face Studio [pag. 17-21]

- n. 1 art. 9725 – Spazzola dura in setola ø 100 mm.
- n. 1 art. 9726 – Spazzola dura in setola ø 70 mm.
- n. 1 art. 9703 – Elettrodo pettine.
- n. 1 art. 9704 – Elettrodo saturatore.
- n. 1 art. 9705 – Elettrodo folgoratore curvo.

Accessori per Unique e Face Studio [pag. 17-21]

- n. 1 art. 9720 – Spazzola dura in setola ø 40 mm.
- n. 2 art. 9721 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 40 mm.
- n. 1 art. 9722 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 20 mm.
- n. 1 art. 9723 – Spazzola dura in setola ø 20 mm.
- n. 1 art. 9728 – Dischetto in spugna ø 40 mm.
- n. 1 art. 9840 – Manipolo porta spazzole, spina **Plug In**.
- n. 3 art. 9771 – Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco a clip completo di adattatore, dim. 60x80H. mm.
- n. 1 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm.
- n. 3 art. 9816 – Confezione di gel conduttivo da 260 gr.
- n. 5 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 35x45 mm.
- n. 2 art. 99193 – Tubetto di connessione Air Massage, ad attacco rapido.
- n. 2 art. 99189 – Campanella Air Massage ø 35 mm.
- n. 2 art. 99191 – Campanella Air Massage, tipo schiacciata.
- n. 2 art. 99190 – Campanella Air Massage ø 20 mm.
- n. 1 art. 99156 – Manipolo H.F.elettronico con regolazione di potenza.
- n. 3 art. 9784N – Adattatore per elettrodo placca.
- n. 1 art. 9701 – Elettrodo cipolla.
- n. 1 art. 9702 – Elettrodo cipollina.
- n. 1 art. 9706 – Elettrodo collo.
- n. 1 art. 9707 – Elettrodo rullo.
- n. 1 art. 9947 – Cavo bipolare per Jono e Disincrostante, spinotti positivo e negativo ø 4 mm, spina **Plug In**.
- n. 1 art. 9948 – Cavo bipolare per Stimolazione, presa femmina positivo e negativo ø 4 mm, spina **Plug In**.
- n. 1 art. 9949 – Cavo per Test Idratazione, presa e maschio positivo e negativo ø 4 mm, spina **Plug In**.
- n. 1 art. 9950 – Manipolo Test Idratazione.
- n. 1 art. 9951 – Manipolo Stimol con spinotto ø 4 mm positivo.
- n. 1 art. 9952 – Manipolo Stimol con spinotto ø 4 mm negativo.
- n. 1 art. 9953 – Manipolo Soft Stimol con spinotti ø 4 mm negativo e positivo.
- n. 1 art. 9954 – Manipolo Jono e Disincrostante con spinotti ø 4 mm negativo e positivo.
- n. 1 art. 9955 – Terminale cilindro per trattamento Disincrostante.
- n. 1 art. 9956 – Terminale rullo per trattamento Micro-Jono.
- n. 1 art. 9957 – Terminale piattello per Hydro Test.
- n. 3 art. 9958 – Terminale micro-sfera per Micro-Jono rughe e piccoli solchi.

Accessori per Unique [pag. 17-21]

- n. 1 art. 9832 – Manipolo Ultrasonico con testina d'emissione a lama.
- n. 1 art. 9934 – Manipolo ultrasonico con testina d'emissione a cilindro.
- n. 1 art. 9727 – Comando a pedale.
- n. 1 art. 9759 – Cavo unipolare per connessione placca.
- n. 1 art. 9935 – Manipolo porta testina abrasiva.
- n. 1 art. 9936S – Testina abrasiva, finitura leggera, completa di filtro.
- n. 1 art. 9937S – Testina abrasiva, finitura media, completa di filtro.
- n. 1 art. 9938S – Testina abrasiva, finitura grossa, completa di filtro.
- n. 1 art. 9939S – Testina in gomma per massaggio.
- n. 1 art. 9941 – Tubetto di connessione aspirazione dermoabrasione, con attacco rapido.

Accessori per Face Studio [pag. 17-21]

- n. 1 art. 9714 – Tubetto di connessione Spray, ad attacco rapido.
- n. 2 art. 9717 – Contenitore con ugello nebulizzatore.
- n. 1 art. 99192 – Tubetto di connessione Vacuum con filtro anti-impurità, ad attacco rapido.
- n. 1 art. 99187 – Canula aspira comedoni foro piccolo.
- n. 1 art. 99188 – Canula aspira comedoni foro grande.
- n. 1 art. 9842 – Manipolo Thermo.

HF Synthesis



Optional

- n. 1 art. 9703 – Elettrodo pettine (03)
- n. 1 art. 9704 – Elettrodo saturatore (04)
- n. 1 art. 9705 – Elettrodo folgoratore (05)
- n. 1 art. 9706 – Elettrodo collo (06)
- n. 1 art. 9707 – Elettrodo rullo (07)

Art. 9113


Kit professionale per trattamenti estetici di Alta Frequenza (HF) completo di:

- n. 1 art. 99156 – Manipolo con regolazione di potenza
- n. 1 art. 99160 – Valigetta da trasporto anti-urto
- n. 1 art. 99157 – Unità di collegamento alla rete
- n. 1 art. 9701 – Elettrodo cipolla (01)
- n. 1 art. 9702 – Elettrodo cipollina (02)



Art. 99156 - Manipolo H.F. con regolazione di potenza per apparecchi: 9049/E - 9065 - 9075 - 9089
230V ~ 50 Hz - 17W **CE**

Art. 9114 - Manipolo H.F. con regolazione di potenza completa di 2 elettrodi:
art. 9701 Cipolla (01)
art. 9702 Cipollina (02)

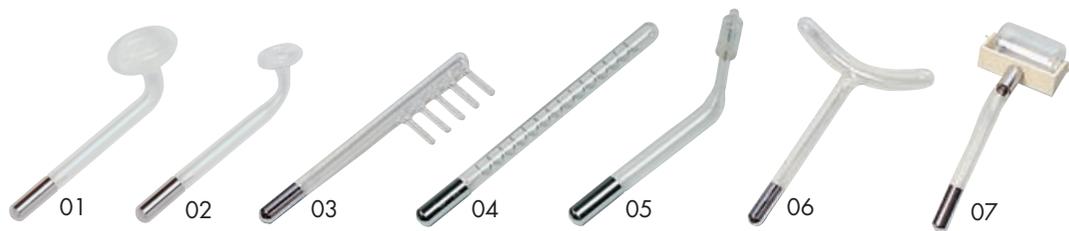

- Art. 9701 – Elettrodo cipolla (01)
- Art. 9702 – Elettrodo cipollina (02)
- Art. 9703 – Elettrodo pettine (03)
- Art. 9704 – Elettrodo saturatore (04)

- Art. 9705 – Elettrodo folgoratore (05)
- Art. 9706 – Elettrodo collo (06)
- Art. 9707 – Elettrodo rullo (07)

iFace R.F. System

iFace R.F. dispone di un sistema di emissione bipolare con due differenti manipoli:

- sistema **Bipolare**, per applicazioni al viso
- sistema **Bipolare**, per applicazioni al corpo

Radiofrequenza nei trattamenti estetici

La metodologia ed il principio fisico è strettamente legato all'ipertermia localizzata.

Le proprietà antalgiche e terapeutiche del calore sono ben note ai ricercatori e sperimentatori, i quali, hanno utilizzato i più disparati sistemi per indurre calore sul corpo umano.

La radiofrequenza rappresenta una delle più moderne tecniche impiegate nei trattamenti anti-age e del rilassamento cutaneo, attenuando con una certa stabilità le rughe e le lassità cutanee anche del corpo, oltre a contribuire efficacemente nei trattamenti contro le adiposità localizzate (cellulite).

La radiofrequenza si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta frequenza, generalmente tra 1 e 6 MHz, a flusso variabile; tale flusso di energia non stimola il tessuto nervoso e muscolare ma produce un "effetto termico controllato", favorendo l'aumento della temperatura del derma.

Il trattamento con radiofrequenza permette di surriscaldare il sottocutaneo, per un'azione anti-aging, ristrutturante e rimodellante.

Il flusso della radiofrequenza contribuisce alla contrazione delle fibre di collagene e, a lungo termine, favorisce la sintesi di nuovo collagene. È evidente che, dopo il ciclo di sedute previste, l'aspetto della pelle troverà nuovo turgore attenuando notevolmente gli antiestetici segni dell'invecchiamento cutaneo.

Dopo il trattamento si osserva un miglioramento del microcircolo e una corretta ripartizione del tessuto trattato, con marcata diminuzione dei noduli antiestetici della pelle, degli inestetismi dell'edema locale apportando un evidente effetto anti-lipolitico.

Particolarmente indicato dopo trattamenti dimagranti per rassodare e ripristinare l'area trattata.

Gli effetti della radiofrequenza non sono immediati ma gradualmente e si evidenziano con il passare dei giorni e delle settimane, arrivando a raggiungere, in alcuni casi, il massimo effetto dopo 1/2 mesi dal trattamento.



Art. 9069



iFace R.F. oltre alla programmazione individuale, dispone di 2 differenti programmi di lavoro: Continuo e Pulsato, "Soft & Intensive", che permettono di gestire automaticamente l'erogazione della temperatura.

Accessori [pag. 17-21]

- n. l art. 99143 – Manipolo Bipolare RFViso
- n. l art. 99142 – Manipolo Bipolare RF Corpo
- n. l art. 9816 – Gel

Comby 8

Apparecchio multifunzionale per **8** trattamenti estetici al viso.



Art. 9049A versione con porta accessori
Art. 9049/E versione senza porta accessori

TRATTAMENTI

Massaggio ad aria

Spray

Vacuum

Thermo

Esfoliazione (peeling)

Controllo idratazione

Micro-Jonoforesi e disincrostante elettronico

Elettrostimolazione - Lifting

Comby 8

TRATTAMENTI

Massaggio ad aria

È una successione ritmica e rapida d'aspirazioni e compressioni che, attraverso l'impiego di apposite coppette in cristallo, permettono di elaborare un micromassaggio drenante migliorando la circolazione superficiale dell'epidermide.



Spray

Mediante l'utilizzo degli appositi contenitori è possibile nebulizzare sostanze cosmetiche senza l'impiego di gas aggiuntivi.



Vacuum

Utile per rimuovere le impurità visibili sulla superficie della pelle, attraverso la loro aspirazione con l'uso di apposite canule in cristallo.



Thermo

L'erogazione controllata della temperatura, distribuita uniformemente sulla superficie dell'apposito Manipolo Thermo, favorisce l'assorbimento di opportuni prodotti cosmetici aumentandone l'efficacia.



Esfolazione (peeling)

Effettua un'ottima detersione dello strato corneo superficiale eliminando le cellule morte mediante l'utilizzo d'apposite spazzole rotanti, con setole dure e morbide. In considerazione delle caratteristiche individuali della pelle, è possibile impostare la corretta velocità ed il senso di rotazione del micromotore.



Controllo idratazione

Si rivela un valido strumento per l'identificazione del tipo di pelle da trattare determinando lo stato d'idratazione dell'epidermide.



Micro-Jonofresi e disincrostante elettronico

La corrente di micro-jonofresi favorisce la corretta distribuzione di opportuni prodotti cosmetici e lo sviluppo dei loro benefici effetti nelle zone d'applicazione.

Il disincrostante elettronico libera in profondità l'epidermide dall'eccesso di sebo ed impurità, preparandola adeguatamente per applicazioni con opportuni prodotti cosmetici di cui amplifica il risultato.



Elettrostimolazione - Lifting

L'azione elettrostimolante differenziata, agisce sulla muscolatura del viso laddove è necessario tonificare e recuperare la forma muscolare unitamente al miglioramento dell'aspetto dell'epidermide. Quest'effetto è coadiuvato dal drenaggio elettro-linfatico che, associato alla contrazione involontaria delle fasce muscolari, permette di ottenere un visibile miglioramento dell'aspetto della pelle, effetto Lifting, coadiuvato da un maggior tono muscolare.



Accessori [pag. 17-21]

- n. 1 art. 9720 – Spazzola dura in setola \varnothing 40 mm.
- n. 1 art. 9721 – Spazzola morbida in pelo di capra \varnothing 40 mm.
- n. 1 art. 9722 – Spazzola morbida in pelo di capra \varnothing 20 mm.
- n. 1 art. 9723 – Spazzola dura in setola \varnothing 20 mm.
- n. 1 art. 9728 – Dischetto in spugna \varnothing 40 mm.
- n. 1 art. 9730 – Manipolo porta spazzole.
- n. 2 art. 9731 – Cavo bipolare con spinotti \varnothing 4 mm.
- n. 3 art. 9771 – Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco a clip, dim. 60x80H mm.
- n. 1 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H cm.
- n. 3 art. 9784 – Adattatore per placca con innesto spinotto \varnothing 4 mm.
- n. 2 art. 9791 – Manipolo isolato per l'utilizzo dei puntali: sfera, cilindro, piattello.
- n. 1 art. 9792 – Puntale a sfera per micro-jono.
- n. 2 art. 9793 – Puntale a cilindro per elettrostimolazione.
- n. 1 art. 9794 – Puntale a piattello per disincrostante.
- n. 2 art. 9816 – Confezione di gel conduttivo da 260 gr.
- n. 5 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 35x45 mm.
- n. 1 art. 9811 – Manipolo elettronico termoriscaldante.

OPTIONAL

Alta frequenza art. 99156 - solo manipolo

L'apparecchio è predisposto per integrare il trattamento senza apportarvi alcuna modifica. L'utilizzo dell'Alta Frequenza favorisce il miglioramento della microstimolazione cutanea aumentando l'ossigenazione della pelle, unitamente all'azione antisettica localizzata.



Accessori [pag. 17-21]

- n. 2 art. 99193 – Tubetto di connessione Air Massage, ad attacco rapido.
- n. 2 art. 99189 – Campanella Air Massage \varnothing 35 mm.
- n. 2 art. 99191 – Campanella Air Massage, tipo schiacciata.
- n. 2 art. 99190 – Campanella Air Massage \varnothing 20 mm.
- n. 1 art. 9714 – Tubetto di connessione Spray, ad attacco rapido.
- n. 2 art. 9717 – Contenitore con ugello nebulizzatore.
- n. 1 art. 99192 – Tubetto di connessione Vacuum con filtro anti-impurità, ad attacco rapido.
- n. 1 art. 99187 – Canula aspira comedoni foro piccolo.
- n. 1 art. 99188 – Canula aspira comedoni foro grande.

Optional [pag. 17-21]

- n. 1 art. 9725 – Spazzola dura in setola \varnothing 100 mm.
- n. 1 art. 9726 – Spazzola dura in setola \varnothing 70 mm.
- n. 1 art. 9817 – Manipolo bipolare con sfere per elettrostimolazione.
- n. 1 art. 9068 – Kit Alta Frequenza composto da:
 - n. 1 art. 99156 - Manipolo HF elettronico con regolazione di potenza.
 - n. 1 art. 9701 - Elettrodo cipolla.
 - n. 1 art. 9702 – Elettrodo cipollina.
 - n. 1 art. 9704 – Elettrodo saturatore.
 - n. 1 art. 9705 – Elettrodo folgoratore curvo.
- n. 1 art. 9703 – Elettrodo pettine.
- n. 1 art. 9706 – Elettrodo collo.
- n. 1 art. 9707 – Elettrodo rullo.

FACE PROGRAM ACCESSORIES



Art. 9701 Electrodo cipolla.



Art. 9702 Electrodo cipollina.



Art. 9703 Electrodo pettine.




Art. 9704 Electrodo saturatore.



Art. 9705 Electrodo folgoratore.




Art. 9706 Electrodo collo.

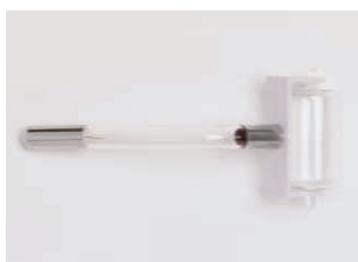

Art. 9707 Electrodo rullo.



Art. 99156 Manipolo H.F. con regolazione di potenza, per apparecchi: 9049/E - 9065 - 9075.

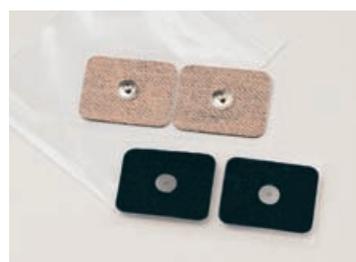

Art. 9741 Confezione contenente 4 elettrodi placca con attacco automatico, dim: 35x45 mm.



Art. 9710 Canula aspira-comedoni foro grande.



Art. 9709 Canula aspira-comedoni foro piccolo.



Art. 9717 Contenitore con ugello nebulizzatore.




Art. 9711 Campanella Air Massage ø 40 mm.



Art. 9712 Campanella Air Massage ø 30 mm.



Art. 9860 Campanella Air Massage ø 15 mm.

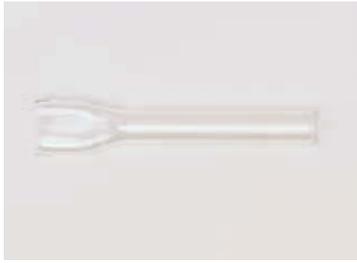

Art. 9713 Campanella Air Massage, tipo schiacciata.



Art. 99189 Campanella Air Massage ø 35 mm.



Art. 99190 Campanella Air Massage ø 20 mm.



Art. 99191 Campanella Air Massage, tipo schiacciata.



Art. 9714 Tubo per funzione spray.



Art. 9715 Tubo per funzione Vacuum.



Art. 9716 Tubo per funzione Air Massage.



Art. 99192 Tubetto di connessione Vacuum con filtro anti-impurità, ad attacco rapido.



Art. 99193 Tubetto di connessione Air Massage, ad attacco rapido.



Art. 9941 Tubetto di connessione aspirazione dermoabrasione, con attacco rapido.



Art. 99187 Canula aspira comedoni foro piccolo.



Art. 99188 Canula aspira comedoni foro grande.



Art. 9720 Spazzola dura in setola ø 40 mm.



Art. 9721 Spazzola morbida in pelo di capra ø 40 mm.



Art. 9722 Spazzola morbida in pelo di capra ø 20 mm.



Art. 9723 Spazzola dura in setola ø 20 mm.



Art. 9725 Spazzola in setola ø 100 mm.



Art. 9726 Spazzola in setola ø 70 mm.



Art. 9728 Dischetto in spugna ø 40 mm.



Art. 9791 Manipolo isolato per l'utilizzo di puntali: sfera, cilindro, piattello.



Art. 9792 Puntale a sfera per micro-jono.



Art. 9793 Puntale a cilindro per trattamenti di stimolazione.



Art. 9794 Puntale a piattello per disincrostante.



Art. 9784R Adattatore per placca con innesto spinotto \varnothing 4 mm (rosso).



Art. 9784N Adattatore per placca con innesto spinotto \varnothing 4 mm (nero).



Art. 9772 Fascia elastica per fissaggio placca, dim. 40x10H cm.



Art. 9771 Elettrodo placca rivestito in spugna dim. 80x60 mm.



Art. 9731 Cavo bipolare con spinotti \varnothing 4 mm.



Art. 9840 Manipolo porta spazzole per Face Studio - Unique.



Art. 9832 Manipolo ultrasuoni.



Art. 9816 Confezione di gel conduttivo da 260gr.



Art. 9730 Manipolo porta spazzole per: 9049/E - 9065.



Art. 9935 Manipolo porta testina abrasiva (Solo manipolo).



Art. 9936S Testina abrasiva, finitura leggera, completa di filtro. Confezione contenente 10 pezzi.



Art. 99176 Aero-Beauty Oxygen



Art. 9937S Testina abrasiva, finitura media, completa di filtro. Confezione contenente 10 pezzi.



Art. 9938S Testina abrasiva, finitura grossa, completa di filtro. Confezione contenente 10 pezzi.



Art. 9939S Testina in gomma per massaggio. Confezione contenente 5 pezzi.



Confezione testine abrasive.



Art. 9811 Manipolo elettronico termoriscaldante per: 9049/E - 9065.



Art. 9847 Manipolo per controllo idratazione Face Studio.



Art. 9934 Manipolo Ultrasonico con testina d'emissione a cilindro.



Art. 9817 Manipolo stimolazione per Comby 8.



Art. 9841 Manipolo stimolazione per Face Studio.



Art. 9842 Manipolo termoriscaldante per Face Studio - Unique.




Art. 9843 Cavo per jonoforesi Face Studio.



Art. 9844 Cavo per controllo idratazione Face Studio.




Art. 9846 Cavo per stimolazione Face Studio.

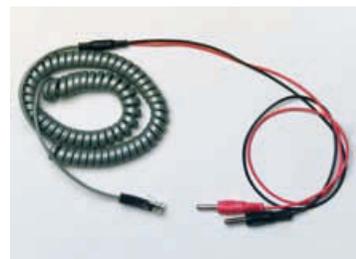

Art. 9947 Cavo bipolare per Jono e Disincrostante, spinotti positivo e negativo Ø 4 mm, spina **Plug In**.



Art. 9948 Cavo bipolare per Stimolazione, presa femmina positivo e negativo Ø 4 mm, spina **Plug In**.

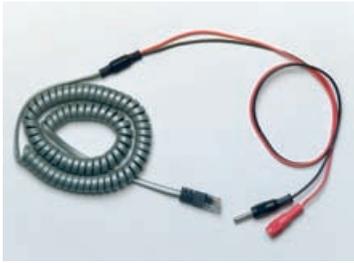

Art. 9949 Cavo per Test Idratazione, presa femmina negativo, spinotto maschio positivo, Ø 4 mm, spina Plug In.



Art. 9759 Cavo unipolare per collegamento elettrodo placca.




Art. 9727 Interruttore a pedale completo di cavo e spinotto.




Art. 9950 Manipolo Test Idratazione. (Piattello escluso)




Art. 9951 Manipolo Stimol con spinotto Ø 4 mm positivo.

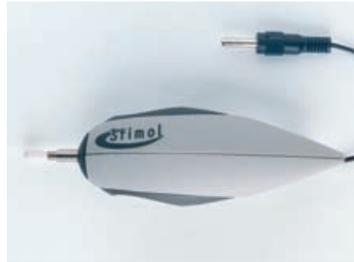

Art. 9952 Manipolo Stimol con spinotto Ø 4 mm negativo.

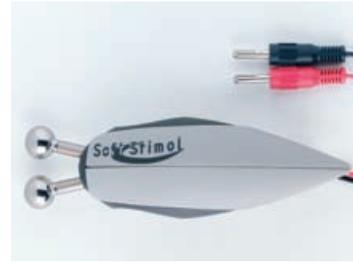

Art. 9953 Manipolo Soft Stimol con spinotti Ø 4 mm negativo e positivo.

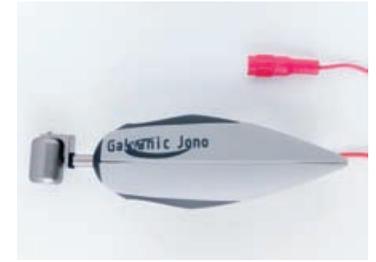

Art. 9954 Manipolo Jono e Disincrostante con presa femmina Ø 4 mm positivo (Rullo escluso).



Art. 9955 Terminale cilindro per trattamento Disincrostante.



Art. 9956 Terminale rullo per trattamento Micro-Jono.



Art. 9957 Terminale piattello per Hydro Test.




Art. 9958 Terminale micro-sfera per Micro-Jono rughe e piccoli solchi.



Art. 99142 Manipolo bipolare RF corpo.



Art. 99143 Manipolo bipolare RF viso.

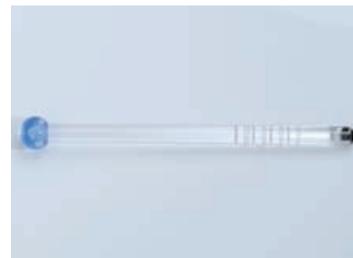

Art. 99153 Penna Touch Screen



Art. 99186 Manipolo Bipolare Radio Frequenza Viso, aree piccole



Art. 99200 Memory card

Laser Polaris - 808 nm

LASER POLARIS è l'apparecchiatura più avanzata tecnologicamente per l'epilazione professionale. Con il grande display touch screen 10" ed il rivoluzionario software easy work, permette di eliminare gli errori più comuni di impostazione e semplificare il lavoro dell'Estetista. Laser Polaris garantisce efficaci risultati per tutte le esigenze di epilazione!



Art. 9138

Tempo a seduta

TEMPI RIDOTTI PER ZONA

Esempio: 4/6 min.

VELOCITÀ Impulso

FINO A 6 SPOT SECONDO

Numero sedute per zona

Da 5 a 7

FOTOTIPI trattati

TUTTI fino al VI°

Raffreddamento

Raffreddato ad acqua a circuito integrato

Spot Manipolo

Fino a 10.000.000 di spot

Periodicità Stagionale

12 MESI ALL'ANNO

Effetti sulla pelle

INDOLORE. Nessun effetto

Ambiente in Istituto

Nessun Odore

VANTAGGI OPERATORE

- Tecnologia innovativa che migliora il comfort e l'assorbimento della luce
- Non viene richiesto **alcun anestetico topico** o raffreddamento secondario
- **RIDUZIONE DEI TEMPI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL 75%**
- Riduzione dei cicli di trattamento di circa il 40%
- Possibilità di trattare **AMPIE ZONE IN POCCHISSIMO TEMPO**
- Possibilità di trattare (con cautela) anche i fototipi più scuri
- **PRODOTTO INTERAMENTE MADE IN ITALY**

VANTAGGI CLIENTE

- **TRATTAMENTI MOLTO PIÙ RAPIDI**, migliore programmazione del proprio tempo
- **TRATTAMENTI PIÙ CONFORTEVOLI** che incoraggiano l'approccio del cliente verso il sistema e lo convincono a proseguire sino al suo completamento.
- Il ciclo di trattamenti (molto più veloce rispetto alle precedenti tecnologie), **migliora i risultati e la soddisfazione**
- La **VELOCITÀ** di esecuzione **RENDE ACCESSIBILI**, per tempo e denaro, anche le **ZONE PIÙ ESTESE** (gambe, schiena, ecc...)
- **NESSUNA SENSAZIONE DI DOLORE**

Principio di funzionamento del Laser Polaris

Tecnologia Laser per Epilazione Progressiva Permanente: risultati ai massimi livelli in totale sicurezza.

Il Laser a Diodo 808nm (nanometri) è la nuova frontiera per l'epilazione professionale; il suo raggio, con una lunghezza d'onda a 808nm, attraversa la cute e viene assorbito dai pigmenti contenuti nel pelo e, in particolar modo, nel bulbo pilifero.

Questo "meccanismo" produce un immediato riscaldamento ed una conseguente eliminazione delle cellule germinative del bulbo, dando vita al processo di Epilazione Progressiva Permanente.

Lunghezza d'onda 808 nm

La "finestra terapeutica" che offre il maggior coefficiente di assorbimento del cromoforo melanina, è compresa tra i 600 nm e i 1200 nm. Inoltre, la melanina, che colora il bulbo pilifero e stelo, è assorbita circa 10 volte di più a 800 nm che a frequenze diverse.

Come funziona il Laser?

Il bersaglio della luce del laser è la melanina, una proteina che viene utilizzata dall'organismo come pigmento e colora di scuro la pelle e gli annessi cutanei come i peli.

La trasformazione della luce in calore determina la distruzione del follicolo pilifero causato dall'aumento della temperatura locale. Questo processo si chiama fototermolisi selettiva. La parola selettiva deriva dal fatto che la luce è inoffensiva per la pelle e per le sue strutture, ma viene assorbita selettivamente dal follicolo pilifero, disattivandolo.

I follicoli che sono nella fase anagen hanno la più grande quantità di melanina e possono assorbire l'energia chiara che proviene dal laser.

L'energia del laser danneggia il follicolo dei peli e altera la relativa capacità di svilupparne altri. Col tempo, i peli cadranno verso l'esterno e la crescita sarà rallentata fino alla progressiva scomparsa.

L'emissione degli spot di luce laser colpiscono selettivamente i peli presenti sull'area trattata, preservando il tessuto circostante.



Depy progress Laser Polaris

I PUNTI DI FORZA

REDDITIVITÀ

Grazie al ridotto tempo impiegato per ogni singolo trattamento

PROFITTO

L'elevata redditività del trattamento consente elevati guadagni per l'Istituto. Ciò grazie anche alla possibilità d'integrare più trattamenti di epilazione su differenti parti del corpo, addirittura nella stessa seduta. **MAGGIOR INCASSO!**

VELOCITÀ

Velocità di esecuzione = risparmio di tempo per la Cliente, che ha sempre meno tempo disponibile

FUNZIONALITÀ ed EFFICIENZA

Risultati visibili da subito.

Solo 5 – 7 sedute per un trattamento completo

SICUREZZA

Software di utilizzo e di controllo delle funzioni + Qualità dei materiali impiegati + Protocolli collaudati permettono di lavorare per 12 mesi all'anno, anche su pelli abbronzate

CONFORTEVOLE


Trattamento indolore. Raffreddamento ad elevata intensità con doppio circuito

MIRATO

Ottimi risultati anche su aree difficili come Gomiti, Ginocchia, Mento, Baffetti.....

AVANGUARDIA e DESIGN

Niente è lasciato al caso, design ed ergonomia sono la «pelle» che racchiude tecnologia ad altissimo livello.

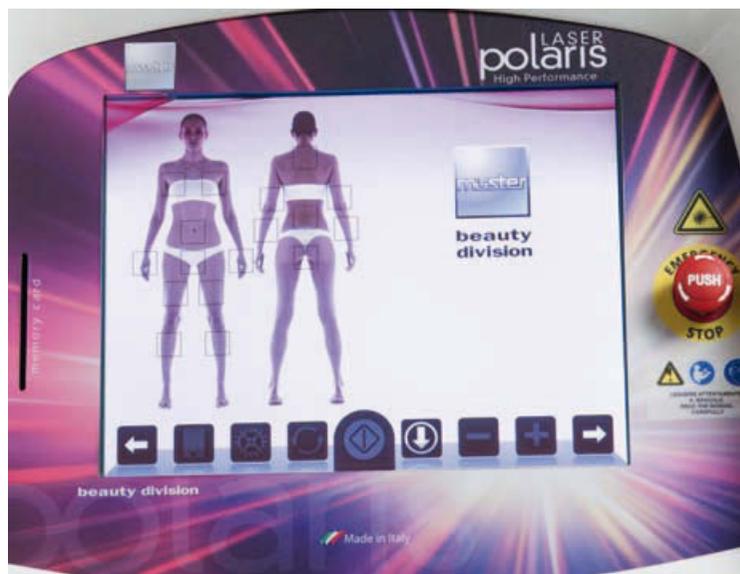

Anamnesi computerizzata

L'apparecchiatura programma i valori da utilizzare per il trattamento. I dati e il numero dei trattamenti possono essere memorizzati sulla memory card, per poterli utilizzare all'incontro successivo.

La memory card memorizzerà i dati dell'anamnesi e le zone da trattare.

In ogni momento, premendo sull'apposito comando, sarà possibile visualizzare il prezzo di un trattamento, per tutte le zone selezionate.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presca di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Caratteristiche tecniche

Sorgente	Laser a diodo
Lunghezza d'onda	808 nm (nanometri)
Potenza	600 Watt
Dimensione Spot manipolo	16 x 16 mm (2,56 cm ²)
Modalità di lavoro	da 1 a 12 al secondo
sia a spot singolo che multipli	
Fluenza	1 ÷ 40 J / 300 ms
Ampiezza impulso	Da 10 ms a Max 300 ms
Densità energia Max	Max 40 J / cm ²
Area Spot raffreddata	da 5°C a 20°C (regolabile)
Raffreddamento Testata Manipolo	con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)
Vita media manipolo	Fino a 10 milioni di spot
Sistema di emissione laser	Pulsante + Pedale
Schermo	Touch-screen a colori da 10.4"
Alimentazione	230V ~ 50/60Hz

Accessori [pag. 41-43]

- n. 1 art. 1062550 Bacinella per gel
- n. 1 art. 16242 Spatola
- n. 2 art. 99222 Card attivazione
- n. 1 art. 99226 Pedale
- n. 1 art. 99227 Occhiali operatore
- n. 1 art. 99228 Kit carico acqua
- n. 1 art. 99229 Dispositivo sicurezza interblocco
- n. 1 art. 9999 Occhiali cliente
- n. 1 art. 99231 Jelly Gel
- n. 1 art. 99232 Dispenser per Jelly Gel

MERCHANDISING

Supporti pubblicitari per la vendita

Art. 99230
Roto-Banner Laser Polaris
60x180 cm



Art. 510913850001
Depliant informativo consumatrice (50pz.)



Depy Progress X-Pulsar PERFORMANCE 2IM - I.P.L.

Luce pulsata, nuova frontiera per la depilazione professionale. Un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di epilazione non invasivo. Sfruttando l'energia concentrata della luce allo Xenon, l'applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero con risultati sorprendenti.

(Attenzione! Riferirsi alle normative vigenti nel paese di utilizzo)




Art. 9146

Depy Progress X-Pulsar PERFORMANCE 2IM - I.P.L.

La fotoepilazione a luce pulsata ad alta intensità è un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di depilazione non invasivo per l'eliminazione permanente e progressiva dei peli superflui.

Apparecchiatura professionale raffreddata ad aria ad alta potenza, tecnologia che permette di mantenere la parte in contatto con la pelle a temperatura costante garantendo una maggiore sicurezza d'uso e migliorando la qualità del trattamento. Sfruttando l'energia concentrata della luce allo Xeno, l'applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero, con risultati sorprendenti. La zona da depilare è interessata da uno spot di luce che, per la sua frequenza d'irradiazione, è poco assorbito dalla cute; al contrario viene assorbito dal pelo che, grazie alla melanina contenuta, trasporta sino alla radice pilifera l'energia trasformata in calore, neutralizza i bulbi piliferi e ne ostacola la ricrescita. In base al principio della fototermolisi, il pigmento della melanina dei peli assorbe la luce in modo selettivo. La melanina è un cromoforo che assorbe la luce in una vasta gamma di frequenze; l'energia luminosa assorbita viene trasformata in energia termica che conduce alla distruzione del bulbo pilifero. La luce pulsata agisce direttamente sul bulbo pilifero (pelo in fase anagena), impedendo la ricrescita del pelo, senza intaccare la cute circostante. La particolare flessibilità dell'apparecchiatura permette di impostare i parametri in rapporto alle caratteristiche di cute e peli, rendendo così possibile la personalizzazione del trattamento secondo le specifiche esigenze.

- **Schermo a colori touch screen da 10"**
- **21.000 SPOT**
- **AMPIE dimensioni della zona trattata per SINGOLO SPOT: ben 12cmq**
- **raffreddamento ad ARIA più delicato sulla pelle**
- **NON serve il GEL.**

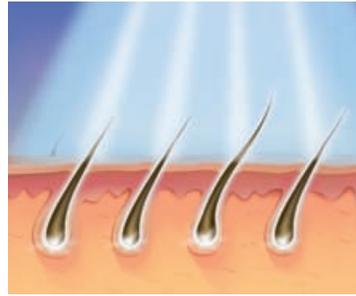

Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.



Depy Progress X-Pulsar PERFORMANCE 21M - I.P.L.

Il trattamento di Fotoepilazione con Depy Progress X-Pulsar, consente di effettuare l'applicazione in breve tempo grazie all'ampia area d'azione: 40x30 mm per ogni impulso, ben 12 cmq.

L'azione è rapidissima: 9 millisecondi per ogni impulso.



I peli trattati sono quelli in fase di crescita (Anagen), per questa ragione i trattamenti devono essere ripetuti ad intervalli di circa 20-30 giorni, per colpire sempre i peli in fase anagena, fino alla completa scomparsa che avviene in 6-12 trattamenti (per ogni zona). La differenza del numero dei trattamenti è legata al colore del pelo, all'area ed alla fisiologia del soggetto trattato.

Anamnesi computerizzata

Il nuovissimo sistema di anamnesi computerizzata è semplice ed intuitivo: basta sfiorare il video in corrispondenza della funzione desiderata e l'apparecchio vi permette di considerare facilmente tutti i parametri per impostare un corretto trattamento: il tutto in pochissimi secondi.

X-Pulsar determina il livello adeguato di potenza e lo specifico filtro da utilizzare per il trattamento, selezionando, in pochissimi passaggi a video, i relativi parametri quali sesso, colore della pelle, colore e aspetto del pelo.

Al termine dell'anamnesi il video visualizzerà, per vostra opportuna verifica, il riepilogo dei dati selezionati e consentirà di procedere al trattamento.

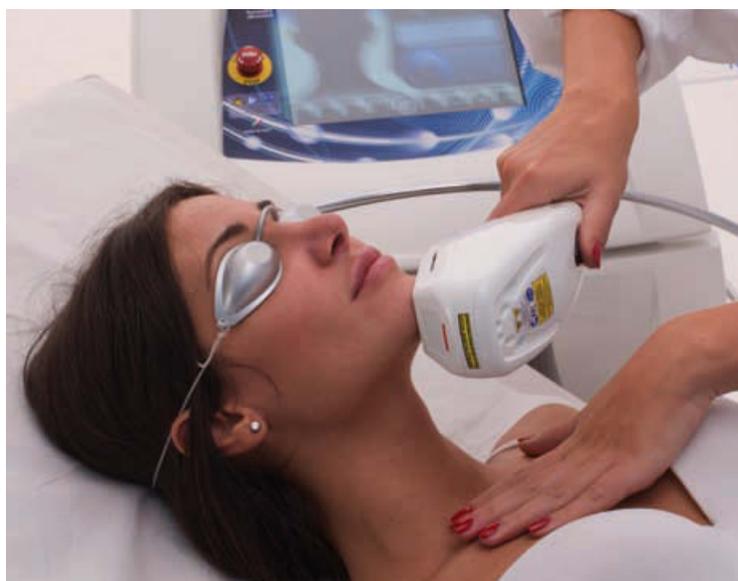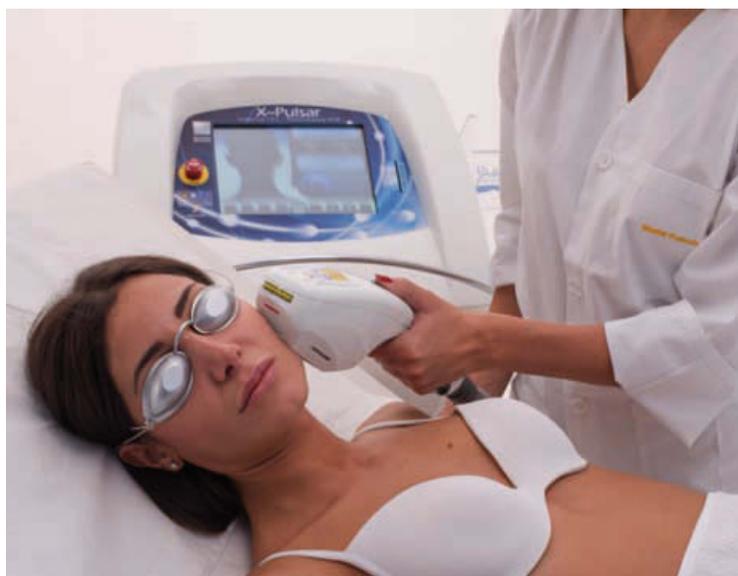

Elaborazione del prezzo di trattamento

X-Pulsar consente di impostare per ogni area da trattare il costo di trattamento con lo scopo di fornire, al termine della fase di anamnesi, il costo totale della seduta.

Trattamento Fotoringiovanimento cutaneo - (optional) Solo per uso Extra CEE.

Il fotoringiovanimento cutaneo si ottiene grazie ai benefici effetti prodotti dal trattamento a luce pulsata, che stimolano le aree interessate risvegliando il loro corretto e naturale funzionamento. Le tecnologie innovative proposte da Depy Progress X-Pulsar hanno fatto registrare miglioramenti visibili anche in condizioni di anomalie cutanee quali: couperose, rughe, capillari superficiali, ipotonicità dell'epidermide. Il flash luminoso è in grado di attivare la pelle in profondità, stimolando la produzione di nuovo collagene, che rivitalizza la tessitura e la consistenza della pelle.

Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa: lampada alla xeno
Lunghezza d'onda lampada: 1000 nm
Lunghezza d'onda operativa filtro rosso: 620 nm
Lunghezza d'onda operativa filtro arancio: 600 nm
Lunghezza d'onda operativa filtro giallo: 550 nm
Durata dell'impulso: 9-10 ms
Potenza assorbita in stand-by: 17W
Potenza max assorbita in ricarica: 425W
Tempo di ricarica dopo impulso: da 2 a 8 secondi a seconda della potenza/densità selezionata

caratteristiche con lampada non filtrata

- Energia massima emessa 120J
- Fluenza massima emessa 10J/cm²

caratteristiche lampada con filtro

Filtro Rosso Energia massima emessa 60J
Fluenza massima emessa 5J/cm²

Filtro Arancio Energia massima emessa 60J
Fluenza massima emessa 5J/cm²

Filtro Giallo Energia massima emessa 66J
Fluenza massima emessa 5,5J/cm²

Dimensione massima della zona trattata per singolo spot:
30mm x 40mm = 12cm²

Sistema di raffreddamento lampade: aria ad elevata potenza

Vita lampada/manipolo: 21.000 spot.

Compiuti 21.000 spot il manipolo deve essere sostituito integralmente, art. 99204.

Accessori [pag. 41-43]

- n. 1 art. 99204 – Manipolo luce pulsata 21.000 spot
- n. 1 art. 99166 – Filtro rosso per epilazione pelli scure
- n. 1 art. 99167 – Filtro arancio per epilazione pelli chiare
- n. 4 art. 99170 – Supporto porta filtro (filtro escluso)
- n. 1 art. 99200 – Memory card
- n. 1 art. 9886 – Occhiali operatore
- n. 1 art. 99202 – Filtro rosso con riduzione
- n. 1 art. 99203 – Filtro arancio con riduzione
- n. 2 art. 99221 – Card attivazione
- n. 1 art. 9999 – Occhiali cliente

Optional

- n. 1 art. 99168 - Filtro giallo per fotoringiovanimento.

MERCHANDISING

Supporti pubblicitari per la vendita



Art. 510913650001

Depliant informativi consumatrice (50pz.)



Art. 99175
Roto-Banner
80x210 cm

Follow Me

Luce pulsata, nuova frontiera per la depilazione professionale.
Un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di
epilazione non invasivo.

Sfruttando l'energia concentrata della luce allo Xeno, l'applicazione
agisce direttamente sul bulbo pilifero con risultati sorprendenti.

(Attenzione! Riferirsi alle normative vigenti nel paese di utilizzo)



Art. 9115

OVUNQUE LUCE PULSATA CON TE DALLA TUA CLIENTE!


- Schermo a colori TOUCH SCREEN
- 21.000 SPOT
- AMPIE DIMENSIONI della ZONA trattata per singolo spot: BEN 12cmq
- RAFFREDDAMENTO ad ARIA PIÙ DELICATO sulla pelle
- NON serve il Gel.

La zona da depilare è interessata da uno spot di luce che, per la sua frequenza d'irradazione, è poco assorbito dalla cute; al contrario viene assorbito dal pelo che, grazie alla melanina contenuta, trasporta sino alla radice pilifera l'energia trasformata in calore, neutralizza i bulbi piliferi e ne ostacola la ricrescita. In base al principio della fototermolisi, il pigmento della melanina dei peli assorbe la luce in modo selettivo.

La melanina è un cromoforo che assorbe la luce in una vasta gamma di frequenze; l'energia luminosa assorbita viene trasformata in energia termica che conduce alla distruzione del bulbo pilifero.

La luce pulsata agisce direttamente sul bulbo pilifero (pelo in fase anagen), impedendo la ricrescita del pelo, senza intaccare la cute circostante.

La particolare flessibilità dell'apparecchiatura permette di impostare i parametri in rapporto alle caratteristiche di cute e peli, rendendo così possibile la personalizzazione del trattamento secondo le specifiche esigenze.

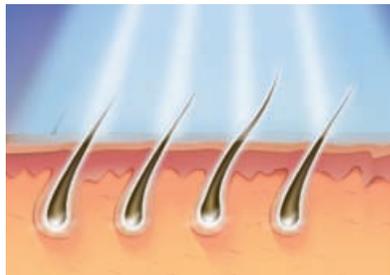

Follow Me



Il **trattamento di Fotoepilazione** con Depy Progress Follow Me, consente di effettuare l'applicazione in breve tempo grazie all'ampia area d'azione: 40x30 mm per ogni impulso, ben 12 cmq. L'azione è rapidissima: 9 millisecondi per ogni impulso. I peli trattati sono quelli in fase di crescita (Anagen), per questa ragione i trattamenti devono essere ripetuti ad intervalli di circa 20-30 giorni, per colpire sempre i peli in fase anagena, fino alla completa scomparsa. La differenza del numero dei trattamenti è legata al colore del pelo, all'area ed alla fisiologia del soggetto trattato.



La fotoepilazione a luce pulsata ad alta intensità è un metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di depilazione non invasivo per l'eliminazione permanente e progressiva dei peli superflui. Apparecchiatura professionale raffreddata ad aria ad alta potenza, tecnologia che permette di mantenere la parte in contatto con la pelle a temperatura costante garantendo una maggiore sicurezza d'uso e migliorando la qualità del trattamento. Sfruttando l'energia concentrata della luce allo Xeno, l'applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero, con risultati sorprendenti.



Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa: lampada alla xeno
 Lunghezza d'onda lampada: 1000 nm
 Lunghezza d'onda operativa filtro rosso: 620 nm
 Lunghezza d'onda operativa filtro arancio: 600 nm
 Durata dell'impulso: 9-10 ms
 Potenza assorbita in stand-by: 17W
 Potenza max assorbita in ricarica: 425W
 Tempo di ricarica dopo impulso: da 2 a 8 secondi a seconda della potenza/densità selezionata.

caratteristiche con lampada non filtrata

- Energia massima emessa 120J
- Fluenza massima emessa 10J/cm²

caratteristiche lampada con filtro

Filtro Rosso: Energia massima emessa 60J
 Fluenza massima emessa 5J/cm²

Filtro Arancio: Energia massima emessa 60J
 Fluenza massima emessa 5J/cm²

Dimensione massima della zona trattata per singolo spot:
 30mm x 40mm = 12cm²

Sistema di raffreddamento lampade: aria ad elevata potenza

Vita lampada/manipolo: 21.000 spot.
 Compiuti 21.000 spot il manipolo deve essere sostituito integralmente, art. 99204.

Accessori [pag. 41-43]

- n. 1 art. 99204 – Manipolo luce pulsata 21.000 spot
- n. 1 art. 99166 – Filtro rosso per epilazione pelli scure
- n. 1 art. 99167 – Filtro arancio per epilazione pelli chiare
- n. 4 art. 99170 – Supporto porta filtro (filtro escluso)
- n. 1 art. 9886 – Occhiali operatore
- n. 1 art. 99202 – Filtro rosso con riduzione
- n. 1 art. 99203 – Filtro arancio con riduzione
- n. 1 art. 9999 – Occhiali cliente

Depy Progress Epylab

L'interfaccia di Epylab garantisce, grazie all'ampio schermo digitale ed all'intuitiva predisposizione dei comandi, di lavorare con estrema semplicità sfruttando completamente le potenzialità dell'apparecchio.



Art. 9076

Depy Progress Epylab

L'utilizzo della Memory Card, dedicata per ogni singolo cliente, permette di impostare i dati per ogni metodologia di trattamento facilitando e diminuendo i tempi per l'impostazione dei parametri tecnici. I bellissimi supporti porta strumenti ed il carrello integrato, rendono pratico e funzionale l'utilizzo di Epylab, favorendone l'impiego e la disposizione.

Trattamenti

Si avvale dell'impiego di correnti miscelate di Termolisi + Elettrolisi, attraverso l'elettrodo ago, in sinergia all'innovativo sistema Flash e Super-Flash. Le funzioni Flash e Super-Flash erogando in pochi millesimi di secondo un impulso ad elevata intensità, contribuiscono a ridurre drasticamente la sensibilità del soggetto in trattamento, aumentandone il risultato visibile sin dalle prime sedute.

Con Epylab, l'operatore estetico può inoltre selezionare le sole correnti di Elettrolisi, adatte in zone particolarmente delicate o per soggetti sensibili alle correnti ad alta frequenza (Termolisi).

Epylab offre inoltre il trattamento professionale di elettrodepilazione indolore Thermosoft che, utilizzando una particolare sonda di superficie in azione sinergica allo specifico prodotto Depy Gel, ne favorisce la conducibilità e l'azione inibente; il metodo è particolarmente adatto per zone delicate. Il sistema di depilazione Thermosoft permette di trattare ampie aree in tempi ridotti, indebolendo progressivamente il pelo.

Epylab può effettuare inoltre il trattamento professionale di elettrodepilazione indolore avvalendosi dell'impiego di correnti di Termolisi ad altissima frequenza, erogate attraverso l'elettrodo a pinza.

Le funzioni di Anaforesi e Cataforesi permettono di effettuare trattamenti di disincrostazione elettronica, per un'efficace preparazione della zona da trattare e, come coadiuvante alla distribuzione di opportuni prodotti cosmetici post-depilatori ad azione lenitiva e/o inibente, aumentandone l'efficacia.

Trattamenti e principali caratteristiche

- Metodo Flash - Metodo Super-Flash.
- Metodo Flash-Blend.
- Metodo Termolisi con elettrodo ago.
- Metodo Termolisi con elettrodo pinza - Metodo Elettrolisi.
- Funzione Anaforesi - Funzione Cataforesi.
- Funzione Sense, erogazione dell'impulso in automatico senza l'azionamento del comando a pedale (abilitata per trattamenti con elettrodo ad ago).
- Programmi personalizzati con MEMORY CARD. Consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-memorizzato sia personalizzato, ripetibile con il semplice inserimento della card nell'apposita presa.
- Regolazioni digitali di tutti i parametri e del tempo di durata dell'impulso, in millesimi di secondo.
- Visualizzazione, durante il trattamento, del tempo mancante al termine della seduta.
- Conta impulsi.
- Ampio schermo retro-illuminato, visibile anche in ambienti con scarsa luminosità.



Predisposizione per lampada a lente autoilluminante



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Accessori [pag. 41-43]

- n. 1 art. 9743 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,075 mm.
- n. 1 art. 9744 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,100 mm.
- n. 1 art. 9745 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,127 mm.
- n. 1 art. 9746 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,150 mm.
- n. 1 art. 9761 – Manipolo porta-ago.
- n. 1 art. 9727 – Comando a pedale.
- n. 1 art. 9759 – Cavo unipolare di connessione per elettrodo placca.
- n. 1 art. 9758 – Manipolo sonda, completo di cavo estraibile.
- n. 1 art. 9749 – Sonda per manipolo Thermosoft.
- n. 3 art. 9732 – Depy Gel, confezione di gel inibente, 200 ml.
- n. 1 art. 9890 – Pinza elettronica completa di cavo estraibile.
- n. 1 art. 9947 – Cavo bipolare con spinotti Ø 4 mm.
- n. 2 art. 9756 – Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco a clip completo di adattatore, dim. 60x80 mm.
- n. 5 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 35x45 mm.
- n. 2 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm.
- n. 1 art. 9791 – Manipolo isolato per l'utilizzo dei puntali: sfera, piattello.
- n. 1 art. 9792 – Puntale a sfera per micro-jono.
- n. 1 art. 9794 – Puntale a piattello per disincrostante.
- n. 10 art. 9837 – Memory Card.

Depy Program Quickly Plus



Art. 9046/E

Il trattamento professionale di elettrodepilazione con Quickly Plus si avvale dell'impiego di correnti di Termolisi, erogate attraverso l'elettrodo ad ago.

- Timer elettronico per impostare in automatico la durata del singolo impulso: da 0,5" a 10".
- Orologio digitale per visualizzare il tempo complessivo di ogni trattamento: funzione stand by, utile per sospendere momentaneamente il conteggio senza azzerare il display.
- Regolazione e visualizzazione luminosa di potenza.



Accessori [pag. 41-43]

- n. 5 art. 30109744 – Aghi per depilazione
- n. 1 art. 9761 – Manipolo porta-ago
- n. 1 art. 9727 – Comando a pedale

Depy Program Flash-Blend

Il trattamento professionale di elettrodepilazione con Flash-Blend, si avvale dell'impiego di correnti miscelate di Termolisi + Elettrolisi, attraverso l'elettrodo ago, in sinergia all'innovativo sistema Flash. Il metodo Flash, erogando in pochi centesimi di secondo un impulso ad elevata intensità, contribuisce a ridurre drasticamente la sensibilità del soggetto in trattamento, aumentandone il risultato visibile sin dalle prime sedute.



Art. 9029A - versione con porta accessori
Art. 9029/E - versione senza porta accessori

Trattamenti e principali caratteristiche

- Metodo Flash
- Metodo Flash-Blend
- Metodo Elettrolisi
- Timer elettronico per impostare in automatico la durata del singolo impulso: da 0,5" a 10"
- Orologio digitale per visualizzare il tempo complessivo di ogni trattamento: funzione stand by, utile per sospendere momentaneamente il conteggio senza azzerare il display.
- Regolazioni e visualizzazioni luminose di potenza.



Accessori [pag. 41-43]

- n. l art. 9744 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,100 mm
- n. l art. 9761 – Manipolo porta-ago
- n. l art. 9727 – Comando a pedale
- n. l art. 9771 – Elettrodo placca dim. 60x80 cm
- n. l art. 9784 – Adattatore per elettrodo placca - nero
- n. l art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
- n. l art. 9759 – Cavo unipolare di connessione per elettrodo placca

Depy Program Complex

Con Depy Complex l'operatore estetico dispone di uno strumento completo per svolgere qualsiasi trattamento professionale di elettrodepilazione. Si avvale dell'impiego di correnti miscelate di Termolisi + Elettrolisi, attraverso l'elettrodo ago, in sinergia all'innovativo sistema Flash e Super-Flash.



Le funzioni Flash e Super-Flash erogando in pochi millesimi di secondo un impulso ad elevata intensità, contribuiscono a ridurre drasticamente la sensibilità del soggetto in trattamento, aumentandone il risultato visibile sin dalle prime sedute.

Con Depy Complex, l'operatore estetico può inoltre selezionare le sole correnti di Elettrolisi, adatte in zone particolarmente delicate o per soggetti sensibili alle correnti ad alta frequenza (Termolisi). Depy Complex offre inoltre il trattamento professionale di elettrodepilazione indolore Thermosoft che, utilizzando una particolare sonda di superficie in azione sinergica allo specifico prodotto Depy Gel, ne favorisce la conducibilità e l'azione inibente; il metodo è particolarmente adatto per zone delicate.

Il sistema di depilazione Thermosoft permette di trattare ampie aree in tempi ridotti, indebolendo progressivamente il pelo.

Depy Complex può effettuare inoltre il trattamento professionale di elettrodepilazione indolore avvalendosi dell'impiego di correnti di Termolisi ad altissima frequenza, erogate attraverso l'elettrodo a pinza.

Le funzioni di Anaforesi e Cataforesi permettono di effettuare trattamenti di disincrostazione elettronica, per un'efficace preparazione della zona da trattare, e come coadiuvante alla distribuzione di opportuni prodotti cosmetici post-depilatori ad azione lenitiva e/o inibente, aumentandone l'efficacia.

Trattamenti e principali caratteristiche

- Metodo Flash - Metodo Super-Flash
- Metodo Flash-Blend
- Metodo Termolisi con elettrodo ago
- Metodo Termolisi con elettrodo pinza
- Metodo Elettrolisi





Art. 9043A - versione con porta accessori
 Art. 9043/E - versione senza porta accessori



- Funzione Anaforesi - Funzione Cataforesi
- Funzione Sense, erogazione dell'impulso in automatico senza l'azionamento del comando a pedale
- Memory Key, memorizza ben 20 trattamenti, 4 per ogni metodo, e modificabili dall'operatore estetico
- Regolazioni digitali di tutti i parametri e del tempo di durata dell'impulso, in millesimi di secondo
- Visualizzazione, durante il trattamento, del tempo mancante al termine della seduta
- Conta impulsi
- Ampio schermo retro-illuminato, visibile anche in ambienti con scarsa luminosità.

Accessori [pag. 41-43]

- n. l art. 9744 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi Gamma Ø 0,100 mm
- n. l art. 9761 – Manipolo porta-ago
- n. l art. 9727 – Comando a pedale
- n. l art. 9759 – Cavo unipolare di connessione per elettrodo placca
- n. l art. 9758 – Manipolo sonda, completo di cavo estraibile
- n. l art. 9749 – Sonda per manipolo Thermosoft
- n. l art. 9732 – Depy Gel, confezione di gel inibente, 200 ml
- n. l art. 9890 – Pinza elettronica completa di cavo estraibile
- n. l art. 9731 – Cavo bipolare con spinotti Ø 4 mm
- n. l art. 9771 – Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco a clip, dim. 60x80H. mm
- n. l art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
- n. l art. 9784 – Adattatore per elettrodo placca
- n. l art. 9791 – Manipolo isolato per l'utilizzo dei puntali: sfera, piattello
- n. l art. 9792 – Puntale a sfera per micro-jono.
- n. l art. 9794 – Puntale a piattello per disincrostante
- n. l art. 9779 – Memory Key

Depy Program Mixing Advantage

Il trattamento professionale di elettrodepilazione con Depy Program Advantage si avvale dell'impiego di correnti di Termolisi, erogate attraverso l'elettrodo ad ago e pinza con il metodo indolore.



Art. 9062A - versione con porta accessori

Art. 9062 - versione senza porta accessori

- 18 programmi residenti e modificabili dall'operatore estetico.
- Regolazioni digitali di tutti i parametri.
- Visualizzazione, durante il trattamento, del tempo mancante al termine della seduta.
- Conta impulsi.
- Display retro-illuminato, visibile anche in ambienti con scarsa luminosità.



Accessori [pag. 41-43]

- n. l art. 9744 – Confezione da 50 aghi monouso sterilizzati a Raggi
Gamma Ø 0,100 mm
- n. l art. 9761 – Manipolo porta-ago
- n. l art. 9727 – Comando a pedale
- n. l art. 9890 – Pinza elettronica completa di cavo estraibile

DEPY PROGRAM ACCESSORIES



Art. 9732 Confezione Depy Gel per depilazione con sonda.



Art. 9743 Confezione aghi \varnothing 0,075 mm (50 pz).



Art. 9744 Confezione aghi \varnothing 0,100 mm (50 pz).




Art. 9745 Confezione aghi \varnothing 0,127 mm (50 pz).



Art. 9746 Confezione aghi \varnothing 0,150 mm (50 pz).



Art. 9759 Cavo unipolare per collegamento elettrodo placca.

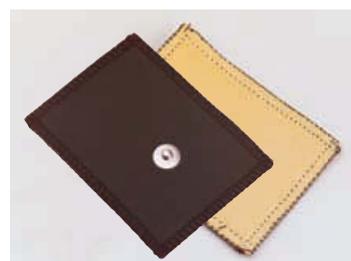

Art. 9771 Elettrodo placca rivestito in spugna dim. 80x60 mm.



Art. 9741 Confezione contenente 4 elettrodi placca con attacco automatico, dim: 35x45 mm.



Art. 9772 Fascia elastica per fissaggio placca dim. 40x10H cm.



Art. 9756 Elettrodo placca art. 9771 completo di adattatore art. 9784.



Art. 9779 Memory Key per Depy Complex art. 9043/E.



Art. 9837 Memory Card per Epylab.



Art. 9784R Adattatore per placca con innesto spinotto \varnothing 4 mm (rosso).



Art. 9784N Adattatore per placca con innesto spinotto \varnothing 4 mm (nero).



Art. 9791 Manipolo isolato per l'utilizzo di puntali: sfera, cilindro, piattello.



Art. 9749 Sonda per manipolo Thermosoft.




Art. 9794 Puntale a piattello per disincrostante.



Art. 9792 Puntale a sfera per micro-jono.



Art. 9731 Cavo bipolare con spinotti \varnothing 4 mm.

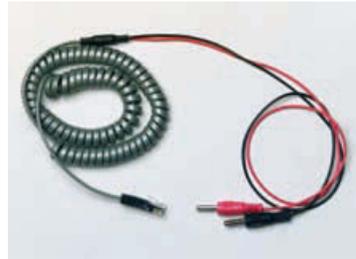

Art. 9947 Cavo bipolare per Jono e Disincrostante, spinotti positivo e negativo \varnothing 4 mm, spina Plug In.



Art. 9874 Gruppo alimentazione sorgente luminosa (unità luminosa esclusa).



Art. 9883 Unità luminosa per anti-acne. Solo per uso extra cee.



Art. 9882 Unità luminosa per depilazione. 500 Clear. Solo per uso extra cee.



Art. 9884 Unità luminosa per fotoringiovanimento. Solo per uso extra cee.



Art. 99183 Unità di depilazione. 600 Dark.



Art. 9890 Pinza elettronica per elettrodo depilatore completa di cavo estraibile con connettore isolato.



Art. 9758 Manipolo sonda elettronico per Depy Complex.



Art. 9761 Manipolo porta ago con cavo e connettore isoalto lunghezza 80 mm.



Art. 9875 Sonda Fototipo "Color Test".



Art. 9727 Interruttore a pedale completo di cavo e spinotto.



Art. 9877 Piastrina amovibile per sterilizzazione e pulizia - versione grande per area 23x57 mm (13,1 cmq).



Art. 9878 Piastrina amovibile per sterilizzazione e pulizia - versione piccola per area 11x30 mm (3,0 cmq).



Art. 9886 Occhiali operatore Luce Pulsata.



Art. 99227 Occhiali operatore Laser.



Art. 99204 Manipolo luce pulsata 21.000 spot.
Art. 99164 Manipolo luce pulsata 11.000 spot.



Art. 99170 Supporto porta filtro (filtro escluso).



Art. 99166 Filtro rosso per epilazione pelli scure.



Art. 99167 Filtro arancio per epilazione pelli chiare.



Art. 99168 Filtro giallo per fotoringiovanimento (optional su richiesta).



Art. 99202 Filtro rosso con riduzione



Art. 99203 Filtro arancio con riduzione



Art. 9999 Occhiali cliente (1 pezzo)



Art. 99229 Dispositivo sicurezza interblocco laser Polaris



Art. 99226 Pedale laser Polaris



Art. 99224 Cavo connessione unità raffreddamento apparecchio



Art. 99225 Manipolo laser Polaris



Art. 1062550 Bacinella per gel



Art. 16242 Spatola



Art. 99228 Kit carico acqua laser Polaris



Art. 99231 Jelly Gel confezione gel per laser e IPL/luce pulsata 5 kg (dispenser riutilizzabile escluso)



Art. 99232 Dispenser riutilizzabile per Jelly Gel



Art. 99200 Memory card



Art. 99221 Card attivazione X-Pulsar



Art. 99222 Card attivazione laser Polaris

Optima 800kHz Intensive Ultrasound

Optima 800kHz Intensive Ultrasound nasce dall'esperienza professionale maturata dopo anni di studi e applicazioni nel campo dell'Ultrasuono Professionale applicato agli inestetismi della Cellulite e dell'Adipe.



Art. 9134

Tali esperienze, opportunamente calibrate e finalizzate alla funzione puramente estetica della persona, hanno consentito di affermare, in abbinamento all'intervento manuale dell'estetista, dopo innumerevoli test pratici, interessanti risultati anche in soggetti ove il problema della cellulite e dell'adipe era presente in modo importante.

Tali risultati attestano il raggiungimento di modificazioni radicalmente rappresentative sulle anomalie estetiche in essere, raggiunte con la massima sicurezza anche grazie alla capacità professionale e attenzione operativa riconosciute alle estetiste che hanno sviluppato i test in sinergia con il nostro Engineering Department.

Optima 800kHz, conforme alle recenti Direttive che regolamentano l'utilizzo delle apparecchiature professionali per estetica, genera un Onda Ultrasonica Unidirezionale ad Alta Intensità e Media Frequenza, in grado di raggiungere rapidamente e contrastare con efficacia l'inetetismo più difficile.

Optima 800kHz dispone di ben 2 applicatori d' ultrasuoni:

- Per le aree più vaste un manipolo dotato di ben **4 Emettitori Convergenti**, per generare vibrazione ed energia sonora convergente e ottimizzare il flusso dell'onda ultrasonica.

- Per le zone più difficili come l'addome e in prossimità delle articolazioni, il **Manipolo Mono-Emettitore**, compatto e con una potenza adeguata a trasmettere con efficacia l'onda ultrasonica.

Il meccanismo di azione biologica dell'energia ultrasonica è legato al potere meccanico-vibrante delle onde ultrasoniche. Esso esercita un micro massaggio che interessa i tessuti sui quali, il tradizionale massaggio, non determina alcuna azione.

Le onde ultrasoniche applicate al tessuto corporeo, perdono una certa porzione dell'energia emessa a causa della naturale barriera offerta dall'organismo: questo processo è conosciuto con il nome di "attenuazione" e si traduce in calore.

Il calore generato, in sinergia con l'onda ultrasonica, raggiunge l'area interessata dall'inetetismo, facilitando notevolmente il processo di riduzione.

Optima 800kHz favorisce quindi una maggiore permeabilità delle cellule adipose i cui contenuti (acidi grassi), una volta "sgretolati", vengono poi immessi nel sistema circolatorio locale e smaltiti attraverso il circuito linfatico ed urinario.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 230 Vca 50 - 60 Hz.
Assorbimento: MAX. 90 WATT
Generatore Ultrasuoni: 800kHz.
Max potenza uscita Ultrasuoni a contatto: 25W
Max potenza/cm² per emettitore (4): 2,5W

Accessori [pag. 85-90]

- n. l art. 99149 – Cinturino impugnatura manipolo ultrasound
- n. l art. 99153 – Penna Touch Screen
- n. l art. 99184 – Manipolo Ultrasuono 800kHz a 4 Emettitori
- n. l art. 99185 – Manipolo Ultrasuono 800kHz Mono-Emettitore
- n. l art. 9816 – Confezione di gel conduttivo da 260 gr
- n. l art. 99200 – Memory card

Optima 800kHz Intensive Ultrasound

L'azione sinergica dei 4 Emettitori ad Ultrasuoni di OPTIMA 800kHz

I 4 Emettitori ad Ultrasuono agiscono in maniera sinergica per la riduzione e redistribuzione del grasso sottocutaneo, delle cellule adipose, con miglioramento del trofismo del tessuto e rimodellamento del profilo del corpo.

L'azione sinergica delle quattro testine ultrasoniche è così in grado di riattivare tutte le zone in cui si accumulano degli ammassi adiposi (es.: fianchi, cosce, glutei) ed utile per rivitalizzare le zone cellulitiche in cui sia presente una scarsa circolazione (cellulite).

Tra i 4 Emettitori si favorisce un aumento del metabolismo cellulare e, contemporaneamente, si intensifica l'elettrolisi nel liquido intra ed extra cellulare, favorendo la contrazione delle minuscole fibre muscolari poste nel derma con un conseguente miglioramento del trofismo tissutale.

L'Emettitore singolo, potenziato per garantire la massima erogazione, agisce anch'esso nel sottocutaneo e sulle cellule adipose, con il conseguente miglioramento del trofismo del tessuto e rimodellamento del profilo del corpo. Particolarmente adatto per l'area addominale ed in prossimità di aree di piccole dimensioni.



Art. 99200

Una pratica **MEMORY CARD** (10 card in dotazione) consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-impostato che personalizzato.

Optima 800kHz, può essere programmata per lavorare una o più aree specifiche mediante la selezione dell'area da trattare; l'apparecchio adeguerà automaticamente il tempo di trattamento per ogni singola zona.


Durante la fase di anamnesi sarà possibile inoltre scegliere le zone da trattare, l'ordine con la quale verranno trattate ed il tempo di permanenza su ciascuna zona.

Una volta avviato il trattamento, Optim 800kHz avviserà l'operatore estetico con messaggi visivi e sonori quando cambiare la zona da trattare e nel caso vi siano passaggi dalla fase energetica alla fase di massaggio.


Programmi disponibili

Optima 800kHz dispone di ben 27 differenti programmi:

in base ad un'anamnesi iniziale della cliente, il software sarà in grado di impostare e consigliare i parametri di lavoro più idonei, lasciando comunque all'operatore estetico la possibilità di modificare a proprio piacimento la potenza e la modulazione (effetto massaggio) di esecuzione.

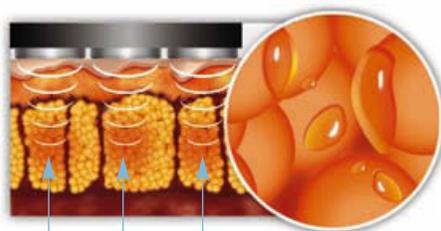

Rappresentazione dell'effetto vibrante ultrasonico con i 4 emettitori.

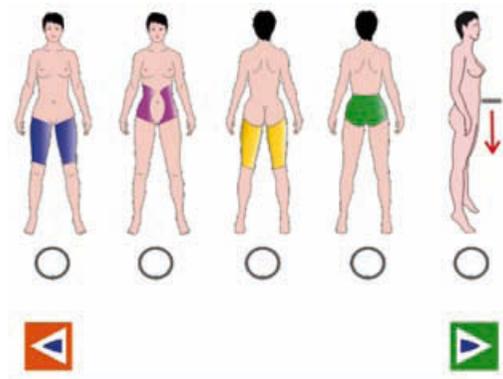

MERCHANDISING Supporti pubblicitari per la vendita



Art. 110912401001 Depliant
informativi consumatrice



Art. 99179 Roto-Banner
80x210 cm

Body Kiss R.F. Face & Body



Art. 9127

Body Kiss R.F. Face & Body

Radiofrequenza nei trattamenti estetici

La metodologia ed il principio fisico è strettamente legato all'ipertermia localizzata. Le proprietà antalgiche e terapeutiche del calore, sono ben note ai ricercatori e sperimentatori che hanno applicato al corpo umano utilizzando i più disparati sistemi e metodi.

La Radiofrequenza rappresenta una delle più moderne tecniche impiegate nei trattamenti anti-age, del rilassamento cutaneo e del rassodamento.

La Radiofrequenza si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta frequenza, generalmente tra 1 e 6 MHz, a flusso variabile; tale flusso di energia non stimola il tessuto nervoso e muscolare ma produce un "effetto termico controllato", favorendo l'aumento della temperatura del derma.

Gli effetti della radiofrequenza non sono immediati, bensì sono gradualmente evidenziano con il passare dei giorni e delle settimane, arrivando a raggiungere il massimo effetto anche dopo 1-2 mesi dal trattamento.

Radiofrequenza viso

Il trattamento con Radiofrequenza permette di surriscaldare il sottocutaneo, per un'azione anti-aging, ristrutturante e rimodellante.

Il flusso della radiofrequenza contribuisce alla contrazione delle fibre di collagene e, a lungo termine, favorisce la sintesi di nuovo collagene. È evidente che, dopo il ciclo di sedute previste, l'aspetto della pelle troverà nuovo turgore attenuando notevolmente gli antiestetici segni dell'invecchiamento cutaneo.

Radiofrequenza corpo

RF Body Kiss grazie alle sue onde è in grado di stimolare alcuni processi naturali quali la produzione del Collagene Elastina e Acido ialuronico incrementando la loro azione permettendo un riequilibrio delle aree trattate.

Tramite un'onda diatermica bipolare, abbinata ai trattamenti tradizionali, RF Body Kiss, permette di trattare con ottimi risultati gli inestetismi più frequenti quali rilassamento cutaneo, adipe localizzato e cellulite.

L'innovativo sistema di applicazione della Radiofrequenza Bipolare corpo, per mezzo delle placche RF, in sinergia con il trattamento di Elettrolipolisi o di Elettrolipolisi, favorisce un benefico effetto visibile già dalle prime sedute. L'associazione delle due onde specifiche favorisce il rimodellamento cutaneo e il miglioramento del microcircolo, aiutando la corretta ripartizione del tessuto fibroso con diminuzione dei noduli antiestetici dell'edema locale, delle tossine accumulate e dei depositi di grasso, con conseguente tonificazione generale dei tessuti.

Il campo elettrico che si viene a creare fra i due elettrodi, determina un aumento del metabolismo cellulare, variando la permeabilità di membrana delle cellule stesse, con un maggior consumo di ossigeno ed un incremento della circolazione locale, favorendo gli scambi cellulari e la combustione locale dei grassi.

RF Body Kiss, oltre alla programmazione individuale dei trattamenti, dispone di ben **37 differenti programmi di lavoro**:

- 8 Mix R.F. + Elettrolipolisi
- 12 Mix R.F. Stimol
- 12 Stimolazione
- 2 Drenomassaggio elettronico
- 1 R.F. Manuale viso
- 1 R.F. Manuale corpo
- 1 R.F. Corpo con placche



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.




Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Sequenza:

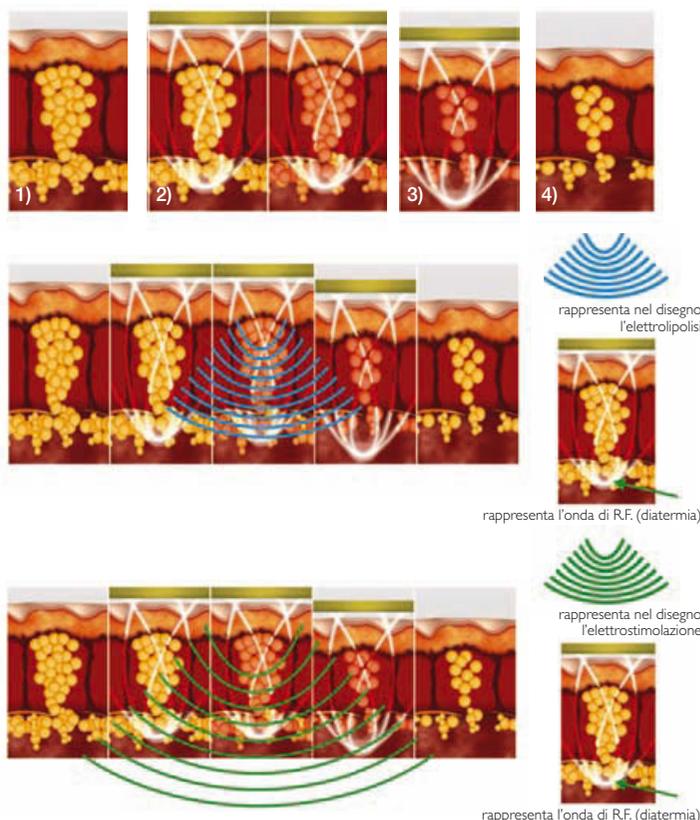

Accessori [pag. 85-90]

- n. 2 art. 9864 - Fasce elastiche 60 x 8cm.
- n. 8 art. 9865 - Fasce elastiche 80 x 8cm.
- n. 2 art. 9866 - Fasce elastiche 100 x 8cm.
- n. 16 art. 99146 - Placche elettrodo silicone mm 95 x 61 arrotondate R.F.
- n. 8 art. 99144 - Placche RF senza elettrodi
- n. 1 art. 99143 - Manipolo bipolare RF viso
- n. 10 art. 99147 - Memory card
- n. 16 art. 99145 - Elettrodo dorato mm 60 x 40 arrotondate R.F. - 1 pezzo
- n. 1 art. 99142 - Manipolo bipolare RF corpo
- n. 3 art. 9816 - Gel

Body Progress Soft & Solve

Soft & Solve è un'apparecchiatura computerizzata di ultima generazione che, grazie alla selezione di particolari modelli d'onde elettriche lipolitiche, in sinergia combinata con l'applicazione localizzata dei raggi infrarossi, contribuisce alla riduzione del tessuto adiposo. L'emissione fotobiologica infrarossa coinvolge delicatamente i tessuti adiposi aumentandone la temperatura e l'attività naturale enzimatica, atta a favorire la lipolisi locale.



Art. 9083

Body Progress Soft & Solve

I raggi infrarossi sono onde elettromagnetiche con lunghezza d'onda compresa tra 760 e 1000 nm (manometro) e vengono chiamati infrarossi per la vicinanza del colore rosso allo spettro (gamma di frequenza) della luce visibile, è uno dei colori percepibili all'occhio umano.

I raggi infrarossi sono in grado di attraversare tutti gli strati dell'epidermide senza riscaldarli e raggiungere così il pannicolo adiposo. La radiazione fotobiologica dell'infrarosso, una volta raggiunto l'area con l'adipe, ne aumenta la temperatura e la conseguente attività enzimatica che favorisce la lipolisi locale.

Particolarità di Soft & Solve è la **placca Infrared Professional** che, oltre ad avere una zona centrale di emissione dell'infrarosso, dispone di due elettrodi aggiuntivi per effettuare in sinergia trattamenti di elettrolipolisi, stimolazione o drenaggio localizzato. In questa particolare applicazione non si otterrà la stimolazione della fascia muscolare ma una bonificazione locale che favorisce la migrazione dei liquidi non metabolizzati attraverso il circolo linfatico.

Altrettanto importante è la possibilità, sfruttando **gli innovativi 6 differenti modelli d'onde elettromagnetiche**, di combinare tra loro le 6 differenti funzioni eccitomotricie e di utilizzare Soft & Solve come un vero e proprio elettrostimolatore anche senza l'impiego delle placche Infrared Professional, ma attraverso i tradizionali elettrodi conduttivi.

Riduzione della cellulite Elettrolipolisi.

Sviluppa un'azione tonico stimolante atta a favorire la riduzione dei depositi cellulitici, i quali, stimolando la circolazione locale, aumentano le richieste metaboliche delle cellule ed il conseguente consumo di grassi.

Miglioramento del sistema circolatorio locale stimola le strutture elastiche del derma, rassodando la cute e favorendo un drenaggio di tutte le sostanze convogliate nel liquido interstiziale, per una facile eliminazione attraverso la diuresi.

L'azione sinergica delle correnti ondulatorie eccitomotricie a bassa frequenza, sviluppa una benefica azione tonico-stimolante, finalizzata alla concreta e progressiva riduzione della massa cellulitica esistente.

Drenaggio sequenziale al viso o al corpo, attraverso il trattamento di elettrostimolazione sequenziale, apporta al circuito linfatico una benefica azione tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive. Tale azione migliora sia il tono muscolare che l'aspetto estetico della pelle, favorendo l'aumento naturale della diuresi nei soggetti con ritenzione idrica.

Snellimento localizzato dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto connettivo.

Il risultato delle correnti impiegate, coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nell'eventuale prodotto utilizzato, è evidente già dalle prime sedute.

Rassodamento delle fasce muscolari con notevole miglioramento dell'elasticità dei tessuti e dell'aspetto della pelle.

La stimolazione di tutto il corpo è effettuata in generale con tre tipologie di trattamento, in funzione delle caratteristiche della persona da trattare. Gambe, glutei, addome e pettorali tonificati, senza escludere i muscoli facciali con una conseguente riduzione della lassità del viso migliorandone la lucentezza della pelle che, unitamente ad una attenuazione dell'effetto di affaticamento, conferiscono un aspetto rivitalizzato.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.



Trattamenti al viso di elettrostimolazione e linfodrenaggio

- Grande schermo digitale ad elevatissima risoluzione
- Easy Pad: sistema di visualizzazione sullo schermo del corretto posizionamento degli elettrodi.
- 43 differenti trattamenti:
 - 8 programmi Infrared + Elettrolipolisi
 - 6 programmi Infrared + Elettrostimolazione Donna
 - 7 programmi Elettrostimolazione Donna
 - 6 programmi Infrared + Elettrostimolazione Uomo
 - 6 programmi Elettrostimolazione Uomo
 - 2 programmi Infrared + Drenomassaggio
 - 8 programmi Drenomassaggio Corpo e Viso

Parametri regolabili per l'impostazione individuale:

- Erogazione delle correnti
- Erogazione dell'onda Infrarosso
- Tempo del trattamento
- Tempo per ogni fase del trattamento
- Valori di frequenza, da 2Hz. a 198Hz.
- Il tempo di pausa impostato: regolabile da -1 a + 10 secondi
- Il tempo di durata emissione impulso impostato: regolabile da 1 a 10 secondi
- Selezione del tipo di onda elettrica da utilizzare

Programmi personalizzati con **MEMORY CARD**. Consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-memorizzato che personalizzato, ripetibile con il semplice inserimento della card.



Accessori [pag. 85-90]

- n. 1 art. 9869 – Marsupio porta-elettrodi completo di kit cavi di connessione
- n. 10 art. 9845 – Cavo bipolare per elettrodi placca
- n. 2 art. 9864 – Fascia 60x80 mm grigia
- n. 8 art. 9865 – Fascia 80x80 mm grigia
- n. 2 art. 9866 – Fascia 100x80 mm grigia
- n. 8 art. 9741 – Confezione 4 elettrodi 35x45 mm
- n. 8 art. 9748 – Confezione 4 elettrodi 45x80 mm
- n. 16 art. 9768 – Elettrodo placca 120x80 mm
- n. 4 art. 9770 – Confezione 30 pz. elettrodi monouso
- n. 16 art. 9771 – Elettrodo placca 60x80 mm
- n. 4 art. 9772 – Fascia 40x10 mm azzurra
- n. 4 art. 9773 – Fascia 60x10 mm azzurra
- n. 4 art. 9774 – Fascia 80x10 mm azzurra
- n. 4 art. 9775 – Fascia 100x10 mm azzurra
- n. 8 art. 9893 – Placca con emettitore infrarossi
- n. 10 art. 9891 – Memory card Soft & Solve
- n. 16 art. 9894 – Elettrodi in spugna con doppia connessione per emettitore infrarosso, 56 x 90 mm
- n. 8 art. 9895 – Confezione 4 elettrodi monouso con doppia connessione per emettitore ad infrarosso, 53x96 mm

Optima Total Cavity

Optima nasce dall'esperienza professionale maturata in settori non riconducibili a quello dell'estetica e sviluppata nel campo specifico del sistema cavitazionale ultrasonico.

(Attenzione! Riferirsi alle normative vigenti nel paese di utilizzo)



Art. 9126

Tali esperienze opportunamente calibrate e finalizzate alla funzione puramente estetica della persona, hanno consentito di affermare, in abbinamento all'intervento manuale dell'estetista, dopo innumerevoli test pratici, interessanti risultati anche in soggetti ove il problema della cellulite e dell'adipe era presente in modo importante.

Tali risultati attestano il raggiungimento di modificazioni radicalmente rappresentative sulle anomalie estetiche in essere, raggiunte con la massima sicurezza anche grazie alla capacità professionale e attenzione operativa riconosciute alle estetiste che hanno sviluppato i test in sinergia con l'Engineering Department.

Optima impiega la tecnologia ad ultrasuoni a bassa frequenza; utilizza ben **4 emettitori convergenti** sullo stesso manipolo, con un'area di lavoro di ben **39 cm²**, per generare vibrazione ed energia sonora. Il meccanismo di azione biologica dell'energia ultrasonica è legato al potere meccanico-vibrante delle onde ultrasoniche esercitando un micro massaggio che interessa i tessuti sui quali, il tradizionale massaggio, non determina alcuna azione.

Le onde ultrasoniche applicate al tessuto corporeo, perdono una certa porzione dell'energia emessa a causa della naturale barriera offerta dall'organismo: questo processo è conosciuto con il nome di "attenuazione" e si traduce in calore.

Optima permette di agire su tutti gli inestetismi impiegando una nuova e rivoluzionaria forma di ultrasuoni a bassa frequenza, con un effetto equivalente a quello degli ultrasuoni ad alta intensità.

Optima favorisce quindi una maggiore permeabilità delle cellule adipose i cui contenuti (acidi grassi), una volta "sgretolati", vengono poi immessi nel sistema circolatorio locale e smaltiti attraverso il circuito linfatico ed urinario.

L'azione sinergica delle 4 testine ad ultrasuoni di OPTIMA

Le 4 teste ad ultrasuono agiscono in maniera sinergica per la riduzione e redistribuzione del grasso sottocutaneo, delle cellule adipose, con miglioramento del trofismo del tessuto e rimodellamento del profilo del corpo.

L'azione sinergica delle quattro testine ultrasoniche è così in grado di riattivare tutte le zone in cui si accumulano degli ammassi adiposi (fianchi, ventre, ginocchia, cosce) ed utile per rivitalizzare le zone cellulitiche in cui sia presente una scarsa circolazione (cellulite).

Tra i 4 emettitori si favorisce un aumento del metabolismo cellulare e, contemporaneamente, si intensifica l'elettrolisi nel liquido intra ed extra cellulare, favorendo la contrazione delle minuscole fibre muscolari poste nel derma con un conseguente miglioramento del trofismo tissutale.

Memory Card

Una pratica MEMORY CARD consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-impostato che personalizzato, ripetibile con il semplice inserimento della card nell'apposita presa dalla schermata del menu principale.

Optima, può essere programmata per lavorare una o più zone specifiche mediante la selezione dell'area da trattare; l'apparecchio adeguerà automaticamente il tempo di trattamento per ogni singola zona. Durante la fase di anamnesi sarà possibile inoltre scegliere le aree da trattare, l'ordine e il tempo di permanenza su ciascuna zona.

Una volta avviato il trattamento, Optima avviserà l'operatore estetico con messaggi visivi e sonori quando cambiare la zona da trattare e nel caso vi siano passaggi dalla fase energetica alla fase di massaggio.

Programmi disponibili

Optima dispone di ben 27 differenti programmi: in base ad un'anamnesi iniziale della cliente, il software sarà in grado di impostare e consigliare i parametri di lavoro più idonei, lasciando comunque all'operatore estetico la possibilità di modificare a proprio piacimento la potenza e la modulazione (effetto massaggio) di esecuzione.

Accessori [pag. 85-90]

- n. 2 art. 99149 - Cinturino impugnatura manipolo Cavitazione
- n. 1 art. 99148 - Manipolo Ultrasuono Cavitazione con 4 emettitori
- n. 3 art. 9816 - Gel
- n. 10 art. 99152 - Memory card
- n. 1 art. 99153 - Penna touch screen




Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.




Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

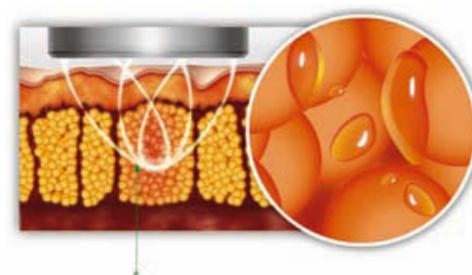

Rappresentazione dell'effetto vibrante ultrasonico con i 4 emettitori.

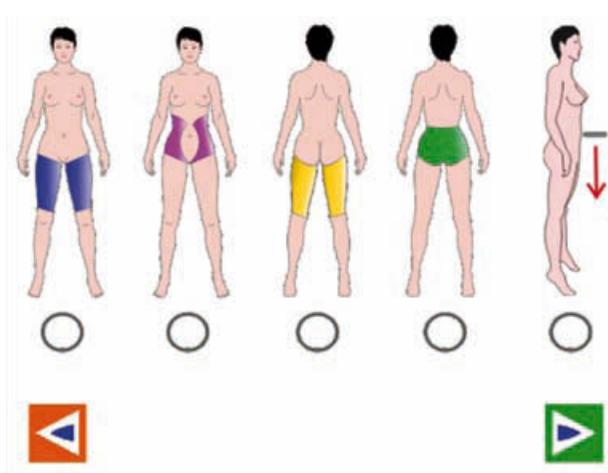

Body Progress Modeling

Apparecchiatura per trattamenti di presso massaggio appositamente testata per ottenere un effetto linfodrenante mediante l'applicazione d'appositi gambali e bracciali suddivisi in settori sovrapposti.



Art. 9078

Body Progress Modeling

L'erogazione d'aria è costantemente controllata da un microprocessore che mantiene costante il flusso d'aria e la pressione all'interno dei settori gonfiabili. Ne risulta così una compressione fisiologicamente peristaltica che come un'onda avvolge uniformemente l'arto dal basso verso l'alto, favorendo l'eliminazione delle scorie trattenute dai tessuti.

Considerando l'utilizzo del linfodrenaggio sequenziale in un programma di trattamenti estetici riducenti, Body Progress Modeling aiuta l'eliminazione del liquido interstiziale in eccesso e la riattivazione dei processi naturali locali, nonché la microcircolazione zonale.

- 10 uscite attive.
- Total Body, un set completo composto da:
 - gambali con pressori inguinali;
 - camere per area addominale;
 - bracciali completi di settori gonfiabili per le mani;
 - contenitore Marsupio.
- Programmi personalizzati con MEMORY CARD.

Consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-memorizzato che personalizzato (nuovi programmi), ripetibile con il semplice inserimento della card nell'apposita presa.

- 3 Programmi corpo generale: trattamenti che consentono di lavorare contemporaneamente gli arti inferiori e arti superiori programmi diversificati in base alle singole esigenze e problematiche della cliente.
- 6 Programmi gambe: trattamenti che agiscono sugli arti inferiori a 8 settori, programmi diversificati in base alle singole esigenze e problematiche della cliente.
- 1 Programma braccia: trattamento ascendente peristaltico a 2 settori favorisce lo scarico di liquidi garantendo una riduzione della parte trattata.
- Ampio schermo digitale "Touch Screen".

Parametri regolabili dall'operatore estetico per l'impostazione individuale:

- tempo totale del trattamento;
- valore di pressione;
- tempo di permanenza di ogni segmento gonfiabile, regolabile da 1 a 40 secondi: regolazione del tempo di durata del ciclo di massaggio;
- tempo di pausa a fine ciclo o esclusione;
- facoltà di eludere dal programma uno o più settori gonfiabili: funzione estremamente utile nel caso vi siano aree da non trattare.

Funzione test

Attivando il pulsante relativo verrà visualizzata tutta la sequenza del trattamento selezionato.

Funzione help

Fornisce rapide spiegazioni "on line" durante l'utilizzo dell'apparecchio.

Sicurezza d'impiego

Il sistema P.C.S. (Pressure Control System) dell'ultima generazione mantiene i valori di pressione uniformi in tutti i settori, anche durante il 1° ciclo di massaggio. Garantisce inoltre l'interruzione automatica del trattamento qualora si dovessero verificare condizioni anomale di pressione, evitando il superamento della soglia massima consentita di 0,2 ATM/132 mm HG, salvaguardando l'apparato.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

ACCESSORI [pag. 85-90]

n. 1 art. 9836 – Gambale Modeling Progress.

n. 20 art. 9783 – Panta-preso in T.N.T.

n. 10 art. 9839 – Memory Card, memoria supplementare per trattamenti personalizzati.

Body Progress Benexere

Apparecchio computerizzato di nuova concezione che, utilizzando in perfetta sinergia la tecnologia degli Ultrasuoni abbinata a 6 differenti modelli di onde elettromagnetiche, contribuisce alla riduzione del tessuto adiposo e della cellulite, migliorando contemporaneamente, sia il tono muscolare sia l'aspetto dell'epidermide.



Art. 9074

Gli ultrasuoni

Le onde ultrasoniche, applicate al tessuto corporeo, perdono una certa porzione della loro energia a causa della naturale barriera offerta dall'organismo: questo processo è conosciuto con il nome di attenuazione e si traduce in calore.

L'interazione degli ultrasuoni con i tessuti biologici favorisce l'azione meccanica, termica e chimica.

L'azione meccanica è dovuta al movimento delle particelle dei tessuti in contatto con l'onda ultrasonica. Le onde ultrasoniche prodotte favoriscono un aumento della permeabilità della membrana e la separazione dei liquidi contenuti.

L'azione termica dipende essenzialmente dalle caratteristiche di resistenza del tessuto corporeo. Il passaggio delle onde ultrasoniche attraverso i tessuti "molliti" sviluppa un naturale innalzamento della temperatura, che incrementa le reazioni metaboliche e si traduce, nelle cellule adipose, in un aumento della lipolisi.

L'azione chimica favorisce la variazione del pH locale e della permeabilità delle membrane cellulari. Particolarità di Benexere è la placca ultrasuoni che oltre ad avere una parte metallica centrale per l'emissione dell'onda ultrasonica, dispone di ulteriori due elettrodi per effettuare in sinergia trattamenti di Elettrolipolisi o di stimolazione e drenaggio localizzato. In questa particolare applicazione non si otterrà la stimolazione della fascia muscolare ma una tonificazione locale nell'area della placca Ultrasonica. Altrettanto importante è la possibilità, sfruttando gli innovativi 6 differenti modelli d'onde elettromagnetiche, di combinare tra loro le 6 differenti funzioni eccitomotorie e di utilizzare Benexere come un vero e proprio elettrostimolatore, anche senza l'impiego delle placche Ultrasoniche, ma attraverso i tradizionali elettrodi conduttivi.



- **Riduzione della cellulite Elettrolipolisi.** Sviluppa un'azione tonico stimolante atta a favorire la riduzione dei depositi cellulitici, i quali, stimolando la circolazione locale, aumentano le richieste metaboliche delle cellule ed il conseguente consumo di grassi.

- **Miglioramento del sistema circolatorio locale** stimola le strutture elastiche del derma, rassodando la cute e favorendo un drenaggio di tutte le sostanze convogliate nel liquido interstiziale, per una facile eliminazione attraverso la diuresi.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.



Body Progress Benexere

- **Drenaggio sequenziale al viso o al corpo**, attraverso il trattamento di elettrostimolazione sequenziale, apporta al circuito linfatico una benefica azione tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive.
- **Snellimento localizzato** dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto connettivo. Il risultato delle correnti impiegate, coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nell'eventuale prodotto utilizzato, è evidente già dalle prime sedute.
- **Rassodamento delle fasce muscolari** con notevole miglioramento dell'elasticità dei tessuti e dell'aspetto della pelle. La stimolazione di tutto il corpo è effettuata in generale con tre tipologie di trattamento, in funzione delle caratteristiche della persona da trattare.
- Trattamenti al viso di elettrostimolazione e linfodrenaggio
- Grande schermo digitale ad elevatissima risoluzione
- Easy Pad: sistema di visualizzazione sullo schermo del corretto posizionamento degli elettrodi.



- 43 differenti trattamenti:

- 8 programmi Ultrasuoni + Elettrolipolisi
- 6 programmi Ultrasuoni + Elettrostimolazione Donna
- 7 programmi Elettrostimolazione Donna
- 6 programmi Ultrasuoni + Elettrostimolazione Uomo
- 6 programmi Elettrostimolazione Uomo
- 2 programmi Ultrasuoni + Drenomassaggio
- 8 programmi Drenomassaggio Corpo e Viso

Parametri regolabili per l'impostazione individuale:

- Erogazione delle correnti
- Erogazione dell'onda Ultrasonica
- Tempo del trattamento
- Tempo per ogni fase del trattamento
- Valori di frequenza, da 2Hz. a 198Hz.
- Il tempo di pausa impostato: regolabile da -1 a + 10 secondi
- Il tempo di durata emissione impulso impostato: regolabile da 1 a 10 secondi
- Selezione del tipo di onda elettrica da utilizzare

- Funzione "HELP" fornisce importanti informazioni utili sull'operatività dell'apparecchio fornendo rapide spiegazioni "on line"

- Programmi personalizzati con MEMORY CARD. Consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, sia esso pre-memorizzato che personalizzato, ripetibile con il semplice inserimento della card.



Accessori [pag. 85-90]

- n. 10 art. 9845 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG
- n. 8 art. 9861 – Placche Ultrasoniche
- n. 8 art. 9748 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 45x80 mm
- n. 8 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 35x45 mm
- n. 16 art. 9768 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 120x80 mm
- n. 16 art. 9771 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 60x80 mm
- n. 2 art. 9864 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x8H. cm
- n. 8 art. 9865 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x8H. cm
- n. 2 art. 9866 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x8H. cm
- n. 16 art. 9867 – Elettrodo placca in gomma per placca ultrasonica
- n. 3 art. 9868 – confezione contenente 2 bende saline
- n. 4 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
- n. 4 art. 9773 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x10H. cm
- n. 4 art. 9774 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x10H. cm
- n. 4 art. 9775 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x10H. cm
- n. 4 art. 9770 – Confezione contenente 50 elettrodi adesivi mono paziente, Ø 35mm
- n. 10 art. 9862 – Memory Card, memoria supplementare per trattamenti personalizzati
- n. 3 art. 9816 – Gel per elettrostimolazione
- n. 1 art. 9869 – Marsupio per elettrostimolazione

Optional [pag. 85-90]

- Art. 9848 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG a quattro derivazioni

Beauty & Beauty Reducer

Avvalendosi del metodo di "Elettroscultura", basato sul principio dell'elettroforesi, Beauty & Beauty Reducer sviluppa un'azione benefica finalizzata alla riduzione di circonferenza e particolarmente indicata per i soggetti con evidenti inestetismi, identificabili in vaste aree del corpo.



Art. 9097

Beauty & Beauty Reducer

In sinergia con il trattamento di elettroscultura, è possibile utilizzare il programma di rassodamento delle fasce muscolari per mezzo della funzione di elettrostimolazione, appositamente elaborata per incrementare la fase di rassodamento nelle aree trattate, apportando un notevole miglioramento dell'elasticità dei tessuti e della pelle.

Reducer (elettroscultura)

L'azione combinata di opportuni prodotti cosmetici, abbinata alle correnti galvaniche, ondulatorie, eccito-motorie a bassa frequenza, sviluppa un benefico effetto tonico-stimolante finalizzato alla progressiva riduzione della massa cellulitica.



Snellimento localizzato dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici. L'elettroforesi favorisce l'azione positiva ed efficace di opportuni preparati cosmetici snellenti e rassodanti.

Beauty & Beauty Reducer è particolarmente indicato come elemento coadiuvante nel contesto di trattamenti volti alla prevenzione di un processo di formazione della cellulite e dell'adipe.

Miglioramento dell'elasticità dei tessuti, conseguente al naturale riequilibrio dell'attività del tessuto e degli scambi cellulari. Effetto decongestionante con maggiore evidenza per gli arti inferiori.

L'applicazione è particolarmente indicata come elemento coadiuvante nel contesto di trattamenti volti alla prevenzione di un processo di formazione della cellulite e dell'adipe.

Stimol (elettrostimolazione)

Rassodamento delle fasce muscolari con notevole miglioramento dell'elasticità dei tessuti e dell'aspetto della pelle.

La stimolazione muscolare può essere effettuata in sinergia al trattamento di elettroscultura per rassodare e tonificare l'area dei glutei o addominale. Se utilizzata singolarmente, la funzione Stimol, dispone di ben 6 canali indipendenti per il rassodamento delle aree trattate con il trattamento di elettroscultura.

Mediante l'impiego dei cavi opzionali a 4 derivazioni (art. 9848), è possibile sdoppiare le singole uscite di elettrostimolazione sino ad interessare 12 zone d'applicazione.

Reducer + Stimol

5 programmi:

- Cellulite + Rassodamento Glutei
- Cellulite + Rassodamento Addominali
- Cellulite+ rassodamento glutei e addominali
- Cellulite compatta + drenaggio



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.



Reducer

7 programmi:

- Cellulite
- Cellulite Molle
- Cellulite Compatta
- Cellulite Adipe
- Drenaggio Intensivo
- Seno Addome
- Braccia, seno e Addome


Stimol

5 programmi:

- Glutei e cosce
- Addominali
- Seno
- Cosce
- Cosce ed Addominali

Grande versatilità

- 4 + 2 canali indipendenti per la funzione Stimol
- 2 canali indipendenti per la funzione Reducer
- Visualizzazione di tutte le metodologie d'applicazione degli elettrodi sul grande schermo a colori
- Impostazione rapida di tutti i parametri di lavoro
- Trattamenti personalizzati mediante l'impiego della "Confidential Card"
- Ampia e completa gamma di accessori
- Marsupio porta-elettrodi completo di kit cavi di connessione

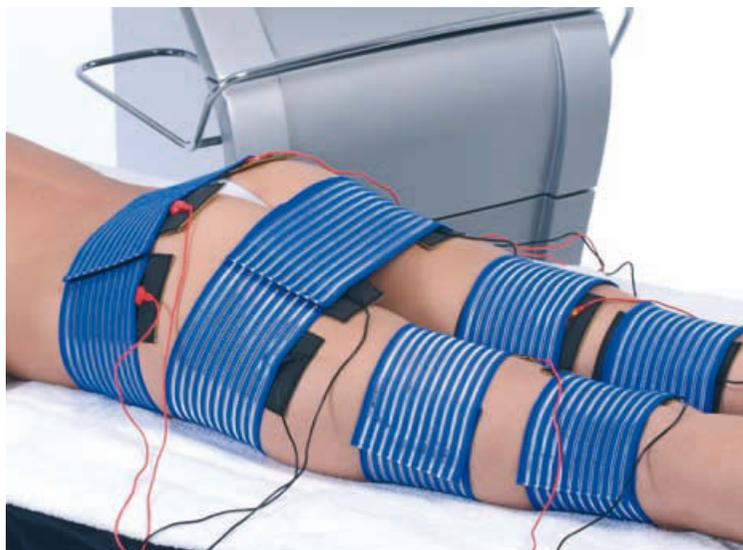

Accessori [pag. 85-90]

- n. 6 art. 9845 - Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG-IN
- n. 4 art. 9848 - Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto PLUG-IN a quattro derivazioni
- n. 1 art. 9980 - Marsupio porta-elettrodi completo di Kit cavi di connessione.
- n. 6 art. 9748 - Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 45x80 mm
- n. 12 art. 9771 - Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico 60 x 80 mm
- n. 2 art. 9772 - Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H.cm
- n. 2 art. 9773 - Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x10H. cm
- n. 2 art. 9774 - Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x10H. cm
- n. 2 art. 9775 - Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x10H. cm
- n. 10 art. 9976 - Memory Card
- n. 10 art. 99154 - Adattatore attacco automatico / coccodrillo - rosso
- n. 10 art. 99155 - Adattatore attacco automatico / coccodrillo - nero
- n. 5 art. 9785 - Benda in cotone crespata ed elasticizzata 20 cm x 5 mt.
- n. 12 art. 9768 - Elettrodo placca dim. 120 x 80 mm
- n. 2 art. 9766 - Elettrodo striscia in gomma conduttiva, dimensioni: lunghezza 8 mt - altezza 2,5 cm

Beauty Partner IntraMeso System

È un'apparecchiatura innovativa e rivoluzionaria che, grazie ai particolari impulsi a simmetria variabile, agisce direttamente sulla membrana cellulare apportando benefici effetti per gli inestetismi legati al tono cutaneo e alla cellulite.



Art. 9099

Beauty Partner raggiunge gli strati più profondi del derma, rapidamente e semplicemente, è efficace, con risultati visibili fin dalla prima applicazione.

Beauty Partner, con l'esclusivo IntraMeso System, associato a mirati ed efficaci prodotti cosmetici, favorisce la risoluzione di estetismi quali:

- rughe
- tonificazione viso
- cellulite ed adiposità localizzata
- rassodamento seno e glutei
- smagliature
- idratazione e nutrizione della pelle

Come funziona?

La **veicolazione transdermica** avviene applicando una particolare forma d'onda a simmetria variabile favorendo l'apertura dei canali interstiziali in tempi assolutamente più brevi, se comparata ai tradizionali metodi conosciuti come, ad esempio, la ionoforesi o l'elettrolisi in generale.



L'IntraMeso System utilizza particolari manipoli, con applicatori muniti di camera di ionizzazione del prodotto, in sinergia all'esclusivo sistema di convogliamento del prodotto, consentendo la veicolazione dei principi attivi senza l'ausilio di gel conduttivi.

Gli applicatori, studiati appositamente per trattamenti al viso ed al corpo, sostituiscono perfettamente la funzionalità degli aghi agendo dalla superficie senza intaccare il derma, dando, ai prodotti utilizzati non diluiti dal gel conduttore, un'efficacia più rimarcata e tempi di trattamento ridotti.

È importantissimo effettuare un ottimo trattamento Scrub prima di utilizzare l'IntraMeso System, il successo è legato all'associazione di due metodi fondamentali, pulizia della cute per la rimozione dello strato corneo in eccesso, e, veicolazione del prodotto anche se composto da sostanze ad elevato peso molecolare.

Beauty Partner, è dotato di Scrub ad ultrasuoni, per una pulizia profonda ad azione intrafollicolare e Scrub superficiale per mezzo di opportune spazzole rotanti.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.



Beauty Partner IntraMeso System

Beauty Partner, oltre alla programmazione individuale, dispone di ben tre differenti programmi di lavoro per effettuare trattamenti: "Soft – Medium & Intensive", che permettono di gestire automaticamente l'erogazione delle correnti ionizzanti senza l'intervento manuale dell'operatore estetico, rendendo l'operatività dell'apparecchio estremamente semplice e sicura.



Trattamenti:

- Programmi predefiniti per trattamento viso e décolleté
- Programmi per trattamento corpo
- 3 programmi automatici di lavoro "Soft", "Medium", "Intensive"
- 1 programma "Libero" per trattamenti personalizzati

Scrub

- Ultrasuono 25KHz
Pelle sensibile – Pelle grassa – Pelle secca.
- Brush
Set completo di spazzole

Dati riempimento cartuccia erogatore

Dose prodotti: siringa da 10 cc inserita nel manipolo

Dosatore prodotti: direttamente con la siringa sul manipolo

Connessione manipolo: cavo extra flessibile



Caratteristiche tecniche

Potenza massima: 140 W

Frequenza emessa: 5 – 100 Hz

Area trattata applicatore viso: 2.5 cmq.

Area trattata applicatore corpo: 9 cmq

Sistema di carico prodotto: Manuale

Collegamento piastra di massa: Cavo extraflessibile con pinza e connettore rapidi.

Accessori [pag. 85-90]

n. 1 art. 9959 – Manipolo IntraMeso

n. 1 art. 9961 – Applicatore viso

n. 1 art. 9960 – Applicatore corpo

n. 1 art. 9832 – Manipolo Ultrasuoni

n. 1 art. 9840 – Manipolo porta spazzole

n. 1 art. 9720 – Spazzola dura in setola ø 40 mm

n. 1 art. 9721 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 40 mm

n. 1 art. 9722 – Spazzola morbida in pelo di capra ø 20 mm

n. 1 art. 9723 – Spazzola dura in setola ø 20 mm

n. 1 art. 9725 – Spazzola dura in setola ø 100 mm

n. 1 art. 9726 – Spazzola dura in setola ø 70 mm

n. 20 art. 9978 – Siringa 10ml.

n. 1 art. 9962 – Comando a pedale

n. 1 art. 9965 – Placca di riferimento monopaziente, dim. 132cmq
conf. da 5 pz.

n. 1 art. 9966 – Placca di riferimento monopaziente, dim. 75cmq
conf. da 5 pz.

n. 1 art. 9967 – Cavo di connessione per placca di riferimento

n. 1 art. 9986 – Soluzione antiossidante - effetto tensore - 100 ml

n. 1 art. 9987 - Soluzione per adiposità localizzata - effetto lipolitico - 100 ml

Body Progress Perfect Beauty Thermo Concept



Art. 9091

Body Progress Perfect Beauty Thermo Concept



L'apparecchiatura professionale per trattamenti riducenti **Perfect Beauty**, offre all'operatore estetico l'opportunità di realizzare con estrema semplicità di utilizzo ed in totale sicurezza, specifici trattamenti personalizzati per il dimagrimento localizzato, mediante l'impiego di 6 fasce termiche **Infrared System Termiband** e dell'innovativa **Fisiosauna a Raggi Infrarossi a 5 settori indipendenti**.

Si avvale dei principi biofisici del calore e dei relativi criteri d'utilizzazione termica applicata al corpo umano: un aumento della temperatura induce ad un incremento delle reazioni metaboliche agendo sugli adipociti stimolandone il naturale scambio cellulare, favorendo il riequilibrio del proprio metabolismo che, per mezzo dei raggi infrarossi, raggiunge anche negli strati più profondi dell'adipe.



Perfect Beauty sfrutta i principi biofisici del calore ed i relativi criteri dell'utilizzazione dell'energia termica sul corpo umano; l'incremento della temperatura corporea di soli 3°C, ad esempio da 37° a 40° C., **apporta un notevole aumento dell'attività metabolica** garantendo, il totale comfort, del cliente trattato.

Trattamento con Fisiosauna.

La dinamica ed uniforme distribuzione del calore differenziato è la vera chiave della nuovissima **Fisiosauna** a raggi infrarossi che, grazie all'azione termica controllata, prodotta da **5 speciali elementi termoriscaldanti ad infrarosso**, permette di effettuare trattamenti con diversi stadi di temperatura in abbinamento ad opportuni prodotti cosmetici e termali, agendo anche in specifiche aree del corpo.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presa di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Metodiche di trattamento effettuabili con Fisiosauna e fasce termoriscaldanti INFRARED TERMICBAND,

- Snellimento generale e locale, coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nel prodotto utilizzato, come ad esempio la paraffina, fanghi, alghe, è evidente già dalle prime sedute.
- Facilita l'assorbimento e quindi la positiva azione benefica di preparati cosmetici snellenti, rassodanti, aromatici o biologici.
- Nel trattamento contro la cellulite il meccanismo d'azione può sintetizzarsi nella stimolazione del ricambio, nella vasodilatazione periferica e nella notevole diminuzione d'acqua.

5 programmi specifici per trattamenti con fisiosauna per l'applicazione idonei prodotti cosmetici:

- 1 olii essenziali
- 2 cere di paraffina
- 3 creme anti-cellulite
- 4 fanghi e/o alghe
- 5 delicato per soggetti con iper-sensibilità al calore nell'area degli arti inferiori

16 programmi per trattamenti con Termicband per l'applicazione idonei prodotti cosmetici:


- 1 cellulite compatta
- 2 cellulite edematosa
- 3 cellulite molle
- 4 snellimento gambe
- 5 snellimento braccia
- 6 donna corpo generale
- 7 soft gambe
- 8 snellimento glutei e cosce
- 9 soft vasodilatante
- 10 adipe donna
- 11 donna ginoide
- 12 donna androide
- 13 donna small
- 14 uomo adipe addominale
- 15 uomo androide
- 16 uomo corpo generale

Tecnologia d'avanguardia

- Creazione di programmi confidenziali mediante l'utilizzo della Memory Key
- Funzione Help fornisce rapide spiegazioni "on line" durante l'utilizzo dell'apparecchio

- 5 differenti aree riscaldanti per la fisiosauna
- Elementi riscaldanti estraibili separatamente
- Singola regolazione di temperatura degli elementi riscaldanti
- Possibilità di esclusione di una o più aree riscaldanti

- 6 canali indipendenti
- 16 programmi di lavoro studiati per differenti tipologie d'inetestismo e prodotti cosmetici.

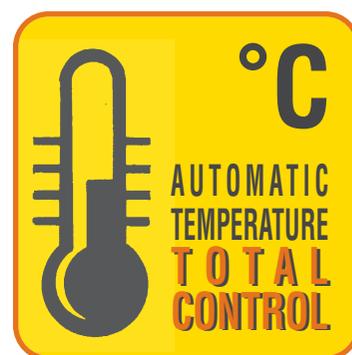

Accessori [pag. 85-90]

- n. 5 art. 21212 – Telo per fanghi atossico dim. 220 x 180 cm.
- n. 1 art. 9940 - Fisio coperta completa di 5 elementi termoriscaldanti dimensioni: 190 x 160 cm.
- n. 5 art. 9783 – panta – presso
- n. 2 art. 9812 – fascia termoriscaldante per addome
- n. 1 art. 9813 – fascia termoriscaldante per coscia sinistra
- n. 1 art. 9814 – fascia termoriscaldante per coscia destra
- n. 10 art. 9931 – Memory Card
- n. 2 art. 9818 - Fascia termoriscaldante per braccia
- n. 4 art. 9868 – confezione contenente 2 bende saline

Check In

Sistema professionale per **l'analisi della pelle, della cellulite e dei capelli.**



Art. 9111

Un innovativo e completo sistema per l'analisi per la valutazione dei principali parametri della pelle, della cellulite e dei capelli.

- Semplice da usare.
- Test personalizzato grazie a check-up specifici per le varie aree del corpo e del viso.
- Suggerimenti e consigli professionali immediatamente disponibili a video, stampabili su apposito scontrino cartaceo e/o visibili sul vostro computer trasferibili per mezzo di una comunissima chiave USB.
- Archiviazione dei dati del cliente con possibilità di monitoraggio delle date nel tempo.

Perché utilizzare Check In?

- Garantire al cliente un test di analisi completo che possa confermare la "diagnosi" dell'operatore estetico.
- Incrementare la fedeltà del cliente.
- Supportare ed aumentare le vendite delle linee di prodotti cosmetici e trattamenti.
- Offrire una nuova opportunità di differenziazione nel servizio e nella professionalità.

Elaborazione dati ed immagini

Ancora più facile ed intuitivo "navigare" all'interno della programmazione **Check In**; il pratico display Touch screen vi permette di impostare facilmente il test singolo o il programma di analisi da eseguire con una semplicissima guida on line, passo dopo passo, che vi conduce sino al termine del test. Estremamente semplice la consultazione dei commenti, dei risultati e degli archivi.

Test individuali eseguibili con Check In

- Idratazione
- Elasticità
- Sebo
- pH
- Melanina
- Fototipo
- Temperatura – Stadio della cellulite
- Età biologica

Programmi dettagliati

- Viso (generale)
- Pelle sensibile
- Anti-Age (2 livelli)
- Whitening
- Tolleranza a Sole UV
- Mani
- Cuoio Capelluto
- Cellulite, condizioni circolatorie e ritenzione idrica.
- Valutazione della variazione di temperatura e mappatura termica digitale dell'area interessata. Denominazione del grado di cellulite tramite analisi termica e valutazione visiva e tattile della pelle.



Ampio vano a bocca di lupo per biancheria provvisto di supporto porta cosmetici.



Capiente cassetto per il contenimento di accessori o materiale di pronto utilizzo.



Presca di corrente per l'alimentazione dell'apparecchio e di un'unità ausiliaria.

Check In

Lo Scontrino

- Dati del test
- Interpretazione grafica dei dati
- Commenti e consigli sul risultato del test.

Stampa in formato A4

- Tutti i dati del test
- Interpretazione grafica dei dati dei singoli parametri
- Risultati dettagliati e grafici in relazione ai programmi combinati
- Immagini e consigli dettagliati
- Stampa delle schermate del database cliente.

Optional Analisi della pelle effettuata con Microcamera

Check In è predisposta per il collegamento all'unità di Microcamera per ampliare la gamma di test e integrare le misurazioni effettuate con le sonde per mezzo dell'analisi e dell'elaborazione delle immagini.

Inoltre, speciali filtri polarizzati, permettono alla microcamera di ottimizzare la visualizzazione di elementi presenti al di sotto della superficie cutanea, quali capillari e accumuli di melanina.

muster

MÜSTER e DIKSON SERVICE S.p.a.
Via priv. da Via Kennedy, s.n.c.
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
www.muster-dikson.com

23/03/2008

Programma Mani

Idratazione
Pelle disidratata
Risultato = 25

Sebo
Pelle secca
Risultato = 5

pH
pH basso
Risultato = 3,8

Pigmentazione
Pigmentazione media

Giudizio Finale

Idratazione

Sebo

Pigmentazione

pH

Trattamenti

L'idratazione e il sebo sono bassi. Il sistema tampone della pelle riesce a mantenere un pH adeguato sulla superficie cutanea. Le radiazioni UV a cui si è stati esposti nel tempo libero hanno favorito la comparsa di macchie pigmentate. Per migliorare la pigmentazione cutanea utilizzare la sera un siero ad azione schiarante specifico per le mani. Per il giorno utilizzare sempre una crema con SPF di almeno 15. In caso di esposizioni prolungate ripetere l'applicazione più volte al giorno. In queste condizioni è anche raccomandato, per i mesi più freddi, l'impiego quotidiano di un trattamento idratante ad azione nutriente.

Risultato Analisi Pelle

Programma Viso Esteso

Rossi Mario

Idratazione

Pelle disidratata

L'idratazione cutanea è ridotta. Con il passare degli anni la capacità della cute di trattenere acqua diminuisce, sia per cause endogene, che per le condizioni ambientali sfavorevoli a cui è spesso esposta. La disidratazione rende la pelle spenta e fragile e conferisce al volto un aspetto stanco e affaticato. Lo stile di vita può contribuire a migliorare l'idratazione cutanea. Alcune semplici precauzioni, come: evitare l'esposizione a correnti d'aria calda e fredda, proteggere la pelle dalle radiazioni UV, dormire un numero adeguato di ore, bere molta acqua e seguire una dieta varia e ricca di frutta e verdura, possono aumentare il contenuto d'acqua nello strato corneo.

Sebo

Pelle grassa

Un eccesso di sebo causa dilatazione dei pori e acne. Il turnover cellulare rallenta e la cute appare più spessa e ruvida, assume un colore giallastro e tende a sviluppare punti neri e brufoli. Questa condizione, che di solito è legata a fattori genetici, può instaurarsi anche in soggetti con pelle non grassa in particolari fasi della vita come l'adolescenza, il post-menopausa o periodi particolarmente stressanti. Per ridurre il livello di sebo l'alimentazione è importante: ridurre l'assunzione di caffè, alcool, carboidrati e zuccheri. Scegliere alimenti ricchi di vitamine, in particolare quelle del gruppo B. I trattamenti dovranno essere finalizzati a rimuovere il sebo in eccesso e le cellule morte, disinfettare e calmare la cute, normalizzare il pH per migliorare l'aspetto della pelle.

Elasticità

Ridotta

L'elasticità della cute è ridotta. Negli anni lo stress ossidativo causato dalle radiazioni solari, dallo smog e dagli inquinanti ambientali provoca una serie di modificazioni strutturali e funzionali che portano all'invecchiamento della cute (invecchiamento estrinseco). Inoltre, con il passare del tempo, le cellule vengono nutrite in maniera meno efficiente e quindi perdono la loro vitalità (invecchiamento intrinseco). Per combattere questi processi è fondamentale ridurre l'esposizione alle dannose radiazioni UV e adottare una dieta ricca di vegetali che apportano sostanze antiossidanti. In particolare la vitamina C che svolge anche una azione di stimolazione cellulare. In caso di necessità, se il livello di stress ossidativo è alto o se le difese antiossidanti sono basse, è utile implementare la dieta con degli integratori ad azione antiossidante.

pH

pH alto

Giudizio Finale

Idratazione

Sebo

Elasticità

pH

La cute si trova in una condizione piuttosto rara: è grassa ma nel contempo disidratata. Questo riduce la plasticità della pelle e di conseguenza l'elasticità. E' indispensabile intervenire al più presto con un trattamento mirato che riduca il sebo e migliori l'idratazione. Detergere accuratamente la cute con un prodotto ad azione dermopurificante, non troppo aggressivo per evitare l'effetto rebound. Stimolare la cute con un tonico anallergico con proprietà purificanti e astringenti. Per il giorno scegliere una crema idratante ricca di vitamine antiossidanti, che attivano le cellule e migliorano l'elasticità della cute. Utilizzare sempre una crema con filtro solare. Preferire una formulazione leggera e con sostanze opacizzanti. Per la notte utilizzare una crema normalizzante, in grado di ripristinare un adeguato livello di pH, con sostanze ad azione idratante profonda (collagene, vitamine) e fitoestrogeni che stimolano l'attività cellulare e la sintesi di fibre elastiche. Nelle pelli mature utilizzare almeno una volta al giorno un siero revitalizzante arricchito da estratti costitutivi antietà (acido ialuronico, vitamine, oligoelementi). 1/2 volte alla settimana applicare una maschera ad azione purificante, levigante (drossiacidi) o assorbente (ad esempio a base di argilla).

L'ampio range di ingrandimenti disponibili (10 - 400x) permette di visualizzare in maniera ottimale:


- Dettagli delle minime imperfezioni cutanee
- Panoramica generale delle pelle



- Condizioni dei capelli, del cuoio capelluto



- Particolari condizioni quali la pelle sensibile, l'acne e la cellulite

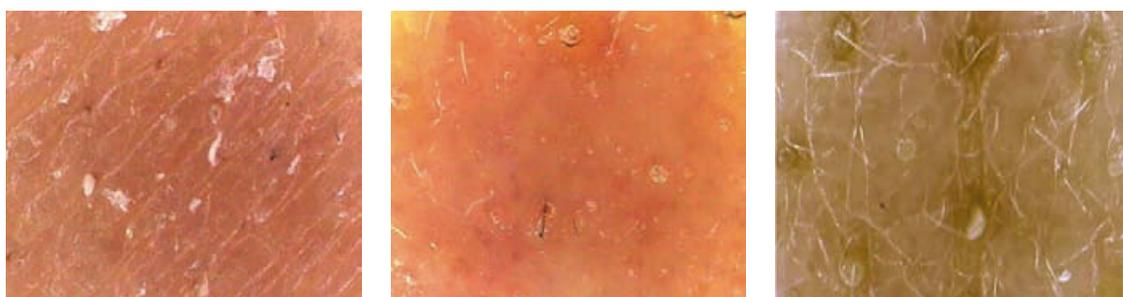

Optional [pag. 85-90]

art. 9995 - Kit microcamera con lenti e filtri

Accessori [pag. 85-90]

- n.l art. 9988 - Sonda idratazione
- n.l art. 9989 - Sonda melanina
- n.l art. 9990 - Sonda elasticità
- n.l art. 9991 - Sonda sebo
- n.l art. 9993 - Sonda pH
- n.l art. 9992 - Sonda temperatura
- n.l art. 99116 - Banda per mappa termica
- n.l art. 9994 - Ricarica sebo
- n.l art. 99117 - Kit taratura e pulizia sonda pH

Body Program Reducer Beautiful Shape

Avvalendosi del metodo di "Elettroscultura", basato sul principio dell'elettroforesi, Muster Reducer sviluppa un'azione benefica finalizzata alla riduzione di circonferenza e particolarmente indicata per soggetti con evidenti inestetismi, identificabili in vaste aree del corpo.



Art. 9012

L'azione sinergica di opportuni prodotti cosmetici con correnti galvaniche, ondulatorie, eccitomotrici a bassa frequenza ed intensità, sviluppa un benefico effetto tonico-stimolante, finalizzato alla progressiva riduzione della massa cellulitica esistente.

Snellimento localizzato dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici.

L'elettroforesi favorisce l'azione positiva ed efficace di opportuni preparati cosmetici snellenti e rassodanti.

L'applicazione è particolarmente indicata come elemento coadiuvante nel contesto di trattamenti, volti alla prevenzione di un processo di formazione della cellulite e dell'adipe.

Miglioramento dell'elasticità dei tessuti, conseguente al naturale riequilibrio dell'attività del tessuto e degli scambi cellulari.

Effetto decongestionante, con maggiore evidenza per gli arti inferiori.




Accessori [pag. 85-90]

- n. 1 art. 9788 – Cavo a 16 poli
- n. 4 art. 9771 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 60x80 mm
- n. 2 art. 9784/R – Adattatore rosso per elettrodo placca
- n. 2 art. 9784/N – Adattatore nero per elettrodo placca
- n. 2 art. 9776 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 150x10H cm
- n. 2 art. 9766 – Elettrodo striscia in gomma conduttiva, dimensioni: lunghezza 8 mt altezza 2,5 cm
- n. 5 art. 9785 – Benda in cotone crespato ed elasticizzato, dimensioni: lunghezza 5 mt altezza 20 cm

Body Program Tone Up

Apparecchio professionale di elettrostimolazione a 4 canali indipendenti per trattamenti estetici di tonificazione e mantenimento della forma fisica.

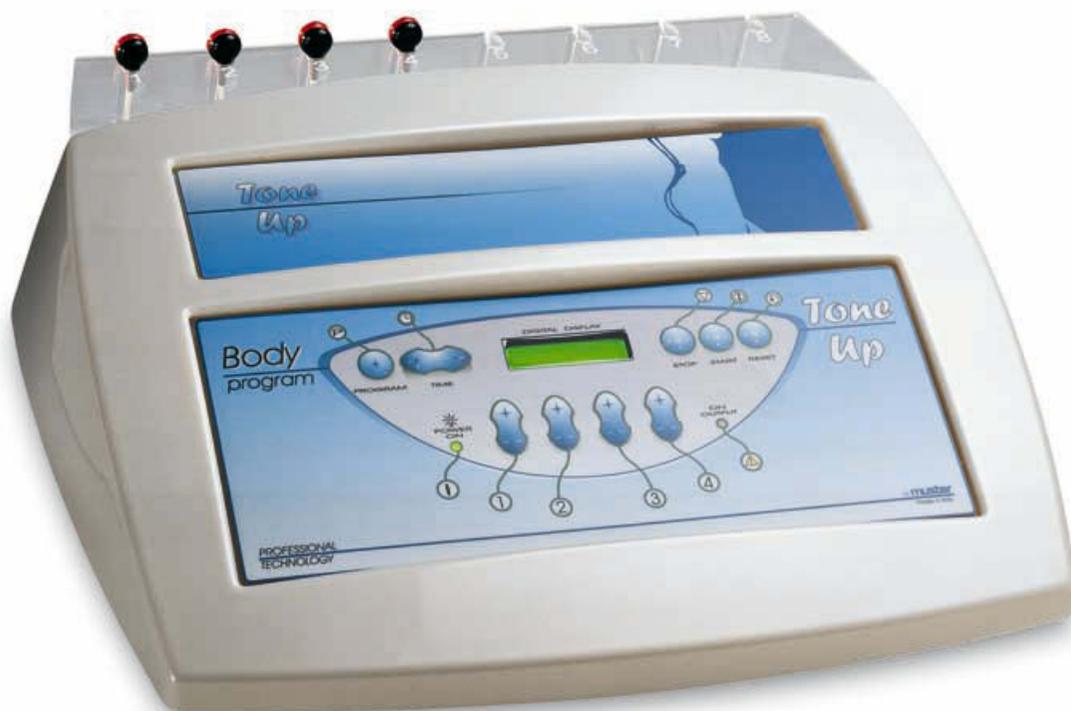

Art. 9064A - versione con porta accessori

Art. 9064 - versione senza porta accessori

L'apporto ottenuto con un'applicazione di Body Program Tone UP è pari circa tre ore di ginnastica attiva: la reazione muscolare non è solo di tonificazione poiché la particolare "onda rotatoria lunga" agisce sugli eccessi adiposi e pannicoli cellulitici, determinando inoltre un effetto dimagrante. L'azione sinergica delle correnti ondulatorie eccitomotrici a bassa frequenza, sviluppa un benefico effetto tonico-stimolante, finalizzato alla concreta e progressiva riduzione della massa cellulitica esistente. Lo snellimento localizzato, dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto connettivo, è il risultato delle correnti impiegate, coadiuvate dall'azione delle sostanze attive presenti nell'eventuale prodotto cosmetico utilizzato. La varietà di programmi disponibili permette di selezionare con estrema semplicità il trattamento più opportuno:

- 1) tonificazione cosce
- 2) cellulite cosce
- 3) tonificazione glutei
- 4) glutei e addominali
- 5) tonificazione addominali
- 6) cellulite glutei
- 7) tonificazione arti superiori
- 8) tonificazione arti superiori e muscoli dorsali
- 9) rassodamento seno
- 10) rassodamento dorsale
- 11) tonificazione viso
- 12) sport allenamento cosce
- 13) sport aumento massa cosce
- 14) sport allenamento gamba
- 15) sport aumento massa.



Accessori [pag. 85-90]

- n. 4 art. 9845 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto **PLUG**
- n. 2 art. 9748 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 45x80 mm
- n. 8 art. 9771 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 60x80 mm
- n. 2 art. 9773 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x10H. cm
- n. 2 art. 9775 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x10H. cm

Optional [pag. 85-90]

- Art. 9848 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto **PLUG** a quattro derivazioni per sdoppiare i canali aumentando la capacità dell'apparecchio sino a 8 uscite per 16 elettrodi

Body Program Slim Press

Apparecchiatura professionale per trattamenti di pressomassaggio sequenziale esercita sul circuito linfatico una benefica azione tonificante e drenante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive, migliorando sia il tono che l'aspetto estetico della pelle.

L'aumento naturale della diuresi, nei soggetti con ritenzione idrica, produce effetti benefici a sostegno dell'eliminazione delle scorie trattenute nei tessuti.

Principali caratteristiche

- Ampio Display Touch Screen a colori
- Compatta e Silenziosa
- Comandi intuitivi ed estrema semplicità d'utilizzo

Gambale a 7 elementi completo di bracciali:

- 2 unità gonfiabili piede/caviglia
- 2 unità gonfiabili gambe
- 1 unità gonfiabile addome
- 2 unità gonfiabili braccia

Chiusura rapida con velcro ad altissima resistenza

- Regolazione del tempo di gonfiaggio per ogni canale: da 1' a 15''
- Possibilità, in caso di necessità, di esclusione del gonfiaggio per ogni singolo canale.
- 3 differenti livelli di regolazione dell'intensità di lavoro: minimo, medio, massimo

10 uscite a regolazione indipendente





Art. 9137

4 programmi operativi pre-impostati:

- A - sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio dei singoli settori
- B - sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio a coppia di settori
- C - sequenziale da piedi a braccia, con mantenimento dei settori gonfiati
- D - sequenziale con attivazione contemporanea gambe e braccia



Accessori [pag. 85-90]

n. 1 art. 99217 – Gambale completo di braccia e kit tubi connessione.

Optional [pag. 85-90]

n. 1 art. 99216 – Marsupio, necessario per contenere più ordinatamente il set gonfiabile.

Art. 99216

Il Marsupio è completo del set tubi di collegamento ai settori gonfiabili e, per utilizzarlo, basta semplicemente collegare i gambali in dotazione all'apparecchio Slim Press al kit tubi di connessione del Marsupio; operazione semplice e veloce.

Body Program Press Light

Apparecchiatura professionale per trattamenti di pressomassaggio sequenziale che esercita sul circuito linfatico una benefica azione tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive, migliorando sia il tono muscolare che l'aspetto estetico della cute.

Principali caratteristiche

- 8 uscite d'aria indipendenti a processo sequenziale
- 6 programmi di presso massaggio pre-impostati
- nuovi gambali a 8 settori modello Press Light
- 10 panta-presso in TNT inclusi

Parametri regolabili dall'operatore estetico per l'impostazione individuale:

- tempo totale del trattamento;
- valore di pressione;
- regolazione del tempo di durata del ciclo di massaggio;
- tempo di pausa a fine ciclo o esclusione.

Sicurezza d'impiego

Il sistema P.C.S. (Pressure Control System) dell'ultima generazione mantiene i valori di pressione uniformi in tutti i settori, anche durante il 1° ciclo di massaggio. Garantisce inoltre l'interruzione automatica del trattamento qualora si dovessero verificare condizioni anomale di pressione, evitando il superamento della soglia massima consentita, pari a 0,2ATM/132mmHG.





Art. 9135



Accessori [pag. 85-90]

- n. l art. 99201 – Gambale modello Light.
- n. l art. 21226 – Panta Presso (conf. 10 pezzi)

Optional [pag. 85-90]

- n. l art. 9826 – Gambale modello LUX.
- n. l art. 9827 – Gambale modello LUX completo di marsupio.

Body Program In Shape Digital Press

Apparecchiatura professionale per trattamenti di pressomassaggio sequenziale, esercita sul circuito linfatico una benefica azione tonificante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive, migliorando sia il tono muscolare che l'aspetto estetico della cute. L'aumento naturale della diuresi nei soggetti con ritenzione idrica, produce effetti benefici a sostegno dell'eliminazione delle scorie trattenute nei tessuti.

Principali caratteristiche

- 8 settori per l'alimentazione d'aria a processo sequenziale o totale.
- Gambali a 7 + 2 settori indipendenti.
- Gestione elettronica di tutte le funzioni - Display Touch Screen
- 16 differenti programmi di pressomassaggio.
- Creazione di programmi confidenziali mediante l'utilizzo della Memory Key.

Parametri regolabili dall'operatore estetico per l'impostazione individuale:

- tempo totale del trattamento;
- valore di pressione;
- permanenza in pressione di ogni segmento gonfiabile regolabile;
- regolazione del tempo di durata del ciclo di massaggio;
- tempo di pausa a fine ciclo regolabile;
- facoltà di eludere dal programma uno o più settori gonfiabili, funzione estremamente utile nel caso vi siano aree da non trattare.

Funzione test

Attivando il pulsante verrà visualizzata tutta la sequenza del trattamento selezionato.

Controllo Settori Gonfiabili

Abitando la funzione, l'apparecchio verifica il corretto funzionamento dei gambali e segnala eventuali anomalie dei settori gonfiabili.


Sicurezza d'impiego

Il sistema P.C.S. (Pressure Control System) dell'ultima generazione mantiene i valori di pressione uniformi in tutti i settori, anche durante il 1° ciclo di massaggio. Garantisce inoltre l'interruzione automatica del trattamento qualora si dovessero verificare condizioni anomale di pressione, evitando il superamento della soglia massima consentita, pari a 0,2ATM/132mmHG.





Art. 9125

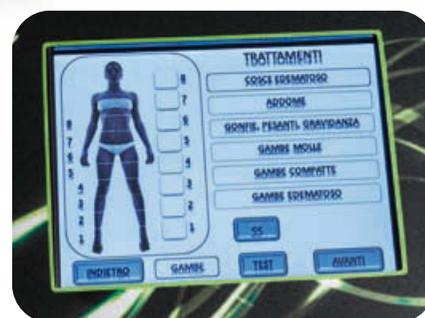

Accessori [pag. 85-90]

- n. 1 art. 9826 – Gambale modello LUX.
- n. 5 art. 9783 – Panta-preso in T.N.T.
- n. 10 art. 99200 – Memory Card, memoria supplementare per trattamenti personalizzati.

Optional [pag. 85-90]

- Art. 9827 – Gambale modello LUX con marsupio.
- Art. 9828 – Set bracciali con corpetto di sostegno.

Body Program Power Tone



L'apparecchio elabora opportune correnti sinusoidali a media ed alta frequenza, dette di "Kotz", che favoriscono marcatamente l'aumento della perimetria del fascio muscolare, riducendo altresì la lassità dello stesso; si riscontrano anche positivi effetti circa la maggiore forza muscolare.

Rispetto ai tradizionali metodi di elettrostimolazione, che utilizzano altre correnti, quelle di "Kotz" determinano un effetto di contenimento delle eventuali sensazioni di dolore. L'impiego delle correnti ad alta e media frequenza, applicate alla fascia muscolare, non determina in sé la contrazione; è la variazione della differenza di potenziale tra l'interno e l'esterno della fibra che ne provoca una specifica risposta, ripristinando il tono-trofismo del muscolo.

I trattamenti eseguiti con PowerTone agiscono sulla forza muscolare (cioè sull'area di sezione trasversale del muscolo) e fanno di un ciclo di trattamento un vero e proprio programma di "allenamento"; tutta la produzione di energia in eccesso viene convertita in calore, aumentando così l'attività muscolare, ed agendo positivamente sulla forza muscolare.



Lo Snellimento localizzato è dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto connettivo. Il risultato delle correnti impiegate, coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nell'eventuale prodotto utilizzato, è evidente già dalle prime sedute.



Art. 9057A - versione con porta accessori
 Art. 9057/E - versione senza porta accessori

Principali caratteristiche:

- Schermo grafico interattivo di ampie dimensioni con funzione "Touch Screen"
- Otto canali indipendenti
- Gestione elettronica di tutte le funzioni
- 21 programmi, elaborati in collaborazione con professionisti del settore, per effettuare trattamenti al corpo mirati che considerano l'aspetto morfologico del soggetto da trattare:
 - elettrostimolazione corpo
 - potenziamento muscolare
 - tonificazione
- Visualizzazione del trattamento impostato
- Visualizza sullo schermo la posizione corretta degli elettrodi per ogni combinazione di trattamento selezionata, fornendo un pratico ed immediato supporto all'operatore estetico
- Parametri regolabili per l'impostazione individuale delle correnti
- Memory Key: programmi personalizzati per ogni cliente con l'inserimento dei dati anagrafici, del tipo di trattamento e del numero delle sedute previsto
- Funzione "HELP": fornisce importanti informazioni utili sull'operatività dell'apparecchio con rapide spiegazioni "on line".



Accessori [pag. 85-90]

- n. 8 art. 9845 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto **PLUG**
- n. 4 art. 9748 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 45x80 mm
- n. 4 art. 9741 – Confezione contenente 4 elettrodi adesivi mono paziente, dim. 35x45 mm
- n. 16 art. 9768 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 120x80 mm
- n. 16 art. 9771 – Elettrodo placca riutilizzabile con attacco automatico dim. 60x80 mm
- n. 2 art. 9772 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 40x10H. cm
- n. 2 art. 9773 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 60x10H. cm
- n. 2 art. 9774 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 80x10H. cm
- n. 2 art. 9775 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 100x10H. cm
- n. 2 art. 9776 – Fascia regolabile in tessuto elastico, dim. 150x10H. cm
- n. 2 art. 9770 – Confezione contenente 30 elettrodi adesivi mono paziente, Ø 27 mm
- n. 1 art. 9779 – Memory Key, memoria supplementare per trattamenti personalizzati

Optional [pag. 85-90]

- Art. 9848 – Cavo bipolare con attacchi automatici e spinotto **PLUG** a quattro derivazioni per sdoppiare i canali aumentando la capacità dell'apparecchio sino a 16 uscite per 32 elettrodi

Fisiosaune

Le Fisiosaune per trattamenti riducenti localizzati Muster, offrono all'operatore estetico l'opportunità di realizzare trattamenti specifici anti-cellulite e dimagrimento, con estrema semplicità d'impiego e grande efficacia.




Art. 9118 Fisiosauna Comfort con rivestimento esterno in PVC atossico.




Art. 9119 Fisiosauna Extra Comfort

- Rivestimento esterno morbido trapuntato in PVC atossico
- Intercapedine ad elevato isolamento termico
- Forma conica per ottimizzare l'irradiazione sul corpo

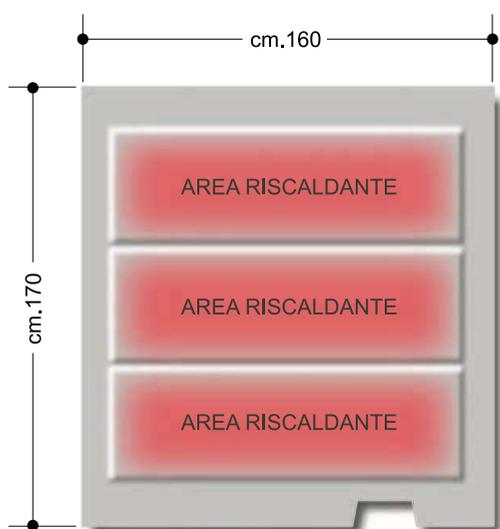

Fisiosauna Comfort

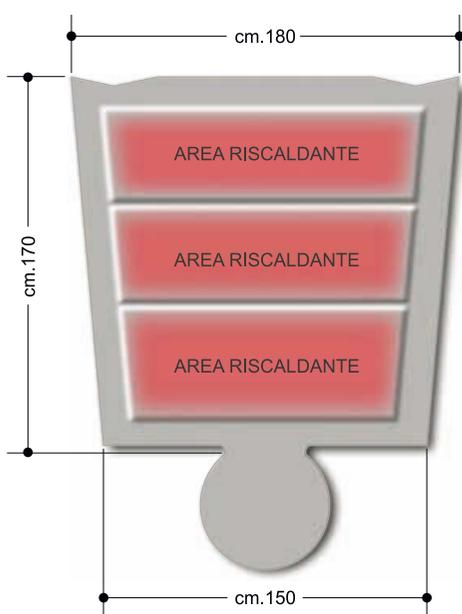

Fisiosauna Extra Comfort



230V - 50 Hz - 300 W

La dinamica ed uniforme distribuzione del calore differenziato permette, grazie all'azione termica controllata elettronicamente e prodotta da speciali elementi termo riscaldanti di effettuare trattamenti con differenti gradienti di temperatura anche in abbinamento ad opportuni prodotti cosmetici e termali.

Trattamenti:

- Snellimento generale e locale, dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto connettivo quale risultato della sudorazione. Esso viene coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nel prodotto utilizzato (paraffina, fanghi, alghe) ed è evidente già dalle prime sedute.
- Facilita l'assorbimento e la benefica azione di preparati cosmetici snellenti, rassodanti, aromatici o biologici; infatti le vie di penetrazione transfollicolare, vale a dire gli orifizi e i canali dei follicoli pilo-sebacei, vengono progressivamente liberati da rifiuti e impurità mediante la sudorazione.
- Svolge un'azione depurativa di tali vie predisponendole in modo favorevole ai preparati cosmetici "di profondità", utili per raggiungere gli strati più lontani dell'epidermide.

Nel trattamento contro la cellulite il meccanismo d'azione può sintetizzarsi nella stimolazione del ricambio, nella vasodilatazione periferica e nella notevole diminuzione d'acqua.

- Stimolazione della reattività antinfiammatoria del trofismo muscolare ed epidermico.

Dispositivo elettronico di comando per ogni singolo settore riscaldante

Sensori per il rilevamento e monitoraggio della temperatura

Impostazione della temperatura da 20°C. a 65°C.

Impostazione del tempo di trattamento con programma automatico di spegnimento da 10 a 60 minuti

Impostazione del tempo di trattamento con programma manuale e spegnimento automatico dopo 4 ore.

Termocoperte

Concepite per l'intenso utilizzo frequente degli Istituti di Bellezza, sono realizzate con la massima cura e, grazie all'impiego di specifici materiali, garantiscono all'Estetista l'esecuzione di trattamenti professionali in totale sicurezza e con la massima praticità d'uso.



Principali caratteristiche:

- commutatore a 3 posizioni per l'impostazione delle temperature di lavoro
- rivestimento esterno di grande robustezza, realizzato in materiale lavabile
- aste flessibili interne per salvaguardare la termocoperta da eventuali dannose piegature durante l'utilizzo
- resistenza elettrica protetta da filo di guardia che ne interrompe il funzionamento nel caso si verificano sovratemperature.



Art. 9055/E



Art. 9056/E

BODY PROGRAM ACCESSORIES



Art. 9741 Confezione contenente 4 elettrodi placca con attacco automatico, dim. 35x45 mm.



Art. 9748 Confezione contenente 4 elettrodi placca con attacco automatico, dim. 45x80 mm.



Art. 9766 Elettrodo striscia in gomma conduttrice per elettroscultura h 5 cm - L 8 m (1 pezzo).




Art. 9768 Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco automatico, dim. 120x80 mm (1 pezzo).



Art. 9771 Elettrodo placca rivestito in spugna con attacco automatico, dim. 60x80 mm (1 pezzo).



Art. 9770 Confezione contenente elettrodi placca monouso circolari, diam. 27 mm (30 pz.).

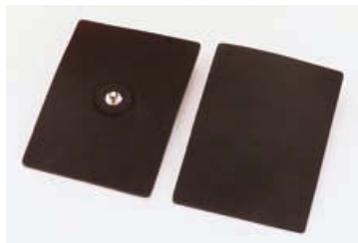


Art. 9867 Elettrodo placca in gomma conduttrice per placca ultrasonica (1 pezzo).



Art. 9894 Elettrodi rivestiti in spugna con doppia connessione per emettitore infrarosso, 56 x 90 mm (1 pezzo).



Art. 9895 Confezione 4 elettrodi monouso con doppia connessione per emettitore ad infrarosso, 53x96 mm.

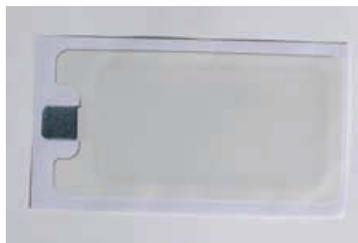

Art. 9965 Piastra Intraderm 132 cmq conf. da 5 pz.



Art. 9966 Piastra Intraderm 75 cmq conf. da 5 pz.



Art. 99144 Placca R.F. senza elettrodi (1 pezzo).



Art. 99145 Elettrodo dorato R.F. dim. 60x40 mm (conf. da 1 pz.)



Art. 99146 Placca elettrodo silicone R.F. dim. 95x61 mm (1 pezzo).



Art. 9784N Adattatore per placca con innesto spinotto Ø 4 mm (nero).



Art. 9784R Adattatore per placca con innesto spinotto Ø 4 mm (rosso).



Art. 31909023 Spinotto cocodrillo per elettroscultura - rosso.



Art. 32909023 Spinotto cocodrillo per elettroscultura - nero.



Art. 99154 Adattatore attacco automatico / cocodrillo - rosso.



Art. 99155 Adattatore attacco automatico / cocodrillo - nero.



Art. 9816 Confezione di gel conduttivo da 260 gr.



Art. 9986 Soluzione antiossidante effetto tensore - 100 ml.



Art. 9987 Soluzione per adiposità localizzata - effetto lipolitico - 100 ml.



Art. 9772 Fascia per fissaggio elettrodi, in tessuto elastico, regolabile, dim. 40x10H cm.



Art. 9773 Fascia per fissaggio elettrodi, in tessuto elastico, regolabile, dim. 60x10H cm.



Art. 9774 Fascia per fissaggio elettrodi, in tessuto elastico, regolabile, dim. 80x10H cm.



Art. 9775 Fascia per fissaggio elettrodi, in tessuto elastico, regolabile, dim. 100x10H cm.



Art. 9776 Fascia per fissaggio elettrodi, in tessuto elastico, regolabile, dim. 150x10H cm.



Art. 9864 Fascia elastica per fissaggio placca ultrasonica, dim. 60x8H cm.



Art. 9865 Fascia elastica per fissaggio placca ultrasonica, dim. 80x8H cm.



Art. 9866 Fascia elastica per fissaggio placca ultrasonica, dim. 100x8H cm.



Art. 9832 Manipolo per apparecchio Ultrasuoni.



Art. 9840 Manipolo porta-spazzole con spinotto Plug.



Art. 9861 Placca ultrasonica (elettrodi in gomma conduttiva esclusi).



Art. 9893 Placca con emettitore infrarossi (elettrodi esclusi).



Art. 9896 Manipolo Porta Applicatori per trattamenti corpo, completo di Funzione Cromoterapia.



Art. 9898 Applicatore Rullo Grande.



Art. 9897 Manipolo per trattamenti viso, completo di Funzione Cromoterapia.



Art. 9899 Applicatore Rullo Piccolo.



Art. 9906 Applicatore Sfere.



Art. 9907 Piastrina Igienica per Manipolo Viso.



Art. 9933 Placche Mix Ultrasuoni + Infrarosso.



Art. 9959 Manipolo IntraMeso. Solo manipolo, applicatore escluso.



Art. 99148 Manipolo ultrasuono cavitazione con 4 emettitori.



Art. 9960 Applicatore corpo.



Art. 9961 Applicatore viso.



Art. 99184 Manipolo Ultrasuono 800kHz a 4 Emettitori



Art. 99142 Manipolo bipolare R.F. corpo.
Art. 99161 Manipolo corpo R.F. per Body Kiss attacco 2 Plug



Art. 99185 Manipolo Ultrasuono 800kHz Mono-Emettitore



Art. 99173 Manipolo Ultrasuono cavitazione 44kHz Mono-Emettitore




Art. 99143 Manipolo bipolare R.F. viso.



Art. 99149 Cinturino impugnatura manipolo ultrasuono 4 testine per art. 99148 e art. 99184.




Art. 9830 Cavetto bipolare con spinotto jack per la connessione all'apparecchio e 2 contatti di tipo automatico.

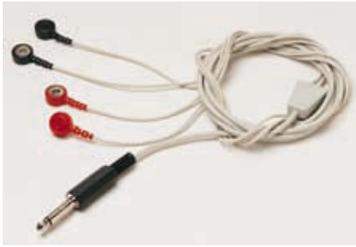

Art. 9831 Cavetto bipolare a 4 derivazioni con spinotto **jack** per la connessione all'apparecchio e 4 contatti di tipo automatico.



Art. 9845 Cavo bipolare con spinotto **Plug** per la connessione dell'apparecchio a 2 contatti automatici.

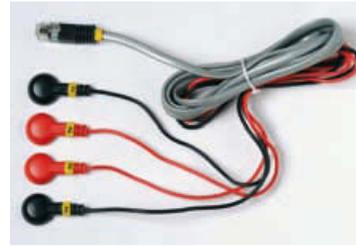

Art. 9848 Cavo per elettrostimolazione con spinotto **Plug** a 4 derivazioni per apparecchio: 9020/E - 9030/E - 9057/E - 9058/E - 9074 - 9077.



Art. 9788 Cavo 16 poli per elettrocultura.
- Art 9023/E



Art. 9962 Comando a pedale.



Art. 9967 Cavo di connessione massa.



Art. 9826 Gambali per pressoterapia mod. Lux, completi di tubetti e raccordi per il collegamento all'appar. Camere d'aria sovrapposte e chiusura a velcro.



Art. 9827 Gambali per pressoterapia mod. Lux completi di marsupio per il contenimento di tutto il gambale e del relativo kit di tubetti di connessione.



Art. 9828 Bracciali per pressoterapia completi di corpetto per il corretto posizionamento degli elementi gonfiabili.



Art. 9836 Gambali e kit braccia con marsupio per pressoterapia Modeling.



Art. 9869 Marsupio porta-elettrodi completo di kit cavi di connessione.



Art. 9940 Fisiocoperta completa di 5 elementi termoriscaldanti dim. 190x160 cm.



Art. 9785 Benda in cotone crespata ed elasticizzata 20 cm x 5 mt per elettrocultura (1 pezzo).



Art. 9868 Confezione contenente 2 bende a soluzione salina.



Art. 9911 Busta Porta-Tutina.



Art. 9908 Tutina Beauty Skin, in poliamide 100%, taglia M/L.



Art. 9909 Tutina Beauty Skin, in poliamide 100%, taglia XL.




Art. 9910 Tutina Beauty Skin, in poliamide 100%, taglia XXL.



Art. 21212 Telo atossico per fanghi.



Art. 9978 Siringa 10 ml 1 pezzo.

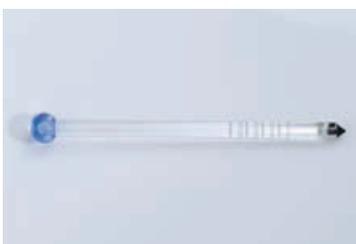

Art. 99153 Penna touch screen.



Art. 9988 Sonda idratazione.



Art. 9989 Sonda melanina.



Art. 9990 Sonda elasticità.




Art. 9991 Sonda sebo.




Art. 9992 Sonda temperatura.



Art. 9993 Sonda pH.

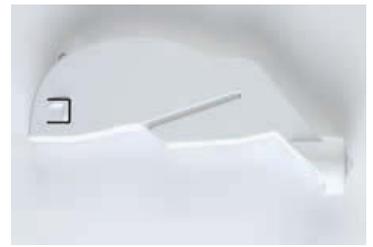

Art. 9994 Ricarica sebo.

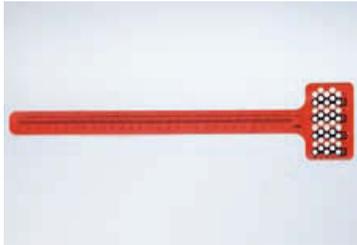

Art. 99116 Banda per mappa termica.



Art. 99117 Kit taratura e pulizia sonda pH.



Art. 9995 Kit Microcamera con lenti e filtri.



Art. 9720 Spazzola dura in setola ø 40 mm.



Art. 9721 Spazzola morbida in pelo di capra ø 40 mm.



Art. 9722 Spazzola morbida in pelo di capra ø 20 mm.



Art. 9723 Spazzola dura in setola ø 20 mm.



Art. 9725 Spazzola in setola ø 100 mm.



Art. 9726 Spazzola in setola ø 70 mm.



Art. 9779 Memory key per art. 9030/E, 9033/E, 9050/E, 9057/E, 9058/E.



Art. 9862 Memory Card per Benexere.



Art. 9891 Memory Card Soft & Solve.



Art. 9931 Memory Card per Perfect Beauty.



Art. 9932 Memory Card per Body Sculpture.



Art. 99200 Memory card



Art. 9976 Memory Card per Beauty & Beauty Reducer.



Art. 99201 Gambale modello Light.



Art. 21226 Pantapresso con elastico versione chiusa in TNT imbustato singolarmente (confezione 10 pz.)



Art. 99210 Set gambale completo + braccia (senza tubi di connessione) per Slim Press.



Art. 99217 Gambale completo di braccia e kit tubi connessione per Slim Press.



Art. 99211 Set completo tubi per connessioni apparecchio/set gambale per Slim Press.



Art. 99216 Accessorio Marsupio, necessario per contenere più ordinatamente il set gonfiabile, completo del kit tubi connessione per Slim Press.

Sly



MANIPOLO SCALDACERA

Per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
Completo di cavo di alimentazione.
Alimentazione 110-240V - 50/60Hz **CE**
Art. 250

Depyllo



MANIPOLO SCALDACERA A RULLO

Per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.
Completo di cavo di alimentazione.
- Doppia resistenza per riscaldare la cera più velocemente.
Alimentazione 110-240V - 50/60Hz **CE**
Art. 30014

Sensitive Super Kit

MANIPOLO SCALDACERA A RULLO

Il Super kit contiene:

- Per depilazione:
 - 1 cartuccia di Sensitive al miele e cera d'api naturali - 100 ml.
 - 1 manipolo riscaldante completo di cavo di alimentazione elettrica.
 - 20 strisce pretagliate in tenax che assicurano uno strappo perfetto.
- Per post-depilazione:
 - 2 bustine di Olio Naturale Post Depilazione da 10 ml cad.
 - 1 depliant di istruzioni e avvertenze per l'uso.

Completo di cavo di alimentazione 110-240V - 50/60Hz **CE**

Art. 295

NUOVA FORMULA

Si attacca al pelo, non alla pelle!

Rimuove i peli con un solo strappo!

Con principi attivi ad azione lenitiva ed antiarrossamento.

NON FA MALE ALLA PELLE.



Fornito in espositore da 10 pz.

iWax

MANIPOLO SCALDACERA A RULLO

Per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.

- Pronto all'uso in **solì 10 minuti!**
- **Doppia resistenza** per riscaldare la cera più velocemente
- Con **doppio indicatore del livello di cera** contenuto nella cartuccia per una facile verifica
- Stazione di carica
- **Impugnatura con inserti gommati** per una presa facile e confortevole
- Doppio indicatore luminoso di funzionamento

Completo di cavo di alimentazione 110-240V ~ 50/60Hz **CE**

Art. 30017



Indicatore del livello di cera contenuto nella cartuccia.



06 23 38

Très Jolie



Indicatore del livello di cera contenuto nella cartuccia.



Imposta tu la temperatura ideale per il trattamento, agendo sulla manopola di regolazione.

MANIPOLO SCALDACERA A RULLO

Per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.

Completo di cavo di alimentazione.

- **Regolazione elettronica della temperatura.**
- Pronto all'uso in **solì 10 minuti!**
- **Doppia resistenza** per riscaldare la cera più velocemente.
- Con "indicatore" del livello di cera contenuto nella cartuccia per una facile verifica.

Alimentazione 110-240V - 50/60Hz **CE**

Art. 259

Bixy

2 INTERRUTTORI
DISTINTI



OFF-OFF



ON - OFF



ON-ON



BASE DI CONNESSIONE PER 2 MANIPOLI SCALDACERA

(La base non comprende i 2 manipoli).

Alimentazione 230V - 50Hz - max 100W

Art. 3001 I



Trittico



BASE DI CONNESSIONE PER 3 MANIPOLI SCALDACERA

(La base non comprende i 3 manipoli).

Alimentazione 110-240V - 50/60Hz - max 100W

Art. 30007



Wax & Wax



Anello di protezione (5 pz. in dotazione).

WAX & WAX PROFESSIONAL

Scaldacera per ceretta in barattolo.

- Caldaietta con finitura antiaderente.
- Involucro in materiale antiurto ad elevata resistenza termica.
- Regolazione di temperatura.
- Spia di accensione.

Alimentazione 230V - 50Hz

Art. 233



Scaldillo



In più: secchiello per cera a caldo o in pezzi

SCALDILLO PROFESSIONAL

Scaldacera professionale per ceretta in barattolo con regolazione della temperatura. Alimentazione 230V - 50Hz



Art. 30013

Velvety



In più: secchiello per cera a caldo o in pezzi

VELVETY

Scaldacera professionale per ceretta in barattolo con regolazione della temperatura. Alimentazione 230V - 50Hz



Art. 30012

Caresse



MÜSTER CARESSE

Scalda paraffina.

- Regolazione di temperatura
- 230V - 650W **CE**

Art. 25830

La confezione contiene:

- confez. da 60 guanti monouso - confez. da 60 calzari monouso
- n° 2 guanti in spugna - n° 2 calzari in spugna
- n° 1 anello distanziatore - n° 4 panetti di cera di paraffina da 250 gr. cad.

Accessori



Art. 25833 (CVC) - Confezione di guanti monouso (60 pz.)



Art. 25834 (CVC) - Confezione di calzari monouso (60 pz.)



Art. 25831 (SH - CVC) - n° 2 guanti in spugna



Art. 25832 (SH - CVC) - n° 2 calzari in spugna

Quark 7

Autoclave TIPO S – 7 Litri. Sterilizza gli strumenti imbustati e non.



Art. 1003 In linea con il decreto legislativo 81/2008 - Norma EN 556 – Norma EN 13060

Quark 7 è semplice e veloce da impostare, basta selezionare il ciclo di sterilizzazione desiderato e premere start.

- Display digitale
- La sterilizzazione degli strumenti, una volta imbustati, dura 30 minuti.
- Peso 31kg
- Temperatura massima 138°C - cicli automatici vapore + temperatura
- Camera in acciaio AISI 304
- Riduzione dei consumi energetici (-25%). Consumo medio solo 700W!

Massima attenzione all'ambiente

Risparmio d'acqua

Risparmio di tempo, il ciclo di sterilizzazione dura solo 30 minuti!

Dimensioni ridotte: volume interno della camera: 7 litri

La dimensione della camera è stata studiata per potere sterilizzare un grande numero di strumenti: pratico cestello porta strumenti in acciaio con tre slitte per un carico massimo di circa 14/16 buste.

Dimensioni esterne: SOLO 38Lx33Hx53Pcm

La dimensione ridotta di Quark 7 permette una facile collocazione all'interno del centro estetico razionalizzando in maniera ottimale lo spazio.

L'autoclave rappresenta l'apparecchiatura scientificamente più evoluta in tema di sterilizzazione, quindi rispetta il D.Lgs 81-2008.



OPTIONAL
Art. 1005 Dimensioni buste autosigillanti
90 x 250mm

Dimostra l'avvenuta sterilizzazione con apposito test: integratore chimico (**onere della prova**).

L'integratore è un test che tutela maggiormente l'estetista dai rischi di eventuali contenziosi, infatti esso è riconosciuto universalmente come prova documentale dell'avvenuta sterilizzazione degli strumenti. Il test è facile da eseguire, non comporta perdite di tempo, lo si esegue durante il normale ciclo.

Sterilizzazione degli strumenti imbustati

La sterilizzazione degli strumenti, una volta imbustati, ha una durata di 30 giorni.



OPTIONAL Art. 1004



PRATICO CESTELLO

La dimensione della camera è stata studiata per potere sterilizzare un grande numero di strumenti: pratico cestello porta strumenti in acciaio con tre slitte per un carico massimo di circa 14/16 buste.



Camera in Acciaio AISI 304
Dimensioni ridotte: volume interno della camera: 7 litri

display digitale Easy Work, Quark 7 è semplice e veloce da impostare. Basta selezionare il ciclo di sterilizzazione desiderato e premere start.

EASY WORK

Accessori

Art. 1004 - Integratore di controllo del corretto ciclo di sterilizzazione – prova dell'avvenuta sterilizzazione.

- Integratori in grado di valutare l'efficacia del processo e l'esposizione ai parametri di sterilizzazione (tempo, temperatura, concentrazione di vapore), per completare il ciclo di sterilizzazione a 121° C e 134° C
- completamente laminati per prevenire il trasferimento dell'inchiostro al prodotto e preservare i risultati dei test.
- Affidabile e semplice da utilizzare. Indicatore chimico non tossico.
- Conforme agli standard vigenti.
- Classe 5

Art. 1005 - Buste auto saldanti per sterilizzazione in autoclave

- Le buste non richiedono l'utilizzo di termosaldatrici in quanto dotate di un nastro biadesivo non tossico specifico per il processo di sterilizzazione.
- Il film blu trasparente garantisce l'immediata identificazione del contenuto.
- Il film è rinforzato per evitare qualsiasi strappo dopo l'apertura della busta
- Carta medica di alta qualità 60 gr.
- Tre linee di saldatura rinforzate e distanziate garantiscono una perfetta adesività durante il processo di sterilizzazione e un'eccellente "pelaggio" durante l'apertura.
- Indicatori di vapore e Eto.
- La direzione di apertura indicata.
- Confezione standard di 200 pz includono le istruzioni per l'uso. Le scatole sono inserite in un cartone.
- Questa tipologia di imballaggio assicura la protezione dalla polvere anche successivamente all'apertura della scatola.

Owo



OWO

Sterilizzatore professionale con lampada germicida per materiali termosensibili (non resistenti al calore).

- Involucro verniciato in colore alluminio
- Alimentazione: 230V - 50Hz - 13 W **CE**

Art. 991


X-Steril

X-STERIL PROFESSIONAL

Sterilizzatore a microsfe

- Temperatura operativa: 250°
- Risultati eccellenti in soli 30 secondi
- Involucro in materiale antiurto ad elevata resistenza termica
- Alimentazione: 230V - 50Hz **CE**

Art. 232

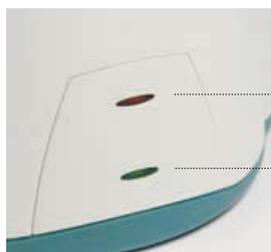

Spia rossa:
fase di pre-
riscaldamento

Spia verde:
temperatura OK
per la sterilizzazione

Art. 873/12

Confezione sfere di ricambio

Lumen

LUMEN LED

Fornetto unghie

- 3 led ad alta efficienza
- Interruttore accensione
- Piedini antiscivolo
- Alimentazione: 100-240V ~ 50/60Hz **CE**

Art. 25806



24 - BLUE



34 - WHITE



33 - BLACK



36 - RED

Dylan



34 - WHITE



50 - LILAC



36 - RED

FORNETTO UNGHIE

- 4 lampade da 9W cad.
- Interruttore generale di accensione ON/OFF.
- Funzione LASTING: funzionamento in continuato senza temporizzazione.
- Funzione TIMING: funzionamento con temporizzazione 90" / 120" / 180".
- Alimentazione 230V - 50Hz

Art. 25896



Interruttore generale di accensione ON/OFF.



4 lampade da 9W cad



LAMPADA DI RICAMBIO DA 9W
per Art. 25892 Smile e Art. 25896 Dylan
Art. 25893

Smile



Fornetto unghie
 - 4 lampade da 9W cad.
 - Selettore tempo di accensione lampada:
 continuo / 120 secondi
 Alimentazione 230V - 50Hz **CE**
Art. 25892



LAMPADA DI RICAMBIO DA 9W
 per Art. 25892 Smile e Art. 25896 Dylan
Art. 25893

Lucignolo



Fornetto unghie
 - 1 lampada da 9W
 - Interruttore accensione lampada
 - Piedini antiscivolo
 - Braccio rotante
 - Alimentazione 14W - 230V - 50Hz **CE**
Art. 25894



LAMPADA DI RICAMBIO DA 9W L
 per Art. 25894 Lucignolo
Art. 25876

Mistral



Aspiratore professionale per limatura unghie.
- Morbida imbottitura poggiamani rivestita in ecopelle.
- 230V - 50Hz **CE**
Art. 25878



Sacchetto di ricambio per aspiratore mistral
Art. 25879 (SHC)

Lente a luce fredda



Minilente a luce fredda con braccio orientabile, 3 diotrie.
- Alimentazione e accensione elettronica
- Attacco da tavolo
- Ideale per ricostruzione unghie e manicure
- 12W
- 230V - 50Hz **CE**
- Dimensioni imballo: cm 16,5 x 10,5 x 30
Art. 30050

Lente luce fredda



Art. 30055

Minilente luce fredda da tavolo,
3 diotrie.

- 12W

- 220-240V - 50Hz **CE**

Dimensioni imballo: cm 32,5 x 23,2 x 19,4

Lente luce fredda LED

Art. 30056

Minilente luce fredda da tavolo,
3 diotrie, 48 led.

- Alimentazione elettronica

- Bassissimo consumo

- Lunga durata dell'unità luminosa

- 5W

- 220-240V - 50Hz **CE**

Dimensioni imballo: cm 32,5 x 23,2 x 19,4





Lampada a luce fredda.
 Alimentazione e accensione elettronica
 - Accensione immediata
 - Maggior durata della lampadina
 - Luminosità più intensa
 - Estensione braccio cm 117
 - 22W
 - 220-240 V - 50Hz **CE**
 Dimensioni imballo: cm 75,4 x 23,1 x 9,5

Art. 30057/MU Versione da muro. 3 diotrie.
Art. 30057/ST Versione da stativo. 3 diotrie.
Art. 30057/TV Versione da tavolo. 3 diotrie.

Art. 30058/MU Versione da muro. 5 diotrie.
Art. 30058/ST Versione da stativo. 5 diotrie.
Art. 30058/TV Versione da tavolo. 5 diotrie.



Lampada a luce fredda LED.
 - Alimentazione elettronica
 - Bassissimo consumo
 - Lunga durata dell'unità luminosa
 - Estensione braccio cm 117
 - 5W
 - 220-240 V - 50Hz **CE**
 Dimensioni imballo: cm 75,4 x 23,1 x 9,5

Art. 30059/MU Versione da muro. 3 diotrie. 48 led.
Art. 30059/ST Versione da stativo. 3 diotrie. 48 led.
Art. 30059/TV Versione da tavolo. 3 diotrie. 48 led.

Art. 30060/MU Versione da muro. 5 diotrie. 48 led.
Art. 30060/ST Versione da stativo. 5 diotrie. 48 led.
Art. 30060/TV Versione da tavolo. 5 diotrie. 48 led.

Lenti a luce fredda



Art. 3005 I/ST

Lampada a luce fredda con 2 lenti intercambiabili (3 e 5 diotrie).

Alimentazione e accensione elettronica

- Accensione immediata
- Maggior durata della lampadina
- Luminosità più intensa
- Estensione braccio cm 134
- 22W
- 230V - 50Hz 

Art. 3005 I/TV Versione da tavolo con morsetto

Art. 3005 I/MU Versione per installazione a parete

Dimensioni imballo: cm 25,5 x 11,5 x 48

Stativi per lenti a luce fredda



Art. 30054

Stativo per lenti

Dimensioni imballo: cm 74x20x7



Art. 30061

Stativo per lenti - GRANDE STABILITÀ

Dimensioni imballo: cm 54X43,50X15

Vaporillo



TESTINA ORIENTABILE



Vapozzone professionale. Applicatore per oli essenziali.
Testina orientabile.

Completo di stativo su ruote.

230V ~ 50 Hz 750W

Art. 1000



Vapippo



portatile!

Potente getto di vapore. VERAMENTE PROFESSIONALE.

Vapozono professionale con Testina orientabile, con borsa da trasporto
230V ~ 50Hz 750 W 
Art. 892

Vapo-Cleaner

DISINCROSTANTE PER VAPORIZZATORI

Confezione contenente 5 bustine da 30 g cad.

Art. 16206



Frese - Burs

FRESE DIAMANTE Grana media - Gambo 2,35 mm

25848 (SH) - Ø 1,4 mm.
LUNGHEZZA 1,2 mm.



25849 (SH) - Ø 2,3 mm.
LUNGHEZZA 2 mm.



25851 (SH) - Ø 2,1 mm.
LUNGHEZZA 8 mm.



25852 (SH) - Ø 1,2 mm.
LUNGHEZZA 6 mm.



25853 (SH) - Ø 5 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.



25854 (SH) - Ø 1,6 mm.
LUNGHEZZA 5 mm.



25855 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 11 mm.



25856 (SH) - Ø 4,5 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.



25857 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 14 mm.



25858 (SH) - Ø 4 mm.
LUNGHEZZA 8 mm.



FRESE DIAMANTE Grana grossa - Gambo 2,35 mm

25859 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.



25860 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 11 mm.



25861 (SH) - Ø 4,5 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.



25862 (SH) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 14 mm.



FRESE CARBONIO

25883 (SHC) - CILINDRICA (grana grossa).



25884 (SHC) - CILINDRICA (grana media).



25885 (SHC) - CONICA GRANDE
(grana media).



25886 (SHC) - CONICA PICCOLA
(grana media).



FRESE ABRASIVE Grana grossa - Gambo 2,35 mm

25847 (SF) - Ø 13 mm.
LUNGHEZZA 18 mm.



FRESE INTERCAMBIABILI

25887 (SHC) - PUNTA PER
CILINDRETTI LEVIGANTI.



25888 (SHC) - CONFEZIONE 100 pz.
CILINDRETTI LEVIGANTI (grana grossa).



25889 (SHC) - CONFEZIONE 100 pz.
CILINDRETTI LEVIGANTI (grana media).



25890 (SHC) - CONFEZIONE 100 pz.
CILINDRETTI LEVIGANTI (grana fine).



FRESE ABRASIVE Grana fine - Gambo 2,35 mm

25840 (SF) - Ø 3 mm.
LUNGHEZZA 8 mm.



25841 (SF) - Ø 4 mm.
LUNGHEZZA 10 mm.



25842 (SF) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 10 mm.



25845 (SF) - Ø 6 mm.
LUNGHEZZA 12 mm.



25843 (SF) - Ø 10 mm.
LUNGHEZZA 16 mm.



25844 (SF) - Ø 13 mm.
LUNGHEZZA 15 mm.



Rotax 30K

ROTAX 30K

Micromotore professionale.
manicare - pedicare - ricostruzione
unghie.

Il manipolo micromotore contiene
un sistema di raffreddamento forzato
interno che garantisce una perfetta
operatività del motore.

220-240V~ - 50/60Hz - 35 W

Art. 25899

Principali caratteristiche tecniche

- Giri motore: 25.000 r.p.m.
- SUPER Compatto e leggero
- Regolazione fine di potenza
- Mandrino per frese con gambo Ø 2,35mm



Manitù 35k Extra Power 35.000 rpm



Art. 25807

Micromotore professionale

Il manipo micro motore dispone di un sistema di raffreddamento forzato interno che ottimizza l'operatività del motore garantendo il massimo comfort per l'operatore estetico. Super compatto e leggero.

- Mandrino per frese con gambo diametro 2,5mm
- Selettore del senso di rotazione
- Azionamento Micromotore con comando a pedale o in continuo.
- Porta manipo ad aggancio rapido, posizionamento lato sinistro o destro.

La confezione contiene

- Centralina elettronica
- Pedale
- Micromotore
- Supporto porta-manipo
- Kit frese

Alimentazione: 220-240V ~ 50 Hz 

Tavolo Infinity

Tavolo manicure e ricostruzione unghie
(accessori esclusi, solo tavolo)



Art. 3621

Podosense special

Micromotore professionale per trattamenti di pedicure, manicure e ricostruzione unghie. Il manipolo micromotore contiene un sistema di raffreddamento forzato interno che garantisce una perfetta operatività del motore.

Art. 25882



Principali caratteristiche tecniche

- Giri motore: da 3500 a 27.000 r.p.m.
- Inversione del senso di rotazione
- Azionamento micromotore: con e senza comando a pedale
- Regolazione fine di potenza
- Compatto e leggero
- Mandrino per frese con gambo Ø 2,35 mm
- Alimentazione: 230V - 50Hz.



Accessori

- n. l art. 25837 – Micromotore
- n. l art. 25838 – Comando a pedale
- n. l art. 9850 – Supporto micromotore in gomma anti-scivolo

Hydro Care



IDROMASSAGGIO PIEDI

- 4 funzioni differenziate
- Alimentazione: 230V - 50Hz.



Art. 25880



Infrared System

Bodyguard



BODYGUARD - SECURITY LIFE

Spina automatica salvavita. Per un sicuro utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche fino a 2000V. Garantisce la sicurezza per il soggetto a contatto con l'apparecchiatura ed i suoi accessori e la sicurezza dell'apparato da scariche e sbalzi di tensione. Studiato per l'uso professionale negli istituti di bellezza.

Art. 25800

Nails

Colori luminescenti per creare ogni volta stravaganti combinazioni diverse. Per un look trendy e personalizzato. Gel Polish, una formula in gel puro che in modo semplice e rapido si stende proprio come uno smalto, polimerizza con UV e regala alle unghie una meravigliosa finitura extra brillante, durando settimane senza sbeccarsi.



10301÷40 Smalto gel

Uv smalto gel per unghie naturali.
Polimerizza in Lampada Uv/Led.
10 ml



10380 Base/finish

Uv smalto gel trasparente per unghie naturali.
funge da base e/o da lucidante finale.
Polimerizza in Lampada Uv/Led.
10 ml



10381 Base gel

Uv Gel di Base con Vitamine E-B5-A,
ideale per unghie fragili e sottili.
Polimerizza in Lampada Uv/Led.
10 ml



10382 Pre gel

Liquido di adesione non acido per unghie naturali. da usare prima dello Smalto-Gel.
10 ml



10397 Cartella colori
composta da 2 "margherite"



Gel polish remover

Solvente per la rimozione del De.Cor Nails Smalto-gel.

Art. 10383 (100ml)

Art. 10384 (500ml)



Soluzione sgrassante

Liquido per sgrassare la dispersione del gel.

Art. 10385 (100ml)

Art. 10386 (500ml)



Art. 10398

Totem da terra
cm. 48x19x152h

Art. 10395

espositore da banco 45 pezzi
cm. 44,4x26,8x34h



Art. 78729 Foil wrap

Fogli di alluminio con spugna sintetica.
Confezione 100 pz.



Art. 78728 Nail wipes

Mini-salviette assorbenti forate.
Dimensione: 5x5 cm.
Confezione 240 pz.



Art. 78727 Nail pad

Mini salviette pretagliate.
Rotolo da 1000 pz.

Relax



Schienale regolabile

LETTINO DA MASSAGGI

con struttura in legno lucidato wengé.

Imbottitura rivestita in ecopelle bianca.

Ampio piano portaogetti.

Dimensioni: cm 182 x 67 x 80h

Art.153 - RELAX

Art.153/P - RELAX PLUS Versione con portarotolo.



Art.153/V - RELAX S

Versione con foro poggia viso, senza portarotolo.

Art.153/VP - RELAX S PLUS

Versione con foro poggia viso e portarotolo.



Optional

Art.153/C - Cuscino copriforo poggia viso.

Désir

Letto da massaggi con struttura in legno

Super resistente. Schienale Reclinabile.

Supporto laterale porta asciugamani.

Ampio piano porta oggetti.

Peso lettino 31,6Kg

Peso Imballato 36,6Kg


Dimensioni imballo 76x197x19cm

Art. 9271

Dimensioni lettino: 71x192xH62/78cm



foro poggia viso

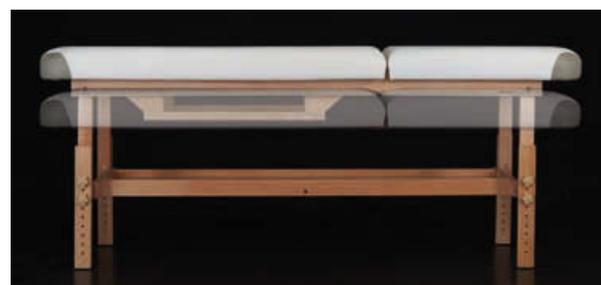

OPTIONAL: art. 9272

Kit accessori per lettino ad innesto rapido.

Poggiatesta regolabile ed asportabile;

Portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta, lunghezza massima 60 cm

Regolazione telescopica dell'altezza. ▲

Min. 62 cm

Max. 78 cm

Tokiwa

Lettino da massaggio in legno trattato antiacqua.

Regolazione autobloccante. Imbottitura amovibile in F.pelle bianca.

Lucidatura: wengé - bianco acidato.

Studiato anche per trattamenti benessere e termali effettuati con fanghi, alghe, ecc..

Dimensioni: cm 184 x 70 x 80 h

Art. 219 Versione senza portarotolo

Art. 219/P Versione con portarotolo



Optional
Art. 297 Poggiatesta estraibile

Quick



LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

A valigia con struttura in legno ultra resistente. Foro poggia viso.
Carico massimo: 250kg super resistente. Super leggero: solo 10,80 kg.
Art. 9261



OPTIONAL: art. 9269
Kit accessori per lettino modello Quick ad innesto rapido.
Poggiatesta regolabile ed asportabile; Sostegno frontale per le braccia; Sostegni laterali per le braccia
Portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta larghezza massima 55cm

Dimensioni: cm 95 X 65 X 19 h (chiuso)
cm 186 X 60 X 62/85 h (aperto)



Lettino chiuso



Fasce per riporre comodamente gli accessori nella parte interna del lettino



Regolazione telescopica dell'altezza.
Min. 62 cm - Max. 85 cm



OPTIONAL: art. 9263 borsa da trasporto per lettino Quick e Woody

Smarty



LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

A valigia con struttura metallica. Foro poggia viso.
Carico massimo: 300kg super resistente. Leggero: solo 15 kg.
Art. 9260

Dimensioni: cm 95 X 75 X 19 h (chiuso)
cm 186 X 70 X 62/76 h (aperto)



OPTIONAL: art. 9268
Kit accessori per lettino modello Smarty ad innesto rapido.
Poggiatesta regolabile ed asportabile; Sostegno frontale per le braccia;
Portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta larghezza massima 45cm



OPTIONAL: art. 9262
borsa da trasporto per lettino Smarty



Lettino chiuso



Fasce per riporre comodamente gli accessori nella parte interna del lettino



Regolazione telescopica dell'altezza.
Min. 62 cm - Max. 76 cm

Woody



OPTIONAL: art. 9263 borsa da trasporto per lettino Quick e Woody

LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

A valigia con struttura in legno ultra resistente. Schienale reclinabile.

Foro poggia viso. Carico massimo: 250kg

Super resistente e super leggero: solo 10,80 kg.

Art. 9270



OPTIONAL: art. 9269

Kit accessori per lettino ad innesto rapido.

Poggiatesta regolabile ed asportabile; Sostegno frontale per le braccia;

Sostegni laterali per le braccia.

Portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta larghezza massima 45cm



Lettino chiuso



Fasce per riporre comodamente gli accessori nella parte interna del lettino



Regolazione telescopica dell'altezza.
Min. 62 cm - Max. 85 cm

Dimensioni: cm 95 X 65 X 19 h (chiuso)
cm 186 X 60 X 62/85 h (aperto)

Easy



Regolazione telescopica dell'altezza

LETTINO MASSAGGI PIEGHEVOLE A VALIGIA

con struttura tubolare in alluminio, sistema di apertura facilitato.

Schienale regolabile con snodo autobloccante.

Completo di borsa da trasporto. Materassino asportabile "double-face".

Leggerissimo: solo 11 Kg.

Dimensioni: cm 73,5 x 60 x 16 h (chiuso) - cm 183 x 60 x 68/85 h (aperto)

Art. 189



Marsupio poggibraccia.



Materassino asportabile double face, bianco/argento.

Sofia



POLTRONA SOFIA

Poltrona pedicure rivestita in f.pelle colore bianco. Pompa idraulica con freno, schienale reclinabile, poggiatesta regolabile, doppio poggiatesta regolabile separatamente.

Dimensioni: cm 60 x 77 x 116/126 h (chiusa) - cm 185 x 77 x 98/108 h (sdraiata)

Art. 74/W



LETTINO DA MASSAGGIO A 2 SNODI

con regolazioni autobloccanti. Struttura in acciaio verniciato con imbottitura rivestita in f.pelle bianca. Braccioli asportabili a distacco rapido. Portarotolo.

Dimensioni: cm 183,5 x 81 x 61/75 h

Art. 204



LETTINO DA MASSAGGIO A 2 SNODI

con regolazioni autobloccanti. Pompa idraulica per la regolazione dell'altezza. Struttura in acciaio verniciato con imbottitura rivestita in f.pelle bianca. Braccioli asportabili a distacco rapido. Portarotolo.

Dimensioni: cm 183,5 x 81 x 75 h

Art. 206

Michelangelo



LETTINO MICHELANGELO

4 motori per impostare facilmente ogni posizione operativa.

Dimensioni: cm 190 x 60 x 59/88 h (schienale sdraiato)

Art. 134



Braccioli asportabili



Cuscino copriforo

Raffaello



Braccioli asportabili



Cuscino copriforo

LETTINO RAFFAELLO

3 motori per impostare facilmente le posizioni operative.

Dimensioni: cm 188 x 62 x 59/84 h (schienale sdraiato)

Art. I33

Hiro plus

HIRO PLUS

Carrello porta apparecchi ed accessori completo di cassetto su guide.

Legno lucidato wengè.

- Dimensioni: cm 54 x 44 x 80 h

- Dimensioni imballo: cm 49 x 77 x 10

cm 39 x 54 x 17 (cassetto)

Art. I24/C



Noble



NOBLE

- 3 piani in vetro temperato.
 - Dimensioni: cm 55 x 44 x 80 h
 - Dimensioni imballo: cm 76 x 45,5 x 15
- Art. 293

Magic



MAGIC

- Carrello porta apparecchi ed accessori con 4 piani in vetro temperato con sacca portatutto laterale (sostituibile).
- Dimensioni: cm 74 x 43 x 91 h
 - Dimensioni imballo: cm 85 x 53 x 17 h
- Art. 222



KASTEL

Poggiagambe per pedicure con piano d'appoggio regolabile in altezza ed inclinazione.

Altezza variabile da 40 a 54 cm.

Art. 209



MIMMO

Seggiolino operativo con regolazione in altezza a vite.

Disponibile esclusivamente con rivestimenti in ecopelle bianca.

Art. 214



DIEGO

Seggiolino da taglio con schienalino, poggiatesta e pompa a gas per la regolazione in altezza.

Seduta h max 82 cm - h min 70 cm.

Disponibile esclusivamente con rivestimento in ecopelle bianca 01-700, oppure nera 01-50.

Art. 321



LIZZY

Seggiolino da taglio con pompa a gas per la regolazione in altezza. Versione con schienalino.

Seduta h max 85 cm - h min 61 cm.

Art. 54/N - Nero

Art. 54/W - Bianco

Carrello Porta Biancheria



Struttura metallica. Sacca in nylon con cordino di chiusura.

- Dimensioni: diametro cm 44 - cm 61 h


- Dimensioni imballo: cm 46X54X6,5

Art. 31201



Aquadream

Il letto Aquadream è cromoterapia con intensità variabile di colori, studiata per conquistare serenità e creare una perfetta condizione psico-fisica per il trattamento: un bagno di luce che dona una nuova energia vitale.

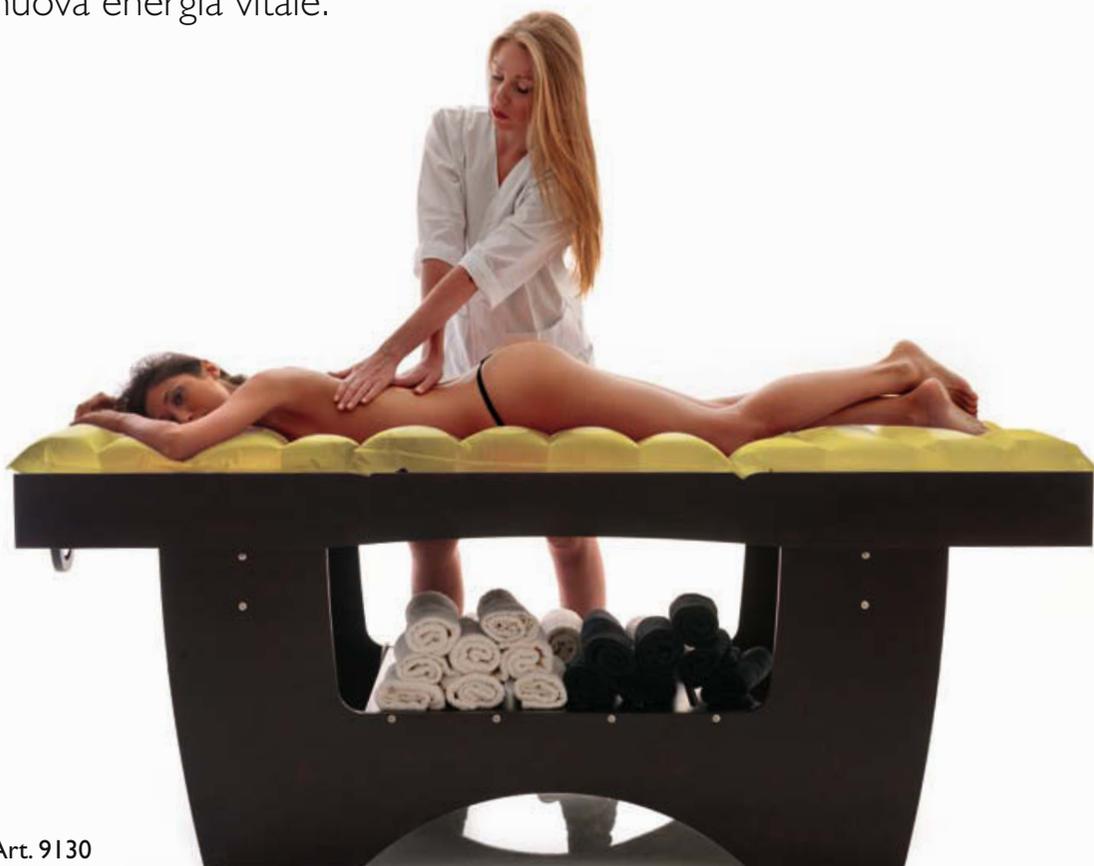

Art. 9130

Interfaccia comandi semplice ed intuitivo

3 pulsanti per 3 diversi valori di temperatura:

- **Tonificante** (32°C),
- **Rilassante** (36°C)
- **Snellente** (40°C)
- Pulsante di accensione
- Indicazione del programma selezionato e della relativa temperatura
- Indicazione dello stato di lavoro della resistenza (attiva/disattiva) di riscaldamento dei materassini.

Dotazione:

- 3 materassini in Poliuretano + 1 materassino aggiuntivo (scorta)
- Kit tubo per il riempimento dell'acqua dei materassini completo di raccordo universale per rubinetto
- 5 coperte isotermitiche

Prestazioni:

- **Pronto all'uso in solo: 2,5 ore**
- Bassi consumi, **solo 300Wh** per mantenere la temperatura di lavoro
- Peso totale con materassi ad acqua: 200kg
- Potenza installata 1200W
- Riscaldamento da freddo (rif.to temperatura iniziale acqua 25°C): 2,5 ore
- Mantenimento temperatura (ciclo snellente 40°C): ca. 300Wh
- Utilizzo della copertina isotermitica: ad apparecchio spento, perdita di 1°C all'ora



Interfaccia comandi semplice ed intuitivo



I pulsanti di controllo dei colori della Cromoterapia consentono l'attivazione e disattivazione di **4 diversi cicli cromoterapici**

- 1) Ciclo Armonizzante - colore dominante verde - quattro fasi di colore dal verde, giallo, arancio e acquamarina
- 2) Ciclo Energizzante - colore dominante giallo - quattro fasi di colore dal giallo, arancio, rosso e ambra
- 3) Ciclo Vitalizzante - colore dominante blu - quattro fasi di colore dal blu, azzurro, orchidea e viola
- 4) Ciclo Arcobaleno - tutti i colori secondo una sequenza cromatica predefinita a 10 colori di durata 30" ciascuno

Per i cicli 1), 2), 3) ciascuna fase di colore ha una durata di 1 minuto e si ripetono nella stessa sequenza fino al comando di OFF del ciclo o Off generale del sistema.

Anche il ciclo colore si ripete fino al comando di OFF del ciclo stesso, attivazione di un altro ciclo colore oppure Off di sistema.




Alcune Applicazioni

- Hot Stone
- In e Yang
- Pinda Sveda
- Anti Stress
- Stretching & Termale
- Decontratturante
- Cellulite
- Drenante
- Fanghi e Olii Essenziali
- Bendaggi riducenti, drenanti, rassodanti

Dimensioni lettino: 205 x 78 x 77h cm

Dimensioni imballo: 224 x 93 x 37h cm

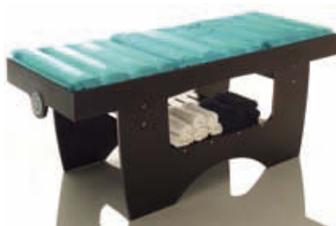


Optional

art. 9131 – Centralina Temporizzata;

- Box centralina con interruttore bipolare e orologio programmatore meccanico accensione/spegnimento con riserva di carica per mancanza rete (5 giorni)
- Impostazione dei tempi a step di 15'
- Possibilità di esclusione dell'orologio

Cromoterapia

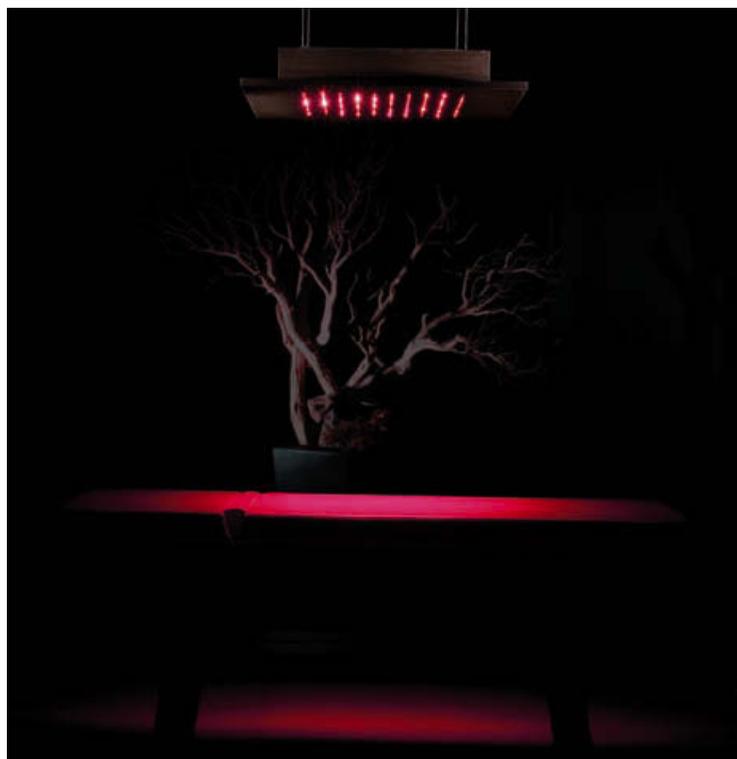

Rosso

Art. 118/L

Cielino emozionale per trattamenti di Cromoterapia.

Tecnologia LED (ecology system = basso consumo energetico). Provisto di telecomando per bloccare la Cromoterapia sui colori primari o per commutare sul programma automatico di variazione cromatica in sequenza. Completo di cordino in acciaio da utilizzare per la pendenza.

Dimensioni: 80x80 cm 230 V ~ 50 Hz - 6,5 W

Che cos'è la Cromoterapia

Secondo la fisica moderna che osserva i corpi illuminati da una sorgente di luce bianca, siamo indotti ad attribuire ad essi un colore per la diversa sensazione che l'occhio ne riceve. Il colore dei corpi non è quindi da intendersi come una loro esclusiva proprietà, ma come un qualcosa dipendente da tre elementi: sorgente luminosa, oggetto, occhio. Psicologi e fisici si sono trovati d'accordo nell'affermare che il colore è una sensazione visiva che si ha quando determinate onde elettromagnetiche stimolano la retina. Dalla diversa lunghezza di queste onde dipende la varietà dei colori. Componendo un raggio di luce bianca per mezzo di un prisma, si ottengono i colori fondamentali: rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco e viola.

Frequenze dei colori:

La luce, nei suoi sette colori che la formano, è energia radiante visibile.

Essa viaggia nello spazio sotto forma di onde vibratorie che si diversificano tra loro in base alle lunghezze d'onda misurate. L'occhio umano riesce a percepire solo radiazioni comprese tra 4000 e 8000 Å (angstrom).

Ogni fascia di lunghezza d'onda corrisponde a un colore ed ha una specifica azione terapeutica:

- ROSSO:	620 nanometri	- ARANCIO:	589 nanometri
- GIALLO:	551 nanometri	- VERDE:	512 nanometri
- BLU:	475 nanometri	- INDACO:	449 nanometri
- VIOLA:	423 nanometri		

Al di sotto del viola troviamo l'ultravioletto e al di sopra del rosso l'infrarosso. La quantità di energia di ciascun colore è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. Più è alta la lunghezza d'onda, più forte sarà la penetrazione cutanea e minore la carica energetica. Ne deriva che il rosso è il colore più penetrante e a seguire l'arancio, il giallo, il verde, il blu, l'indaco e il viola. Quest'ultimo arriva a profondità limitate, ma infonde un'alta quantità di energia.



Arancio



Giallo



Verde



Blu



Indaco



Viola



Telecomando


Un “tuffo” nel mondo della bellezza!

La grande Show Room di Cerro Maggiore, alle porte di Milano, lungo l'autostrada che collega l'aeroporto della Malpensa con il capoluogo Lombardo, offre l'opportunità unica di un “tuffo” nel mondo della bellezza.

Un mondo che Münster & Dikson conosce bene: su una superficie di 3000 mq sono visibili soluzioni, apparecchiature, attrezzature ed esempi d'ambientazione dedicati all'universo professionale dell'Estetica e dell'Acconciatura.

Luci, colori e finiture interpretano gli arredi e le sedute per offrire le soluzioni più singolari e diversificate, mentre il rigore tecnico delle apparecchiature e la loro linea affascinante lasciano intuire facilmente la qualità e la gran classe dei Centri che l'azienda cura nella loro realizzazione.

Una mission che Münster & Dikson vive intensamente attraverso l'interpretazione delle esigenze e dei desideri della clientela: per questo l'azienda mette in campo la sua quarantennale esperienza, unita alle intuizioni dei suoi architetti ed alla professionalità innovativa dei suoi tecnici in un mix capace di sorprendere!

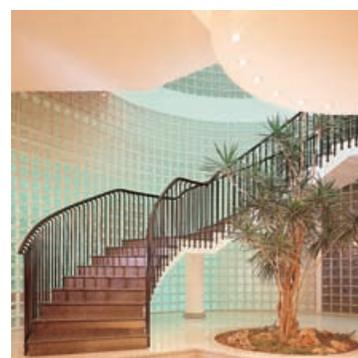

 **MÜSTER & DIKSON S.p.A**

Via Privata da via Kennedy snc - 20023 Cerro Maggiore (Milano) Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331-525359
e-mail: sales@muster-dikson.com - www.muster-dikson.com

Export Department
Tel. +39 0331-525111 (r.a.) - Fax +39 0331-519627
e-mail: export@muster-dikson.com