

Guida all'utilizzo dell'apparecchio acustico retroauricolare Quantum™ micro



Grazie

Grazie per aver scelto un apparecchio acustico Unitron.

CRAI S.p.A., in collaborazione con Unitron, si preoccupa delle esigenze delle persone che hanno una perdita uditiva. Lavoriamo a stretto contatto con l'audioprotesista per offrire a tutti soluzioni avanzate specifiche. Perché sentire è importante.

Il vostro apparecchio acustico

Audioprotesista: _____

Telefono: _____

Modello: _____

Numero di serie: _____

Sostituzione batteria : ☐ Batteria 312

Garanzia: _____

Usare il programma 1 per: _____

Usare il programma 2 per: _____


Usare il programma 3 per: _____

Usare il programma 4 per: _____

Data di acquisto: _____

Guida rapida

Sostituzione della batteria

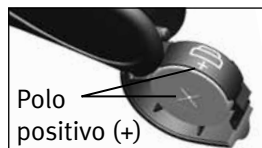


Avviso batteria scarica

2 bip ogni
30 minuti

□ 312

Acceso/Spento

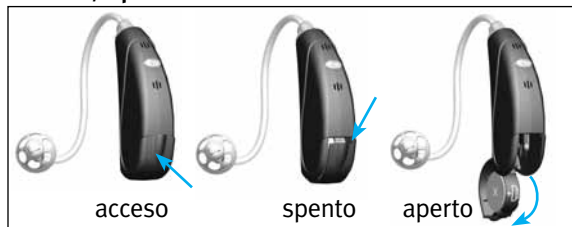

Pulsante


- cambio programma
- controllo volume;
apparecchio destro= più forte,
apparecchio sinistro= più debole
- bilanciamento comfort-chiarzza;
app. destro=chiarzza,
app. sinistro=comfort

Indice

Caratteristiche dell'apparecchio acustico	2
Applicazione dell'apparecchio acustico	4
Accensione e spegnimento dell'apparecchio acustico.....	6
Informazioni sulla batteria.....	8
Suggerimenti per la prima applicazione dell'apparecchio acustico	12
Istruzioni per l'uso	14
Uso del telefono.....	20
Cura del vostro apparecchio acustico.....	21
Pulizia del vostro apparecchio acustico	22
Funzionalità principali dell'apparecchio acustico	26
Guida alla risoluzione dei problemi	29
Avvertenze	34
Informazioni sulla conformità.....	38
Osservazioni del cliente.....	40
Note aggiuntive.....	41

Caratteristiche dell'apparecchio acustico

- 1 **Curvetta** - il vostro auricolare personalizzato si connette all'apparecchio acustico mediante la curvetta
- 2 **Microfono** - attraverso i microfoni, il suono entra nell'apparecchio acustico. **Protezione microfono** - protegge i microfoni da sporco e detriti
- 3 **Pulsante** - permette di cambiare il programma di ascolto, di modificare il livello di volume o di bilanciare comfort e chiarezza, in funzione dell'impostazione personalizzata
- 4 **Vano batteria/accensione e spegnimento** - chiudere il vano per accendere l'apparecchio acustico, aprire parzialmente il vano per spegnere l'apparecchio acustico. L'apertura completa del vano vi permette di sostituire la batteria
- 5 **Auricolare** - consente al suono di passare dall'apparecchio acustico all'orecchio e di mantenere l'apparecchio acustico in posizione
- 6 **Tubetto sottile** - attraverso il tubetto sottile il suono viene trasmesso al condotto uditivo
- 7 **Cupoletta** - mantiene il tubetto sottile in posizione nel vostro condotto uditivo
- 8 **Fermo** - aiuta a evitare che la cupoletta e il tubetto sottile fuoriescano dal condotto uditivo

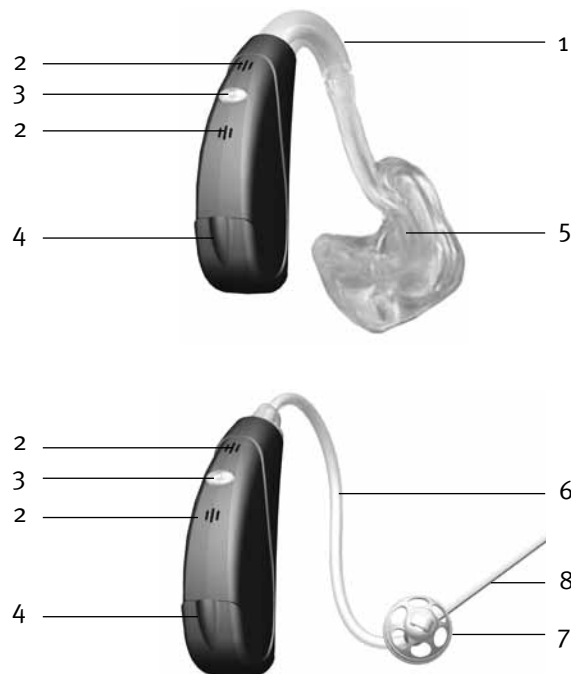


Applicazione dell'apparecchio acustico

Il contrassegno colorato all'interno del vano batteria indica il lato:


rosso = orecchio destro; blu = orecchio sinistro.

Retroauricolare con auricolare


1. Tenete l'auricolare tra il pollice e l'indice. L'apertura deve essere rivolta verso il condotto uditivo, con l'apparecchio acustico appoggiato sulla parte superiore dell'orecchio.

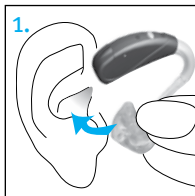

2. Inserite con attenzione l'auricolare nell'orecchio. Potrebbe essere necessaria una leggera rotazione all'indietro. L'auricolare deve adattarsi all'orecchio in modo aderente e confortevole. Tirare il lobo indietro e in basso può favorire un più facile inserimento dell'auricolare nel condotto uditivo.

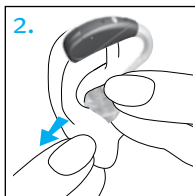


3. Collocate l'apparecchio acustico sulla parte superiore dell'orecchio.

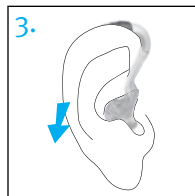


Retroauricolari con tubetto sottile


1. Collocate l'apparecchio acustico sulla parte superiore dell'orecchio. Il tubetto sottile deve rimanere allineato contro la testa, senza sporgere.

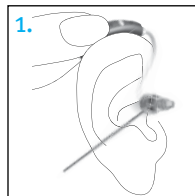

2. Tenete il tubetto sottile nel punto di attacco alla cupoletta e spingetelo delicatamente nel condotto uditivo.

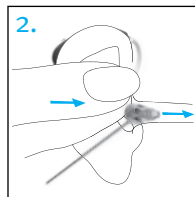

3. Collocate l'elemento di tenuta nell'orecchio finché non appoggia sul fondo dell'apertura del condotto uditivo.

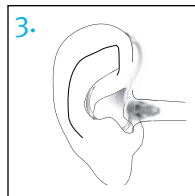

Accensione e spegnimento dell'apparecchio acustico

Il vostro apparecchio acustico ha uno sportello batteria con tre posizioni, che agisce come interruttore di accensione/spegnimento e che permette di accedere al vano batteria.

1. ACCESO: chiudete completamente il vano batteria.



Nota: L'apparecchio acustico si accende dopo circa 5 secondi. L'audioprotesista può aumentare ulteriormente il ritardo di avvio se necessario.

2. SPENTO: aprite parzialmente il vano batteria.



3. APERTO: aprite completamente lo sportellino per accedere al vano batteria e sostituire la batteria.



Nota: Per accendere e spegnere l'apparecchio acustico mentre è applicato all'orecchio, impugnate la parte superiore e inferiore dell'apparecchio con l'indice e il pollice. Usate il pollice per aprire e chiudere il vano della batteria.

Informazioni sulla batteria

Per sostituire la batteria, aprite completamente il vano.

Avviso batteria scarica

L'emissione di due segnali acustici lunghi da parte dell'apparecchio sta ad indicare che il livello di carica della batteria è basso. Dopo il primo segnale di avviso, potreste sentire una riduzione della qualità sonora, che verrà ripristinata inserendo una nuova batteria nell'apparecchio acustico.

Se non siete in grado di udire l'avviso di batteria scarica, il vostro audioprotesista può modificare la frequenza o il volume del segnale acustico. Se preferite, il segnale acustico può essere completamente disattivato.

 Gli apparecchi acustici sono progettati per emettere un avviso di batteria scarica ogni 30 minuti, finché non si sostituiscono le batterie oppure queste si esauriscono completamente. Si raccomanda quindi di sostituire le batterie il più presto possibile dopo aver udito l'avviso di esaurimento batteria.

Sostituzione della batteria

1. Aprite con delicatezza lo sportello della batteria usando le unghie.
2. Afferrate la batteria con il pollice e l'indice e rimuovetela.
3. Inserite la nuova batteria nel vano batteria con il polo positivo (+) della batteria sullo stesso lato del segno (+) sul bordo del vano batteria. In questo modo lo sportello del vano batteria si chiude correttamente.

 **Nota:** Se la batteria non è inserita correttamente, l'apparecchio acustico non si accende.

4. Chiudete il vano batteria.



Sostituzione della batteria in un apparecchio acustico con vano batteria resistente alle manomissioni

Alcuni apparecchi acustici sono dotati di uno sportello del vano batteria resistente alle manomissioni per motivi di sicurezza. Per sostituire la batteria, aprite il vano batteria e, usando la punta di una penna, fate rientrare nell'apparecchio acustico la parte posteriore del perno di chiusura. Rimuovete la vecchia batteria. Inserite una nuova batteria con il polo positivo (+) della batteria sullo stesso lato del segno (+) sul bordo del vano batteria. La nuova batteria sarà posizionata correttamente quando chiudete lo sportello del vano.



Cura delle batterie

Smaltite sempre le batterie in modo sicuro e rispettose dell'ambiente.

Per allungare la vita della batteria, ricordatevi di spegnere l'apparecchio acustico quando non viene utilizzato.

Quando l'apparecchio acustico non viene utilizzato, rimuovete la batteria e lasciate il vano aperto per consentire l'evaporazione dell'umidità interna.

Suggerimenti per la prima applicazione dell'apparecchio acustico

1. Iniziate a utilizzare l'apparecchio acustico in una stanza tranquilla di casa, in modo da abituarvi alla nuova qualità del suono. I suoni come il ticchettio di un orologio, il ronzio del computer, il bip del forno a microonde o il fruscio degli abiti o della carta possono in un primo momento sembrarvi forti, poiché non li avete sentiti correttamente per molto tempo.
2. Leggete ad alta voce da soli e imparate come correggere il volume della vostra voce mentre indossate l'apparecchio acustico.
3. Parlate ad altre persone e imparate a distinguere nuovamente i diversi tipi di suoni.
4. Sarà necessario un certo periodo di tempo perché riusciate ad abituarvi completamente all'apparecchio acustico e possiate apprezzarne i vantaggi.
5. Utilizzate l'apparecchio acustico quanto più potete durante il giorno, allungando gradualmente ogni giorno il tempo di utilizzo.

6. Annotate sul retro di questo opuscolo le difficili situazioni di ascolto, indicando qualsiasi vi risulti sgradevole. Queste informazioni aiuteranno il vostro audioprotesista a mettere a punto l'apparecchio acustico nel modo più adatto per voi.
7. Coinvolgete la famiglia e gli amici nel periodo di familiarizzazione. Ad esempio, chiedete ad altri di regolare la televisione a un volume confortevole.
8. Quando state iniziando ad abituarvi all'apparecchio acustico, indossatelo negli ambienti dove l'ascolto è più difficile, ad esempio in ufficio, durante le feste o al ristorante. Questo può essere difficile anche per le persone con capacità uditive normali. Prendete tutto il tempo necessario per riacquisire la capacità di udire in situazioni difficili.
9. Fate in modo che il vostro apparecchio acustico entri a far parte della vita quotidiana e siate pazienti con voi stessi fino a quando non tornerete a interpretare correttamente il suono.

Istruzioni per l'uso

Il vostro apparecchio acustico retroauricolare è dotato di un pulsante per un'ulteriore regolazione dell'apparecchio.

Pulsante



L'apparecchio acustico è dotato di un pulsante che può essere utilizzato per passare da un programma all'altro, regolare il volume o regolare il bilanciamento comfort-chiariezza.

☐ **Controllo dei programmi**

Se il pulsante è stato configurato per il controllo dei programmi, ogni volta che premete il pulsante, l'apparecchio acustico passa a un nuovo programma.

L'apparecchio acustico emette un bip per indicare il programma attualmente selezionato.

Programma 1 (es. programma automatico)	♪	1 bip
Programma 2 (es. parlato in ambiente rumoroso)	♪♪	2 bip
Programma 3 (es. telefono)	♪♪♪	3 bip
Programma 4 (es. musica)	♪♪♪♪	4 bip
DuoLink (se abilitato) (vedere a pag 18)	L'apparecchio sull'altro orecchio emette un bip identico a quello del lato dove avviene la regolazione	

☐ **Controllo volume**

Se il pulsante è stato configurato come controllo volume:

- Premete il pulsante sull'apparecchio destro per aumentare il volume di entrambi gli apparecchi acustici.
- Premete il pulsante sull'apparecchio sinistra per ridurre il volume di entrambi gli apparecchi acustici.

Regolazione del volume	Bip	
Livello di volume consigliato		1 bip
Aumento del volume		bip breve
Riduzione del volume		bip breve
Livello del volume massimo		2 bip
Livello di volume minimo		2 bip

□ **Bilanciamento comfort-chiarezza**

Se il pulsante è stato configurato come bilanciamento comfort-chiarezza:

- Premete il pulsante sul retroauricolare destro per aumentare la chiarezza del parlato.
- Premete il pulsante sul retroauricolare di sinistra per diminuire il rumore globale o aumentare il comfort d'ascolto.

Ogni passo modifica le performance dell'apparecchio acustico. A volte sono necessari più passaggi per ottenere il risultato di ascolto desiderato. Dopo ogni pressione attendete circa 4-5 secondi per consentire all'apparecchio acustico di impostare le nuove regolazioni.

L'apparecchio acustico emette un bip quando viene modificato il livello di comfort-chiarezza.

Impostazione del bilanciamento comfort-chiarezza	Bip	
Livello ideale di comfort e chiarezza		1 bip
Aumento del livello di chiarezza dei suoni		bip breve
Aumento del comfort d'ascolto		bip breve
Livello massimo di chiarezza dei suoni		2 bip
Livello massimo di comfort d'ascolto		2 bip

DuoLink

Se DuoLink è attivato, quando si modificano le impostazioni di volume, programma o comfort-chiarezza di un apparecchio acustico, la modifica viene applicata contemporaneamente anche all'altro.

Ad esempio, se il pulsante è configurato come controllo di programma e DuoLink è abilitato, quando premete il pulsante dell'apparecchio acustico destro, il programma lo cambierà su entrambi gli apparecchi.

Apprendimento

Il vostro apparecchio acustico è in grado di imparare le impostazioni per i diversi ambienti, purché questa funzionalità sia disponibile e abilitata dall'audioprotesista. Nel tempo, l'apparecchio acustico adatterà il volume predefinito e le impostazioni di comfort-chiarezza ai livelli solitamente utilizzati.

Telecomando

L'apparecchio acustico può essere fornito dotato di un telecomando che permette di cambiare i diversi programmi di ascolto, il volume e il comfort-chiarezza.

Uso del telefono

I telefoni non funzionano tutti in modo identico, pertanto potreste sperimentare risultati diversi in base al telefono utilizzato. Con molti telefoni sarà sufficiente tenere il ricevitore vicino all'orecchio, senza dover passare all'apposito programma telefonico sull'apparecchio acustico. Ricordatevi di muovere leggermente il ricevitore per trovare la posizione di ascolto ottimale.

In base al tipo di telefono utilizzato, l'audioprotesista potrebbe aver selezionato sull'apparecchio acustico un programma specifico per le chiamate telefoniche.

Se l'apparecchio acustico è configurato per funzionare con il dispositivo wireless uDirect™ che si indossa intorno al collo, potrete beneficiare della soluzione Bluetooth® a mani libere. Per ulteriori informazioni, consultate la guida all'utilizzo di uDirect.

Cura del vostro apparecchio acustico

Lasciate aperto il vano batteria quando non utilizzate l'apparecchio.

Rimuovete l'apparecchio acustico durante l'utilizzo di prodotti per capelli. Tali sostanze possono ostruirlo e impedirne il corretto funzionamento.

Non indossate l'apparecchio acustico durante il bagno o la doccia e non immergetelo nell'acqua.

Se l'apparecchio acustico si bagna, non asciugatelo nel forno o nel forno a microonde. Non toccate i controlli di regolazione. Aprite immediatamente lo sportello della batteria e lasciate asciugare l'apparecchio acustico in modo naturale per 24 ore.

Protegete l'apparecchio acustico dal calore eccessivo (asciugacapelli, vano portaoggetti o cruscotto dell'automobile).

Il regolare utilizzo di un deumidificatore, per esempio un cuscino essiccante, aiuta a prevenire

la corrosione, prolungando la durata del vostro apparecchio.

Non lasciate cadere l'apparecchio acustico ed evitate gli urti contro superfici dure.

Pulizia del vostro apparecchio acustico

La formazione di cerume è normale e naturale. Un importante passaggio della pulizia e della manutenzione quotidiana è rappresentato dalla verifica dell'assenza di cerume.

Non usate alcol per pulire l'apparecchio acustico, l'auricolare o la cupoletta.

Non usate strumenti appuntiti per rimuovere il cerume. L'inserimento di oggetti appuntiti nell'apparecchio acustico o nell'auricolare può danneggiarli gravemente.

Auricolare

Assicuratevi sempre che l'auricolare sia pulito e libero dal cerume.

Non utilizzate alcol per pulire l'auricolare.



Se l'auricolare si ottura, pulite l'apertura con uno spazzolino.

Se il vostro medico vi ha prescritto delle gocce auricolari, pulite l'eventuale umidità sull'auricolare o sul tubetto per evitarne l'ostruzione.

Se l'auricolare richiede un'ulteriore pulizia:

1. Scollegate il tubetto di plastica dall'aggancio dell'apparecchio acustico o prodotti appropriati che troverete presso il vostro audioprotesista.
2. Lavate soltanto l'auricolare con acqua tiepida, usando sapone neutro.
3. Sciacquatelo con acqua fredda e lasciatelo asciugare per una notte.
4. Assicuratevi che il tubetto dell'auricolare sia asciutto prima di ricollegarlo all'apparecchio acustico. L'uso di una pompetta per l'apparecchio acustico può aiutarvi a rimuovere l'umidità e i residui dal tubetto. Per ulteriori informazioni, consultate il vostro audioprotesista.

Tubetto sottile e cupoletta

Fate sostituire il tubetto sottile e la cupoletta dal vostro audioprotesista ogni tre/sei mesi o quando diventano rigidi, fragili o decolorati.




Pulite ogni giorno la cupoletta con un panno umido.

Pulite periodicamente il tubetto sottile con lo strumento di pulizia fornito, quando iniziate a notare la presenza di residui all'interno e all'esterno del tubetto.

1. Tenete il tubicino in una mano e l'apparecchio acustico nell'altra.
2. Ruotate leggermente l'apparecchio acustico fino a staccarlo dal tubicino.
3. Utilizzate un panno umido per pulire la parte esterna del tubetto sottile e la cupoletta.
4. Rimuovete la cupoletta dal tubetto sottile prima di pulire il tubetto sottile.

5. Utilizzate il dispositivo di pulizia fornito nel kit, inserendolo delicatamente nel punto di collegamento del tubicino con l'apparecchio acustico, facendolo poi fuoriuscire attraverso il tubicino stesso.

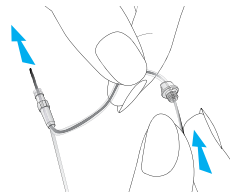

 **Nota:** il tubetto sottile e la cupoletta non devono mai essere sciacquati o immersi nell'acqua, in quanto le gocce d'acqua potrebbero rimanere nel tubo, bloccando i suoni o danneggiando i componenti elettrici dell'apparecchio acustico.

6. Dopo aver pulito il tubetto sottile, riapplicatelo all'apparecchio acustico ruotando delicatamente l'apparecchio sul tubetto.
7. Riapplicate la cupoletta sul tubetto sottile spingendola delicatamente nell'estremità del tubetto.

Funzionalità principali dell'apparecchio acustico

Bilanciamento comfort-chiarezza

Il vostro apparecchio acustico si regola automaticamente in modo da consentire un ascolto più chiaro del parlato o migliorando il comfort nelle situazioni rumorose. Alcuni modelli di apparecchi acustici Quantum retroauricolari offrono un comando per regolare il bilanciamento comfort-chiarezza.

- La regolazione del bilanciamento comfort-chiarezza fa in modo che l'apparecchio acustico si focalizzi maggiormente sulla chiarezza del parlato.
- L'abbassamento del bilanciamento comfort-chiarezza fa in modo che l'apparecchio acustico attenui il rumore di fondo, offrendo un maggiore comfort.

Le regolazioni del bilanciamento comfort-chiarezza possono essere eseguite mediante i comandi dell'apparecchio acustico o per mezzo di un

telecomando. Rivolgetevi al vostro audioprotesista per conoscere i comandi di bilanciamento comfort-chiarezza che sono stati programmati.

Man mano che proseguite con la regolazione del bilanciamento comfort-chiarezza, il vostro apparecchio acustico imparerà gradualmente quali sono le vostre impostazioni preferite.

DuoLink

Con DuoLink, gli apparecchi acustici comunicano tra di loro in modalità wireless. Quando viene apportata una modifica al programma, al bilanciamento comfort-chiarezza o al volume di un apparecchio acustico, anche l'altro apparecchio acustico si modifica automaticamente.

Telefono binaurale

Con la funzione del telefono binaurale, le telefonate da cellulare e da rete fissa possono essere ascoltate con entrambe le orecchie e senza la necessità di accessori aggiuntivi. Non è richiesto alcun accessorio.

uDirect e uTV

uDirect™ and uTV™ sono accessori opzionali per tutti gli apparecchi acustici Quantum retroauricolari.

- uDirect consente di accedere in modo semplice e senza interventi manuali ai dispositivi abilitati per Bluetooth, come i telefoni cellulari. Dispone anche di un connettore per collegare via cavo dispositivi come i lettori MP3.
- uTV viene utilizzato insieme a per trasmettere direttamente l'audio dalla TV al vostro apparecchio acustico uTV può anche trasmettere l'audio da impianti stereo, computer e altre sorgenti.

Per ulteriori informazioni sull'uso di uDirect o uTV, consultare la guida all'utente di quell'accessorio. Per informazioni sull'acquisto di un accessorio uDirect o uTV, potete contattare il vostro audioprotesista.

Guida alla risoluzione dei problemi

Causa	Possibile rimedio
Nessun suono	
Non acceso	Accendere
Audio non chiaro, distorto	Sostituire la batteria
Contatto batteria non funzionante	Consultare l'audioprotesista
Batteria inserita al contrario	Inserire la batteria con il segno più (+) verso l'alto
Auricolare/tubetto/cupoletta otturati da cerume	Pulire l'auricolare o la cupoletta. Vedere "Pulizia del vostro apparecchio acustico". Utilizzare il dispositivo di pulizia per rimuovere il cerume dal tubetto. Consultare l'audioprotesista.
Protezione del microfono ostruita	Consultare l'audioprotesista

Causa	Possibile rimedio
Audio insufficiente	
Volume basso	Aumentare il volume; oppure se il problema persiste consultare l'audioprotesista per i modelli senza controllo manuale del volume.
Batteria quasi scarica	Sostituire la batteria
Auricolare/tubetto sottile/ cupoletta non inseriti correttamente	Vedere “Applicazione dell'apparecchio acustico sull'orecchio”. Reinserire con attenzione.
Variazione dell'udito	Consultare l'audioprotesista
Auricolare/tubetto sottile/ cupolette ostruite dal cerume	Pulire l'auricolare. Vedere “Pulizia del vostro apparecchio acustico”. Utilizzare il dispositivo di pulizia per rimuovere il cerume dal tubetto. Consultare l'audioprotesista.
Protezione del microfono ostruita	Consultare l'audioprotesista

Causa	Possibile rimedio
Funzionamento intermittente	
Batteria quasi scarica	Sostituire la batteria
Contatto batteria sporco	Consultate il vostro audioprotesista
Due bip lunghi	
Batteria quasi scarica	Sostituire la batteria
Fischi	
Auricolare/tubetto/ cupoletta non inseriti correttamente	Vedere “Applicazione dell'apparecchio acustico sull'orecchio”. Reinserire con attenzione.
Mani/vestiti vicini all'orecchio	Allontanare mani/vestiti dall'orecchio
Auricolare/tubetto/ cupoletta non conformi	Consultare l'audioprotesista

Causa	Possibile rimedio
-------	-------------------

Non chiaro, distorto

Auricolare/tubetto/ cupoletta non conformi	Consultare l'audioprotesista
---	---------------------------------

Auricolare/tubetto/
cupoletta otturati da
cerume

Pulire l'auricolare.
Vedere “Pulizia del
vostro apparecchio
acustico”. Utilizzare il
dispositivo di pulizia
per rimuovere il cerume
dal tubetto. Consultare
l'audioprotesista.

Batteria quasi scarica	Sostituire la batteria
------------------------	------------------------

Protezione del microfono
ostruita

Consultare
l'audioprotesista

Auricolare/tubetto/cupoletta che fuoriescono dall'orecchio

Auricolare/tubetto/ cupoletta non conformi	Consultare l'audioprotesista
---	---------------------------------

Auricolare/tubetto/
cupoletta non inseriti
correttamente

Vedere “Applicazione
dell'apparecchio acustico
sull'orecchio”.
Reinserire con attenzione.

Causa	Possibile rimedio
-------	-------------------

Audio debole al telefono

Telefono non posizionato correttamente	Muovere il ricevitore telefonico attorno all'orecchio per cercare il segnale più chiaro. Vedere “Uso del telefono”.
---	---

L'apparecchio acustico
necessita di regolazione

Consultare
l'audioprotesista

Per altri problemi non elencati nella guida, contattate il
vostro audioprotesista.

Avvertenze

- ⚠ L'apparecchio acustico deve essere utilizzato solo secondo le istruzioni fornite dall'audioprotesista.
- ⚠ Gli apparecchi acustici non ripristinano le normali condizioni uditive e non evitano né migliorano i danni all'apparato uditivo dovuti a condizioni organiche.
- ⚠ Non usate l'apparecchio acustico in aree a rischio di esplosioni.
- ⚠ Le reazioni allergiche agli apparecchi acustici sono rare. Tuttavia, se avvertite una sensazione di prurito, rossore, indolenzimento, infiammazione o bruciore dentro o intorno all'orecchio, informate l'audioprotesista e consultate un medico.
- ⚠ Nel caso improbabile che alcune parti rimangano nel condotto uditivo dopo la rimozione dell'apparecchio acustico, consultate immediatamente un medico.

- ⚠ Rimuovete l'apparecchio acustico in caso di TAC, risonanza magnetica o altri esami con apparecchi elettromagnetici.
- ⚠ Prestate particolare attenzione quando indossate apparecchi acustici con livelli di pressione audio superiori a 132 decibel. Potreste correre il rischio di danneggiare ulteriormente l'udito. Rivolgetevi a un audioprotesista per garantire che l'uscita massima del vostro apparecchio acustico sia adatta alle particolari condizioni del vostro udito.

Avvertenze relative alla batteria

- ⚠ Non lasciate l'apparecchio acustico o le batterie alla portata di bambini e animali.
- ⚠ Non mettete mai in bocca l'apparecchio acustico o la batteria. In caso di ingestione dell'apparecchio acustico o della batteria, consultate immediatamente un medico.

Precauzioni

- ⚠ L'utilizzo di apparecchi acustici è solo una parte della riabilitazione dell'udito; potrebbero essere necessari un apprendimento specifico e l'insegnamento della lettura labiale.
- ⚠ Nella maggior parte dei casi, l'uso saltuario dell'apparecchio acustico non offre vantaggi ottimali. Una volta abituati all'apparecchio acustico, è consigliabile indossarlo ogni giorno e nell'arco dell'intera giornata.
- ⚠ Il vostro apparecchio acustico è costruito con i componenti più moderni per fornire la migliore qualità sonora in qualsiasi situazione d'ascolto. Tuttavia, alcuni dispositivi di comunicazione come i telefoni cellulari possono creare delle interferenze (ronzii) negli apparecchi acustici. In caso di interferenze provenienti da un telefono cellulare vicino a voi, potete ridurre l'interferenza in diversi modi. Cambiate il programma dell'apparecchio acustico, girate il capo in un'altra direzione o individuate il telefono cellulare e allontanatevi da esso.

Nota per l'audioprotesista

- ⚠ Non applicate la cupoletta a pazienti con timpani perforati, cavità dell'orecchio aperte o condotti uditivi alterati chirurgicamente. In tali casi si consiglia l'utilizzo di auricolari personalizzati.

Codice di identificazione

Il numero di matricola e l'anno di produzione sono indicati all'interno del vano batteria.

Informazioni sulla conformità

Dichiarazione di conformità

Unitron dichiara che questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva sui dispositivi medici 93/42/EEC e della Direttiva sulle apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione 1999/5/EC. Il testo completo della Dichiarazione di conformità può essere ottenuto dal produttore.

L'apparecchio acustico descritto in questo libretto di istruzioni è certificato come:

Sistema standard per l'udito

USA	FCC ID: VMY-UWBTE1
Canada	IC:2756A-UWBTE1

Avviso 1

Questo dispositivo soddisfa la Parte 15 della Normativa FCC e il documento RSS-210 di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- 1) il dispositivo non deve causare interferenze nocive
- 2) il dispositivo deve sopportare qualsiasi interferenza in ingresso, incluse le interferenze in grado di causare funzionamenti indesiderati.

Avviso 2

Qualsiasi modifica apportata a questo dispositivo e non espressamente approvata da Unitron può invalidare l'autorizzazione FCC all'uso del dispositivo.

Avviso 3

Questo dispositivo è stato collaudato e ne è stata verificata la compatibilità con i limiti stabiliti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la Parte 15 della Normativa FCC e il documento ICES-003 di Industry Canada. Questi limiti sono stati studiati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze nocive in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se il dispositivo dovesse causare interferenze nocive alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si raccomanda che l'utente provi a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore
- Connettere il dispositivo a una presa situata su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
- Rivolgersi al fornitore o a un tecnico radio/TV esperto per ricevere aiuto

Osservazioni del cliente

Prendete nota delle vostre particolari esigenze o preoccupazioni e riferitele durante la vostra prossima visita dopo la consegna dell'apparecchio acustico.

Questo aiuterà il vostro audioprotesista a soddisfare le vostre esigenze.

☐

☐

☐

☐

☐

Note aggiuntive



Via G. D'Annunzio 35,
35024 Bovolenta (Padova)

Tel: 049 5386777
Fax: 049 5386656
www.craispa.com



Unitron Hearing Ltd.

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

European Representative

Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany



Centro Audioprotésico

www.unitron.com



12-018 029-5884-05

