



Manuale d'uso



1017 SW Berg Parkway
Canby, OR 97013 - USA
Tel.: +001 503.266.2231
Numero verde: 800.824.4387 (USA)
www.srsmith.com



CONFERMA DELLA SCHEDA DI PROFILO DEL BORDO VASCA

I sollevatori per l'accesso acquatico prevedono un'applicazione specifica. Il completamentoLa compilazione della Scheda di Profilo del Bordo Vasca garantisce che il sollevatore acquistato per l'applicazione funzioni conformemente alle linee guida ADA (Normativa statunitense per i disabili). S.R. Il servizio fornito da Smith ai clienti comprende l'esame gratuito di tutte le Schede di Profilo del Bordo Vasca presentate. Prima di installare il sollevatore per piscina, l'installatore deve esaminare e confermare le informazioni fornite nella Scheda di Profilo del Bordo Vasca. Se la descrizione dell'applicazione non corrisponde al sito d'installazione, è necessario compilare una nuova Scheda di Profilo del Bordo Vasca e presentarla a S.R. Smith.

NOTA: SE LA SCHEDA DI PROFILO DEL BORDO VASCA NON VENISSE COMPILATA CORRETTAMENTE, IL SOLLEVATORE POTREBBE NON OTTEMPERARE ALLE LINEE GUIDA ADA (NORMATIVA STATUNITENSE PER I DISABILI)

Per compilare la Scheda di Profilo del Bordo Vasca online, consultare www.srsmith.com/liftprofile, contattare il Servizio Clienti al numero (800) 824-4387 (valido per gli Stati Uniti) o scrivere all'indirizzo sales@srsmith.com.

deck profile sheet*
pool lifts

*Deck profile form must accompany your pool lift order.

1. Preferred Lift: PAL Splash! aXe multiLift

2. Gutter Configuration:

Fully recessed gutter Fully recessed gutter w/parapet Partially recessed gutter Above ground spa

Rollout gutter Flush gutter and deck w/ or w/o bulinose Standard backyard pool Other: (please draw)

3. Deck Material (check one): Concrete Pavers

4. Distance from pool deck to water line (A):

If applicable:

5. Height of curb (B):

6. Width of curb (C):

7. Width of gutter (D):

8. Decorative stone setback:

Note: As pools may vary, please insert accurate measurements for your pool in the space provided. Manufacturer will configure the lift to match your unique poolside specifications. Order cannot be processed without the required fields entered above.

Fax this completed form to 503.266.4334 or email to sales@srsmith.com

Name of Distributor Lift Will Be Purchased From City State

Your Name Email Phone

Project Name PO Number

toll free 800.824.4387
fax 503.266.4334
web www.poollifts.com

SR Smith.

SF-720-003 10/2011

INDICE

aXs 1000/EU

DECK PROFILE SHEET CONFIRMATION.....	2
INTRODUCTION.....	3
WARNINGS AND SAFETY SUMMARY.....	4
PRODUCT OVERVIEW.....	6
aXs - PRODUCT COMPONENTS.....	6
UNPACKING & ASSEMBLY INSTRUCTIONS.....	11
USING THE aXs LIFT.....	12
TRANSFERRING.....	13
IN CASE OF BATTERY FAILURE.....	15
STANDARD ACCESSORIES/OPTIONAL ACCESSORIES.....	15
MAINTENANCE and CLEANSING.....	16
TROUBLE SHOOTING.....	17
LONG-TERM STORAGE.....	18
WARRANTY INFORMATION.....	18
SPECIFICATIONS.....	20
1. Dimensions/Capacity.....	20
2. Actuator.....	20
3. Motor.....	20
4. Battery.....	20
5. Range of Motion Information.....	20
7. Materials and Finish Information.....	20
Appendix - A.....	Error! Bookmark not defined.
Appendix - B.....	Error! Bookmark not defined.

LEGGERE PER INTERO LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE

INTRODUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni relative al funzionamento sicuro, alla cura e alla manutenzione di aXs 1000/EU.

Utente a cui il sollevatore è destinato:

Tutti i sollevatori S.R. Tutti i sollevatori S.R. Smith sono stati progettati per assistere chiunque abbia problemi nell'entrare o nell'uscire da una piscina o da una vasca idromassaggio; l'unica limitazione consiste nel peso dell'utente, che non deve superare la portata massima consentita per il prodotto (da 300 libbre [136 kg] a 400 libbre [181 kg] in base al modello). Sarà cura compito del Proprietario del sollevatore garantire l'attuazione delle corrette procedure di sicurezza e l'esecuzione di una valutazione dei rischi. In presenza di un Utente con disabilità mentale o con gravi disabilità fisiche, tali elementi devono essere presi in considerazione per determinare il numero di persone richieste per completare il trasferimento sul sedile e il numero di persone richieste in acqua per accogliere l'Utente. Al sedile deve essere fissato l'apposito sistema di ritenuta (cintura di sicurezza o giubbotto di ritenuta), da usare e allacciare completamente durante ogni trasferimento.

Il nostro obiettivo è di fornire ai clienti la tecnologia più innovativa e avanzata offrendo un'altissima qualità a prezzi accessibili. Tutti i nostri sollevatori rispettano le specifiche contenute nelle linee guida ADAAG 2004 della Access Board (solo per gli Stati Uniti), nella Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, nella Direttiva 2011/65/EU (RoHS2) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose, nella EN 50581:2012 e nella normativa ISO10535:2006, compresa la ripetizione del ciclo di sollevamento del sollevatore per un totale di 11.000 cicli. Il sistema di sollevamento e i componenti elettronici alimentati a corrente alternata sono conformi alla normativa EN60601-1-2, 2007/03.

Brevetto statunitense n. 5.790.995

aXs, il logo aXs e LiftOperator sono marchi registrati di S.R. Smith, LLC.

Modello/ Prodotto N. _____ Nome del prodotto _____

S.R. Smith, LLC PO Box 400 1017 SW Berg Parkway Canby, Oregon 97013 USA Tel.: +001 503-266-2231 Fax: +001 503-266-4334 www.srsmith.com Assemblato negli Stati Uniti
<input type="text" value="SN S"/>
EC REP
ONET B.V. Hommertweg 286 6436 AM Amstenrade Paesi Bassi qnet@ce-mark.com qnet@ce-authorizedrepresentative.eu
  
24 V CC



Riepilogo delle avvertenze e delle istruzioni per la sicurezza

PERICOLO – LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESENTI AVVERTENZE E ISTRUZIONI E DEL MANUALE D'USO PUÒ PROVOCARE GRAVI LESIONI O LA MORTE

ATTENZIONE

- **DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DA PARTE DI ADULTI** – È consentito l'utilizzo da parte di bambini solo sotto la supervisione di un adulto. Il sollevatore aXs deve essere usato esclusivamente da persone in condizioni di salute tali da permettere lo svolgimento di attività in acqua. Gli Utenti dovrebbero consultare il proprio medico per valutare la propria idoneità allo svolgimento di attività in acqua.
- È necessario utilizzare sempre la cintura di sicurezza durante il trasferimento dell'utente.
- **VIETATO SALTARE/TUFFARSI/ARRAMPICARSI** – Non saltare o tuffarsi dal sollevatore e non arrampicarsi sullo stesso.
- Per aXs il limite di utilizzo è pari a UNA PERSONA con peso inferiore al limite di peso massimo di 300 libbre (136 kg). Utilizzare esclusivamente per il trasferimento dell'utente e non come paranco o gru.
- **RISCHIO DI PIZZICAMENTO O SCHIACCIAMENTO** – Non avvicinare mai le dita e le mani ai bracci del sollevatore durante l'utilizzo.

ATTENZIONE

- **LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA** – Verificare il livello della batteria prima di ogni utilizzo. Prima di ogni utilizzo l'indicatore della batteria deve essere di colore VERDE, a indicare una carica superiore al 50%. Se l'indicatore della batteria è di colore GIALLO, la carica è inferiore al 50% e la batteria deve essere caricata completamente prima dell'utilizzo. Se l'indicatore della batteria è di colore ROSSO, la carica è inferiore al 25%: il sollevatore non deve essere utilizzato e la batteria deve essere caricata completamente prima dell'utilizzo.
- **DANNI EVENTUALI** – Non utilizzare il sedile o l'intelaiatura del sedile per spostare o posizionare il sollevatore aXs.
- **DANNI EVENTUALI** – Evitare un accumulo eccessivo di condensa nell'alloggiamento della batteria. Un accumulo eccessivo di condensa può avere delle ripercussioni sulla batteria e sulle prestazioni del dispositivo di sollevamento e potrebbe determinare guasti alla batteria e/o il mancato funzionamento del sollevatore.

ATTENZIONE

IL LIMITE DI UTILIZZO È PARI A
UNA PERSONA CON PESO
INFERIORE AL LIMITE DI PESO
MASSIMO DI 136 KG!

SINTESI DELLE LINEE GUIDA ADA* (Valide solo per gli Stati Uniti)

1009.2.1 Posizione del sollevatore per piscina

Il sollevatore per piscina dovrà essere posizionato laddove il livello dell'acqua non superi i 48 pollici (122 cm). Se il livello dell'acqua supera i 48 pollici (132 cm) in tutta la piscina, posizionare il sollevatore dove risulti appropriato.

1009.2.2 Posizione del sedile

Nella posizione sollevata, l'asse centrale del sedile dovrà trovarsi al di sopra del bordo vasca ad almeno 16 pollici (40 cm) dal bordo della piscina.

1009.2.3 Spazio sgombro a bordo vasca

Sul lato del sedile opposto all'acqua dovrà essere presente uno spazio sgombro a bordo vasca parallelo al sedile. Tale spazio avrà una larghezza minima di 36 pollici (91 cm) e si estenderà in avanti per almeno 48 pollici (122 cm) a partire da una linea situata 12 pollici (30 cm) dietro al bordo posteriore del sedile.

1009.2.4 Altezza del sedile

Durante la posizione di carico il sollevatore si fermerà a 16-19 pollici (40-48 cm) misurati dal bordo vasca alla parte superiore della superficie del sedile.

1009.2.8 Profondità d'immersione

Il sollevatore immergerà il sedile per almeno 18 pollici (46 cm) al di sotto del livello stazionario dell'acqua.


*Sarà cura del proprietario della piscina rispettare la normativa ADA. Consultare www.ada.gov per le linee guida complete.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

Il sollevatore acquatico aXs è un sistema di sollevamento semifisso progettato per garantire alle persone con disabilità o con problemi di mobilità l'accesso universale a piscine o vasche idromassaggio nell'ambito di strutture abitative, ricettive e multiunità. Il sollevatore aXs è alimentato da una batteria ricaricabile da 24 V. Il movimento di sollevamento è assicurato da un attuatore elettronico a vite, mentre il movimento di rotazione è garantito da un motoriduttore elettronico. S.R. Smith ha progettato il sistema di sollevamento nel modo più sicuro possibile, seguendo tutte le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Tutte le etichette dei prodotti sono necessarie al fine di un funzionamento sicuro, affidabile e corretto del sollevatore evitando infortuni. Tale progettazione garantisce il corretto funzionamento in tutta sicurezza e riduce al minimo i problemi tecnici.

Il sollevatore aXs comprende un pilone alto 36 pollici (92 cm) dal bordo piscina, garantisce una rotazione a 360° ed è progettato per l'utilizzo con configurazioni con bordi vasca semplici con una distanza massima di 6 pollici (15 cm) dal bordo all'acqua. Anche se deve essere usato a partire da un ancoraggio fisso a bordo piscina, aXs può essere trasportato grazie al carrellino Caddy aXs. Il carrellino Caddy non solo è concepito per facilitar il sollevamento e la rimozione di aXs dall'ancoraggio a bordo piscina, ma funge altresì da supporto per riporre il sollevatore quando quest'ultimo non è più necessario. La portata massima per il modello aXs è di 300 libbre (136 kg). Il sollevatore aXs deve essere usato esclusivamente da persone in condizioni di salute tali da permettere lo svolgimento di attività in acqua. Gli Utenti dovrebbero consultare il proprio medico per valutare la propria idoneità allo svolgimento di attività in acqua.

COMPONENTI DEL PRODOTTO aXs

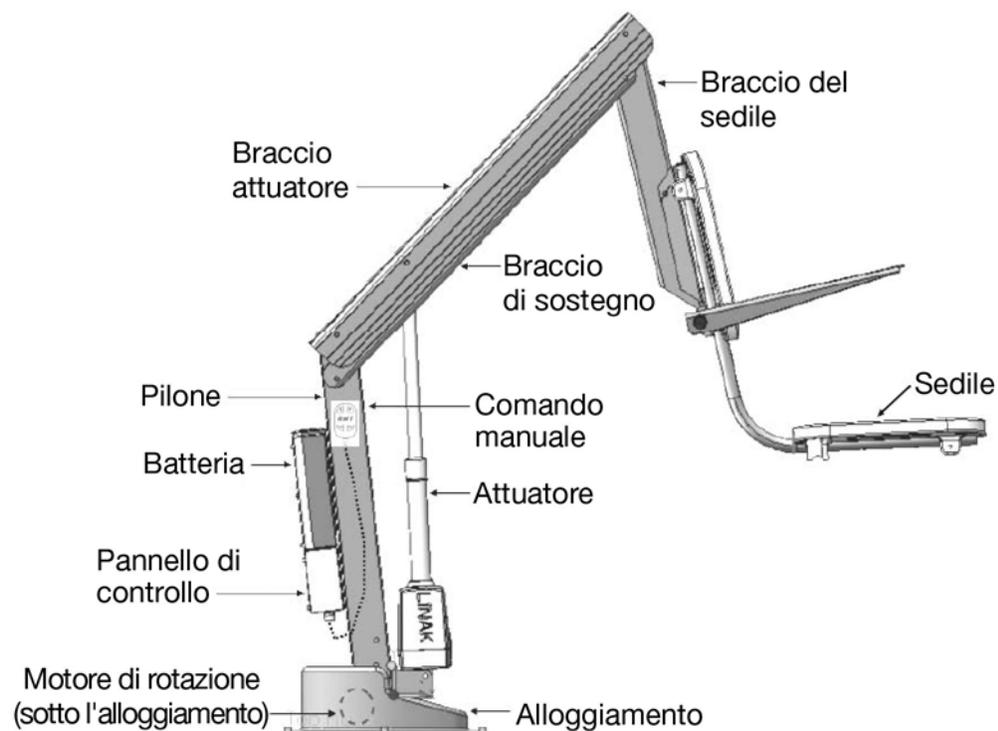

aXs 1000

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

Il sollevatore è composto da diversi componenti:

si monta sul bordo vasca e contiene gli elementi di rotazione del sollevatore.

scorre all'interno del manicotto d'ancoraggio installato a bordo piscina.

il principale componente verticale del sollevatore.

braccio di sollevamento primario che collega il pilone al braccio del sedile, è sollevato dall'attuatore a cui è fissato.

Braccio di sostegno: conferisce stabilità al braccio del sedile.

fornisce un punto di fissaggio per il gruppo sedile e si incastra nel braccio attuatore per evitare punti con pericolo di schiacciamento.

il coperchio in plastica ABS con cappuccio acrilico protegge i componenti dell'unità di base dagli agenti atmosferici. Utilizzare esclusivamente materiali puliti, morbidi e non abrasivi per pulire l'alloggiamento.

provvede ai movimenti di discesa e di salita del sollevatore.

comprende una piastra di montaggio, un motore da 24 V e un piccolo ingranaggio.

Pannello di controllo LiftOperator può prevedere una funzione opzionale di chiave d'attivazione, che garantisce maggiore sicurezza consentendo il funzionamento del comando soltanto con l'utilizzo della stessa. L'unità comanda tutte le operazioni del sollevatore esattamente come il comando manuale dell'utente. Nella parte inferiore del pannello di controllo sono collegati tre cavi che consentono il funzionamento del sollevatore: il connettore più grande per il controllo manuale, il connettore n. 1 per il cavo motore (striatura rossa). 2 per il cavo motore (striatura rossa).

Comando Touchpad


I tasti direzionali del comando touchpad possono essere utilizzati nel caso in cui il comando manuale non sia a portata di mano o sia guasto. È sufficiente tenere premuto il tasto direzionale per eseguire l'azione desiderata con un movimento alla volta (salita, discesa, spostamento a destra, spostamento a sinistra). Rilasciando il pulsante direzionale, il movimento si arresta.

Indicatori LED del livello della batteria (Battery Level)

Gli indicatori LED del livello della batteria (Battery Level) mostrano i livelli di carica della batteria. All'attivazione del comando touchpad o del comando manuale, i LED s'illuminano e restano accesi per 10 secondi. Con una carica superiore al 50% i LED sono di colore verde, con una carica inferiore al 50% sono di colore ambra, mentre con una carica inferiore al 25% sono di color rosso e segnalano che è necessario ricaricare la batteria. Non utilizzare il sollevatore se il LED è di colore rosso, ossia con una carica inferiore al 25%; rimuovere la batteria e ricaricarla interamente prima dell'utilizzo.

LED di manutenzione richiesta (Service Required)

Il LED di manutenzione richiesta (Service Required) si accende quando il gruppo batterie è stato rimosso/sostituito 120 volte, ossia circa una volta ogni 4 mesi. Questo LED segnala che è necessario provvedere alla manutenzione del sollevatore. Consultare la sezione relativa alla

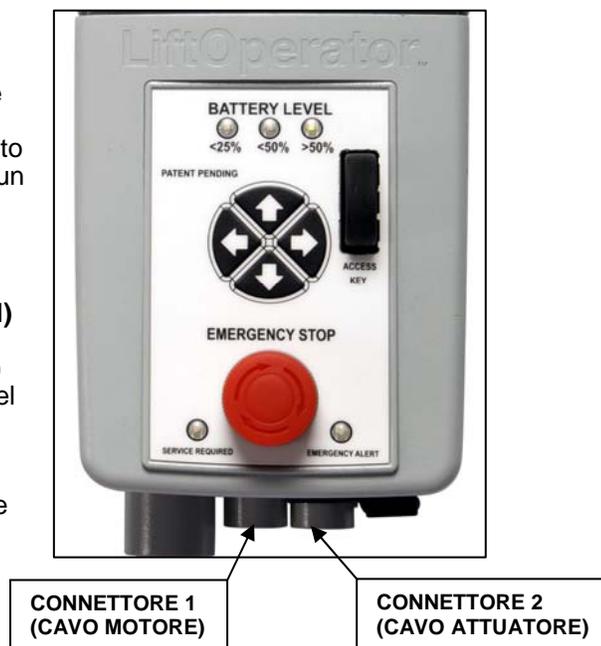

manutenzione del Manuale d'uso del sollevatore per i requisiti. Il LED di manutenzione richiesta può essere ripristinato inserendo un dispositivo di archiviazione di massa USB con formattazione FAT standard (non incluso) nella porta USB situata nella parte inferiore del comando. **Quando la spia di manutenzione richiesta è illuminata accesa, il sollevatore non deve essere utilizzato fino al completamento dell'intervento di manutenzione richiesto.**

Pulsante d'arresto di emergenza (Emergency Stop)

In caso di emergenza o se è necessario arrestare subito il movimento del sollevatore, premendo il pulsante di arresto di emergenza (pulsante rosso sul comando Emergency Stop) si arresteranno tutti i movimenti del sollevatore. Contemporaneamente, un allarme sonoro suonerà per 10 secondi e si fermerà per 5 secondi; tale sequenza si ripeterà finché il pulsante non verrà ripristinato ruotandolo nella direzione indicata dalle frecce sul pulsante (in senso orario). Inoltre, il LED rosso dell'allarme di emergenza (Emergency Alert) lampeggerà finché il pulsante non verrà premuto e resterà rosso fino al ripristino del pulsante.

L'allarme di emergenza (sonoro e tramite LED) può essere attivato premendo contemporaneamente due pulsanti qualsiasi sul comando manuale (fornito con il sollevatore). In questo modo si arresteranno tutti i movimenti del sollevatore, si attiverà un allarme sonoro e il LED rosso inizierà a lampeggiare. Una volta rilasciati i due pulsanti, il sollevatore ritornerà alla normale modalità di funzionamento e l'allarme sonoro non suonerà più.

Chiave di attivazione

La chiave di attivazione opzionale garantisce maggiore sicurezza permettendo il funzionamento del comando soltanto con l'utilizzo della stessa per una maggiore sicurezza. Per abilitare il funzionamento, inserire la chiave di accesso nella fessura situata accanto alle frecce direzionali di comando del touchpad. Per disabilitare il funzionamento, rimuovere la chiave. Quando la chiave viene inserita o rimossa, il LED di (Battery Level) s'illuminerà per 10 secondi.



Chiave di attivazione (opzionale)

Porta USB

Il comando LiftOperator presenta una porta USB per scaricare il log relativo al funzionamento del sollevatore. LiftOperator presenta una porta USB per scaricare il log relativo al funzionamento del sollevatore. È sufficiente inserire una comune chiavetta USB con formattazione FAT standard (facilmente reperibile nei punti vendita) nella fessura situata nella parte inferiore del comando sul lato all'estrema destra. Premere un tasto direzionale qualsiasi del touchpad; tutti i LED del livello della batteria (Battery Level) lampeggeranno. Durante il download lampeggerà il LED verde che indica una carica della batteria superiore al 50%. In caso di problemi dell'unità durante il download del log relativo al funzionamento, il LED rosso che indica una carica inferiore al 25% lampeggerà. In tal caso, rimuovere la chiavetta USB dalla porta e reinserirla; se il LED rosso che indica una carica inferiore al 25% lampeggia ancora, assicurarsi che la chiavetta USB utilizzata sia formattata secondo lo standard FAT. Le informazioni presenti sulla chiavetta USB possono essere scaricate su un PC per essere analizzate e/o copiate su un foglio di calcolo. Il log relativo al funzionamento ha una capacità di circa 7600 eventi. Una volta pieno, il file rimuoverà l'evento più vecchio e lo sostituirà con quello più nuovorecente.


Dopo i dati di riepilogo, gli eventi vengono visualizzati dal più vecchio al più recente. La prima colonna rappresenta il tempo in secondi dall'ultimo evento, la seconda colonna contiene la descrizione dell'evento, mentre la terza colonna indica la durata in secondi dell'attività.

Di seguito viene proposto un esempio di un breve file di log:

<u>Activity (Attività)</u>	<u>Description (Descrizione)</u>
dev_id_upper,0	Programing data (Dati di programmazione)
dev_id_lower,1	Programing data (Dati di programmazione)
fw_rev,90	Firmware rev. (Rev. firmware)
batt_volt_float,24929	Non-loaded battery voltage in millivolts (Tensione batteria non caricata in millivolt)

batt_volt_load, 21487 millivolt)	Loaded battery voltage in millivolts (Tensione batteria caricata in millivolt)
batt_capacity, 99 capacità della batteria)	Estimated battery capacity in % (Stima percentuale della capacità della batteria)
charge_starts, 8 carica)	Number of times charging was attempted (Numero di tentativi di carica)
charge_completes, 1 tentativi di carica riusciti)	Number of times charging was finished successfully (Numero di tentativi di carica riusciti)
0, power_on, 1	Connecting Battery Pack (Collegamento al gruppo batterie)
0, key_enable,	Inserting Activation Key (Inserimento della chiave di attivazione)
2, alert_pressed,	Emergency Button pressed (Pulsante di emergenza premuto)
3, alert_released,	Emergency Button released (Pulsante di emergenza rilasciato)
8, lift_up, 2	Lift movement – up (Movimento del sollevatore – salita)
5, lift_down, 2	Lift movement – down (Movimento del sollevatore – discesa)
11, lift_up, 2	Lift movement – up (Movimento del sollevatore – salita)
4, turn_left, 2	Lift movement - turn left (Movimento del sollevatore – sinistra)
3, turn_right, 1	Lift movement - turn right (Movimento del sollevatore – destra)
308, key_disable,	Removing Activation Key (Rimozione della chiave di attivazione)
3, log_write,	USB File Download (DownloadDownload file USB)

Gruppo batterie: Il gruppo batterie è rimovibile e si trova nella parte superiore del pannello di controllo.

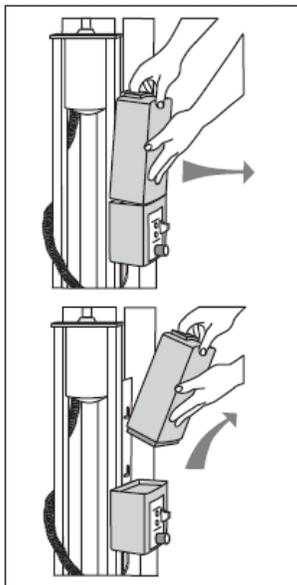

Per rimuoverlo, tirare il gruppo batterie in direzione opposta rispetto alla piastra di montaggio in modo tale che il fermo del gruppo batterie fuoriesca dalle linguette laterali della piastra di montaggio; sollevare poi il gruppo batterie ed estrarlo dal pannello di controllo.

Per rimetterlo in posizione, allineare il gruppo batterie con la piastra di montaggio in modo tale che il fermo combaci con la linguetta centrale e che la parte inferiore del gruppo batterie corrisponda con la zona a incasso situata nella parte superiore del pannello di controllo. Abbassare in posizione il gruppo batterie in modo tale che il fermo sia totalmente fissato nella piastra di montaggio e che il gruppo batterie si trovi nella giusta sede al di sopra del pannello di controllo.

La batteria deve essere completamente rimossa e posizionata lontano dal bordo vasca quando è necessario ricaricarla.



Il gruppo batterie dovrebbe essere ricaricato ogni giorno. Evitare di scaricare completamente la batteria per non comprometterne la durata.



Il gruppo batterie presenta un indicatore LED vicino alla porta del connettore. Tale LED diventerà rosso non appena l'unità verrà collegata al trasformatore; se il LED resta di colore rosso, il gruppo batterie è in fase di carica, mentre quando la batteria è completamente carica diventerà verde. Se la batteria è completamente carica e l'unità è collegata al trasformatore, il LED resterà rosso per circa 10 secondi per poi diventare verde. Se il LED rosso lampeggia mentre l'unità è collegata al trasformatore, significa che la batteria presenta un guasto e che il gruppo batterie deve essere sostituito. Prima della spedizione tutte le batterie vengono controllate e sottoposte a verifica tutte le batterie. Consultare le condizioni di garanzia relative alla sostituzione della batteria in caso di problemi post-vendita. Normalmente le batterie hanno una durata compresa tra 2 e 3 anni in base all'utilizzo e alla cura. Una batteria interamente carica permette circa 30 cicli di sollevamento, a seconda del peso degli Utenti. Prima dell'uso è necessario controllare il livello di carica della batteria osservando l'indicatore LED situato al di sopra della spina del caricatore per verificare la presenza di un livello di carica sufficiente. Il caricatore deve essere collegato alla batteria per visualizzare il LED.

Non è necessario scaricare totalmente la batteria prima di ricaricarla. La batteria dovrebbe essere caricata ogni giorno e non può essere sovraccaricata. Servono da due a quattro ore per una carica completa, in base all'utilizzo della batteria. Evitare di scaricare completamente la batteria per non comprometterne la durata.

Prestare attenzione a non far cadere la batteria per evitarne il danneggiamento. Se l'involucro della batteria presenta incrinature, non usare la batteria e provvedere alla sua sostituzione. In caso di temperature estreme inferiori a 41°F (5°C) o superiori a 104°F (40°C), rimuovere la batteria e riporla in un ambiente controllato per evitare di comprometterne la durata.

Smaltimento della batteria Le batterie situate all'interno del gruppo batterie sono riciclabili e devono essere smaltite conformemente alle normative locali, statali/provinciali o federali/nazionali in vigore.

Gruppo della piastra di fermo Il gruppo batterie può essere fissato alla piastra di montaggio grazie al gruppo della piastra di fermo in dotazione. Per installarlo, aprire la piastra di fermo in modo tale che le linguette inferiori si avvicinino per permettere l'inserimento della piastra di fermo nelle fessure situate sulla piastra di montaggio fissata al sollevatore. Chiudere il gruppo della piastra di fermo cosicché le linguette s'incastano nelle fessure. Inserire un lucchetto (non incluso) nei fori del gruppo della piastra di fermo per bloccarla.

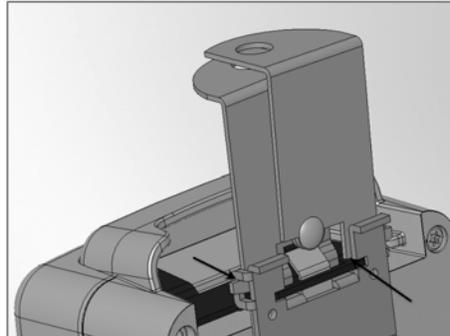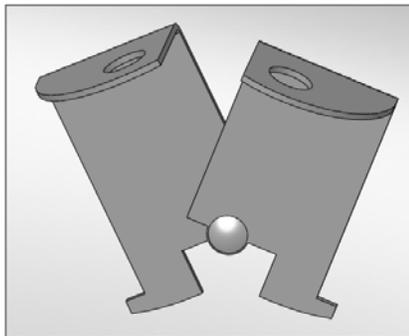

Comando manuale: l'unità a quattro pulsanti guida tutti i movimenti di sollevamento. Le frecce indicano la direzione del movimento. Il comando è interamente resistente all'acqua ed è conforme agli standard IP67.

il sedile è composto da una parte in plastica rotazionale con un'intelaiatura di acciaio inox. Sono disponibili due tipi di dispositivi di sicurezza: la cintura di sicurezza di serie e il giubbotto di ritenuta opzionale. Il sedile dispone di punti di fissaggio per i due dispositivi, entrambi di facile fissaggio. Assicurarsi di scegliere il dispositivo di sicurezza adatto per ogni Utente.

- Si raccomanda l'utilizzo della cintura di sicurezza durante l'uso del sollevatore per le persone con capacità motoria ridotta o assente dalla vita in giù.
- Si raccomanda l'utilizzo del giubbotto di ritenuta durante l'uso del sollevatore per le persone con capacità motoria ridotta o assente dalle spalle in giù.



La cintura di sicurezza o il giubbotto di ritenuta opzionale devono essere utilizzati ogni volta che si usa il sollevatore. Il poggiatesta è rimovibile e si sposta verso l'alto per evitare danni se il sedile viene abbassato eccessivamente. Si raccomanda di risciacquare il sedile con acqua semplice dopo ogni utilizzo e di pulirlo ogni giorno con una soluzione disinfettante diluendo della candeggina domestica in acqua semplice in rapporto 1:100, risciacquando poi con acqua semplice. In caso di incidenti di contaminazione, ad esempio con gli escrementi di un paziente/Utente, pulire immediatamente il sedile e la cintura di sicurezza o il giubbotto di ritenuta con la stessa soluzione disinfettante. Non usare il sedile, la cintura di sicurezza o il giubbotto di ritenuta se danneggiati o usurati.

I braccioli (opzionali solo per gli Stati Uniti, di serie sui modelli esportati) sono concepiti come sostegno per il trasferimento sul sedile. Durante il trasferimento possono essere ruotati in alto al di fuori dalla guida. Se il sollevatore è sprovvisto di questi elementi opzionali (solo per gli Stati Uniti), i braccioli possono essere acquistati a parte e facilmente installati in un secondo tempo.

Il gruppo sedile del sollevatore è progettato per l'uso esclusivo con i sollevatori per l'accesso acquatico S.R. Smith.

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO E IL MONTAGGIO

CONSULTARE LO SCHEMA (pagina 5) PER IDENTIFICARE LE PARTI.

LEGGERE PER INTERO LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE

Prima di aprire il pallet di trasporto, controllare accuratamente lo stato esterno dei materiali del trasporto per accertare eventuali danni visibili. È importante riportare ogni eventuale danno sulla Polizza di Carico prima di firmare per la consegna. Contattare immediatamente S.R. Smith o il proprio Rivenditore Autorizzato per riferire di eventuali parti danneggiate o mancanti.


Assicurarsi che l'ancoraggio di montaggio sia stato installato nel punto corretto del bordo piscina per consentire il funzionamento del sollevatore. Si raccomanda che l'installatore dell'ancoraggio sia esperto nell'installazione di strutture a bordo piscina.

Il sollevatore aXs viene spedito su un pallet rivestito ed è per lo più già montato. Non sono necessari strumenti per l'installazione e la configurazione. Posizionare il pallet vicino all'ancoraggio a bordo piscina per facilitare l'installazione e la configurazione.


Procedura per il disimballaggio e il montaggio di aXs:

1. Rimuovere attentamente la plastica che ricopre il pallet.
2. Rimuovere attentamente dal pallet eventuali rinforzi di legno.
3. Rimuovere il gruppo sedile e metterlo da parte per il fissaggio.
4. Rimuovere il sollevatore dal pallet e posizionarlo nell'ancoraggio a bordo vasca.
5. Rimuovere e disimballare il comando manuale dalla scatola degli accessori. Inserire la spina nel connettore grande sul pannello di controllo e appendere il comando manuale alla maniglia. Assicurarsi che la spina sia fissata saldamente.
6. Controllare che le spine pre-installate siano fissate saldamente nelle prese indicate coi numeri 6 e 2.
7. Fissare la batteria al pannello di controllo. Per rimuovere la batteria, tirarla leggermente nella direzione opposta rispetto alla piastra di montaggio e sollevare il gruppo batterie per rimuoverlo dal pannello di controllo.
8. Coprire il pannello di controllo e la batteria con il coperchio della batteria/console per proteggere dall'umidità.
9. Controllare il corretto funzionamento dei comandi di salita e discesa sia del touchpad, sia del comando manuale.
10. Controllare il corretto funzionamento dei comandi di spostamento laterale sia del touchpad, sia del comando manuale.
11. Controllare il pulsante d'arresto di emergenza (Emergency Stop) che per verificare il funzionamento/l'attivazione dell'allarme sonoro interno.
12. In caso di comandi dotati della chiave d'attivazione opzionale, la chiave questa deve essere inserita nella fessura per consentire il funzionamento dell'unità. Quando la chiave viene rimossa, il sollevatore non funzionerà (N.B.: l'allarme e il pulsante di arresto di emergenza Emergency Stop funzioneranno con la chiave non inserita nella fessura).
13. Fissare la batteria al pannello di controllo.

14. Ruotare il sedile fino a posizionare il braccio del sedile al di sopra del bordo vasca.
15. Fissare il gruppo sedile nell'apposito foro mediante il bullone e il dado ad alette. Quando il sollevatore viene riposto, il sedile può essere fissato rivolto all'interno per occupare meno spazio.

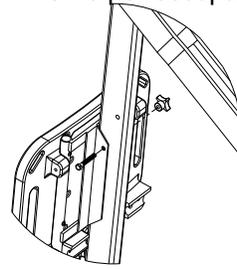


16. Fissare il poggiatesta al sedile mediante i bulloni e i dadi ad alette.

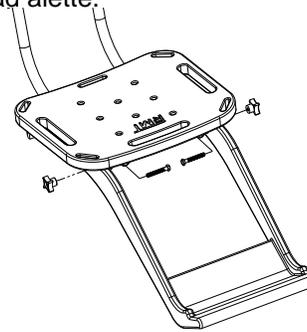

USO DEL SOLLEVATORE aXs

Ad ogni utilizzo del sollevatore si raccomanda di rispettare tutte le istruzioni per l'uso contenute nel manuale d'uso. Ad ogni utilizzo del sollevatore si raccomanda di rispettare tutte le etichette e le istruzioni operative, di avvertenza e di precauzione presenti sul sollevatore. Sarà cura compito del Proprietario del sollevatore garantire l'attuazione delle corrette procedure di sicurezza e l'esecuzione di una valutazione dei rischi. In presenza di un Utente con disabilità mentale o con gravi disabilità fisiche, tali elementi devono essere presi in considerazione per determinare il numero di persone richieste per completare il trasferimento sul sedile e il numero di persone richieste in acqua per accogliere l'Utente. In caso il sollevatore aXs venga usato da una persona disabile che vive da sola, occorre installare un dispositivo di comunicazione nella zona di utilizzo per richiedere assistenza in caso di emergenza. Il sollevatore aXs deve essere usato esclusivamente da persone in condizioni di salute tali da permettere lo svolgimento di attività in acqua. Gli Utenti dovrebbero consultare il proprio medico per valutare la propria idoneità allo svolgimento di attività in acqua. Non avvicinare dita e mani ai bracci del sollevatore durante l'utilizzo.

Schema di trasferimento di aXs

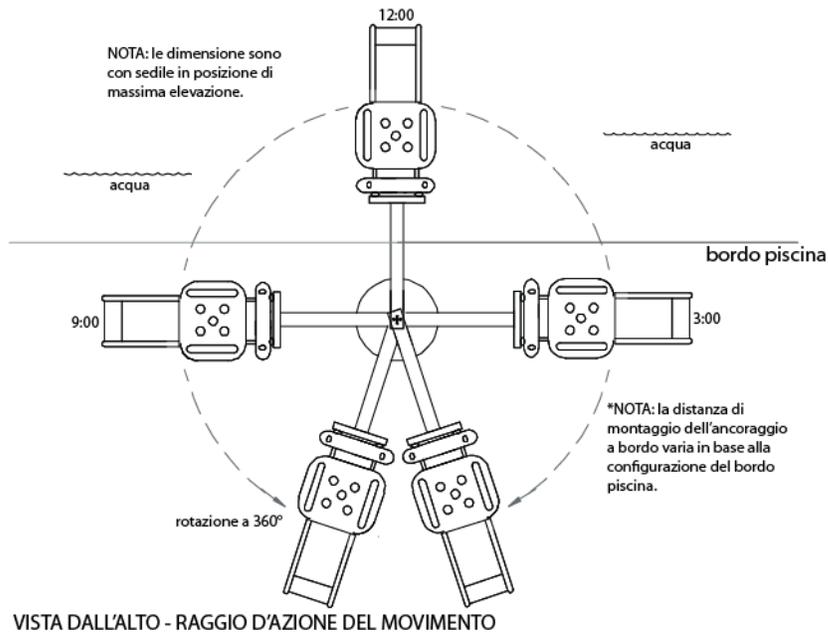

TRASFERIMENTO

Una volta posizionata l'unità, seguire la procedura riportata di seguito per il trasferimento sul sedile e in acqua. Il sollevatore aXs deve essere usato esclusivamente da persone in condizioni di salute tali da permettere lo svolgimento di attività in acqua. Gli Utenti dovrebbero consultare il proprio medico per valutare la propria idoneità allo svolgimento di attività in acqua.

- Ruotare il sedile verso uno dei lati del sollevatore per raggiungere la posizione di trasferimento migliore.
- Alzare o abbassare il sedile fino all'altezza di trasferimento adatta.
- Procedere al trasferimento sul sedile, assicurandosi che il peso dell'Utente sia centrato sul sedile. Se necessario, è possibile ruotare verso l'alto i braccioli (opzionali per gli Stati Uniti, di serie sui modelli esportati). Se l'Utente usa una sedia a rotelle, tenerla nelle vicinanze per poterla recuperare facilmente.
- infilare nella fibbia l'estremità libera della cinghia della cintura, tirare fino in fondo, chiudere e premere verso il basso la chiusura sulla cintura.
- In alternativa, allacciare il giubbotto di ritenuta opzionale: posizionare le cinghie per le spalle sulle spalle, fissare le cinghie alle chiusure a clip alla base del giubbotto di ritenuta e stringere le cinghie per le spalle.
- Alzare il sedile affinché vi sia spazio sufficiente per le gambe durante la rotazione.
- Ruotare il sedile in posizione 12:00, al di sopra dell'acqua.
- Abbassare il sedile nella piscina. Il comando manuale resistente all'acqua può restare collegato al sedile se il sollevatore è azionato da una persona in acqua.
- Slacciare la cintura di sicurezza: afferrare la chiusura, sollevarla e tirare l'estremità libera.
- In alternativa, slacciare il giubbotto di ritenuta: aprire le chiusure a clip delle cinghie per le spalle e procedere al trasferimento in acqua.
- Al termine, ritornare al sedile, assicurandosi che il peso dell'Utente sia centrato sul sedile.
- Allacciare la cintura di sicurezza o il giubbotto di ritenuta opzionale.
- Alzare il sedile affinché vi sia spazio sufficiente per le gambe durante la rotazione.
- Ruotare il sedile fino alla posizione di trasferimento originaria.
- Alzare o abbassare il sedile fino all'altezza di trasferimento adatta.
- Slacciare la cintura di sicurezza o il giubbotto di ritenuta opzionale.
- Procedere al trasferimento dal sedile.

IN CASO DI GUASTO DEL COMANDO MANUALE

in caso di guasto di sollevamento sono presenti dei pulsanti di comando d'emergenza nel pannello di controllo. Premere, a seconda dei casi, il pulsante di discesa o di salita/spostamento a destra o a sinistra situato sul pannello anteriore del pannello di controllo.

In caso il sollevatore aXs venga usato da una persona disabile che vive da sola, occorre installare un dispositivo di comunicazione nella zona di utilizzo per richiedere assistenza in caso di emergenza.



INSTALLAZIONE A BORDO PISCINA DELL'ANCORAGGIO DI aXs

Assicurarsi che l'ancoraggio di montaggio sia stato installato nel punto corretto del bordo piscina per consentire il funzionamento del sollevatore. Si raccomanda che l'installatore dell'ancoraggio sia esperto nell'installazione di strutture a bordo piscina.

La distanza di montaggio ottimale per l'ancoraggio è compresa tra 12" (30,5 cm) e 18" (46 cm) dal bordo della piscina. Il sollevatore aXs è progettato per l'uso con configurazioni con bordi piscina semplici senza bordi vasca sporgenti. Contattare S.R. Smith in caso di dubbi sul posizionamento dell'ancoraggio a bordo vasca o per sapere se il sollevatore aXs è compatibile con la propria struttura.

Ancoraggio bordo vasca


(Installare l'ancoraggio in modo tale che la linguetta di arresto sia parallela al margine tra bordo vasca e acqua (BVA) oppure perpendicolare e il più lontano possibile dal margine BVA)

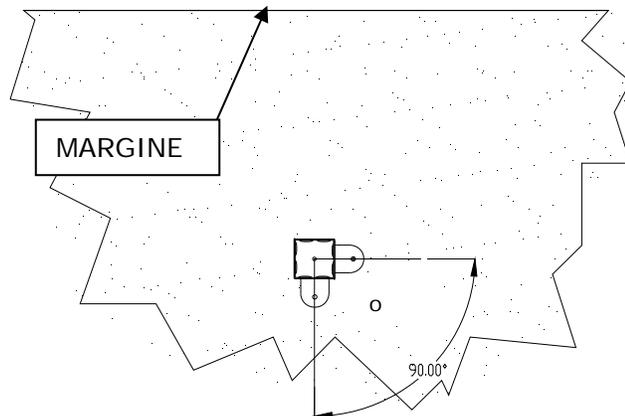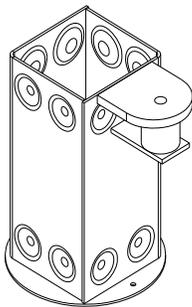

Installazione dell'ancoraggio nei bordi piscina di calcestruzzo


Seguire i seguenti consigli per verificare la corretta installazione dell'ancoraggio:

1. Identificare la posizione corretta per installare il sollevatore, assicurandosi che l'ubicazione dell'ancoraggio sia a non più di 18" (46 cm) dal bordo della piscina.
2. Usare una carotatrice per praticare un foro a bordo piscina. Assicurarsi che il foro abbia un diametro minimo di 5" (13 cm) e una profondità minima di 7" (18 cm). Il foro può essere più profondo del materiale a bordo piscina, ma la profondità è importante per garantire l'incapsulamento totale dell'ancoraggio nel calcestruzzo.
3. Rimuovere eventuali detriti dal foro.
4. Inserire l'ancoraggio nel foro. **Importante!! Usare una livella per verificare che l'ancoraggio sia a piombo e a filo con la superficie a bordo vasca.**
5. Collegare la presa di ancoraggio usando le viti di fissaggio in dotazione secondo le disposizioni locali vigenti.
6. Mischiare del calcestruzzo d'ancoraggio.
7. Riempire la cavità con il calcestruzzo d'ancoraggio. Fare attenzione a non far entrare il calcestruzzo nell'ancora.
8. Lasciare indurire il calcestruzzo secondo le istruzioni del produttore.

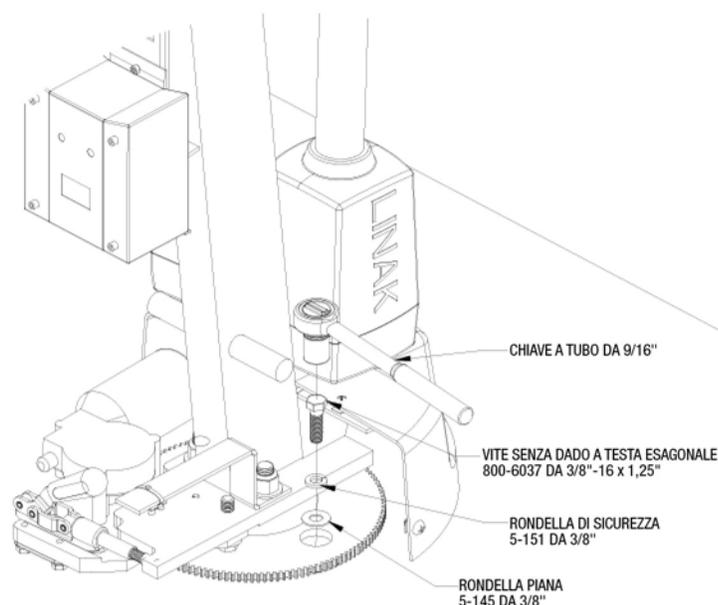

IN CASO DI GUASTO DELLA BATTERIA

se il sollevatore non gira elettronicamente, è possibile rimuovere l'alloggiamento e individuare la chiusura a ginocchiera (levetta rossa). Tirare la levetta verso l'alto e ruotarla fino in posizione orizzontale. Raggiunta la posizione orizzontale, tirare la levetta per ruotare il gruppo in senso orario. In questo modo si disinnestano gli ingranaggi permettendo la rotazione manuale del sollevatore. Eseguire la procedura al contrario per rinnestare il gruppo ingranaggi.

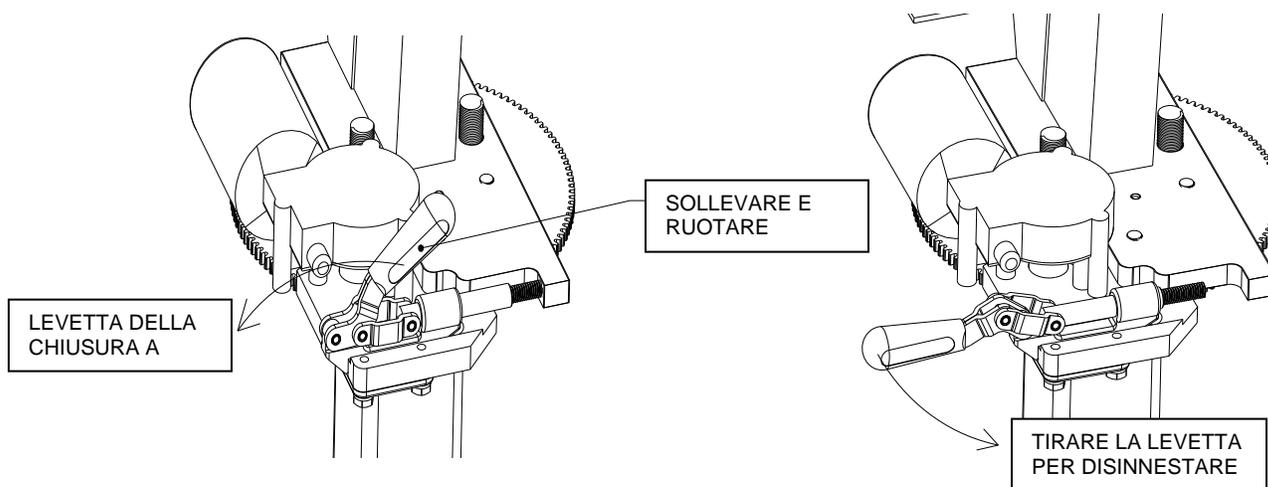

In caso il sollevatore aXs venga usato da una persona disabile che vive da sola, occorre installare un dispositivo di comunicazione nella zona di utilizzo per richiedere assistenza in caso di emergenza.

ACCESSORI DI SERIE/ ACCESSORI OPZIONALI

Tutti i modelli di sollevatore per piscina includono i seguenti accessori:

- Gruppo cintura di sicurezza: cintura di nylon resistente all'acqua per una maggiore sicurezza.
- Batteria/Caricatore: batteria ricaricabile da 24 volt.

È possibile acquistare gli accessori opzionali per il sollevatore aXs presso i Rivenditori Autorizzati. Sono disponibili i seguenti accessori:

Coperchio della batteria/console - P/N AX 9004: protegge la batteria e l'unità di comando dall'esposizione all'umidità

Giubbotto di ritenuta - P/N 900-2000: elemento di ritenuta in cinque punti per gli individui che necessitano di un grado di stabilità superiore a quello garantito dalla cintura di sicurezza.

Copertura totale - P/N 920-2000: composta da materiale in nylon resistente agli agenti atmosferici per proteggere l'unità dalle intemperie quando non è in uso.

Gruppo braccioli - P/N AX2320: braccioli in acciaio inox verniciato a polvere per aumentare la sensazione di sicurezza.

Accessorio per tavola spinale - P/N 500-1000: può essere usato per convertire il sollevatore all'uso con qualsiasi tavola spinale standard (tavola spinale non inclusa).

Cuscino per sedile - P/N 890-1000: cuscino resistente all'acqua per una maggiore comodità durante il trasferimento.

Ancoraggio e chiusura superiore – P/N 300-6200L - L'ancoraggio a bordo piscina LiftLock misura 2,875" (7,30 cm) di diametro esterno e 2,75" (6,98 cm) di diametro interno. Include una chiusura superiore e una vite di fissaggio.

MANUTENZIONE e PULIZIA

Una manutenzione minima prolunga la vita del sollevatore. Tenere tutti i componenti elettronici puliti e all'asciutto. Un accumulo eccessivo di condensa può avere delle ripercussioni sulla batteria e sulle prestazioni del dispositivo di sollevamento e potrebbe determinare guasti alla batteria e/o il mancato funzionamento del sollevatore. Se il sollevatore viene usato all'aperto, è disponibile e raccomandabile la copertura totale opzionale.

I proprietari dei sollevatori devono essere a conoscenza di eventuali normative locali, statali/provinciali o federali/nazionali in vigore relative all'ispezione e/o al collaudo dei sollevatori.

È necessario attuare il seguente programma per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, eseguendo gli interventi giornalieri prima di ogni utilizzo:

Intervento di manutenzione eseguito	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Verificare il livello della batteria prima di ogni utilizzo / Caricare la batteria ogni giorno	✓		
Pulire il pannello di controllo e il collegamento della batteria con un panno asciutto e pulito	✓		
Verificare se il sollevatore presenta danni o componenti allentati o mancanti	✓		
Verificare il normale funzionamento	✓		
Spruzzare il gruppo ingranaggi con un lubrificante/antiruggine ad alta resistenza come l'antiruggine ad alta resistenza LPS 3		✓	
Assicurarsi che tutti i collegamenti dei cavi siano fissati saldamente			✓
Controllare se il telaio del sollevatore, il pilone, il braccio di supporto e il gruppo sedile presentano ruggine			✓
Intervento di pulizia eseguito – dopo ogni uso			
Risciacquare il sedile e la cintura di sicurezza/il giubbotto di ritenuta con acqua semplice dopo ogni utilizzo. Pulire ogni giorno il sedile e la cintura di sicurezza/il giubbotto di ritenuta	✓		

con una soluzione disinfettante diluendo della candeggina domestica in acqua semplice in rapporto 1:100, sciacquare con acqua semplice e asciugare l'intero sollevatore. In caso di incidenti di contaminazione, ad esempio con gli escrementi di un paziente/Utente, pulire immediatamente il sedile e la cintura di sicurezza/il giubbotto di ritenuta con la soluzione disinfettante*			
Pulire tutti i collegamenti della batteria con una spugnetta abrasiva di nylon			✓
Detergere tutte le superfici metalliche con una cera detergente per mantenere le finiture del sollevatore			✓

*** Evitare il contatto diretto con pelle ed occhi durante l'utilizzo della soluzione disinfettante. In caso di incidenti di contaminazione, immergere la cintura di sicurezza o il giubbotto di ritenuta nella soluzione disinfettante per 10 minuti, successivamente sciacquare con cura con acqua semplice.**

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Verificare che la batteria sia completamente carica prima di procedere alla risoluzione dei problemi.

Il sollevatore non ruota

Il sollevatore si alza e si abbassa?

Sì.

1. Controllare il collegamento al pannello di controllo. Verificare che la spina sia inserita completamente.

2. Controllare se il collegamento dal comando manuale al pannello di controllo presenta spinotti danneggiati.

3. Controllare se il collegamento sulla morsettiere situata sul telaio presenta dei fili staccati.

4. Controllare se il cavo di collegamento è danneggiato.

5. Cercare di azionare il sollevatore utilizzando i pulsanti di comando sul pannello anteriore del comando. Se utilizzando i pulsanti del pannello di controllo il sollevatore ruota, probabilmente il problema riguarda il comando manuale.

6. Se invece utilizzando i pulsanti del pannello di controllo il sollevatore non ruota, invertire i cavi del motore come segue: Invertire i cavi del motore come segue: individuare la zona del pannello di controllo dove sono fissati i cavi, rimuovere il cavo attuatore dal connettore n. 2 e sostituirlo con il cavo motore da 24 V del connettore n. 1. Attivare i pulsanti di salita e discesa sul comando manuale. Se il sollevatore ruota, probabilmente il problema riguarda il comando manuale; se invece il sollevatore non ruota, probabilmente il problema riguarda il motore da 24 V.

7. 6. Contattare il proprio Rivenditore Autorizzato o S.R. Smith per le informazioni sulla sostituzione.

Il sollevatore si alza e si abbassa?

No.

1. Controllare il livello di carica della batteria.

2. Controllare il collegamento della batteria.

3. Usare un'altra batteria interamente carica. Se il sollevatore continua a non funzionare, sostituire il pannello di controllo.

Il sollevatore non si alza e non si abbassa

Il sollevatore ruota?

Sì.

1. Controllare il collegamento al pannello di controllo. Verificare che la spina sia inserita completamente.

2. Controllare se il collegamento dal comando manuale al pannello di controllo presenta spinotti danneggiati.

3. Controllare se il cavo di collegamento è danneggiato.

4. Attivare i pulsanti di salita e di discesa sul pannello anteriore del pannello di controllo. Se il sollevatore funziona correttamente, probabilmente il problema riguarda il comando manuale.
5. Se invece utilizzando i pulsanti del pannello di controllo il sollevatore non si alza e non si abbassa, invertire i cavi del motore come segue Invertire i cavi del motore come segue: Invertire il cavo attuatore del connettore n. 2 e il cavo motore da 24 V del connettore n. 1. Attivare i pulsanti di salita e discesa sul comando manuale. Se il sollevatore si alza e si abbassa, probabilmente il problema riguarda il comando manuale. Se invece il sollevatore non si alza e non si abbassa, probabilmente il problema riguarda l'attuatore.
6. Contattare il proprio Rivenditore Autorizzato o S.R. Smith per le informazioni sulla sostituzione.

Il sollevatore ruota?

No.

1. Controllare il livello di carica della batteria.
2. Controllare il collegamento della batteria.
3. Usare un'altra batteria interamente carica. Se il sollevatore continua a non funzionare, sostituire il pannello di comando.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE PER LUNGO TEMPO

Quando si ripone il sollevatore per un periodo di tempo prolungato:

- Lavare il sedile con una soluzione disinfettante, sciacquare con acqua semplice e asciugare l'intero sollevatore.
- Spruzzare il gruppo ingranaggi con un lubrificante e antiruggine ad alta resistenza come l'antiruggine ad alta resistenza LPS 3.
- Tenere la batteria nel caricatore in luogo asciutto a temperatura controllata.
- Coprire l'unità e riporla in un luogo asciutto lontano dalle sostanze chimiche da piscina.

Per domande o commenti contattateci ai numeri +001 800.824.4387 o +001 503-266-2231 oppure all'indirizzo info@srsmith.com. Per informazioni sui Rivenditori Autorizzati in tutto il mondo consultare il sito www.srsmith.com

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

S.R. Smith, LLC garantisce all'acquirente originale al dettaglio che i prodotti fabbricati da S.R. Smith, se montati e installati correttamente secondo le istruzioni di montaggio e di installazione di S.R. Smith e se usati e mantenuti correttamente, saranno esenti da vizi di materiale e fabbricazione per un periodo di tre (3) anni dalla data di produzione originaria, ad eccezione dei seguenti prodotti: WetDek™ (1 anno) e PoolSonix™ (2 anni). L'acquirente originale al dettaglio deve seguire la procedura specificata nel prosieguo per la richiesta di garanzia. S.R. Smith riparerà o sostituirà il prodotto a sua discrezione e lo restituirà al proprietario in porto franco. La decisione di provvedere alla riparazione o alla sostituzione è a discrezione esclusiva di S.R. Smith. Le batterie, i componenti e i sistemi di sollevamento acquatici sono coperti da una garanzia separata, specificata di seguito.

Tutti i Sistemi di Sollevamento Acquatici sono coperti da una garanzia di tre (3) anni per il telaio, ad esclusione della finitura verniciata a polvere che potrebbe riportare dei graffi con il normale uso. Tutti i componenti elettronici e del motore, fatta eccezione per le batterie, hanno una garanzia piena di due (2) anni. Nel periodo di garanzia, S.R. Smith riparerà o sostituirà eventuali elementi ritenuti difettosi. Le batterie del sollevatore sono coperte da garanzia proporzionale di un anno. Durante i primi 90 giorni dall'acquisto, le batterie sono coperte al 100%, mentre in caso di problemi alla batteria verificatisi tra il giorno 91 e il giorno 365 le batterie sono coperte al 50% del costo originale. Si raccomanda la normale manutenzione e cura dell'unità, incluso il caricamento della batteria quando non in uso. Non riporre l'unità, la batteria o i componenti in prossimità di sostanze chimiche.

La garanzia non è trasferibile ed è soggetta ai seguenti termini e condizioni ([vedere i Termini e le Condizioni complete di S.R. Smith](#)):

S.R. Smith non è responsabile né del costo di rimozione o sostituzione di ogni eventuale prodotto S.R. Smith difettoso, né di eventuali altre spese o danni che potrebbero verificarsi durante tale rimozione o sostituzione.

La presente garanzia esclude lo scolorimento dei materiali, la macchiatura microbiologica di piattaforme di tuffo o scivoli e la ruggine o la corrosione di parti o prodotti metallici. Consultare le istruzioni di manutenzione e cura di S.R. Smith per la normale manutenzione e pulizia dei prodotti S.R. Smith. Le istruzioni per la manutenzione sono disponibili all'indirizzo www.srsmith.com/care.php.

La presente garanzia riguarda esclusivamente i vizi di materiale e fabbricazione e non comprende danni o guasti dovuti ad altre cause, compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, eventi naturali, uso improprio o abuso, incidente o negligenza, incendio,

errore di montaggio o di installazione, scheggiatura o scrostatura dei rivestimenti vinilici o in polvere, danni da ghiaccio. La presente garanzia non copre i danni provocati dall'uso improprio di sostanze chimiche. Tutte le garanzie decadono nel momento in cui i prodotti vengono alterati o riparati da chiunque senza previo consenso scritto di S.R. Smith.

IMPORTANTE: LA PORTATA MASSIMA SU TRAMPOLINI CON BASE FISSA O FLESSIBILE, SUPPORTI, SCIVOLI, SCALETTE E GRADINI DI SCALETTE NON DOVREBBE SUPERARE LE 250 LIBBRE (113 KG). ECCEZIONI: LA PORTATA MASSIMA DA NON SUPERARE È DI 400 LIBBRE (181 KG) PER LA BASE E LA TAVOLA FRONTIER IV, DI 275 LIBBRE (124 KG) PER GLI SCIVOLI TURBOTWISTER E TYPHOON, DI 175 LIBBRE (79 KG) PER LO SCIVOLO CYCLONE E DI 325 LIBBRE (147 KG) PER GLI SCIVOLI VORTEX.

S.R. Smith non è responsabile di eventuali danni conseguenti, speciali o accidentali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, eventuali danni per la perdita dell'uso delle piscine, lesioni personali o danni alla proprietà, e ogni rivendicazione in tal senso è espressamente esclusa e declinata. Poiché alcuni Stati non permettono l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali, speciali o conseguenti, le suddette limitazioni potrebbero non applicarsi. La presente garanzia conferisce diritti legali specifici al Cliente, che può godere anche di altri diritti, variabili da Stato a Stato. La garanzia si estende solo all'acquirente originale al dettaglio, che è l'unico a poterla far valere.

Qualora durante il periodo di garanzia un qualsiasi prodotto S.R. Smith presenti dei problemi derivanti da vizi di materiale e fabbricazione coperti dalla presente garanzia, l'acquirente originale al dettaglio deve informare S.R. Smith tramite www.srsmith.com/warranty.php. Tale segnalazione dell'acquirente originario al dettaglio deve contenere tutte le informazioni pertinenti sul prodotto come specificato nel modulo di richiesta di garanzia. S.R. Smith deciderà se occorre rendere il prodotto oppure chiederà di rimuovere e rendere (1) la parte difettosa e (2) la parte del prodotto che riporta il numero di serie. I pezzi del prodotto devono essere puliti e resi in porto franco allo stabilimento S.R. Smith all'indirizzo 1017 SW Berg Parkway, Canby, OR 97013 USA oppure all'indirizzo 105 Challenger Drive, Portland, TN 37418 USA in base alla decisione di S.R. Smith.

LA GARANZIA QUI DESCRITTA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, CHE CON LA PRESENTE VENGONO DECLINATE ED ESCLUSE, COMPRESA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN DETERMINATO SCOPO O USO.

GLI UNICI ED ESCLUSIVI RIMEDI IN CASO DI VIOLAZIONE DI UNA QUALSIVOGLIA GARANZIA RELATIVA AI PRODOTTI SARANNO LIMITATI ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE PRESSO LO STABILIMENTO S.R. SMITH'S INDICATO O IN ALTRO LUOGO A DISCREZIONE DI S.R. SMITH. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI S.R. SMITH SARÀ SUPERIORE ALL'INTERO IMPORTO PAGATO DALL'ACQUIRENTE ORIGINALE AL DETTAGLIO A S.R. SMITH PER IL PRODOTTO GUASTO O DIFETTOSO.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI S.R. SMITH SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENTI, SPECIALI, INDIRETTI, PUNITIVI O ESEMPLARI O DI LUCRO CESSANTE DERIVANTI DA QUALSIVOGLIA VIOLAZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA O IN ALTRO MODO.

Nessun rappresentante, agente, distributore o rivenditore di S.R. Smith ha la facoltà di variare in qualsiasi modo la presente garanzia. S.R. Smith non è responsabile di eventuali impegni, dichiarazioni o garanzie date da qualsiasi altra persona al di là della garanzia espressamente specificata nella presente garanzia.

Procedure di garanzia

Procedure di garanzia La garanzia S.R. Smith decorre dalla data di produzione.

Per fare richiesta di sostituzione in garanzia, seguire la procedura descritta di seguito.

- 1. Fotografare il prodotto danneggiato.**
 - a) La foto deve comprendere l'unità intera (ad esempio supporto e tavola del trampolino oppure scivolo a distanza).
 - b) Includere anche una o più foto della zona danneggiata.
- 2. Rimuovere dal prodotto l'etichetta del numero di serie.**
 - a) S.R. Smith associa un numero di serie ad ogni tavola, supporto, scivolo e corrimano prodotto. L'etichetta che riporta il numero di serie delle tavole, dei supporti e degli scivoli è argentata, di forma rettangolare, lunga 1" (2,5 cm) ed è situata a lato o sul fondo del prodotto; l'etichetta con il numero di serie dei corrimano è trasparente, lunga 2" (5 cm) e si trova all'interno della curva più alta. e si trova all'interno della curva più alta.
- 3. Allegare le foto e l'etichetta con il numero di serie alla richiesta scritta di sostituzione in garanzia S.R. Smith. Accludere le seguenti informazioni:**
 - a) Nome e descrizione del prodotto (ad esempio lunghezza/colore della tavola, direzione della curva dello scivolo, ecc.).
 - b) Data di acquisto e/o data d'installazione.
 - c) Descrizione del danno.
 - d) Indirizzo di spedizione con indicazione di un contatto e di un numero di telefono.
- 4. Spedirci per posta le foto, l'etichetta con il numero di serie e la richiesta scritta a:**

S.R. Smith, LLC
PO Box 400
1017 SW Berg Pkwy
Canby, OR 97013 - USA
Attn: Warranty Specialist

****Nota:** la mancanza di informazioni causerà ritardi di elaborazione e la possibilità che la richiesta venga respinta.

In caso di domande su tale procedura, contattare il responsabile
S.R. Smith della Garanzia al numero 800.824.4387 o tramite e-mail all'indirizzo warranty@srsmith.com

SPECIFICHE

aXs 1000/EU

1. Dimensioni/Portata

Altezza pilone	32" (81 cm)
Altezza con braccio alzato	56,5" (143,5 cm)
Lunghezza totale esteso	68,75" (174,6 cm)
Lunghezza riposto sedile escluso	47" (119 cm)
Peso dell'unità, sedile incluso	81 libbre (36,7 kg)
Peso dell'unità, sedile escluso	68 libbre (30,8 kg)
Durata della batteria	Alimentazione 24 V CC 30 cicli (stima approssimativa)
Carico di reazione dell'ancoraggio Verticale Coppia	Portata di sollevamento 300 libbre (136 kg) 380 libbre (172 kg) 1400 piedi per libbra (1898 N·m)

2. Attuatore

Tipo	Attuatore meccanico a vite
Spinta massima	1680 lb (7472N)
Tensione	24 V CC
Ampere massimi	9
Velocità massima	0,59"/sec (1,49 cm/sec)

3. Motore

Rotazione	24 V CC, 13 RPM Rapporto di riduzione 9:1
-----------	--

4. Batteria

Alimentazione Intervallo di temperatura	2 V CC, IP65 gel piombo acido 41°F (5°C) a 104°F (40°C)
--	--

5. Informazioni sull'ampiezza del movimento

Corsa verticale	46" (117 cm)
Rotazione	Continua
Arco maggiore, sedile incluso	61" (155 cm)
Arco o minore, sedile incluso	51" (129,5 cm)

6. Rumorosità

Rumorosità al di sotto di 50 dB (A), misurati secondo DS/EN ISO 3746.

7. Informazioni su materiali e finiture

Telaio
 Alloggiamento
 Bracci
 Pilone
 Gruppo sedile

Coperture

Acciaio inox verniciato a polvere
 Plastica ABS formata sotto vuoto
 Alluminio verniciato a polvere
 Acciaio inox verniciato a polvere
 Sedile: plastica rotazionale
 Intelaiatura: acciaio inox verniciato a polvere
 Nylon rivestito in uretano

ELENCO DEI PEZZI

Numero del pezzo	Descrizione
AX5001	Attuatore LA34
100-1499	Comando a 4 pulsanti
100-1555	Comando a 4 pulsanti con chiave di attivazione
100-1495	Gruppo batterie di scorta
100-1530	Caricatore
100-4000A	Comando manuale
AX1430	Gancio per comando manuale
120-1100	Motore da 24 V
120-1800	Cavo motore con O-ring
100-3100	Supporto della Batteria
AX2000	Pilone
AX2100	Gruppo braccio attuatore
AX2200	Gruppo braccio di sostegno
AX2300	Braccio del sedile
AX2400A	Gruppo sedile
AX2450	Schienale/seduta del sedile
AX3000	Ingranaggio grande
800-5065	Ingranaggio piccolo
800-5066	Chiusura a ginocchiera
AX4000	Parte posteriore alloggiamento aXs
AX4050	Parte posteriore alloggiamento aXs
AX9004	Coperchio console batteria aXs (verde)
AX9003	Gruppo cintura di sicurezza aXs (grigio)
AX8360	Bussole lunghe
AX8340	Bussole corte
AX8000	Vite d'acciaio
AX8400	Albero filettato lungo
AX8500	Albero filettato corto
AX8800	Piastrina per viti autofilettanti
300-6200L	Ancoraggio a bordo piscina di bloccaggio
AX3600	Unità del mozzo/albero
AX2320	Bracciolo
900-2000	Giubbotto di ritenuta
AX9000	Copertura totale per aXs (verde)
500-1000	Accessorio per tavola spinale