

SENSATION®

The Art of Beauty

AERO WIND
travel mesh nebulizer




ISTRUZIONI PER L'USO

Art.: 217

Grazie per aver acquistato il nebulizzatore Aero Wind. Ideale per il trattamento delle malattie respiratorie come asma, allergie, ecc.

Aero Wind si avvale, per il suo funzionamento, della tecnologia Mesh: grazie al circuito di oscillazione ad eccitamento automatico, i fogli di ceramica all'interno della testa del nebulizzatore, insieme alla rete metallica, sono portati ad oscillare ad una frequenza elevata in modo consecutivo; questo permette al liquido che scorre attraverso la micro maglia della rete metallica di essere espulso e nebulizzato per formare un aerosol da inalazione.

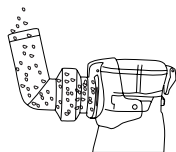

Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Attenzione:

Non utilizzare mai questo apparecchio quando la temperatura ambiente supera i 40°C.

Non agitare il nebulizzatore durante il funzionamento.

Evitare forti scosse all'unità principale e ai suoi componenti, es. caduta a terra.

Se danneggiato, non smontare l'apparecchio e non cercare di ripararlo. Contattare Macom srl

Questo apparecchio è destinato solo ad uso umano.

Utilizzare gli accessori solo come indicato in questo manuale.

Questo apparecchio, i suoi componenti, e gli accessori saranno eliminati in conformità con le relative disposizioni. Lo smaltimento improprio può causare inquinamento ambientale.

Prima dell'uso, assicurarsi che l'apparecchio e gli accessori (es. boccaglio e maschera) siano montati correttamente.

Rischio di scossa elettrica

Prima di utilizzare Aero Wind verificare che la tensione di corrente indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione delle rete elettrica locale.

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è bagnato.

Non inserire o disinserire la spina dalla presa di corrente con le mani bagnate.

Non immergere l'unità principale in acqua o altri liquidi.

Non usare l'apparecchio in ambienti umidi come il bagno.

Al termine del trattamento spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

Spegnere e disinserire la spina dalla presa di corrente elettrica prima di pulire l'apparecchio.

AVVERTENZE

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.


Non usare l'apparecchio se danneggiato. Contattare il servizio assistenza Macom.

Non tentare di riparare l'apparecchio. Qualsiasi riparazione deve essere fatta da personale qualificato al fine di evitare rischi.


Rimuovere le pile se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo.

I sacchetti in polietilene che contengono prodotti e imballaggi possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. Non utilizzare in culle, lettini, passeggini o box per bambini. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

- Il prodotto non è progettato per essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.

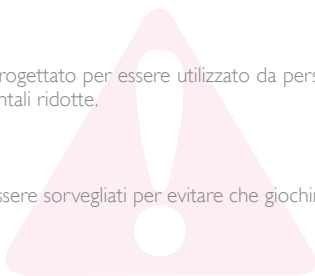

PEZZI E COMPONENTI

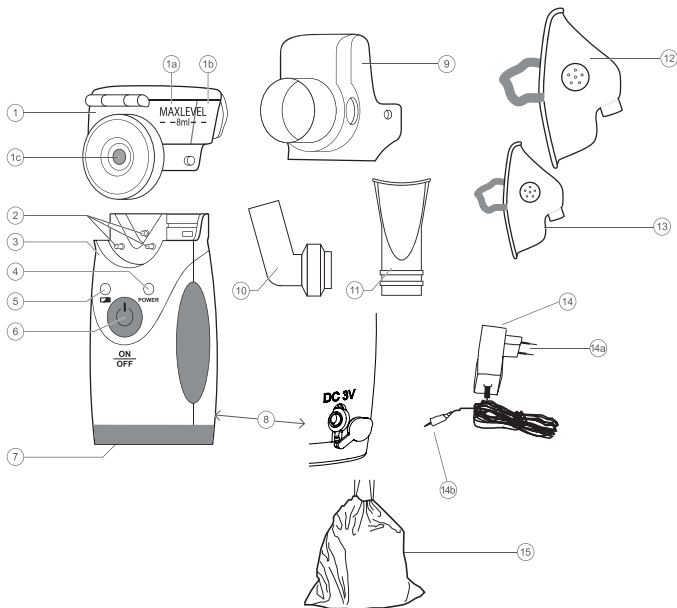

1. Nebulizzatore

1a. Coperchio

1b. Sicura

1c. Testa del nebulizzatore
(maglia metallica)

2. Elettrodo

3. Unità principale

4. LED alimentazione

5. LED indicatore livello batteria basso

6. Interruttore ON/OFF

7. Coperchio vano portabatterie

8. Foro per ingresso
alimentatore

9. Coperchio esterno

10. Connettore

11. Boccaglio

12. Mascherina per adulto

13. Mascherina per bambino

14. Alimentatore

14a. Spina alimentatore

14b. Jack alimentatore

15. Sacca

PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

1. Alimentazione:

Preparare le batterie o l'alimentatore di corrente.

Uso dell'apparecchio con batterie

Aprire il vano portabatterie (posizionato in fondo all'unità principale) lungo la direzione della freccia (vedi figura 1); inserire due batterie di tipo AA; richiudere.

Nota: assicurarsi che la polarità delle batterie sia corretta.

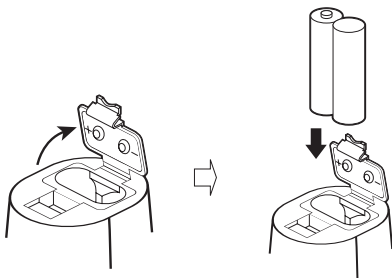


Fig.1

Uso dell'apparecchio con alimentatore

- 1) Collegare il jack dell'alimentatore all'unità principale (vedi figura 2).
- 2) Inserire la spina dell'alimentatore ad una presa di corrente.

Tensione d'entrata: AC 220V, 50Hz

Tensione d'uscita: DC 3V, 1A

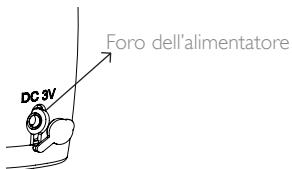


Fig.2

Se il LED non si illumina: controllare le batterie e, se necessario, sostituirle.
Se l'apparecchio non funziona ancora, andate alla sezione – **Ricerca ed eliminazione dei guasti** – per risolvere il problema.

Nota bene:

- Pulire e sterilizzare il nebulizzatore e i suoi accessori prima di usarlo per la prima volta. Ciò si rende necessario anche nel caso in cui l'apparecchio non sia stato usato da molto tempo.
- In presenza di patologie con rischi di infezione e contaminazione microbica si consiglia un uso personale del nebulizzatore e degli accessori. Il nebulizzatore e gli accessori dei diversi utilizzatori dovrebbero essere conservati separatamente.

MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

1. Installare l'apparecchio

Tenere l'unità principale e il nebulizzatore rispettivamente con la mano sinistra e la mano destra: premere leggermente il nebulizzatore, lungo la direzione della freccia (vedi figura 3), verso l'interno della fessura.; un suono "click" indica che è stato installato correttamente.

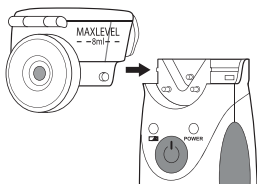


Fig. 3

Nota bene:

- 1) Tenere sempre puliti il nebulizzatore e l'elettrodo.
- 2) Se non installato correttamente, potrebbe non funzionare durante la nebulizzazione.

2. **Installare il coperchio esterno**

Come mostrato in figura 4: tenere l'unità principale con la mano sinistra, afferrare la parte inferiore del coperchio esterno con la mano destra e premerla, leggermente, verso l'interno lungo il bordo inferiore del nebulizzatore finché non si aggancia alle colonnine sporgenti su entrambi i lati della testa del nebulizzatore. Premere verso il basso con il pollice e il dito medio finché un suono "click" non indicherà che l'installazione è stata completata correttamente.

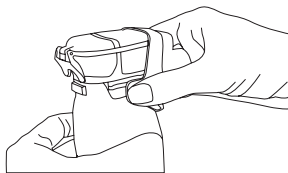


Fig. 4

3. Conservare l'apparecchio assemblato in un sacchetto pulito e asciutto.

USO DELL'APPARECCHIO

1. **Rimuovere il coperchio esterno**

La rimozione viene effettuata in modo inverso rispetto all'ordine di installazione (vedi figura 5).

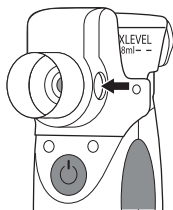


Fig.5

2. **Aprire il nebulizzatore:**

Tenere l'unità principale con la mano sinistra, stringere la sicura del nebulizzatore con il pollice e l'indice della mano destra e farla scattare verso l'alto per aprire il nebulizzatore come in figura 6.

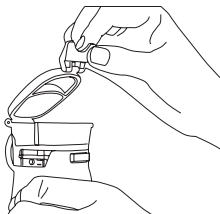


Fig. 6

3. **Aggiungere il liquido:**

Versare il medicinale nell'apposito contenitore a vaschetta (posizionato vicino alla testa del nebulizzatore) come in figura 7.

Nota bene:

- 1) Il volume massimo e minimo di liquido è di 8 ml. (MAX LEVEL) e di 0.5 ml. rispettivamente.
- 2) Se necessario, per regolare la temperatura del liquido, aggiungere acqua calda o fredda nell'apposito contenitore.

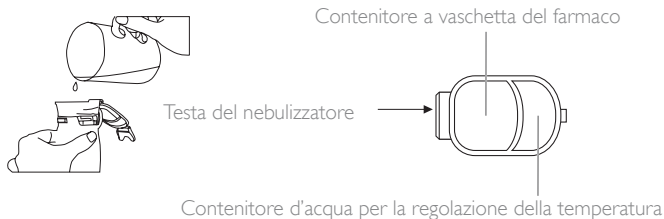


Fig. 7

4. **Chiudere il nebulizzatore**

Come mostrato in figura 8: tenere l'unità principale del dispositivo con la mano sinistra e chiudere il coperchio del nebulizzatore con la mano destra. Premere la sicura verso il basso con il pollice finché non si sente un suono "click"



Fig. 8

5. Reinstallare il coperchio esterno (vedi la sezione-**Montaggio del Dispositivo**)

6. **Installare il bocaglio o la maschera**

• Bocaglio

Collegare il bocaglio all'uscita del coperchio esterno lungo la direzione della freccia (vedi figura 9).

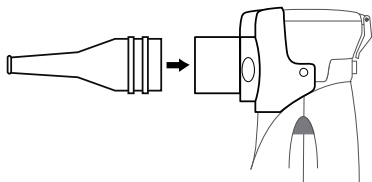


Fig. 9

Uso del boccaglio

Portare il boccaglio all'interno della bocca e chiudere leggermente le labbra per facilitare il flusso del liquido nebulizzato (vedi figura 10).

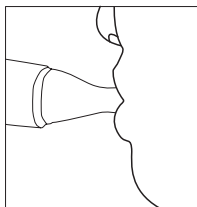


Fig. 10

• Maschera

Collegare il connettore con la maschera lungo la direzione della freccia (vedi figura 11).

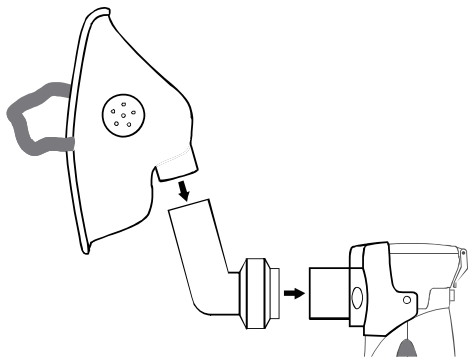


Fig. 11

Uso della maschera

Avvicinare la maschera al viso, tirare la fascia elastica dietro la testa, e posizionarla con precisione (vedi figura 12).

- 1) In caso di uso di medicinali per la cavità nasale: inspirare lentamente e a fondo attraverso la cavità nasale e poi espirare lentamente dalla bocca.
- 2) In caso di uso di medicinali per la gola: inspirare lentamente e a fondo attraverso la bocca e poi espirare lentamente dalla cavità nasale.
- 3) E' possibile alternare i due metodi.

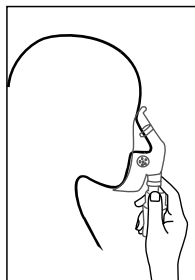


Fig. 12

Nota bene:

- 1) Qualora si rendesse necessario sostituire la maschera, utilizzare sempre dispositivi medici che soddisfano i controlli e le certificazioni sanitarie richieste.
- 2) Utilizzare il bocaglio correttamente ed evitare che il liquido nebulizzato sia spruzzato sulla lingua.
- 3) Non deglutire il liquido nebulizzato, si consiglia dopo l'inspirazione di trattenere il respiro per un istante: in questo modo le particelle in sospensione inalate possano depositarsi; poi espirare lentamente.
- 4) Per ottenere una nebulizzazione efficiente: sedersi comodamente e rilassarsi. Se si preferisce effettuare il trattamento a letto si consiglia di mettere un cuscino dietro la schiena per tenere la schiena dritta. Una posizione scomoda e una respirazione instabile possono causare un blocco nel tratto respiratorio.
- 5) Fare respiri profondi e regolari in modo che il liquido nebulizzato possa essere inalato profondamente nel tratto respiratorio.
- 6) Premere l'interruttore ON/OFF se si vuole fermare la nebulizzazione durante il trattamento; l'apparecchio si spegnerà automaticamente quando il liquido è esaurito.
- 7) Durante la nebulizzazione, l'angolo massimo di inclinazione dell'apparecchio è di 45° (dalla linea verticale). Se l'angolo è maggiore, il liquido potrebbe rovesciarsi dalla rete metallica che si trova nella testa del nebulizzatore.
- 8) Se durante il funzionamento l'apparecchio viene inclinato, al punto che il liquido non è a contatto con la testa del nebulizzatore, si spegnerà dopo un intervallo di circa 10 secondi.
- 9) Qualora rimanga poco liquido è possibile inclinare l'apparecchio per accumulare il liquido all'altezza della testa così da utilizzare tutto il liquido residuo. Durante il funzionamento, si raccomanda di non scuotere l'apparecchio poiché ciò potrebbe provocare un cattivo funzionamento e lo spegnimento automatico.

7 Termine del trattamento

Spegnere l'interruttore ON/OFF e disinserire la spina dell'alimentatore dalla presa elettrica.

Rimuovere il boccaglio/la maschera e il connettore in ordine inverso rispetto all'ordine di installazione corrispondente.

Rimuovere il coperchio esterno.

Rimuovere il nebulizzatore: tenere l'unità principale con la mano sinistra, premere il tasto PRESS (posizionato sopra il jack dell'alimentatore) con il pollice sinistro lungo la direzione della freccia (vedi Fig. 13); tenere entrambe i lati dell'estremità inferiore del nebulizzatore con la mano destra e farlo scorrere fuori delicatamente.

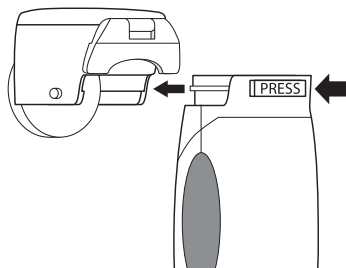


Fig. 13

Rimuovere il liquido residuo per vuotare il nebulizzatore e pulire l'apparecchio. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione – **Pulizia e Disinfezione**.

PULIZIA E DISINFEZIONE

Pulizia

Dopo l'uso si consiglia di utilizzare l'apparecchio, per circa 1-2 minuti, con solo acqua potabile: ciò permetterà di pulire la testa del nebulizzatore.

Prima di procedere accertarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla rete elettrica.

- 1) Rimuovere dall'apparecchio tutti i componenti e gli accessori.
- 2) Aprire il coperchio del nebulizzatore e rimuovere il liquido residuo. Pulire la maschera, il boccaglio, il connettore, il coperchio esterno e il nebulizzatore delicatamente.

Attenzione: l'unità principale non deve essere lavata.

- 3) Asciugare bene gli accessori con garza medica. **Importante:** la rete metallica, all'interno della testa del nebulizzatore, non deve essere toccata con forza da oggetti ruvidi o taglienti.
Asciugare l'entrata e l'uscita della testa del nebulizzatore delicatamente con un tampone medico o bastoncino di carta cotonato.
- 4) Se c'è polvere sulla superficie dell'unità principale, rimuoverla con una garza leggermente umida e pulita, asciugare.
- 5) Dopo la pulizia riporre l'apparecchio in una sacca pulita.

Disinfezione

- 1) Lavare la maschera, il boccaglio, il connettore e il coperchio esterno con una soluzione di cloruro di ammonio diluito al 0.1% per 10 minuti; sciacquare con acqua e asciugare con garza medica.
- 2) Disinfezione della testa del nebulizzatore: pulire delicatamente la rete metallica all'interno della testa del nebulizzatore con un tampone medico immerso in alcool medicale; sciacquare la testa del nebulizzatore con acqua; asciugare la superficie della testa del nebulizzatore delicatamente con un tampone medico o bastoncino di carta cotonato.
- 3) Si raccomanda una disinfezione con acqua bollente per i seguenti accessori: boccaglio, connettore e coperchio esterno: immergerli in uno sterilizzatore ad ebollizione con una quantità di acqua sufficiente a coprirli completamente, scaldare l'acqua fino all'ebollizione (per 20 minuti complessivamente) e asciugare il tutto con garza medica.
- 4) La disinfezione con ebollizione **NON** deve essere effettuata per i seguenti pezzi: il nebulizzatore, la testa del nebulizzatore, l'unità principale, la maschera, l'adattatore di corrente, la sacca e l'imballaggio.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

- Assicurarsi che non ci sia liquido residuo nel nebulizzatore.
- Assicurarsi che il nebulizzatore sia stato pulito e sterilizzato correttamente dopo l'uso.
- Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo pulito e sicuro.
- Proteggere l'apparecchio da luce solare diretta e da urti.
- Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro, lontano da fonti di calore e fiamme.
- Proteggere l'apparecchio da contatto diretto con liquidi corrosivi.
- Non asciugare mai l'apparecchio, i suoi componenti e gli accessori con il forno a microonde.
- Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno all'unità principale.
- Non tentare di riparare l'apparecchio, qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom srl.
- Utilizzare e conservare il dispositivo in ambienti in cui la temperatura e l'umidità siano conformi ai requisiti specificati nella sezione – **Norme di Funzionamento**, altrimenti il dispositivo potrebbe non funzionare bene.

NOTE

- Non toccare mai la rete metallica all'interno della testa del nebulizzatore con le mani.
- Non utilizzare liquido che contengano estere, particelle grasse o sospese (compreso il succo di erbe a diffusione); si prega di notare che le norme di funzionamento possono variare a seconda del tipo di medicinale utilizzato; si prega di utilizzare un liquido standard per la nebulizzazione consigliato dal medico.
- Il liquido per la nebulizzazione dovrebbe essere preparato con una base di acqua fisiologica al 0.9% o come prescritto dal medico curante. Non si può utilizzare acqua del rubinetto o bollita. Il contenitore per la preparazione del liquido deve essere sterilizzato ad ebollizione.
- La durata del trattamento non dovrebbe essere superiore ai 15 minuti. Attenersi sempre e comunque a quanto consigliato dal medico curante.
- Fare attenzione all'uso dell'apparecchio in presenza di bambini. L'apparecchio contiene oggetti di piccole dimensioni che possono essere accidentalmente ingeriti. I bambini possono utilizzare l'apparecchio solo se controllati da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Rimuovere le pile qualora si preveda di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.
- Non immergere l'apparecchio in acqua, non lavarlo sotto l'acqua. Non utilizzare l'apparecchio sotto la doccia.
- Se il dispositivo non funziona leggere sezione – **Ricerca ed eliminazione dei guasti.**
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a gas infiammabili.
- Questa unità è in conformità dello Standard EMC IEC60601-1-2:2001. Tuttavia, se è utilizzata con altri dispositivi medici o attrezzature elettriche, questo può influenzare il funzionamento di alcuni dispositivi. Si prega di seguire le istruzioni dei manuali e di utilizzare tutti i dispositivi correttamente.

DICHIARAZIONE

Quando le informazioni tecniche relative alle esigenze dell'utilizzatore non rientrano nell'ambito della riservatezza della Ditta, la Ditta si impegna a fornire l'informazione secondo la procedura, compresi i diagrammi dei circuiti e gli elenchi dei pezzi, e altre informazioni tecniche relative che non comportano la rivelazione di segreti commerciali. Per l'accesso ai canali informativi e alle procedure, si prega di contattare il distributore o produttore.

RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI

In caso di problemi durante il funzionamento si prega di consultare la seguente tabella

No.	Difetto	Sintomi/Possibili cause	Soluzione
1	Frequenza del nebulizzatore bassa	Si spegne o si accende il LED indicatore di batteria debole	Sostituire le batterie
		Il nebulizzatore è otturato	Pulire il nebulizzatore (vedi la sezione –Pulizia e Disinfezione); cambiare la testa del nebulizzatore, se necessario
2	Il LED della corrente non si accende e il dispositivo non funziona	E' stata invertita la polarità della batteria	Reinstallare correttamente le batterie
		Il voltaggio della batteria è basso	Sostituire le batterie
		L'alimentatore di corrente non è collegato correttamente al jack, all'unità principale o alla presa di corrente	Ricollegarlo alla presa di corrente o riattaccarlo nel jack
		Installazione errata del nebulizzatore	Reinstallare il nebulizzatore correttamente. Vedi la sezione – Montaggio del Dispositivo

No.	Difetto	Sintomi/Possibili cause	Soluzione
3	Il LED della corrente si accende ma il dispositivo non funziona	Installazione errata del nebulizzatore	Reinstallare il nebulizzatore correttamente
		Inquinamento del nebulizzatore	Pulire il nebulizzatore; sostituire la testa se necessario
		Il liquido non viene a contatto con il calore del nebulizzatore	Inclinare leggermente l'unità principale verso se stessi per raccogliere il liquido nella testa del nebulizzatore
		Ci sono bollicine tra il liquido e la testa del nebulizzatore	Scuotere delicatamente il liquido
		Polvere sul polo elettrico dell'unità principale	Pulire l'elettrodo dell'unità principale con garza medica.

NORME DI FUNZIONAMENTO

Nome del prodotto	AERO WIND
Modello	travel mesh nebulizer
Corrente	2 batterie AA o alimentatore (AC-DC 3V1A)
Potenza assegnata	2W
Frequenza ultrasonica	Circa 140 kHz
Livello di sicurezza	Tipo B, Classe II
Frequenza della nebulizzazione	≥ 0.25 ml/min
MMAD	Circa 5 μ m
Indicazione livello batteria basso	2.2V \pm 0.2V
Vita della testa del nebulizzatore	180 ore
Vita della batteria	90 minuti con due batterie AA alcaline
Spegnimento automatico	Spegnimento automatico in assenza di liquido
Temperatura di funzionamento e umidità	+10°C~+40°C, \leq 85% R.H.
Temperatura di conservazione e umidità	-10°C~+40°C, \leq 85% R.H.
Grado di inquinamento	Grado 2
Categoria di Voltaggio	Categoria II
Alitudini	\leq 2000 m
Accessori	Coperchio esterno, Connettore, Maschera per adulti, Maschera per bambini, Boccaglio, Manuale di istruzione, Sacca, Alimentatore.

CLASSIFICAZIONE

- Attrezzatura non adatta all'uso in presenza di miscele infiammabili.
- Attrezzatura motorizzata internamente
- Parte applicata tipo BF
- La maschera o il boccaglio sono riconosciuti come parti applicate

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato" riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Contrassegno CE in conformità delle direttive CE 93/42/CEE.



Istruzioni sul funzionamento.



Pezzo applicato tipo BF.

POWER Indicatore luminoso di corrente.



Indicatore livello di batteria basso.



Questo prodotto è dotato di doppio isolamento.

GARANZIA CONVENZIONALE

Offerta da: **Macom S.r.l.** - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. L'acquirente per usufruire della garanzia dovrà contattare il Numero **02 33 10 76 56** o l'indirizzo email **info@macomsrl.it** e fornire a **Macom S.r.l.** lo scontrino o altro documento fiscale rilasciato al momento dell'acquisto medesimo. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da **Macom** medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da **Macom** nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it