



SINH₂OX WASHER

Istruzioni per l'uso

Model No. XF8007

imported by sinh2ox health & care srl Torino, Italy®



SINH2OX HEALTH AND CARE srl

via ferdinando bocca 11, 10132 torino, italy

p. iva 10867140013

capitale sociale € 40.000 i.v.

iscrizione Registro imprese CCIAA: # TO-1168289 del 21/01/2013 - Torino

☎ +39 333 6246062 ✉ info@sinh2ox.com

Prima di utilizzare il prodotto, leggere queste istruzioni con attenzione e conservare questo manuale per futura consultazione.

Istruzioni di sicurezza

Le informazioni di questa sezione sono fornite per evitare danni alle persone e alle cose.

L'irrigatore nasale è privo di BPA e di conservanti ed è sicuro per l'uso quotidiano. Da utilizzare per la pulizia del naso e per ridurre il rischio di raffreddore, allergia e sinusiti incluso:

secchezza nasale

- naso chiuso e senso di peso facciale
- sintomi nasali dell'influenza e del raffreddore
- irritazione nasale da polvere, inquinamento, peli di animale, pollini e fumo
- esiti di interventi chirurgici sul naso e sui seni paranasali (**solo su indicazione del vostro specialista!!!**)

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso

Attenzione

- Per evitare danni, non utilizzare questo apparecchio se il naso è completamente bloccato
- Per evitare danni, non utilizzarlo se hai un'infezione all'orecchio o senso di ovattamento all'orecchio
- Per evitare danni, non utilizzarlo per bambini minori dei 6 anni

Questo apparecchio non è studiato per essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con impedimenti fisici o mentali e con scarsa capacità o esperienza senza la supervisione e l'aiuto di una persona responsabile della loro sicurezza

- Per evitare danni, non usare l'apparecchio subito dopo chirurgia nasale o sinusale
- Per evitare danni, non utilizzare l'apparecchio in caso di ferite esposte o sanguinamento del naso o dei seni
- Utilizzare solo secondo le istruzioni. Questo apparecchio è adatto solo per lavaggio nasale. Non utilizzare per le orecchie, sotto la lingua o altre zone delicate
- Non utilizzare con acqua fredda o senza soluzione salina. Non riempire il serbatoio con acqua a temperatura superiore i 40°C
- Utilizzare con 500 cc di acqua tiepida distillata o precedentemente bollita (assicurarsi che si sia raffreddata prima dell'uso)
- Non utilizzare questo apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o è danneggiato, se è stato immerso in sostanze liquide di qualsiasi tipo
- Non immergere in acqua
- Per evitare danni, non utilizzare l'apparecchio indossando piercing nasali
- Non aggiungere oggetti estranei alla soluzione salina
- **L'apparecchio non è inteso per uso medicale**
- Mantenere l'apparecchio pulito. Assicurarsi di eliminare l'acqua residua e di far funzionare qualche secondo l'apparecchio dopo l'uso. Trascurare di utilizzare questi semplici accorgimenti può produrre danno alla salute per la possibile comparsa di muffe o batteri. Ciò può produrre cattivo odore e cattivo funzionamento.

Avvertenze sulle batterie

- Inserire le batterie correttamente controllando le estremità + e -
- Rimuovere le batterie esaurite e smaltirle correttamente
- Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo
- Non buttare le batterie nel fuoco

Non manomettere

Non manomettere mai l'apparecchio, non smontarlo o tentare di ripararlo

Precauzioni

Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio

Specifiche

Alimentazione: 3 batterie AA-4.5V DC


Peso: circa 265 g senza batterie

Capacità: circa 300 ml

Dimensioni: 73 (L) x 89 (P) x 244 (A) mm



Identificazione delle parti dell'irrigatore nasale

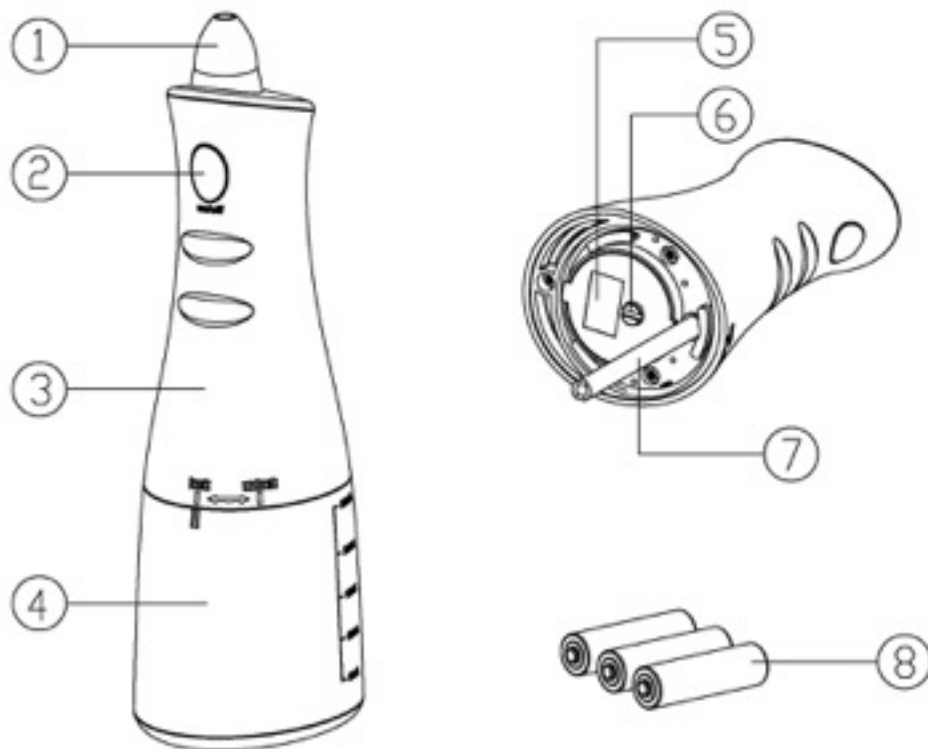

1. Puntale nasale
2. Interruttore
3. Unità principale
4. Serbatoio
5. Coperchio delle batterie
6. Vite del coperchio delle batterie
7. Tubo di aspirazione dell'acqua
8. Batterie AA (non incluse)

Per il migliore risultato, effettuare il lavaggio nasale 1-2 volte al giorno. Iniziare con un getto di acqua bollita e lasciata raffreddare in cui è stata disciolta 1 bustina di sali.


Non utilizzare acqua di rubinetto per sciogliere i sali se non è stata precedentemente bollita e lasciata raffreddare.

Se il passaggio nasale è completamente bloccato o se vi è ovattamento auricolare smettere il lavaggio nasale consultare il medico.


Nota

Ci possono essere residui di liquido nell'apparecchio (unità principale, serbatoio, tubo di aspirazione) dopo l'utilizzo, non vi sono rischi per la salute se sono stati seguiti i consigli di bollitura dell'acqua.

Preparazione dell'irrigatore per l'uso

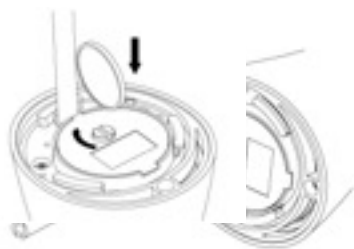


1. inserire il tubo di aspirazione se non è attaccato all'unità principale

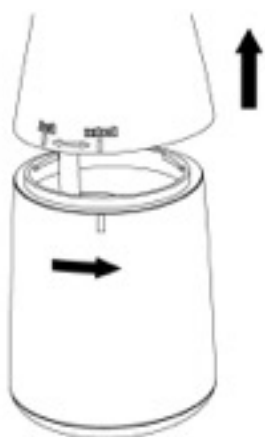


2. disinserire il serbatoio blu dalla unità principale ruotandolo in senso antiorario



3. svitare la vite del coperchio della batteria posizionato sull'unità principale utilizzando una moneta o un cacciavite (non rimuoverla completamente). Nota: la vite rimarrà inserita nel coperchio della batteria

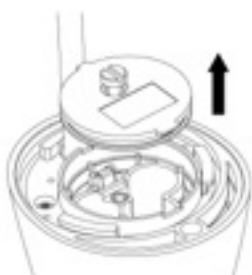


4. Estrarre il coperchio della batteria dal suo insediamento per aprire il vano delle batterie

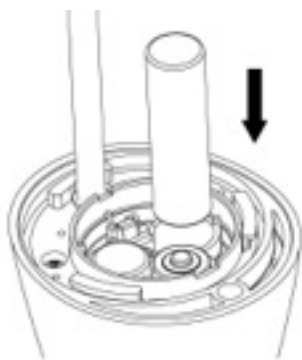

5. Inserire 3 batterie AA seguendo le istruzioni di inserimento presenti nel vano



6. Rimontare il coperchio delle batterie allineando la linguetta sul coperchio con il suo alloggiamento sull'unità principale
7. Spingere il coperchio con forza nel suo alloggiamento e riavvitare la vite di fermo sul coperchio fino allo stop.

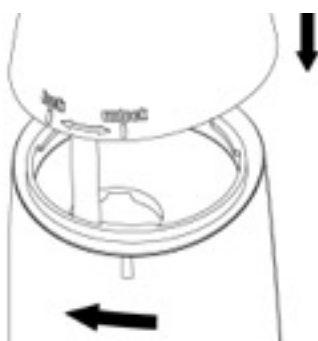

8. Inserire il tubo di aspirazione bianco della unità principale nell'apposito foro presente nel serbatoio blu. Allineare la tacca presente sul serbatoio blu con la tacca di apertura sull'unità principale e ruotare in senso orario fino allo stop.



9. Installare il puntale in silicone soffice. Sono forniti due puntali per l'utilizzo da parte di più persone

Lavare con cura l'irrigatore nasale prima di ogni utilizzo.

Effettuare il lavaggio nasale con l'irrigatore nasale



1. Lavarsi le mani con cura prima di ogni utilizzo

2. Rimuovere il serbatoio blu ruotandolo in senso antiorario dalla posizione di blocco a quella di sblocco e separarlo dalla unità principale.


3. Posare il serbatoio blu su una superficie piana, versare il contenuto di una bustina di sali (non inclusi nella confezione) nel serbatoio blu


4. Riempire il serbatoio blu con 240 ml di acqua. Riscaldare in forno a microonde fino alla temperatura desiderata.

Attenzione:

- scaldare a microonde il serbatoio blu solo dopo averlo riempito con acqua
- non utilizzare acqua calda o bollente
- non lasciare in microonde più di 30 sec.

Nota: può verificarsi gocciolamento dal foro del serbatoio

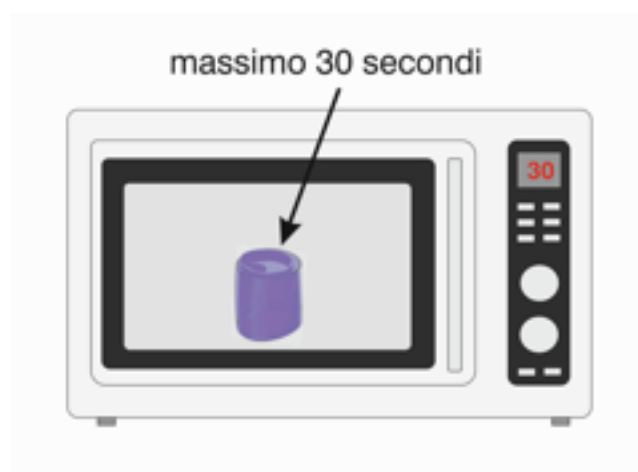

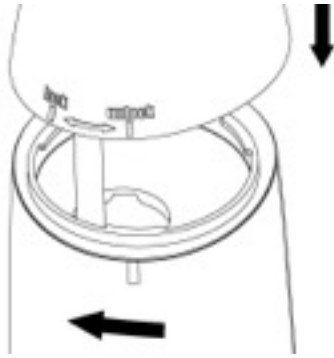

5. Rimontare l'irrigatore inserendo il tubo di aspirazione bianco nel foro del serbatoio blu. Allineare la tacca sul serbatoio blu con la tacca di sblocco sull'unità principale e ruotare in senso orario per fissare il serbatoio all'unità principale.

6. Scuotere gentilmente per disciogliere i sali

7. In piedi davanti al lavandino inclinare la testa in avanti ed appoggiare la punta soffice ad una narice, aprire la bocca, premere il pulsante di accensione ed attendere che il flusso d'acqua fuoriesca dalla narice opposta. Irrigare la narice con almeno 120 ml di soluzione (circa 15 sec), poi soffiare con gentilezza il naso per eliminare il muco, i batteri e l'eccesso d'acqua dal naso. Ripetere dall'altro lato. Fermare l'irrigazione se si avverte fastidio, dolore o pressione.



8. Eliminare i residui di acqua e pulire con acqua insaponata il puntale morbido e il serbatoio, risciacquare abbondantemente e asciugare.

Manutenzione

Lavare e asciugare prima di riporre l'apparecchio per il rischio di contaminazione con batteri e muffe.

Avvolgere l'apparecchio in un panno prima di riporlo in una borsa o simili per il rischio di perdite di liquido.

Toglierlo da borse o bagagli appena possibile per prevenire la contaminazione batterica o da muffe.

Puntale soffice

Rimuoverlo dall'unità principale e lavarlo con acqua poi asciugarlo

Unità principale

Lasciare funzionare l'apparecchio 2-3 sec dopo la fine dell'irrigazione finché non esca più acqua.

Rimuovere eventuale sporco utilizzando sapone su un panno umido poi asciugare con un panno asciutto.

Lavare con acqua se è molto sporco.

Non pulire con solventi, benzina, alcol, ecc. l'utilizzo di questi detergenti può produrre cattivo funzionamento, rottura o perdita del colore delle parti.

Non lavare a temperatura superiore a 50°C.

Accertarsi che il coperchio delle batterie sia ben chiuso.

Non immergere l'apparecchio in acqua.

Non lavare l'unità principale in lavastoviglie.

Asciugare dopo averlo lavato con acqua.

Rimuovere le batterie se non si utilizza per lungo tempo.

Tubo di aspirazione

Rimuovere il tubo di aspirazione dall'unità principale

Lavare con acqua e asciugare

Non piegare il tubo di aspirazione

Non attenersi a queste istruzioni può produrre malfunzionamento o rottura del tubo d'aspirazione

Serbatoio

Assicurarsi di eliminare l'acqua residua dal serbatoio

Rimuovere il serbatoio e lavarlo con cura con una spazzola per bottiglie e detersivo per i piatti

Risciacquare con acqua e asciugare.

Il puntale soffice, il tubo di aspirazione ed il serbatoio possono anche essere disinfettati immergendoli qualche minuto in una soluzione di quelle comunemente utilizzate per la disinfezione dei biberon per lattanti (tipo Milton o simili)

Asciugare se non utilizzato per lungo tempo

Utilizzare solo eversivi delicati

Non utilizzare solventi, benzina, alcol perché possono causare malfunzionamento, rottura o perdita di colore delle parti.

Questo prodotto è studiato esclusivamente per uso domestico e non medicale

SINH2OX HEALTH AND CARE srl

via ferdinando bocca 11, 10132 torino, italy

p. iva 10867140013

capitale sociale € 40.000 i.v.

iscrizione Registro imprese CCIAA: # TO-1168289 del 21/01/2013 - Torino

☎ +39 333 6246062 ✉ info@sinh2ox.com