
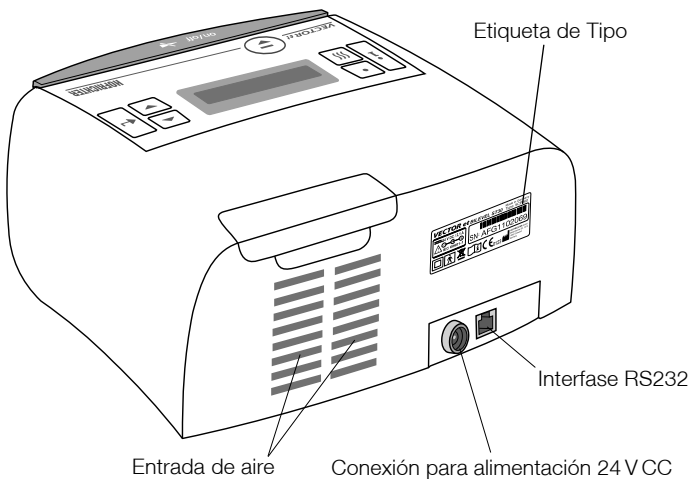



! Este documento no reemplaza al manual del fabricante. Siga las instrucciones del manual del usuario.

HOFFRICHTER
Quality makes the Difference



VECTOR et Instrucciones breves
para equipos con software 2.150

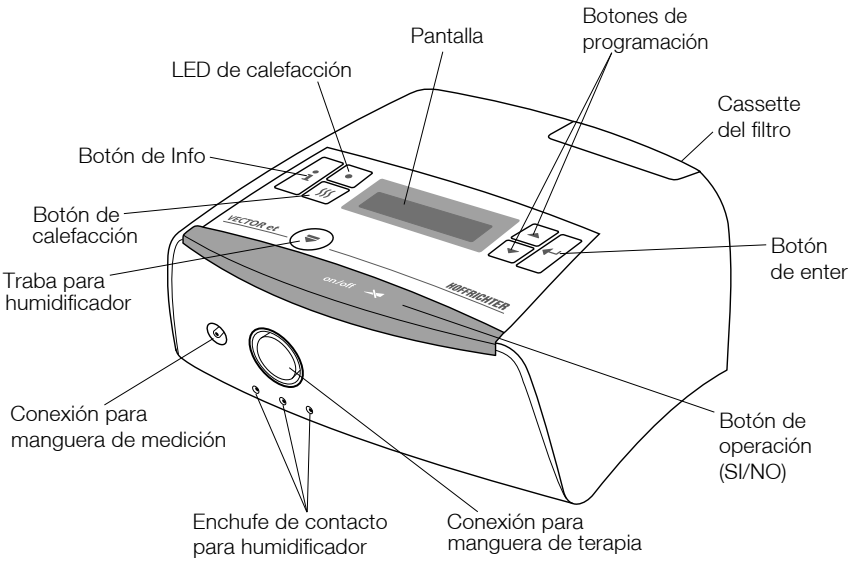

Inserte la tarjeta SD:

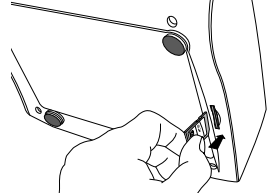

Retire la tarjeta SD:

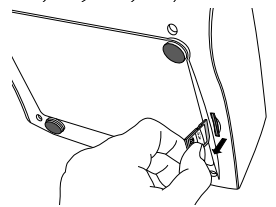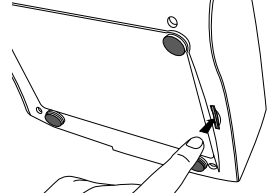


INICIO/FIN DE LA TERAPIA

Para iniciar o finalizar la terapia, oprima el botón de operación (Si/No).

AJUSTANDO LOS PARÁMETROS

Los siguientes 3 botones están disponibles para ajustar los parámetros en el equipo:

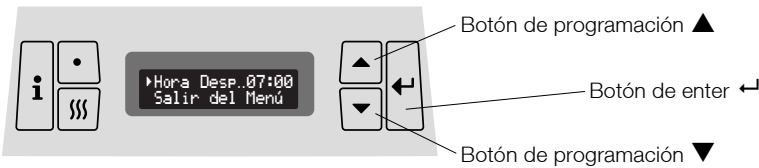

1. Oprima el botón enter ← durante 1 seg. aprox.
2. Cambie al siguiente parámetro con el botón de programación ▲ con la siguiente secuencia:



Una flecha parpadeando ► muestra el parámetro activo.

3. Oprima el botón enter ← para cambiar un parámetro.
4. Ajuste el valor deseado con los botones ▲ y ▼.
5. Confirme el nuevo valor oprimiendo el botón enter ←.

① solamente VECTOR et AUTO

RELOJ DE ALARMA ENCENDIDO/APAGADO

- Active el reloj de alarma utilizando el botón de programación ▲ (solo posible en el modo suspendido). Aparecerá un símbolo de una campanita en la pantalla.
- Utilizando el botón de programación ▼, el reloj de alarma será desactivado. El símbolo de la campanita desaparece de la pantalla.

AJUSTANDO LA HORA DE DESPERTADOR

1. Oprima el botón enter ← durante 1 seg. aprox.
2. Seleccione **Hora Desp** utilizando los botones de programación ▲ y ▼.
3. Confirme oprimiendo el botón enter ←.
4. Ajuste la hora de Despertador utilizando los botones de programación ▲ y ▼.
5. Confirme la hora de despertar oprimiendo el botón enter ←.

MENÚ INFO

Ingrese al Menú Info oprimiendo el botón **i**. Aquí todos los parámetros ajustados pueden revisados. Los cambios de estos parámetros solo pueden ser realizados por su médico o distribuidor autorizado.

REEMPLAZANDO EL FILTRO A CASSETTE

Si el filtro está contaminado o la pantalla muestra el mensaje de **Cambiar Filtro**, el filtro debe ser reemplazado.


1. Para cambiar el cassette, tirelo hacia arriba de la unidad.
2. Separe el cassette del filtro del marco del filtro tirando y separándolos.
3. Reemplace el cassette del filtro.
4. Monte el marco del filtro sobre el nuevo cassette del filtro. Asegúrese que la parte superior (hendidura) y el cassette del filtro (pines) están en posición correcta.

Para reiniciar el contador del filtro. Oprima el botón enter **↵**. Luego seleccione **Desech. Filtro** utilizando los botones de programación **▲** y **▼**. Oprima el botón enter **↵** dos veces.

⚠ ATENCIÓN

Nunca opere el equipo sin filtro a cassette. Use solamente los filtros a cassette originales de HOFFRICHTER.



5.0hPa
Cambiar Filtro

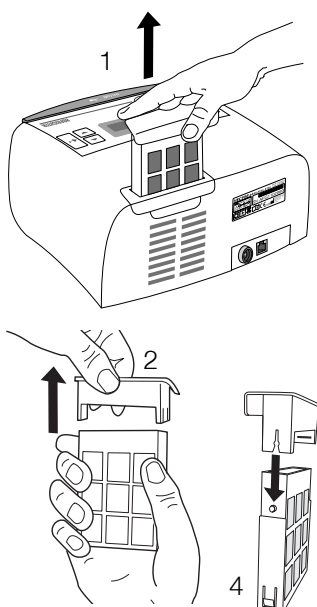

HUMIDIFICADOR DE AIRE AquaDROP et (opcional)

Conecte el humidificador:

Desconecte el humidificador:

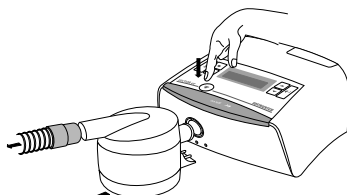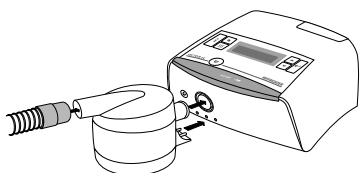

Ajustando el nivel de calefacción:

1. Oprima el botón del calefactor **☺** hasta que se muestre el menú de calefacción.
2. Oprima el botón enter **↵**. La pantalla con el nivel de calefacción comenzará a parpadear.
3. Utilizando los botones de programación **▲** y **▼** para ajustar el nivel de calefacción deseado. El nivel 1 representa el más bajo y el nivel 5 la máxima salida de calefacción.
4. Confirme el ajuste utilizando el botón enter **↵**.

►Calefacción.....2
Salir del Menú

►Calefacción.....2
Salir del Menú

Oprima el botón de calefacción **☺** para **encender** la calefacción del humidificador. La pantalla ahora muestra el nivel actual de ajuste de la calefacción y el LED de calefacción se enciende.

Oprima el botón de calefacción **☺** nuevamente para **apagar** la calefacción del humidificador. El LED de calefacción se apaga. Para más información, por favor ver el manual de usuario del AquaDROP et.

LIMPIEZA

LIMPIEZA DIARIA DE LA MÁSCARA

1. Desconecte la máscara de la manguera de terapia.
2. Limpie la máscara con agua ligeramente jabonosa. ¡No utilice ningún otro agente!
3. Enjuague la máscara con agua limpia. Deje secar completamente la máscara al aire. No exponer a los rayos del sol.

LIMPIEZA SEMANAL DE LA MANGUERA DE TERAPIA

1. Ocluya la manguera de medición firmemente con los tapones de manguera antes de su limpieza.
2. Limpie la manguera de terapia con agua ligeramente jabonosa. ¡No utilice ningún otro agente! Enjuague la manguera de terapia con agua limpia. Deje secar completamente la manguera de terapia al aire.
3. Luego de la limpieza, retire ambos tapones de la manguera de medición.

IMPORTANTE

Si hay agua en la manguera de medición de presión, puede afectar negativamente la terapia.

LIMPIE SEMANALMENTE EL EQUIPO

1. Desconecte el cable de alimentación.
2. Limpie el equipo con un paño ligeramente humedecido con agua jabonosa.
3. Seque el equipo con un paño seco.

LIMPIEZA DEL CABEZAL

Limpie el cabezal cuando sea necesario:

1. Desconecte el cabezal de la máscara.
2. Límpielo como se describe en las instrucciones de operación de su fabricante.

