

CAMBIO DE FILTRO, LIMPIEZA

⚠ ATENCIÓN

Observe siempre las indicaciones de limpieza. De lo contrario, la presencia de gérmenes podría tener efectos perjudiciales para la salud.

CAMBIO Y LIMPIEZA DEL FILTRO

⚠ ATENCIÓN

El filtro debe cambiarse o limpiarse cuando esté sucio o bien cuando el mensaje → FILTRO ← aparezca en la pantalla.

Cambio del filtro

Retire el filtro de la parte posterior de la unidad y sustitúyalo por uno nuevo o uno limpio.

Limpieza del filtro

1. Extraiga el filtro de la parte posterior de la unidad.
2. Utilice única y exclusivamente agua jabonosa templada para limpiar el filtro. A continuación, enjuáguelo con agua limpia y déjelo secar en un lugar aireado.



Extracción del filtro

Limpieza diaria de la máscara

1. Desconecte la máscara y la válvula de exhalación de la manguera de terapia.
2. Para la limpieza de la mascarilla utilice única y exclusivamente agua jabonosa templada. Enjuáguela a continuación con agua limpia y déjela secar en un lugar aireado y protegido de la luz solar directa.

Limpieza semanal de la manguera de terapia



1. Desacople el manguera corrugado de la unidad y de la mascarilla.
2. Utilice agua jabonosa templada para limpiar el manguera. Enjuáguelo bien con agua limpia y déjelo secar en un lugar aireado.

Limpieza semanal de la unidad

1. Desconecte el enchufe de alimentación
2. Limpie la unidad con un paño ligeramente humedecido con agua jabonosa. Luego use un paño seco para retirar la humedad de la unidad.

Limpieza del cabezal (si es necesario)

1. Desconecte el cabezal de la máscara.
2. Limpie el cabezal como se describe en las instrucciones de operación del fabricante.

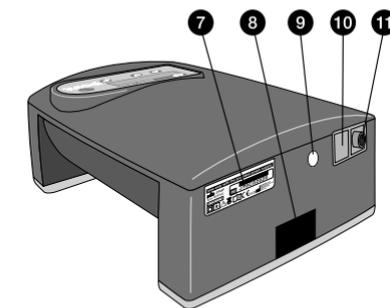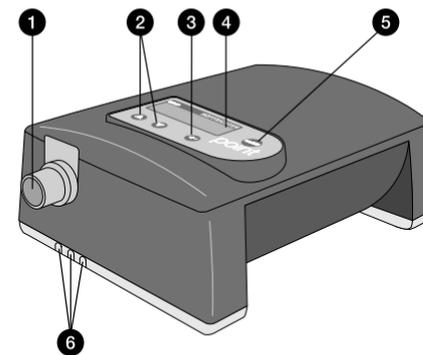

- 1 Conexión del manguera corrugado
- 2 Botones de programación
- 3 Botón Enter
- 4 Display
- 5 Botón SI/NO
- 6 Cubierta para enchufes de conexión para el humidificador
- 7 Etiqueta de tipo
- 8 Filtro o abertura de conexión para el **filtersystempoint**
- 9 Cubierta para la conexión de la compensación de presión
- 10 Interfase RS232
- 11 Conexión a la red

HOFFRICHTER
Quality makes the Difference

point

Instrucciones Breves Unidad de terapia respiratoria




A partir de versión de software 2.101



Estas instrucciones breves no reemplazan a las Instrucciones de Operación. ¡Observe las Instrucciones de Operación!

COMENZANDO

1. Instale la unidad siguiendo las indicaciones de instalación (véanse las Instrucciones de Operación).
2. Conecte la fuente de alimentación a la unidad.
3. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación y enchufe esta a la toma de corriente.
4. La unidad muestra un mensaje de bienvenida, la versión Del software y la cantidad de horas de tratamiento actual. Asimismo, el indicador muestra fecha y hora.
5. Conecte las mangueras de terapia
 - a) a la salida de aire, y
 - b) a la máscara.
6. En algunos casos, la unidad debe calibrarse. Consúltese el capítulo „Calibración“ de las Instrucciones de Operación.
7. Colóquese la mascarilla. A partir del mismo momento en que se seleccione el modo de funcionamiento automático, la unidad empezará a funcionar con fuertes inspiraciones y espiraciones. En modo manual, pulse la botón SI/NO para poner en marcha la unidad.
8. La unidad entonces realizará una prueba de máscara durante el tiempo seleccionado y a la presión prescrita. Ahora usted debería colocarse la máscara adecuadamente para eliminar cualquier pérdida potencial.
9. Ubique la manguera de manera que no ejerza ninguna fuerza sobre la máscara cuando usted esté acostado.
10. Respire profunda y calmadamente solo a través de su nariz.

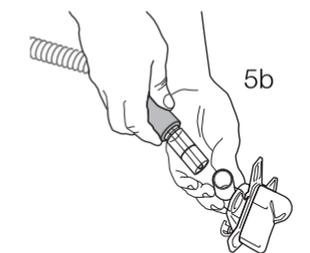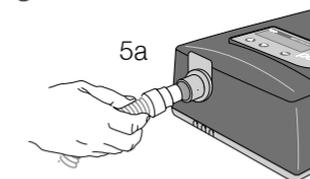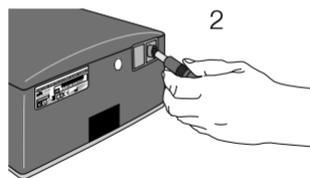

MENÚS

El point dispone de un Menú Estándar y de un Menú Completo. Para cambiar entre menús, pulse la tecla \leftarrow . A continuación, mantenga pulsadas al mismo tiempo las teclas \blacktriangle y \blacktriangledown . En la pantalla aparece el mensaje:

Menu Estándar
activo

ó

Menú Completo
activo

AJUSTE DE LOS PARÁMETROS

Para ajustar los parámetros de la unidad se dispone de las siguientes 3 teclas:

- \blacktriangle = Botón de programación
- \blacktriangledown = Botón de programación
- \leftarrow = Botón de ingreso (enter)

1. Pulse la tecla \leftarrow durante aprox. 1 segundo.
2. Active el Menú Estándar o el Menú Completo según el caso.
3. Pulsando la tecla \blacktriangle cambiará al siguiente parámetro. Un triángulo parpadeante \blacktriangleright representa el parámetro activo.
4. Pulse la tecla \leftarrow para cambiar un parámetro.
5. Ajuste el valor deseado mediante las teclas \blacktriangle y \blacktriangledown .
6. Confirme el nuevo valor con la tecla \leftarrow .

IMPORTANTE

La terapia de presión está protegida con un PIN y solo puede ser ajustada por un médico.

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL DESPERTADOR


- Pulsando la tecla \blacktriangle se activa la función despertador. En la pantalla aparece un símbolo en forma de campana.
- Pulsando la tecla \blacktriangledown se desactiva otra vez la función despertador. El símbolo de la campana desaparece.

AJUSTANDO LA HORA DE DESPERTADOR (EJEMPLO)


1. Pulse la tecla \leftarrow durante aprox. 1 segundo.
2. Seleccione con las teclas \blacktriangle y \blacktriangledown la opción **Hora Desp.**
3. Confirme la selección con la tecla \leftarrow .
4. Ajuste la hora del despertador con las teclas \blacktriangle y \blacktriangledown .
5. Confirme la hora ajustada con la tecla \leftarrow .

ACCESORIOS (Opcional)


Humidificador
aquapoint

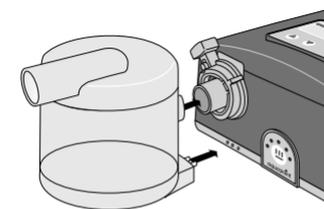

Sistema de Filtrado
filtersystempoint

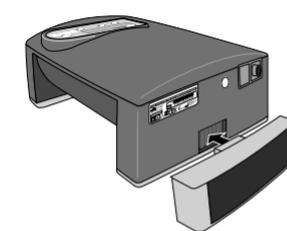

Pack de baterías
powerpackpoint

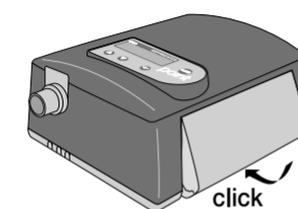

Consúltense las Instrucciones de Operación para obtener información más detallada.