

www.medtronicdiabeteslatino.com

Medtronic Diabetes Latin America

3750 NW 87th Ave, Suite 700

Miami, FL 33178

USA

Tel: 1.800.646.4633



Paradigm, Bolus Wizard, Quick-set, Quick-serter, Silhouette, Sure-T y Polyfin son marcas registradas;
y CareLink, mio y Revel son marcas de Medtronic-MiniMed, Inc.
11213005 ©2013 Medtronic MiniMed, Inc. Todos los derechos reservados.

Empezando

con la bomba de insulina MiniMed Paradigm®



Guía paso a paso de la bomba de insulina MiniMed Paradigm®

Introducción

Bienvenido 3

Guía paso a paso

Mecanismo de la bomba y administración de insulina 4

Sección 1: Básicos de la bomba 5

Sección 2: Instalación de la pila 7

Sección 3: Pantalla INICIO 8

Sección 4: Botones de la bomba 9

Sección 5: Modos de funcionamiento 12

Sección 6: Pantalla ESTADO 13

Sección 7: Leyendo los menús y pantallas 14

Sección 8: Aprendiendo a programar la bomba 20

Sección 9: Administrando bolus 32

Sección 10: Suspendiendo el administración de insulina en su bomba 37

Introducción al software para el manejo de terapia CareLink® 43

Preguntas frecuentes 45

Folletos de entrenamiento 51

Guía de consulta rápida de basal 53

Guía de consulta rápida de bolus 55

Cambiando su equipo de infusión 57

Reglas de seguridad 61

Apéndice

Alertas y Alarmas 64

Posibles problemas con la pila 65

Expansión del mapa del menú 66




Guía paso a paso de la bomba de insulina MiniMed Paradigm®

Bienvenido, y gracias por elegir a Medtronic como su aliado en el manejo de su diabetes. Hizo una elección muy buena y ha comprado el último avance tecnológico en el suministro de insulina. Nos complace ser parte de su equipo de cuidado de salud.

Ya sea que usted es novato en terapia de bomba de insulina o si tiene experiencia previa, usted necesita saber cómo funciona su nueva bomba de insulina Paradigm®. Esta guía ofrece instrucciones paso a paso sobre las operaciones básicas y la programación de su bomba.

Por favor use su bomba para completar cada ejercicio y practicar. Asegúrese que no tenga la bomba conectada cuando practique. Los ejercicios son presentados en secuencia lógica. Realizarlos en orden le ayudará a desarrollar su técnica y conocimiento en el uso de la bomba. Practicar estos ejercicios lo preparará para utilizar su bomba con facilidad y confianza. Tendrá entrenamiento adicional durante su sesión inicial de entrenamiento en el uso de bomba.

Por favor asegúrese también de completar el libro de trabajo *Información básica sobre el tratamiento con bomba de insulina*. Nuestro objetivo es proveerle con un programa de entrenamiento multifacético que le motivará para usar su bomba con confianza y éxito.

Aquí tiene unos consejos rápidos para que los tome en cuenta. No hay problema si se equivoca. Su bomba regresará automáticamente a la pantalla de INICIO (si no toca un botón en 30 segundos). El botón de  le permite retroceder a la pantalla anterior si es que presiona el botón equivocado. ¡Diviértase mientras practica!



¿SABIA USTED QUE...?
Puede encontrar una explicación completa de los aspectos técnicos y operativos de su bomba en la *Guía del usuario de MiniMed Paradigm®*.



IMPORTANTE No conecte la bomba de insulina a su cuerpo o intente usar insulina de la bomba mientras aprende a navegar las pantallas y entiende las funciones de la bomba durante su auto-aprendizaje (ej., mientras lee este libro o en un curso en internet). Solo puede usar la bomba ya sea con solución salina o insulina, después de haber recibido entrenamiento formal de un instructor certificado en el producto.

Mecanismo y administración de insulina

Antes de comenzar, asegurémonos que usted sabe cómo se administra la insulina cuando usa una bomba de insulina. Las piezas que componen el sistema de administración de la bomba son el equipo de infusión, el reservorio y la bomba.

Equipo de infusión

El equipo de infusión consta de un tubo (1) que transporta la insulina de la bomba hacia su cuerpo. En un extremo del tubo se encuentra el conector del reservorio (2) el cual se conecta al reservorio.

En el otro extremo, se encuentra la sección para el sitio de inserción (3) que se conecta a su cuerpo.

El sitio de inserción tiene una aguja pequeña (cánula) (4) que va debajo de la piel. La insulina se administra a través de la cánula. Un pedazo de adhesivo (5) rodea el sitio de inserción y mantiene el equipo de infusión en su lugar.

Reservorio

El reservorio es similar a una jeringa y tiene una capacidad de suministro de insulina para 2 ó 3 días. El reservorio se acopla al compartimiento del reservorio de la bomba (6).

Usted deberá cambiar el equipo de infusión y llenar un nuevo reservorio con insulina cada 2 ó 3 días.

Bomba


La bomba contiene una mini computadora y un motor que controla el movimiento de un pistón (7), localizado en la parte baja del compartimiento del reservorio. El pistón actúa como el émbolo de una jeringa y controla con precisión la administración de insulina basal y bolus.

Cada vez que la bomba administra insulina, el pistón avanza y hace subir el fondo del reservorio para administrar la cantidad exacta de insulina que se programó.

El pistón se debe rebobinar cada vez que se coloque un reservorio nuevo y lleno en el compartimiento del reservorio.

Equipo de infusión*

- 1 Tubo
- 2 Conector del reservorio
- 3 Sección del sitio de inserción
- 4 Cánula
- 5 Adhesivo

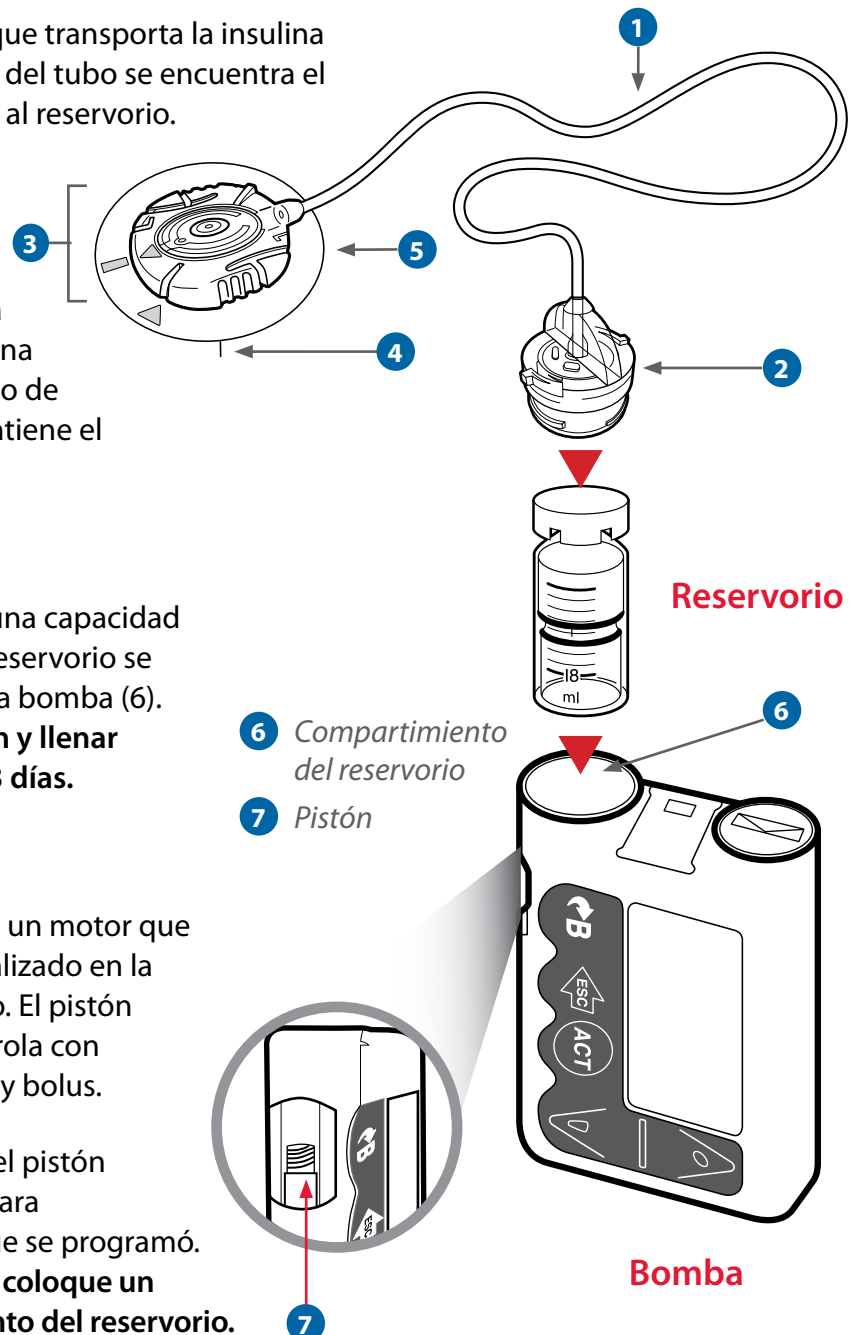

*El equipo de infusión Quick-set® es el que se muestra en la ilustración.

Sección 1:

Básicos de la bomba

Qué hay en su bomba de insulina

Antes de insertar la pila o de presionar cualquier botón, observe detenidamente la bomba y familiarícese con todas las funciones. Por favor utilice la bomba y siga los pasos.

Frente de la bomba



Pantalla de la bomba
Muestra toda la información necesaria para operar y programar su bomba.

Botones de la bomba
La bomba tiene cinco botones y cada uno tiene funciones específicas.

Botones de la bomba

Parte posterior de la bomba



Diagrama de la pila (AAA)
Muestra la dirección en que se debe insertar la pila.

Número de serie de la bomba
Si llama a la línea de ayuda, deberá proporcionar este número.

Número de teléfono de la línea de ayuda de Medtronic Diabetes está disponible las 24 horas del día
Expertos capacitados en el producto se encuentran a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana.




NOTA Las bombas MiniMed Paradigm® pueden variar en apariencia

Compartimientos del reservorio y pila

Compartimiento de la pila

Aquí se instala la pila.

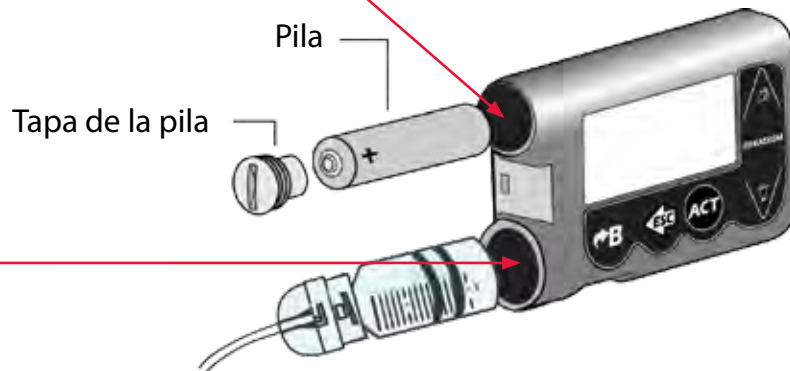

Compartimiento del reservorio

Aquí se inserta el reservorio que tiene una capacidad de suministro de insulina para 2 ó 3 días.

Ventana del reservorio y pistón

Ventana del reservorio

Permite ver la cantidad de insulina que queda en su reservorio.

Pistón

El pistón se encuentra dentro del compartimiento del reservorio.



NOTA La bomba viene con un tapón rojo en el compartimiento del reservorio (no se ilustra en esta página). Por ahora, deje el tapón rojo en su lugar.


Sección 2:

Instalación de la pila

Su bomba de insulina funciona con una pila AAA. Para instalar la pila, necesita una moneda (ya sea de cinco o veinticinco centavos de dólar o moneda de similar grosor).



Paso 1. Ponga la moneda en la ranura de la tapa del porta pila. Gire la tapa hacia la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj).

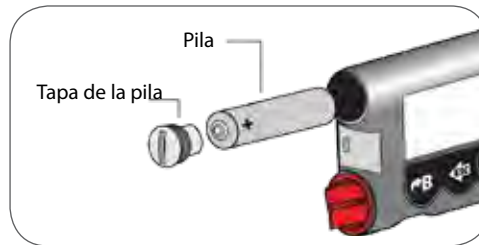

Paso 2. Coloque la pila en el compartimiento de la pila introduciendo primero el extremo negativo (plano), y el extremo positivo que quede hacia afuera.



Paso 3. Ponga la tapa. Use la moneda para girar la tapa a la derecha (en dirección a las manecillas del reloj) y apriete hasta que la ranura quede horizontal.



Paso 4. La bomba debe encenderse. Repasará varias pantallas hasta mostrar la pantalla de INICIO, como se muestra arriba. Si la pantalla de INICIO aparece, su batería está en buen estado, y está insertada correctamente. Si la pantalla de INICIO no aparece, siga los pasos de la página "Posibles Problemas con la Pila" en el Apéndice.



¡IMPORTANTE!

¡Tenga cuidado de no apretar demasiado la tapa del porta pila!



¿SABIA USTED QUE...?

Se recomiendan pilas alcalinas AAA de Energizer®. Pruebas demuestran que son las pilas más confiables para usarse con la bomba. Las pilas se deben guardar a temperatura ambiente, no en el refrigerador o en otros lugares fríos.



NOTA Por favor no programe el tiempo y hora todavía. Le explicaremos más adelante en esta guía.

Sección 3:

Pantalla INICIO


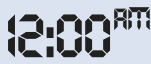

Todo comienza aquí

Cuando se instala una pila que funciona, la bomba de insulina queda encendida y la pantalla INICIO aparece. La pantalla INICIO siempre muestra el icono de reservorio, la hora, y el icono de la pila. Todos los otros menús se accesan de la pantalla de INICIO. La bomba “se mueve” de la pantalla de INICIO.

Si no se presiona ningún botón después de 30 segundos la bomba regresa a la pantalla de INICIO.



PANTALLA INICIO CON ICONOS Y HORA
 Cuando aparece la pantalla INICIO, la bomba está encendida y lista para programarse.

1 Icono del reservorio	2 Hora	3 Icono de la pila
 Queda entre el 75% y el 100%	 Formato de hora de 12 horas	 Queda entre el 50% y el 75%
Muestra cuánta insulina queda aproximadamente en el reservorio.	Muestra la hora.	Muestra cuánto queda de pila aproximadamente.
El icono está dividido en cuatro segmentos. Cada segmento representa aproximadamente el 25% de un reservorio lleno.		El icono está dividido en cuatro segmentos. Cada segmento representa aproximadamente el 25% de la vida útil de la pila.









NOTA Si la pantalla de la bomba está en blanco, la bomba no está encendida. Consulte la página “Posibles problemas con la pila” en el Apéndice.

Sección 4:

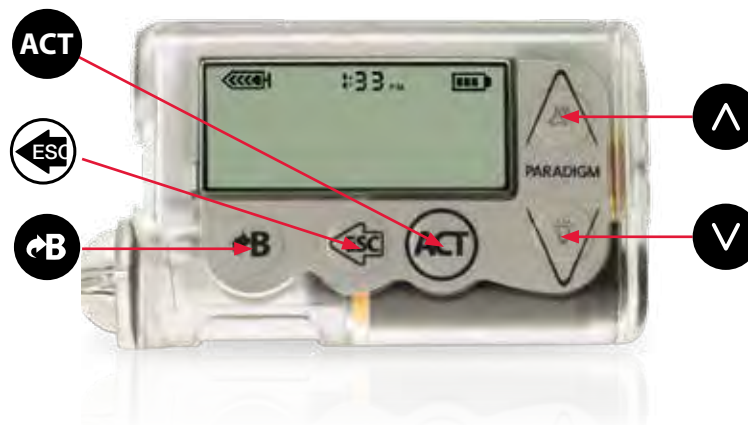Botones de la bomba

Cada botón en su bomba tiene una función especial. Algunos botones tienen más de una función. Estas funciones adicionales dependen de la pantalla o el menú que esté utilizando.



Flecha ARRIBA	Flecha ABAJO	Botón ACT	Botón ESC	Botón B
				
<ul style="list-style-type: none"> Se utiliza para desplazarse hacia arriba por los elementos de un menú. Se utiliza para aumentar o cambiar el valor de los elementos parpadeantes. 	<ul style="list-style-type: none"> Se utiliza para desplazarse hacia abajo por los elementos de un menú. Se utiliza para disminuir el valor de un número parpadeante. Enciende o apaga la luz de fondo si se presiona en la pantalla de INICIO. 	<ul style="list-style-type: none"> Abre los menús. Acepta, confirma o activa las selecciones del menú. 	<ul style="list-style-type: none"> Le permite volver a la pantalla anterior o salir del menú. Si se presiona de la pantalla de INICIO, abre la pantalla ESTADO. 	<ul style="list-style-type: none"> También conocido botón de Bolus Express. Acceso rápido a pantalla de CONFIGURAR BOLUS. Acceso rápido a Bolus Wizard® (cuando está activado). Se usa con otras teclas para acceder ciertas funciones.



Ejercicios de práctica

Use su bomba para realizar los siguientes ejercicios de práctica.

En todos los ejercicios de práctica de este capítulo, cuando vea la palabra:

- “Presione”: pulse y suelte el botón.
- “Mantenga presionado”: presione y mantenga la presión en el botón.



Ejercicios de práctica 1: Aprendiendo a usar los botones de la bomba

En la pantalla INICIO:

1. Presione **ACT** para abrir el MENÚ PRINCIPAL.
2. Presione las flechas **↓** y **↑** para desplazarse por los menús.
3. Presione **ESC** para regresar a la pantalla de INICIO.



Ejercicios de práctica 2: Encender y apagar la luz de fondo

En la pantalla INICIO:

1. Presione la flecha **↓**. Se encenderá la luz de fondo.
2. Vuelva a presionar la flecha **↓**. Se apagará la luz de fondo.



NOTA No utilice objetos afilados como las uñas, la punta de lápiz o bolígrafo para presionar los botones de la bomba, ya que podrían dañar el teclado.




Ejercicio de práctica 3: Administrando un bolus de práctica

En la pantalla INICIO:

1. Presione **B**. Aparecerá la pantalla CONFIGURAR BOLUS.



2. Presione **▲** cinco veces para programar 0.5 unidades de bolus.

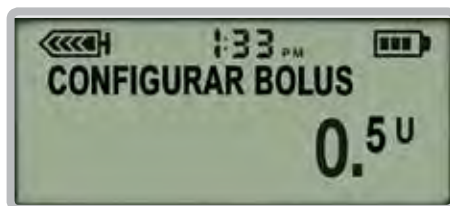

3. Presione **ACT** para confirmar. La bomba sonará una alerta una vez como indicación de que ha empezado a administrar el bolus en incrementos de 0.025 unidades o cantidades.

La bomba pitará nuevamente cuando termine de administrar el bolus. Luego volverá a la pantalla INICIO.

¡Felicitaciones! Acaba de administrar su primer bolus de práctica. Recuerde, normalmente se administrará un bolus usando el Bolus Wizard.




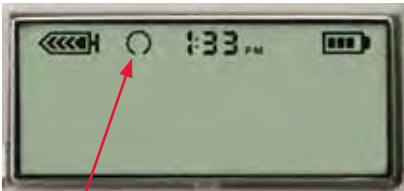
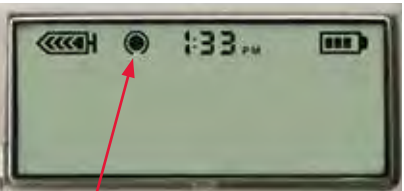
NOTA Cada vez que presione el botón **▲**, la cantidad del bolus aumentará en 0.1 unidades (a menos que se haya cambiado la configuración de la bomba en el MENÚ BOLUS).

Sección 5:

Modos de funcionamiento

Su bomba de insulina funciona en uno de estos tres modos: Normal, Especial o Atención.

Si la bomba está funcionando en cualquier otro modo que no sea el normal, aparecerá un icono circular de "alerta". A continuación se muestra un ejemplo del icono de alerta que aparece durante cada modo de funcionamiento.

1 Normal	2 Especial	3 Atención
 <p>Sin icono circular</p> <p>La bomba funciona y administra insulina tal y como se le programe. Cuando la bomba funciona en modo normal, significa que no se están utilizando funciones especiales y que no hay alarmas ni alertas activas.</p>	 <p>Icono de círculo vacío</p> <p>La bomba está funcionando y administrando insulina con una función especial o bajo una condición especial, por ejemplo, una configuración basal temporal, pila baja o reservorio con volumen bajo.</p> <p>La bomba hará sonar una alarma o vibrará periódicamente para recordarle que está funcionando en el modo especial (la frecuencia de la alerta dependerá de la condición).</p>	 <p>Icono de círculo lleno negro</p> <p>La bomba no está administrando insulina. Esto ocurre si se pone a la bomba en SUSPENDER o si otra condición hizo que la bomba se detenga.</p> <p>La bomba hará sonar una alarma o vibrará periódicamente para avisarle que usted no está recibiendo insulina (la frecuencia de la alerta dependerá de la condición).</p>

Sección 6:

Pantalla de ESTADO

Esta pantalla le permite ver rápidamente información sobre el estado de operación de su bomba de insulina. Se actualiza constantemente y muestra la información más actual sobre:




- U100 – El tipo de insulina que usa su bomba
- Índice basal actual
- Fecha de inicio del reservorio
- Unidades que quedan en el reservorio
- Estado de la pila (normal o bajo)
- Fecha
- Número de serie
- Versión del software que usa su bomba


La pantalla de Estado se puede acceder presionando  de la pantalla INICIO.




Ejercicio de práctica: Viendo la pantalla ESTADO

En la pantalla INICIO:

1. Presione . Aparece la pantalla ESTADO.
2. Utilice las flechas  y  para desplazarse y examinar la pantalla ESTADO.

Para volver a la pantalla INICIO, .



Presione  en la pantalla INICIO para ver la pantalla ESTADO



NOTA Su bomba aún no está completamente programada. Por lo tanto, es posible que los datos sean los de fábrica o que falte parte de la información en la pantalla ESTADO.

Sección 7:


Leyendo menús y pantallas

Hay seis menús principales. Cada menú contiene las funciones y opciones correspondientes a ese menú. Por ejemplo, si busca una función relacionada con la administración de bolus, vaya al MENÚ BOLUS; si busca una función de índice basal, vaya al MENÚ BASAL. Cada menú está configurado de manera que las funciones que se utilizan con mayor frecuencia se encuentran al principio del menú.

Pantalla de la bomba

La pantalla de su bomba de insulina puede mostrar hasta cinco líneas de información a la vez.

- **Línea 1:** Siempre muestra los iconos del reservorio, hora y pila.
- **Línea 2:** Siempre muestra el nombre del menú que está viendo (PRINCIPAL, BOLUS, SUSPENDER, SENSOR, etc.).
- **Línea 3, 4, y 5:** Muestran las tres primeras selecciones del menú

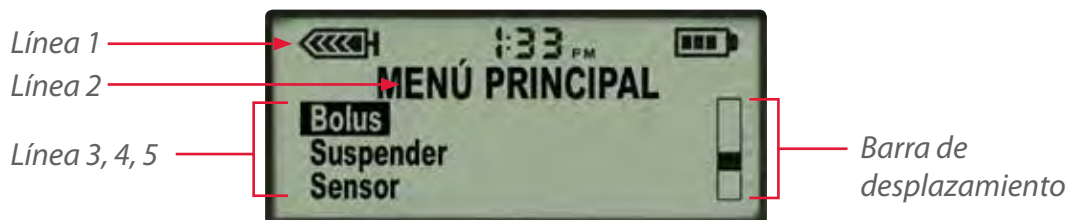

Barra de desplazamiento


Cuando una pantalla o un menú tienen más de cinco líneas de información, aparece la barra de desplazamiento a la derecha que le permite saber que hay más información disponible. Cuando vea la barra de desplazamiento en la pantalla, utilice la flecha para desplazarse y ver la información restante.

Más información sobre el MENÚ PRINCIPAL

El MENÚ PRINCIPAL le permite elegir uno de estos seis menús:

- **Bolus:** Contiene las opciones y funciones relacionadas con los bolus.
- **Suspender:** Le permite interrumpir la administración de insulina. Generalmente se utiliza esta función cuando se desconecta para ducharse, cambiarse o nadar.
- **Sensor:** Contiene selecciones que se relacionan con nuestro producto de monitoreo continuo de la glucosa (esta información no está incluida en este cuaderno de ejercicios).
- **Basal:** Contiene todas las selecciones relacionadas con la administración del índice basal.
- **Reservorio + Eq.Infus:** Contiene las selecciones necesarias para cambiar el equipo de infusión, el reservorio y la insulina.
- **Utilidades:** Contiene una variedad de otras opciones.

Cada menú (Bolus, Sensor, Basal, Reservorio + Eq.Infus y Utilidades) tiene un submenú que contiene opciones y funciones adicionales relacionadas con ese menú.

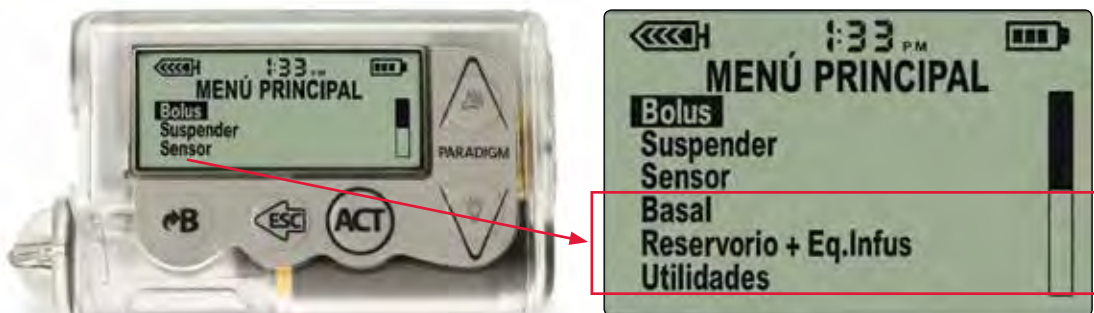

Presione **▼** para desplazarse hacia abajo y ver todas las opciones del MENÚ PRINCIPAL

Ahora veremos un mapa básico de los menús y luego realizaremos algunos ejercicios de práctica.



Ejercicios de práctica 1: Viendo el MENÚ PRINCIPAL

En la pantalla INICIO:

1. Presione **ACT**. Aparece el MENÚ PRINCIPAL. Observe la barra de desplazamiento a la derecha de la pantalla.
2. Utilice la flecha **V** para ver todas las opciones del MENÚ PRINCIPAL.





3. Presione **ESC** para volver a la pantalla INICIO.



Ejercicio de práctica 2: Ingresar al MENÚ BOLUS

En la pantalla INICIO:

1. Presione **ACT**. Aparecerá el MENÚ PRINCIPAL, y Bolus estará subrayado.
2. Presione **ACT**. Aparecerá el MENÚ BOLUS, y Config. bolus estará subrayado. Observe que no hay ninguna barra de desplazamiento, ya que sólo hay tres opciones en este menú.
3. Presione **ESC** dos veces para volver a la pantalla INICIO.

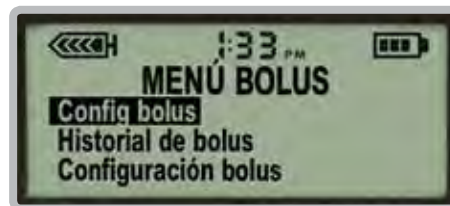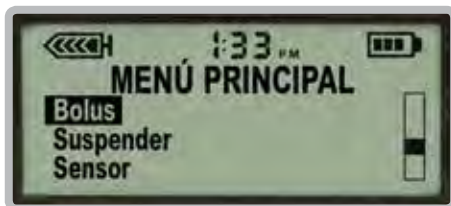




Ejercicio de práctica 3: Ingresar al MENÚ BASAL

En la pantalla INICIO:

1. Presione **ACT**, y aparece el MENÚ PRINCIPAL.
2. Use **▼** para seleccionar Basal.
3. Presione **ACT**, y aparece el MENÚ BASAL. Observe que no hay ninguna barra de desplazamiento, ya que sólo hay tres opciones en este menú
4. Presione **ESC** dos veces para volver a la pantalla INICIO.

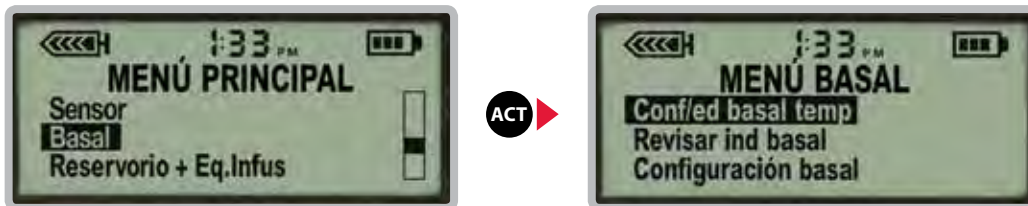

¡ Aquí tiene un consejo! Cuando esté viendo cualquier pantalla que no sea la pantalla INICIO, la flecha **▼** funciona sólo como un botón para desplazarse hacia abajo y no enciende la luz de fondo. Para encender la luz de fondo cuando se encuentra en otra pantalla o menú, deberá utilizar una nueva técnica llamada "combinación de botones."



Ejercicio de práctica 4: Encendiendo la luz de fondo cuando NO está en la pantalla INICIO

En la pantalla INICIO:

1. Presione **ACT**. Aparecerá el MENÚ PRINCIPAL.
2. Para encender la luz de fondo, mantenga presionado el botón **⬅B** y presione la flecha **▼** al mismo tiempo. Se encenderá la luz de fondo.
3. Mantenga presionado el botón **⬅B** y presione la flecha **▼** para apagar la luz de fondo.

Mantenga presionado **⬅B** ...y luego presione **▼**

Mapa básico de menús

Navegación

Presione **ACT** en la pantalla INICIO para abrir el MENÚ PRINCIPAL.


Presione **ACT** en el MENÚ PRINCIPAL para abrir los submenús.

Presione **ESC** para retroceder a menús anteriores y para volver a la pantalla INICIO.

Cuando hay texto adicional, aparece la barra de desplazamiento en los menús.

Presione **V** para desplazarse hacia abajo y así poder ver el texto adicional de la pantalla.


Presione **^** para volver al principio.


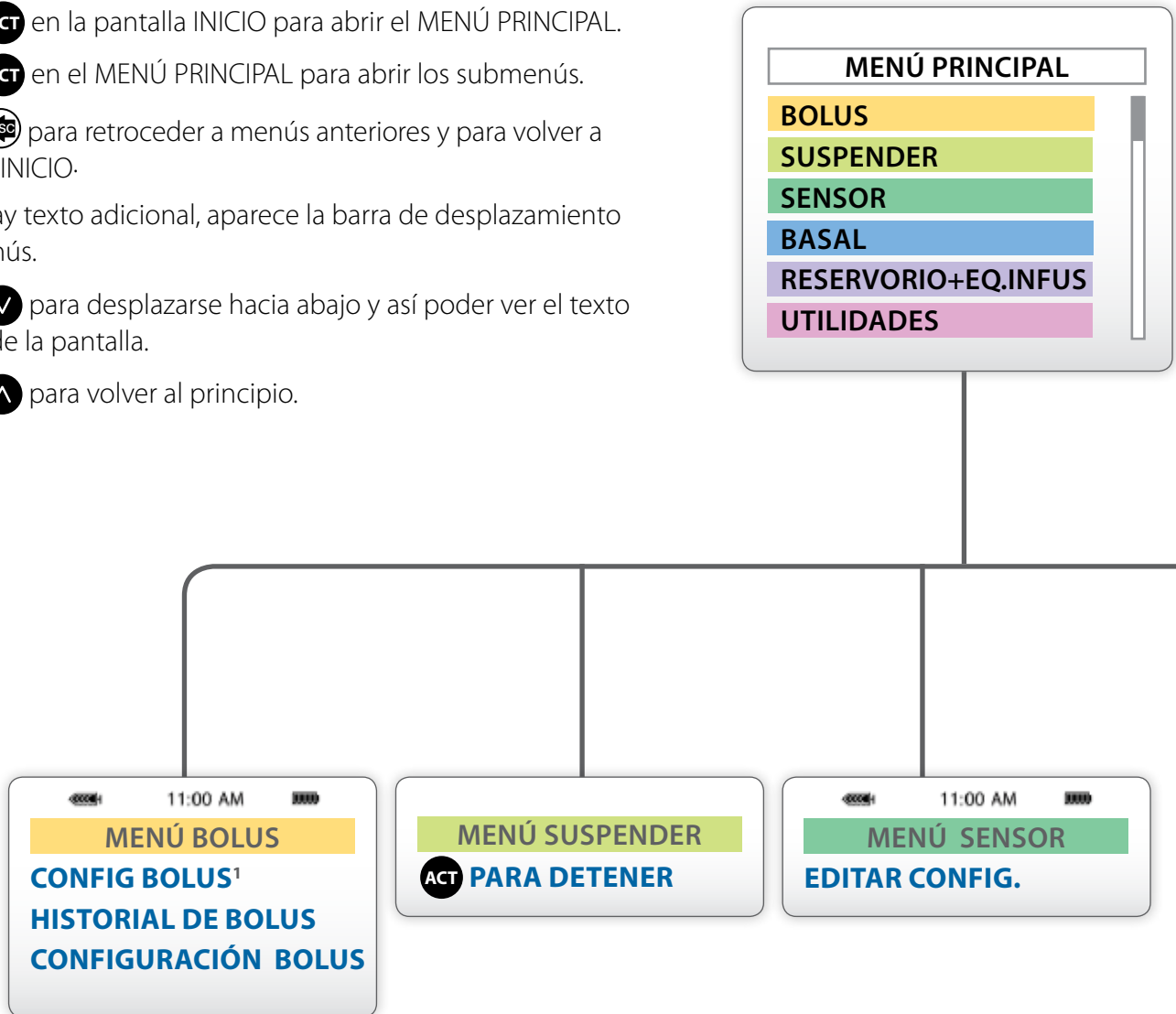


NOTA: Este diagrama muestra las opciones básicas que están disponibles en cada menú según la configuración que viene de fábrica.

En el Apéndice puede encontrar un menú expandido que muestra todas las funciones y opciones.

Pantalla ESTADO

Presione  en la pantalla INICIO para ingresar al MENÚ ESTADO.

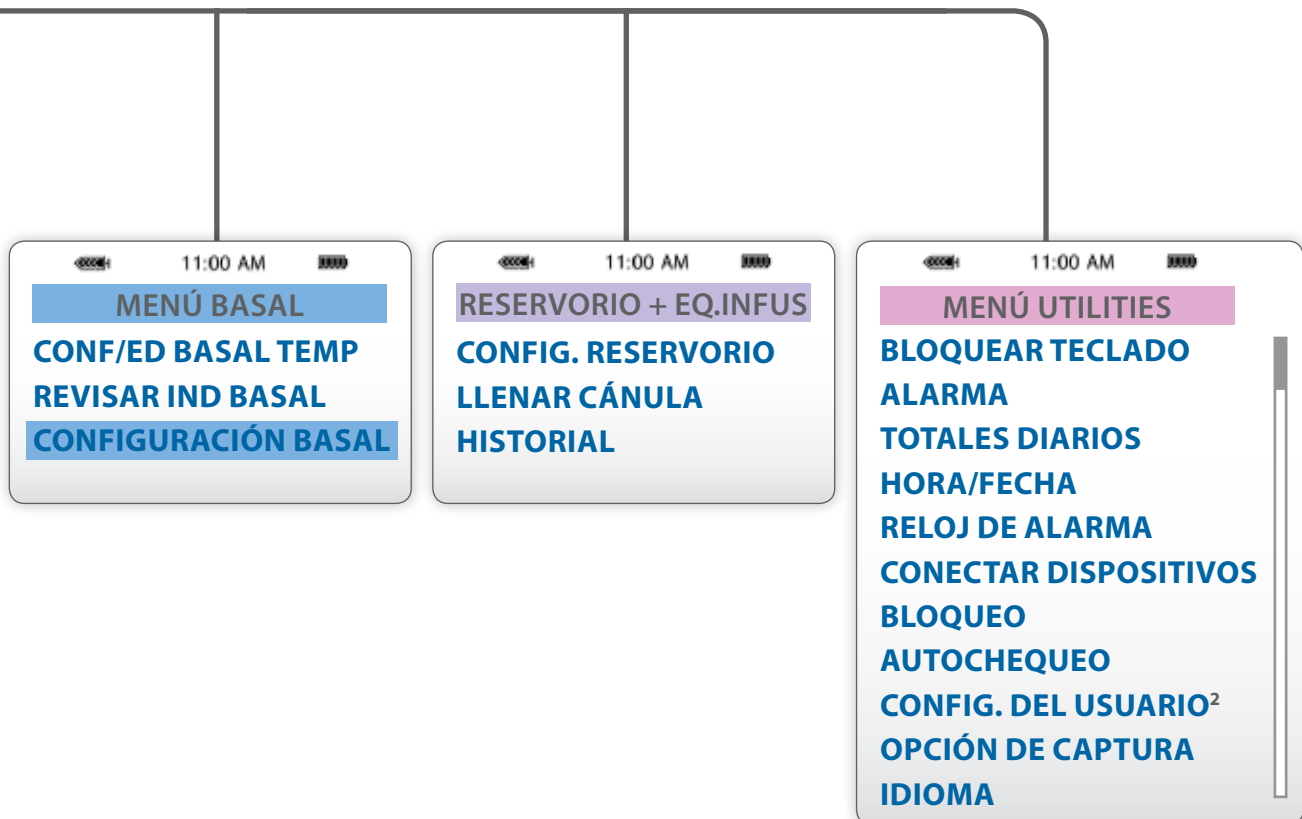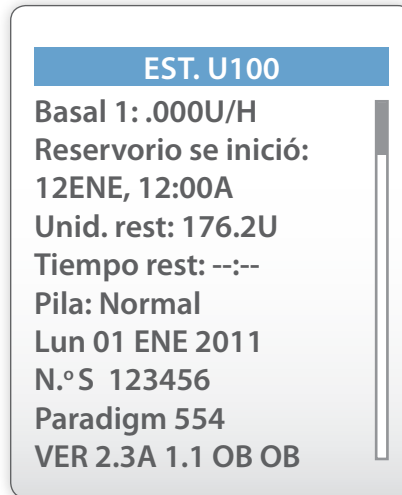

² Sólo aparece al mantener presionado  y presionar .

Sección 8:

Aprendiendo a programar su bomba

Ahora está preparado para programar algunas de las funciones básicas de su bomba de insulina. Esto le ayudará a conocer mejor el funcionamiento de su bomba y le permitirá practicar con los botones.

MENÚ UTILIDADES

Presione **▼** hasta encontrar MENÚ UTILIDADES. Es la última opción del MENÚ PRINCIPAL. Comenzaremos aquí.

El MENÚ UTILIDADES tiene muchas opciones que le permiten personalizar su bomba. Aprenderá cuáles son las funciones que puede empezar a utilizar inmediatamente y cuáles puede dejar para después.

Primero, vamos a ver las opciones disponibles en el MENÚ UTILIDADES. Luego seleccionaremos y programaremos algunas de las funciones.



Ejercicio de práctica: Veamos el MENÚ UTILIDADES

En la pantalla INICIO:


1. Presione **ACT**, para que aparezca el MENÚ PRINCIPAL.
2. Presione **▼** y desplácese hasta Utilidades.
3. Presione **ACT**, para que aparezca el MENÚ UTILIDADES.
4. Use **▼** y **▲** para desplazarse por el MENÚ UTILIDADES.
5. Presione **ESC** dos veces para volver a la pantalla INICIO.

Al principio de cada ejercicio, verá que se utiliza el siguiente “método abreviado”. Ésta es una forma rápida de enumerar los pasos que debe seguir para llegar a cada menú.

Pantalla INICIO > MENÚ PRINCIPAL > Utilidades



Desplácese para ver todas las opciones del MENÚ UTILIDADES

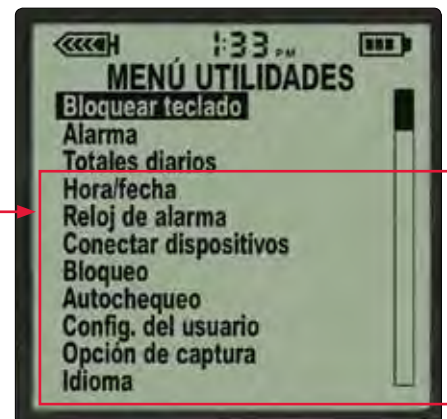

*Opciones adicionales del menú están disponibles al desplazarse hacia abajo con **▼***



IMPORTANTE

La mayoría de las alertas y alarmas de su bomba se pueden silenciar y borrar presionando



Seleccionando y configurando alertas

Su bomba de insulina es fácil de usar y es muy segura. La bomba realiza constantemente una serie de pruebas de seguridad para verificar que esté funcionando correctamente. Si detecta cualquier condición que requiera su atención, tocará o vibrará para alertarlo de la situación.

Ejemplos de alertas comunes que recibirá incluye:

- **Alerta de pila baja:** Alerta cuando sólo queda el 10% de vida útil de la pila.
- **Advertencia de reservorio bajo:** Alerta cuando el reservorio de insulina está bajo.
- **Suspender:** Alerta cada 15 minutos cuando la bomba está suspendida.



NOTA Su bomba viene con alerta audible activada, pero si lo prefiere puede elegir configurarla para que vibre.




Ejercicio de práctica: Configurando tipo de alerta


Pantalla INICIO > MENÚ PRINCIPAL > Utilidades

Del menú UTILIDADES:

1. Desplácese **▼** a Alarma y presione **ACT**. Aparece el MENÚ ALARMAS.
2. Desplácese **▼** a Tipo de alertas y presione **ACT**. Aparece Tipo de alertas.
3. Desplácese **▲** o **▼** para escuchar las alertas.
4. Seleccione la alerta que prefiera: Pitido (largo, medio, corto) o Vibrar.
5. Presione **ACT** para confirmar su elección. ¡Ya configuró el tipo de alertas!
6. Presione **ESC** tres veces para volver a la pantalla INICIO.

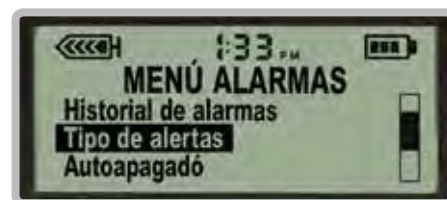

Seleccione Tipo de alertas en el MENÚ ALARMAS

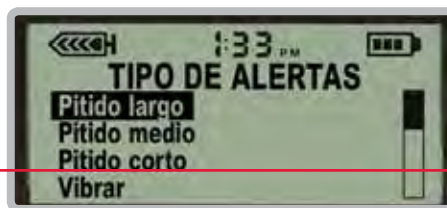




La opción Vibrar se encuentra disponible cuando se desplaza hacia abajo con **▼**

Configurando hora y fecha

Configurar hora y fecha correctamente en su bomba de insulina es importante.

Configuremos la hora y la fecha en su bomba ahora.


Ejercicio de práctica: Configurando hora y fecha


La bomba activará una serie de pantallas a medida que configure la hora y la fecha. Use las flechas  y  para establecer los valores parpadeantes y luego presione  para confirmar cada selección.


Pantalla INICIO > MENÚ PRINCIPAL > Utilidades

Del menú UTILIDADES:

1. Desplácese  a Hora/Fecha y presione .

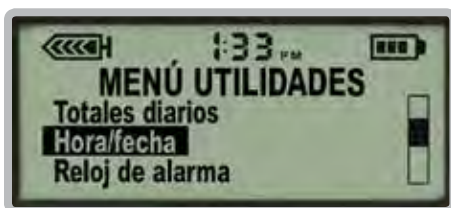

2. Seleccione el formato 12 horas (a.m./p.m.) o de 24 horas (hora militar) y presione .

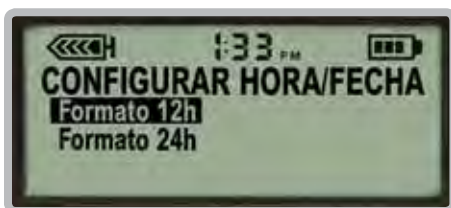

IMPORTANTE

Configurar la hora y fecha correcta asegura que la insulina basal se administre a la hora correcta y que los datos ingresados en su bomba sean registrados correctamente.


Siempre verifique y asegúrese que la hora y fecha

- incluya AM o PM
- sean correctas

Configurando hora y fecha

3. Presione **ACT** para cambiar la Hora/Fecha.
4. Use **▼** y **▲** para configurar la hora. Asegúrese de desplazarse por las horas hasta que la hora a.m. o p.m. se configure correctamente.
5. Presione **ACT** para confirmar.
6. Repita los pasos 4 y 5 para configurar los minutos, el año, el mes y el día.

La primera vez que configure la hora y la fecha, aparecerá el siguiente mensaje:
“¿HORA/FECHA CORRECTA?,” seleccione Sí y presione **ACT**.

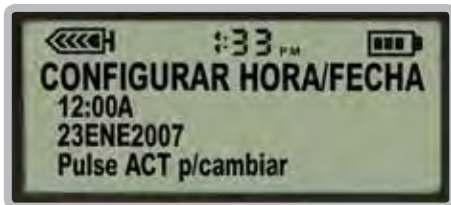

Sonará una alarma REVISE CONFIGS; borre la alarma presionando **ESC** y luego **ACT**.



¿SABÍA USTED QUE...?

La cantidad de cada índice basal por hora se divide en incrementos de 0.025 unidades y se administra uniformemente durante la hora. Por ejemplo, si su índice basal está configurado para 0.300 unidades por hora, la bomba administrará 0.025 unidades de insulina cada 5 minutos hasta llegar a un total de 0.300 unidades cada hora.

MENÚ BASAL

En el MENÚ BASAL, puede programar índices basales, cambiar y revisar los índices basales, configurar un índice basal temporal y la cantidad basal máxima.

Cuando programe un índice basal en la bomba, se administrará automáticamente esa cantidad exacta cada hora.

Cuando inicie su bomba de insulina por primera vez, probablemente comenzará con un sólo índice basal. La bomba administrará esa cantidad basal exacta uniformemente, durante cada hora, las 24 horas del día. Por ejemplo, si su índice basal inicial es de 0.500 unidades (½ unidad) por hora, la bomba administrará media unidad por hora, las 24 horas del día. Esto significa que recibirá un total de 12 unidades de insulina basal por día.

Su proveedor de cuidado de salud determinará cuál es su índice basal inicial. Cuando controle su GS (glucemia) según las instrucciones, sus lecturas de GS le ayudarán a usted y a su proveedor de cuidado de salud a determinar si la cantidad del índice basal es correcta, si es necesario ajustarla o si necesita más de un índice basal.

Si sus lecturas de GS indican que necesita más de un índice basal, se pueden agregar índices basales fácilmente.

El primer ejemplo de la siguiente página muestra cómo se podría establecer un sólo índice basal y cómo se administraría cada hora.

El segundo ejemplo muestra cómo se podrían establecer varios índices basales y cómo se administrarían cada hora.

Para insulina basal...

Jill siempre tenía que acordarse de tomar su inyección a la hora de dormir antes de tener su bomba de insulina. Tomar su inyección cada noche a la misma hora tal como le instruyó su doctor era difícil. Jill está en la universidad y a veces se duerme temprano, otras noches se quedaba estudiando en la biblioteca hasta tarde. Ahora con la bomba, ella no tiene que preocuparse cuando tomar la inyección. Ella recibe su insulina basal automáticamente, 24 horas al día.



Único índice basal

Índices basales

1. 12 AM 0.75 u/h



El índice basal por hora de 0.75 u/h se administra equitativamente durante cada hora las 24 horas del día.


Índices basales múltiples

Índices basales

1. 12 AM 0.900 u/h

2. 8 AM 0.650 u/h

3. 6 PM 0.900 u/h

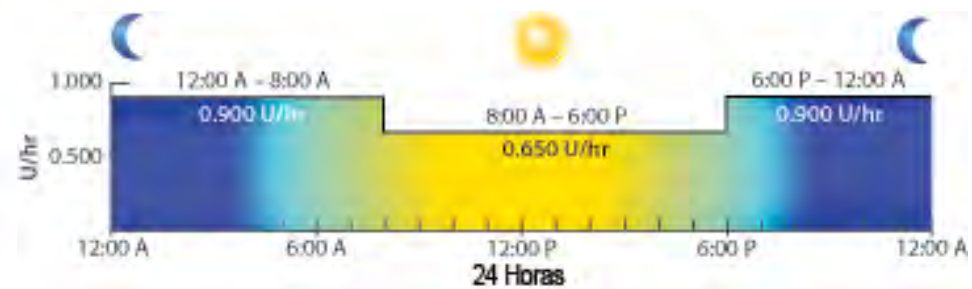

La bomba cambia automáticamente el índice basal basado en el tiempo y cantidad programados.

Configurando un sólo índice basal

La hora de inicio para el primer índice basal está pre-programado a medianoche y no se puede cambiar. En cuanto el índice basal 1 es programado en la bomba, empieza a administrar insulina cada hora de medianoche a medianoche.




Ejercicio de práctica: Configurando un sólo índice basal


Pantalla INICIO > MENÚ PRINCIPAL > Basal

EN EL MENÚ BASAL:

1. Desplácese a CONFIGURACIÓN BASAL. Presione **ACT**.
2. Config/editar basal estará subrayado. Presione **ACT**.
3. Aparecerá CONF ÍNDICE BASAL 1 con la hora preestablecida en 12:00 A (a.m.) y el índice parpadeando en 0.000.

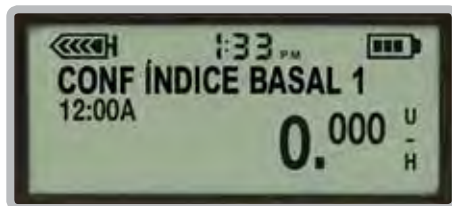


4. Presione y mantenga presionado **▲** hasta configurar la primera cantidad del índice basal en 0.500 u/h. Si se pasa de las 0.500 unidades, utilice **▼** para volver a las 0.500 unidades. El índice basal aumentará en 0.025 unidades cada vez que presione el botón.

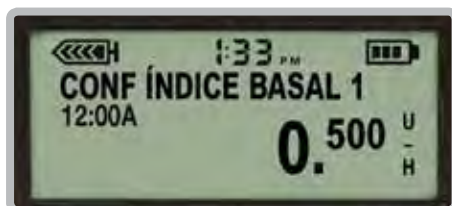


5. Presione **ACT** para confirmar su Índice basal en 0.500 u/h.

6. Aparecerá la pantalla CONF ÍNDICE BASAL 2. (En este ejercicio sólo configurará un índice basal, así que no deberá configurar una hora de inicio para el segundo índice basal).

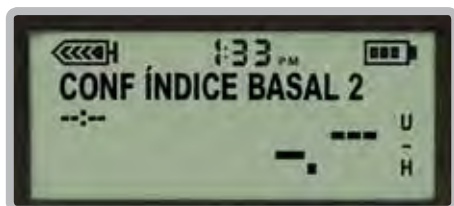

7. Presione **ACT**, para que aparezca la pantalla ÍNDICE BASAL, que indicará:

- Índice actual .500 U/H
- Inicio N.º 1 – 12:00A
- Total 24h 12.00 U

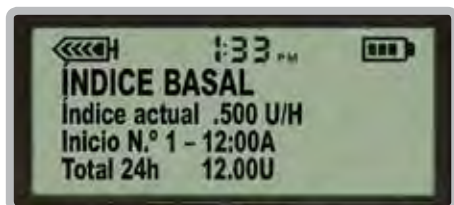

En este ejemplo, el total de 24 horas es 12.00 u. Ésta es la cantidad total de insulina basal que su bomba administrará durante 24 horas cuando el índice basal se configura en 0.500 unidades por hora.

Configurando múltiples índices basales


Ahora que aprendió a configurar un índice basal, aprenderemos a programar múltiples índices basales.

Ejercicio de práctica: Configurando múltiples índices basales


Pantalla INICIO > MENÚ PRINCIPAL > Basal

Del MENÚ BASAL:


1. Desplácese a CONFIGURACIÓN BASAL y presione **ACT**.
2. Config/editar basal estará subrayado. Presione **ACT**.
3. Aparecerá CONF ÍNDICE BASAL 1.

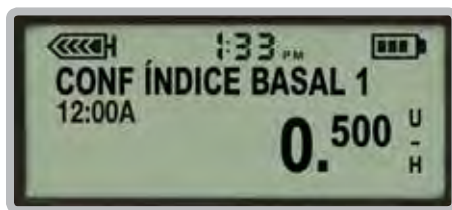


4. Presione **ACT** para confirmar que el índice 0.500 es correcto y que no desea cambiar la cantidad de ese índice.
5. Aparecerá CONF ÍNDICE BASAL 2 con guiones parpadeando en la esquina superior izquierda. Los guiones parpadeantes indican que aquí se debe programar la hora de inicio del segundo índice basal.
6. Configure las siguientes horas de inicio e índices basales con las flechas **▲** y **▼**. Presione **ACT**, para confirmar cada fecha e índice:
 - a. Hora de inicio 2: 3:00 AM Índice: 0.800 u/h

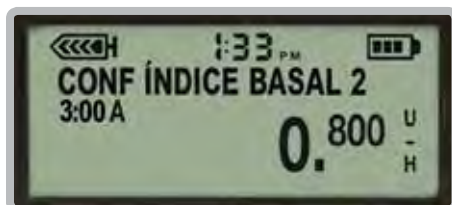

b. Hora de inicio 3: 7:00 AM Índice: 0.650 u/h

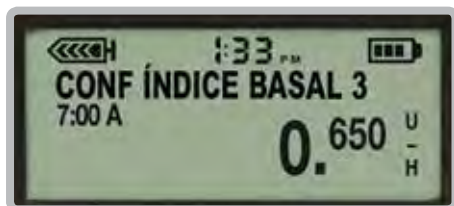

7. Cuando aparezcan los guiones para la Hora de inicio 4, presione **ACT**.
8. Aparecerá la pantalla **ÍNDICE BASAL**, que indicará el índice actual, la hora en que comenzó a administrarse el índice actual y el Total de 24 horas, que en este ejemplo es de 15.750U.

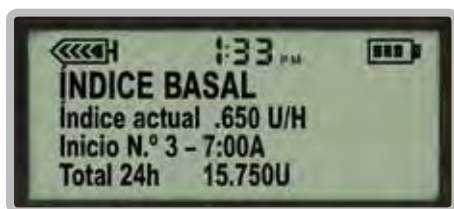

Necesitando más de un índice basal...

Cuando Mateo se inyectaba insulina, despertaba de mañana con GSs bajos. Sin embargo, si bajaba la dosis de insulina para prevenir estos bajos matutinos, tenía GSs altos más tarde en el día. Ahora que Mateo tiene su bomba de insulina, está programada para administrar menos insulina cuando duerme y más durante el día para que sus GSs no sean tan bajas cuando se despierta y que no sean tan altas durante el día cuando las necesita.

Consejo útil: La mayoría de la gente necesita más de un índice basal para obtener mejor control de su bomba. Trabaje con su proveedor de cuidado de salud para obtener sus índices basales ajustados correctamente cuando empiece terapia de bomba.



Veamos la pantalla REVISAR IND BASAL

La bomba de insulina tiene otra excelente función que le permite revisar los índices basales que ha configurado en su bomba. La pantalla REVISAR IND BASAL se encuentra en el MENÚ BASAL.

Revisemos los índices basales que acaba de ingresar.




Ejercicio de práctica: Veamos la pantalla REVISAR IND BASAL

Pantalla INICIO > MENÚ PRINCIPAL > Basal

Del MENÚ BASAL:

1. Desplácese hasta REVISAR IND BASAL y presione **ACT**.
2. Aparecerá ESTÁNDAR (revisión basal estándar), con el total de 24 horas y cada índice basal:

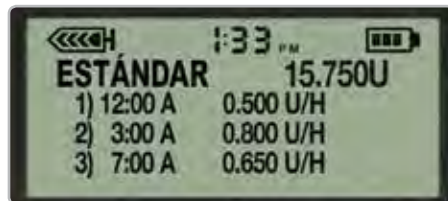

3. Presione **ESC** tres veces para volver a la pantalla INICIO.

También puede mirar la pantalla ESTADO para ver cuál es el índice basal que se está administrado actualmente. Para hacerlo:

1. Presione **ESC** en la pantalla INICIO para ver la pantalla ESTADO.
2. Desplácese **V** para ver cuál es el índice basal que se está administrando actualmente y la cantidad que se administra cada hora.

Borrando índices basales

Si desea practicar un poco más la configuración de índices basales, puede borrar el índice basal que acaba de configurar. Una vez borrado, puede repetir los ejercicios de práctica o configurar otros índices basales para repasar la programación de la bomba.




Ejercicio de práctica: Borrando índices basales


Pantalla INICIO > MENÚ PRINCIPAL > Basal

Del MENÚ BASAL:

1. Desplácese hasta CONFIGURACIÓN BASAL y presione **ACT**.
2. Config/editar basal estará resaltada.
3. Presione **ACT** para que aparezca CONF ÍNDICE BASAL 1.
4. Presione **V** hasta que el índice se configure en 0.000 u/h.

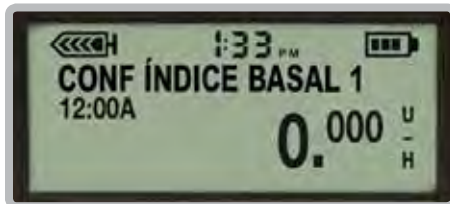

5. Presione **ACT**.
6. Cuando aparezca CONF ÍNDICE BASAL 2, presione **V** para configurar la hora en (--:--) y presione **ACT**.

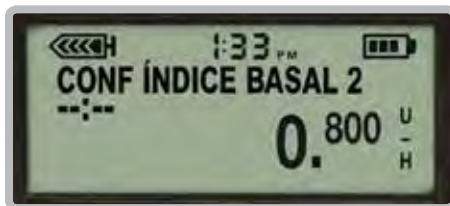

7. ÍNDICE BASAL: Aparecerá la pantalla del índice actual.

Ahora el total de 24 horas debería decir: Total 24 h 0.000U. Se han borrado sus índices basales.

Sección 9:

Administrando bolus

Un bolus puede administrarse por dos motivos: compensar alimentos que contienen carbohidratos o para corregir niveles de glucosa más altos de lo deseado.

La bomba de insulina le permite ingresar a la función de bolus de varias maneras. Esta sección explica cómo administrar un bolus con la función CONFIGURAR BOLUS del MENÚ BOLUS y el botón Bolus Express.



Ejercicio de práctica 1: Administrar un bolus de 0.5 u

Pantalla INICIO > MENÚ PRINCIPAL > Bolus

Del MENÚ BOLUS:

1. Config bolus estará subrayada. Presione **ACT**.
2. Aparecerá la pantalla CONFIGURAR BOLUS con 0.0 u parpadeando.
3. Presione **▲** 5 veces para configurar la cantidad del bolus en 0.5 u (½ unidad).
4. Presione **ACT** para confirmar la cantidad y administrar el bolus.


Por favor tenga en cuenta: Su bomba de insulina administra en incrementos de 0.025 unidades. Observe la pantalla (i.e., 0.025; 0.050; 0.075; 0.100, etc.) hasta que la mitad de unidad de insulina bolus es administrada.

Su bomba pitará una vez que haya terminado de administrar el bolus. Entonces regresará a la pantalla de INICIO.




¿SABÍA USTED QUE...?

A medida que se administre bolus, la cantidad de insulina activa que esté siendo registrada por su bomba aparecerá en la esquina de la parte baja izquierda de la pantalla.

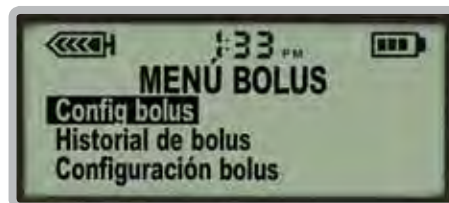

Config bolus está resaltado, presione **ACT**

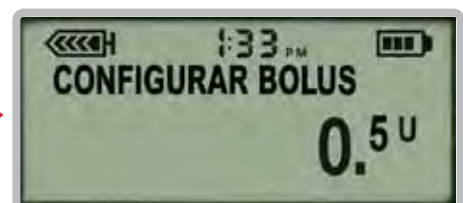

Aparece la pantalla CONFIGURAR BOLUS, 0.0 u parpadeando



NOTA La bomba suena una vez cuando comienza a administrar un bolus y emite otro sonido cuando termina. Luego vuelve a la pantalla INICIO.


Botón Bolus Express

El botón Bolus Express o **↩B**, es el método que probablemente utilizará con mayor frecuencia para administrar un bolus. Es fácil y conveniente de usar porque el botón se encuentra en el frente de su bomba de insulina.

Cuando se presiona el botón Bolus Express en la pantalla INICIO, se abre inmediatamente la pantalla CONFIGURAR BOLUS con 0.0 u parpadeando, listo para que ingrese la cantidad del bolus. Una vez activada la función Bolus Wizard,[®] utilizará el botón **↩B** para ingresar a la calculadora de Bolus Wizard.



¿SABÍA USTED QUE...?
Una vez que la función Bolus Wizard[®] esté programada y activada, no será necesario que ingrese la cantidad de insulina que se debe administrar. Simplemente ingresará su valor de glucemia y la cantidad de gramos de carbohidratos que piensa comer. La función Bolus Wizard[®] calculará por usted la cantidad de insulina que se debe administrar.

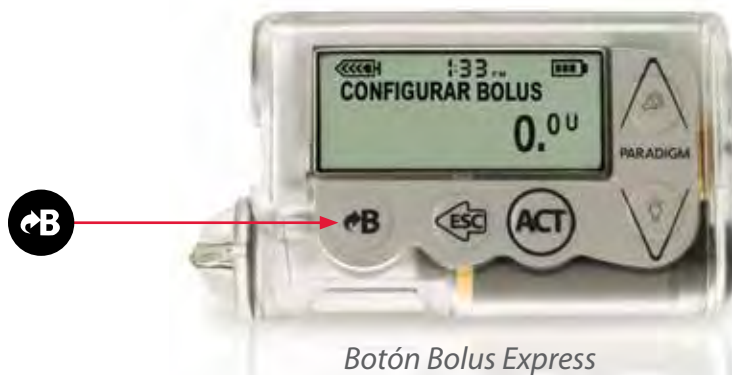

Ejercicio de práctica 1:

Utilizando el botón **↩B** para administrar un bolus de una unidad

En la pantalla INICIO:

1. Presione **↩B**. Aparecerá la pantalla CONFIGURAR BOLUS con 0.0 u parpadeando.
2. Use la flecha **▲** para configurar un bolus de 1.0 unidad (1 unidad).
3. Presione **ACT** para confirmar y administrar el bolus de una unidad.
4. Observe la pantalla mientras la bomba administra el bolus. Sonará y volverá a la pantalla INICIO cuando haya terminado.

El Bolus Wizard

La característica de Bolus Wizard calcula la cantidad de insulina bolus que usted necesita cuando ingresa su glucemia actual y el número de carbohidratos que está a punto de comer. El Bolus Wizard usa su programación individualizada prevista por su proveedor de cuidado de salud para calcular la cantidad de insulina bolus. Esta configuración incluye Ración de carbohidrato, Factor de sensibilidad de Insulina, Objetivo de GS, y Hora de insulina activa.

Al contar carbohidratos y usar el Bolus Wizard, usted podrá administrar la cantidad correcta de insulina para su comida y corrección de bolus. Esto puede ayudar a mantener sus niveles de glucosa mejor controladas.

Usando el Bolus Wizard:



Pruebe e ingrese GS

Ingrese gramos de carbohidratos que se comerán

Muestra cantidad aproximada de insulina a ser administrada

Aprenderá más sobre cómo usar el Bolus Wizard cuando conozca a sus entrenadores.

Usando el Bolus Wizard...

Larry está muy contento ya que su bomba de insulina ha hecho que el manejo de su glucosa sea más fácil. Antes de la bomba él tenía que calcular por sí mismo cuanta insulina necesitaba. Ahora, su medidor manda su GS a su bomba, el programa sus carbohidratos, y la bomba administra el bolus.

Consejo útil. Después de empezar terapia de bomba, hacer una glucometría dos horas después de los alimentos le ayudará a determinar si su configuración de Bolus Wizard es correcta. Si su GS es muy alto o muy bajo, su proveedor de cuidado de salud le puede ayudar a ajustar su programación para ayudarle a lograr un mejor control de glucosa.



Pantalla HISTORIAL DE BOLUS

La pantalla HISTORIAL DE BOLUS es una excelente función de registro. Registra la fecha, la hora, la cantidad y el tipo de cada bolus administrado. En la pantalla HISTORIAL DE BOLUS se pueden ver los últimos 24 bolus. El bolus más reciente aparece primero.

Examinemos la pantalla HISTORIAL DE BOLUS y revisemos los bolus que ha administrado.




Ejercicio de práctica 1: Viendo el Historial de bolus


Pantalla INICIO > MENÚ PRINCIPAL > Bolus

Del MENÚ BOLUS:

1. Presione **V** para resaltar Historial de bolus y presione **ACT**.

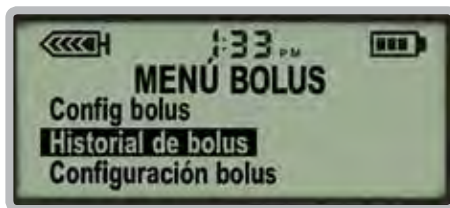

2. Aparecerá la pantalla HISTORIAL DE BOLUS.

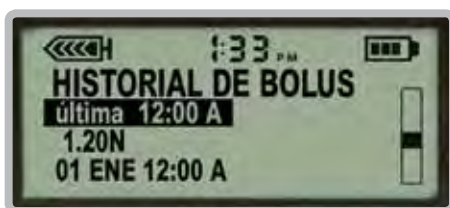

Muestra los últimos 24 bolus administrados

3. Use **V** y **^** para desplazarse y revisar los bolus que ha administrado.



¿SABÍA USTED QUE...?

Su bomba también muestra en la pantalla ESTADO el bolus más recientemente administrado. Esto permite que pueda verificar fácil y rápidamente la hora y la cantidad de su último bolus.

Para ver el bolus que se administró más recientemente en su bomba, presione **ESC** en pantalla de INICIO para ir a la pantalla de ESTADO.




¿SABÍA USTED QUE...? Para ver los últimos 250 bolus administrados en su bomba de insulina, puede cargar la información de su bomba a una computadora. El software especial en línea para el control del tratamiento de la diabetes CareLink™ Personal organiza toda la información de la bomba en informes que usted y su proveedor de servicios de salud pueden revisar.

En la pantalla DETALLE DEL BOLUS puede ver los detalles de los últimos 24 bolus.



Ejercicio de práctica 2: Viendo detalles del historial de bolus

1. Siga los pasos que se indican en la página anterior para ingresar a la pantalla HISTORIAL DE BOLUS.
2. Resalte el bolus que desea revisar y presione **ACT**.

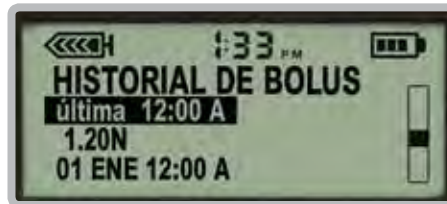

3. Aparecerán los detalles de ese bolus.



4. Presione **ESC** para volver a la pantalla HISTORIAL DE BOLUS. Para ver los detalles de otros bolus, simplemente resalte el que desee y presione **ACT**.
5. Presione **ESC** (4 veces) para volver a la pantalla INICIO.

Sección 10:

Suspendiendo la administración de insulina en su bomba

Función SUSPENDER

Aunque nunca debería interrumpir o detener la administración de insulina de su bomba durante más de una hora aproximadamente, habrá ocasiones en las que querrá poner a su bomba en SUSPENDER y desconectarla de su sitio de infusión. Entre los motivos por los que podría suspender y desconectarse de su bomba se incluyen los siguientes:

- **Para bañarse o nadar**

Generalmente se suspende el índice basal y se quita la bomba para bañarse y realizar actividades acuáticas. Los equipos de infusión están diseñados para que usted pueda desconectarse fácilmente de su bomba y del tubo, y dejarlos en un lugar seco y seguro.

Suspendiendo la bomba...

Danielle desconecta su bomba cuando va a nadar. Ella siempre suspende su bomba para que no suministre insulina mientras que no tiene la bomba adherida a su cuerpo.

Consejo útil Mientras que la bomba está suspendida, pitará y vibrará cada 15 minutos.



- **Interrumpir o detener un bolus**

Es posible que haya ocasiones en las que desee detener o interrumpir un bolus. La bomba está diseñada para permitirle interrumpir fácilmente la administración de un bolus mediante la función SUSPENDER.

Interrumpir o detener un bolus

Sam programa un bolus para almorzar, pero antes que pueda empezar a comer el teléfono timbra. Es su prima llamando de larga distancia así que Sam sabe que esta llamada va a tardar. Así que ella programa la bomba para SUSPENDER y cancelar la administración del bolus para no experimentar niveles bajos de azúcar en la sangre.



Más información sobre la función SUSPENDER

Cuando se pone la bomba en SUSPENDER, se detiene toda administración de insulina.

Insulina basal

Cuando cambie la función de la bomba de SUSPENDER y la haga CONTINUAR, la insulina basal se administrará nuevamente. **Cualquier insulina basal que no se administró mientras la bomba estaba en SUSPENDER, no se administrará.**

Insulina bolus

Cuando interrumpe un bolus, la insulina bolus que ya se administró antes de poner la bomba en SUSPENDER es la única insulina que se administrará para ese bolus. **Cuando haga CONTINUAR la administración de insulina, la cantidad de insulina bolus que no se administró antes de poner la bomba en SUSPENDER no se administrará.**



Ejercicio de práctica 1: Poner la bomba en SUSPENDER


De la pantalla INICIO:

1. Presione **ACT** para abrir el MENÚ PRINCIPAL.
2. Presione **V** para subrayar Suspende.
3. Presione **ACT**; parpadeará SUSPENDER.
4. Presione **ACT** para confirmar que desea poner la bomba en Suspende.
5. Aparecerá SUSPENDER en la pantalla de la bomba. Aparecerá la hora en que se detuvo la bomba justo por encima de SUSPENDER y el icono de alerta (círculo negro relleno) entre el icono del reservorio y la hora. Después de 30 segundos (para conservar la energía de la pila), la bomba volverá a la pantalla INICIO.



Bomba en SUSPENDER; observe el icono

6. Presione **ESC** para examinar su pantalla ESTADO. Observe que la primera información de su pantalla ESTADO le indica que la bomba está suspendida y muestra la hora en que se puso en SUSPENDER.
7. Presione **ESC** para volver a la pantalla INICIO.

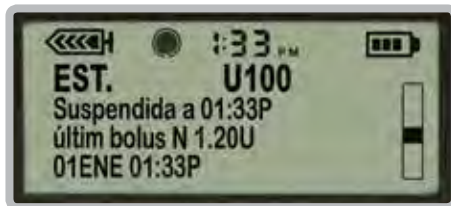


La pantalla ESTADO muestra cuándo se suspendió la bomba




Ejercicio de práctica 2: Continuar la administración de insulina basal

1. Presione **ACT** en la pantalla INICIO.
2. CONTINUAR parpadeará en la pantalla.

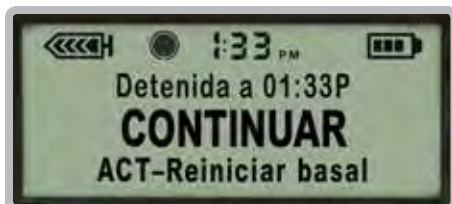

Presione **ACT** cuando la bomba esté en SUSPENDER

3. Presione **ACT** para confirmar que desea continuar la administración basal.
4. La bomba volverá a la pantalla INICIO y comenzará a administrar la insulina basal tal como se programó.

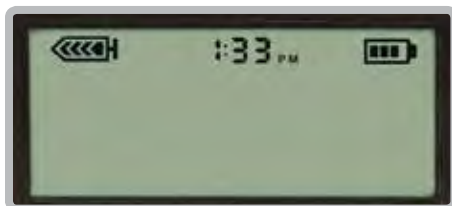

La bomba volverá a la pantalla INICIO

¡Felicitaciones! Ha utilizado satisfactoriamente las funciones SUSPENDER y CONTINUAR. Observe que ya no aparece el icono de alerta (círculo lleno negro) en la pantalla de su bomba.









NOTA Siempre que la bomba esté en SUSPENDER, el icono de alerta se mantendrá en el frente de la pantalla como recordatorio visual. La bomba también pitará o vibrará cada 15 minutos como recordatorio audible de que su bomba está en SUSPENDER y que usted no está recibiendo insulina.



Ejercicio de práctica 3: Suspender la bomba mientras se administra un bolus

En la pantalla INICIO:

1. Presione  para que aparezca la pantalla CONFIGURAR BOLUS.
2. Presione  para configurar un bolus de 5.0 u (5 unidades).
3. Presione .
4. Permita que el bolus comience a administrarse, luego presione  otra vez.
5. En el MENÚ PRINCIPAL, Suspender aparece subrayado.
6. Presione . SUSPENDER parpadeará en la pantalla.
7. Presione  otra vez.
8. La bomba está en SUSPENDER, y se ha cancelado la administración de bolus.

Para ver la cantidad exacta de insulina que se administró antes de que se suspendiera el bolus, haga CONTINUAR la administración y luego examine la pantalla ESTADO o vaya al Historial de bolus en la pantalla MENÚ BOLUS.

¡Felicitaciones! Ha finalizado satisfactoriamente su capacitación preliminar sobre su nueva bomba de insulina MiniMed Paradigm®.

Introducción al software de control del tratamiento CareLink

El software de control del tratamiento CareLink Personal es un programa de Internet que Medtronic ofrece gratuitamente. Este software le permite cargar los datos de su bomba y glucómetro a una computadora y organizarlos en informes y cuadros fáciles de leer. Estos informes le brindan un panorama general de cómo la insulina, la toma de alimentos y el ejercicio afectan el control de su glucosa.

Cuando utiliza la función Bolus Wizard® de su bomba, ésta rastrea y registra:

- Sus lecturas del glucómetro
- Los carbohidratos que ingiere
- La cantidad de insulina que se administró en cada bolus
- La hora en que se administró cada bolus

La revisión de datos de estos informes les permiten a usted y a su proveedor de cuidado de salud identificar los patrones y las tendencias de la glucosa para poder determinar si es necesario ajustar algún parámetro en la bomba.

Configure su cuenta CareLink Personal para poder cargar los datos de su bomba y medidor cada 2 ó 3 días después de comenzar a usar su bomba. Usted y su proveedor de cuidado de salud podrán revisar fácilmente la información y ajustar los parámetros de su bomba de insulina según sea necesario.

Para configurar su cuenta de CareLink Personal vaya a:

carelink.medtronicdiabetes.com



Preguntas frecuentes

Cuando aprende algo nuevo, generalmente surgen preguntas. Esta lista incluye algunas preguntas frecuentes. Si desea, tome nota de cualquier otra pregunta que tenga para hacérsela a su instructor certificado del producto.

¿Dónde debo usar mi bomba?

Dónde y cómo usar la bomba son preguntas frecuentes entre nuevos usuarios de la bomba. La mayoría de las personas descubre que usar una bomba de insulina no representa ningún problema y que se puede usar de varias formas. Probablemente le lleve sólo uno o dos días encontrar las formas de uso que le resultan más convenientes. A continuación encontrará algunas ideas que le ayudarán.

- Use el clip que viene con la bomba y abróchelo al cinturón o a una faja en la cintura
- Coloque la bomba (con o sin el clip) en el bolsillo del pantalón
- Guárdela en el bolsillo de la camisa
- Llévela en el sostén
- Utilice un tubo más largo y coloque la bomba en un calcetín

¿Dónde puedo colocar la bomba cuando duermo?

- Abróchela a la cintura del pantalón de pijama
- Abróchela a la camisa de la pijama o guárdela en el bolsillo
- Colóquela junto a usted en la cama o debajo de la almohada

Medtronic Diabetes ofrece accesorios que pueden brindarle más comodidad, protección y disimular su bomba. Para más información, consulte a nuestro sitio de Internet www.medtronicdiabeteslatino.com y contacte a su representante local de Medtronic. Vea otras opciones en sitios de Internet como Kangaroo Pump Pockets (bolsillos/cangureros) y accesorios únicos.

¿Y cuándo hay intimidad?


Otra pregunta frecuente es qué hacer con la bomba durante la intimidad. Conversar sinceramente con su pareja generalmente resuelve cualquier inquietud que pueda tener. Algunas personas simplemente optan por dejar la bomba en su lugar. Otros optan por utilizar el tubo más largo que les permite colocar la bomba en un lugar más alejado. Otra idea es desconectarse temporalmente de la bomba y el tubo. Simplemente recuerde que desconectarse de la bomba durante períodos prolongados puede tener como consecuencia niveles altos de glucosa que podrían llevar a Cetoacidosis diabética. Por lo tanto, siempre asegúrese de volver a conectar la bomba después de tener intimidad.

¿Debo quitarme la bomba antes de someterme a radiografías?

Si debe someterse a una radiografía, tomografía computarizada, resonancia magnética (MRI), o cualquier otro procedimiento que lo exponga a radiación o campos magnéticos, quítese la bomba antes de ingresar al área de radiación o campo magnético.

Los equipos de infusión con cánula como Quick-Set,[®] Silhouette[®] y mio[™] se pueden dejar colocados durante el procedimiento. Sin embargo, los equipos de infusión que utilizan una aguja en lugar de una cánula para infundir insulina (como Sure-T[®] y Polyfin[®]) se deben quitar antes del procedimiento.

Si accidentalmente su bomba de insulina se ve expuesta a un fuerte campo magnético como una resonancia magnética, interrumpa su uso y comuníquese con su representante local o la oficina de Medtronic.

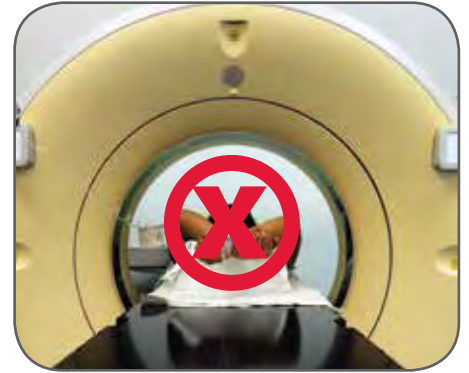

¿Se puede usar la bomba al pasar por los controles de seguridad de un aeropuerto?

Usted puede usar su bomba de insulina al pasar por un sistema de seguridad común como los detectores de metal del aeropuerto. No mande sus aparatos por la máquina de rayos x. Medtronic ha conducido una serie de pruebas oficiales sobre los efectos de escáners de cuerpo completo en los aeropuertos y los equipos médicos de Medtronic y se ha encontrado que algunas de las escáners pueden incluir rayos x. Para evitar remover sus equipos, usted puede requerir un proceso de revisión alternativo. Si usted elige pasar por un escáner de cuerpo completo en el aeropuerto, debe remover su bomba de insulina y sensor CGM (sensor y transmisor).



Imprima y complete la información en una tarjeta de emergencia de aeropuerto y cárguela con usted.

Notifique a los agentes de seguridad que hacen las revisiones que usted tiene diabetes, que usted usa una bomba de insulina y que porta sus suministros con usted. Dado que las normas de viaje están sujetas a cambio, es aconsejable verificar con la administración de Seguridad del Transporte (TSA, Transportation Safety Administration) antes de viajar. Los pasajeros internacionales deberían consultar a sus aerolíneas particulares para conocer las normas internacionales. En la siguiente página se incluyen algunos consejos útiles relacionados con los viajes en Estados Unidos.

Consejos para viajar con bombas de insulina y suministros

- Avise al personal de seguridad que usted tiene diabetes y que usa una bomba de insulina. Dígales que lleva consigo insulina y otros suministros.
- No es necesario que se quite la bomba. La bomba no activará los detectores de metal ni éstos dañarán su bomba.
- No haga pasar la bomba por equipos de rayos x.
- Si tienen alguna pregunta, dígales que inspeccionen visualmente la bomba en lugar de quitársela del cuerpo. (Recuerde que si debe quitarse o levantarse la ropa para mostrar su bomba, puede solicitar que lo inspeccionen en privado).
- Ya no es suficiente mostrar un certificado médico como comprobante de necesidad médica al transportar jeringas. Para abordar un avión con jeringas y otros dispositivos de administración de insulina, debe presentar un frasco de insulina que tenga una etiqueta pre impresa de un profesional o farmacia que identifique claramente el medicamento.
- Nunca guarde la insulina en el equipaje, ya que puede estar expuesta a temperaturas extremas. El calor o frío extremos pueden hacer que la insulina pierda su eficacia.
- Abordar un avión con lancetas está permitido si las lancetas tienen tapa y se llevan junto a un glucómetro que tenga el nombre del fabricante grabado en relieve.



Consejos generales para viajar

- Empaque insumos adicionales, como reservorios, equipos de infusión, pilas y tiras reactivas para la determinación de cetonas. Lleve los suministros, la insulina y una prescripción con usted, por si acaso se pierde su equipaje o se desnaturaliza su insulina.
- Empaque comprimidos de glucosa o carbohidratos para el tratamiento de la hipoglucemia (glucosa baja). En caso de que los vuelos se demoren o se cancelen, lleve alimentos adicionales que sean fáciles de transportar, como barras nutritivas.



¿Cuándo debería llamar a la línea de ayuda disponible las 24 horas?

Medtronic Diabetes ofrece una línea de ayuda disponible las 24 horas de día que cuenta con personal técnico de servicio altamente capacitado y especializado. Estos técnicos están a su disposición para ayudarle con cualquier duda o pregunta técnica que pueda tener acerca del funcionamiento de su bomba.

Ejemplos de cuándo podría necesitar llamar a la línea de ayuda:

- Si le preocupa que la bomba no esté funcionando correctamente.
- Si lee acerca de una función de la bomba en la Guía del usuario que no comprende y necesita ayuda.
- Si ha sonado una alarma de su bomba, y usted ha seguido las instrucciones para desactivar la alarma pero ésta vuelve a sonar.



El número de la línea de ayuda se encuentra en la parte posterior de su bomba.

La línea de ayuda 24/7 de Medtronic está disponible en la mayoría de los países de América Latina. También puede contactar a su representante local o visitar nuestro sitio <http://medtronicdiabeteslatino.com/contacto.php>

¿Cuándo debería llamar a mi proveedor de servicios de salud?

Pregúntele a su proveedor de servicios de salud cuándo, con qué frecuencia y en qué circunstancias debería comunicarse con él. Por lo general, los proveedores revisarán su información de glucosa con más frecuencia cuando comience el tratamiento con la bomba por primera vez. Esto les permite ajustar los parámetros de su bomba. Una vez ajustados, la mayoría de los proveedores de servicios de salud le pedirán que siga un esquema de seguimiento de rutina. Ejemplos de otras situaciones en las que debería comunicarse con su proveedor de cuidado de salud son:

Hipoglucemia (GS de menos de 70 mg/dL)

- Cualquier episodio grave de hipoglucemia que requiera la asistencia de otra persona para tratar el descenso de la glucemia, o cualquier episodio que cause la pérdida del conocimiento.
- Hipoglucemia frecuente
- Hipoglucemia que se produce casi a la misma hora todos los días o que habitualmente se produce después de ciertas actividades (como pasar la aspiradora o lavar el auto)
- Hipoglucemia que se produce después o durante el ejercicio



Hiperoglucemia (GS por encima de su nivel deseado máximo o superior a 250 mg/dL)

- Hiperoglucemia que es frecuente o persistente
- Hiperoglucemia que se acompaña de náuseas o vómitos
- Hiperoglucemia y presencia de cetonas
- Hiperoglucemia que se produce casi a la misma hora todos los días o habitualmente después de ciertos eventos (como comer).

Como siempre, cuando tenga la glucemia alta o baja, siga las instrucciones que se indican en el capítulo "Pautas de seguridad" del cuaderno de ejercicios "Información básica sobre el tratamiento con bomba de insulina".

Folletos de entrenamiento

Esta sección contiene información que será cubierta en su entrenamiento de inicio con la bomba. Este contenido es intencionado como repaso de post entrenamiento únicamente.



IMPORTANTE Por favor **NO** realice los pasos que se indican en esta sección hasta después de haberse reunido con su proveedor de cuidado de salud o instructor de bomba certificado.




Para programar un Índice basal individual:




1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.
Presione **ACT**.


2. Desplácese a **Configuración basal**.
Presione **ACT**.

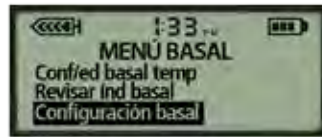

3. **Config/editar basal** está seleccionado.
Presione **ACT**.

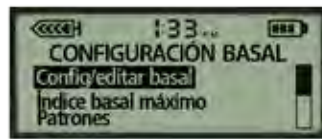


4. Use **▲** para programar la cantidad basal.
Presione **ACT**.

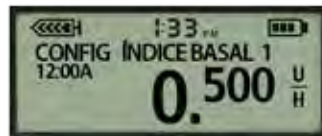

5. Presione **ACT** otra vez para ignorar **CONF HORA INICIO 2**.

6. Aparece la pantalla de **ÍNDICE BASAL**, que muestra el índice actual (u/h); hora de inicio del índice y total en 24 hr.

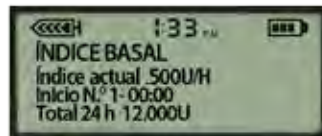


Para cambiar un Índice basal:

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.
Presione **ACT**.

2. Desplácese a **Configuración basal**. Presione **ACT**.


3. **Config/editar basal** está seleccionado.
Presione **ACT**.

4. Use las flechas para cambiar la cantidad de índice basal. Presione **ACT**.

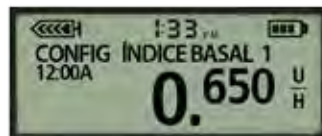

5. Presione **ACT** otra vez para ignorar **CONF HORA INICIO 2**.

6. Aparece la pantalla de **ÍNDICE BASAL** con el nuevo índice basal (u/h); hora de inicio del índice total en 24 hr.

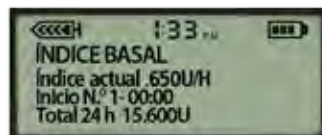

Para agregar un Índice basal:


1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.
Presione **ACT**.

2. Desplácese a **Configuración basal**. Presione **ACT**.


3. **Config/editar basal** está seleccionado.
Presione **ACT**.

4. Presione **ACT** para confirmar **ÍNDICE BASAL 1**.


5. Use las flechas para **CONF HORA INICIO 2**.
Presione **ACT**.

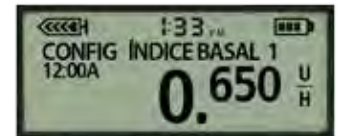


6. Use las flechas para **CONF ÍNDICE BASAL 2**.
Presione **ACT**.

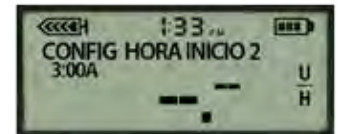

7. Repita pasos 5 y 6 según sea necesario.
Presione **ACT** para ignorar la última **CONF HORA INICIO**.

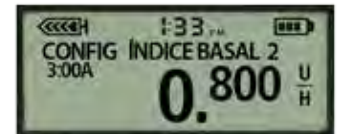


8. Aparece la pantalla de **ÍNDICE BASAL** que muestra el índice actual (u/h); hora de inicio del índice y total en 24 hr.

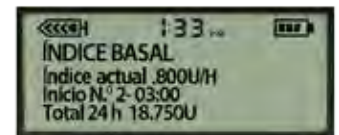


Para revisar Índice(s) basal(es):

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.
Presione **ACT**.

2. Seleccione **Revisar índ basal**.
Presione **ACT**.

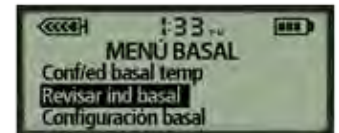

3. **ESTÁNDAR** y total de 24 horas aparece en la línea de arriba. Abajo están los índices basales programados, mostrando la hora de inicio y unidades por hora de cada una.

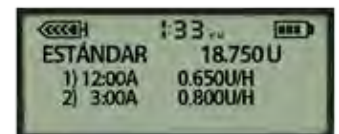

Nota: Las configuraciones mostradas son únicamente con propósito ilustrativo — sus configuraciones serán diferentes.

Índice basal temporal

Esta función le permite incrementar o reducir inmediatamente su índice basal, por el periodo temporal que programe. Principalmente cuando ejercita y se enferma.


Para programar tipo de basal temporal:

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.

Presione **ACT**.


2. Desplácese a **Configuración basal**.

Presione **ACT**.

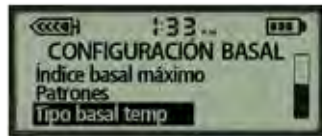

3. Desplácese a **Tipo basal temp**. Presione **ACT**.

4. Seleccione **Índice basal (U/H)** o **Porcentaje de basal**. Presione **ACT**.

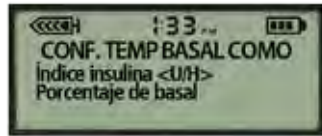


Para programar índice basal temporal:

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.

Presione **ACT**.

2. **Conf/ed basal temp** está subrayado.

Presione **ACT**.

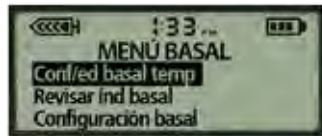

3. Use **▲** para programar duración de tiempo.

Presione **ACT**.



4. Use las flechas para **CONFIG TEMP BASAL U/H** o **CONFIG TEMP BASAL %**. Presione **ACT** para iniciar índice basal temp.

5. Un círculo abierto en la parte superior de la pantalla y una alerta por hora indica que basal temp está trabajando.




Para cancelar índice basal temporal:

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.

Presione **ACT**.

2. Seleccione **Cancelar basal temp**.

Presione **ACT**.

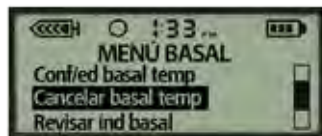

3. El círculo abierto desaparecerá cuando basal temp ha sido cancelado.

Patrones

Esta función permite pre-programar tres índices basales diferentes para facilitar cambios de horario de rutina (ej.: día de semana vs. fin de semana; día vs. turno nocturno, etc.).

Para iniciar patrones (On):

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.

Presione **ACT**.

2. Seleccione **Configuración basal**.



Presione **ACT**.

3. Seleccione **Patrones**.

Presione **ACT**.

4. Seleccione **On**.

Presione **ACT**.

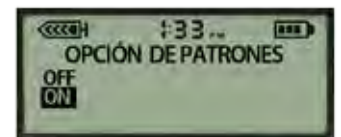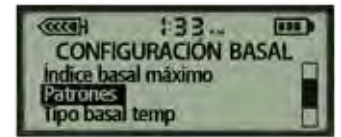

Para programar patrones basal:

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.


Presione **ACT**.

2. Desplácese a **Configuración basal**. Presione **ACT**.

3. **Config/editar basal** está subrayado. Presione **ACT**.

4. Subraye **Patrón A**.

Presione **ACT**.

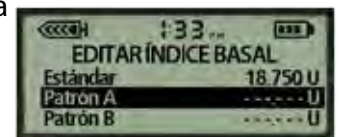


5. Use **▲** a **CONF ÍNDICE BASAL 1**. Presione **ACT**.

6. Configure otras horas o índices según sea necesario O Presione **ACT**.

7. Aparece pantalla **ÍNDICE BASAL A**. El círculo abierto en la parte superior de la pantalla indica que **Patrón A** está activo.

Presione **ESQ**.

8. Repita pasos 3 a 7 para configurar **Patrón B**.

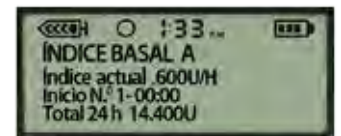

Para escoger patrón basal:


1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.

Presione **ACT**.

2. Desplácese a **Selección patrones**.

Presione **ACT**.


3. Subraye el patrón que quiere iniciar. Presione **ACT**.

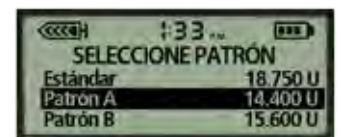

Para activar el Bolus Wizard (On):




1. De **MENÚ PRINCIPAL**, seleccione **Bolus**.
Presione **ACT**.

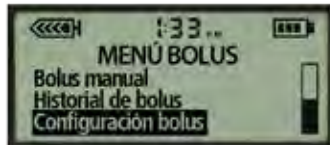


2. Desplácese a **Configuración bolus**.
Presione **ACT**.


3. Seleccione **Conf. Bolus Wizard**.
Presione **ACT**.

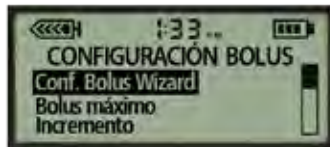


4. Seleccione **Editar config.**.
Presione **ACT**.

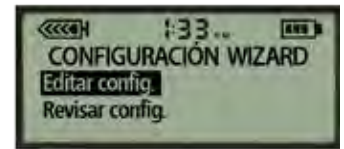

5. Aparece la pantalla de **EDITAR CONFIG.**.
Presione **ACT**.

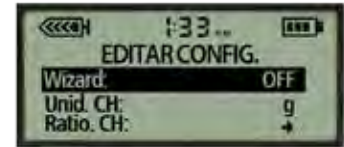


6. Seleccione **ON**.
Presione **ACT**.

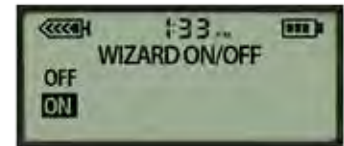


Continúe a la sección siguiente para programar la configuración.

Para programar configuraciones:


1. Seleccione **Unid. CH**.
Presione **ACT**.

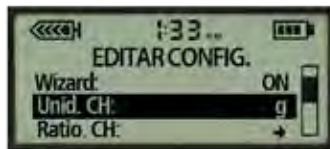


Seleccione **Gramos**.
Presione **ACT**.

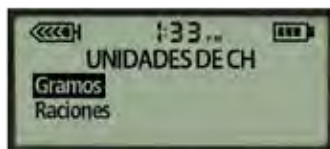


2. Seleccione **Ratio CH**.
Presione **ACT**.

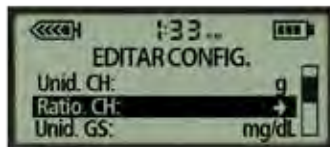


Use las flechas para configurar **Ratio**.
Presione **ACT**. Para omitir **CONF. HORA DE INICIO** presione **ACT** otra vez.

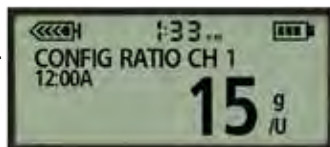


3. Seleccione **Unid. GS**.
Presione **ACT**.

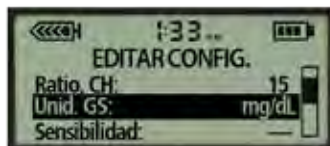


Seleccione **mg/dL**.
Presione **ACT**.

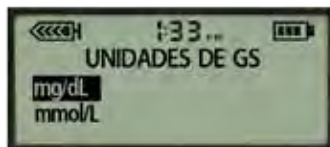


4. Seleccione **Sensibilidad**.
Presione **ACT**.

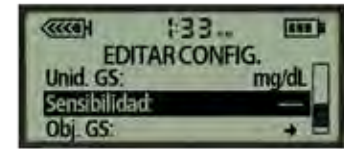


Use las flechas para programar **Sensibilidad**.
Presione **ACT**. Para omitir **CONF. HORA DE INICIO 2** presione **ACT** otra vez.

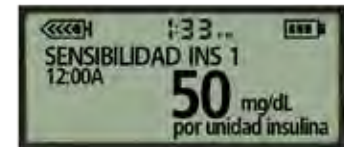


5. Seleccione **Obj. GS**.
Presione **ACT**.

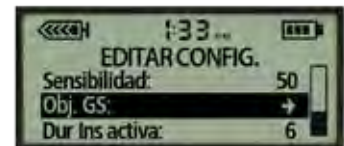

Use las flechas para configurar **Objetivo** Bajo y Alto.
Presione **ACT** después de cada uno. Presione **ACT** otra vez para omitir **CONF. HORA DE INICIO 2**.

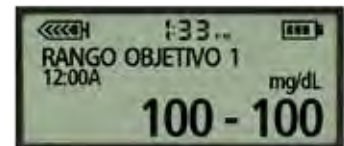

6. Seleccione **Dur Ins Activa**.
Presione **ACT**. Use las flechas para programar **Hora**. Presione **ACT**.


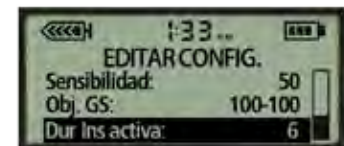


Presione **ESC**.
Configuración de Bolus Wizard está completa.





Suministrando bolus de comida y de corrección:

1. Presione **Ⓟ**. Examine GS. Si usa un medidor adherido presione **Ⓜ**. **○**, use las flechas para ingresar su GS. Presione **Ⓜ**.
2. Use **⬆** para ingresar los gramos de carbohidrato. Presione **Ⓜ**.
3. Revise los detalles. Presione **Ⓜ**.
4. Confirme la cantidad de bolus (cámbiela si es necesario). Presione **Ⓜ** para suministrar.

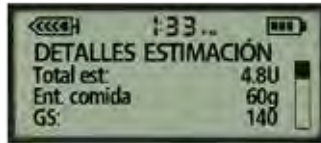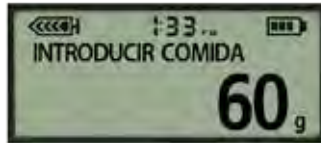



Suministrando corrección de bolus (no comida):

1. Presione **Ⓟ**. Examine su GS. Si tiene un medidor adherido presione **Ⓜ**. **○**, use las flechas para ingresar su GS. Presione **Ⓜ**.
2. Deje en cero los gramos de carbohidrato. Presione **Ⓜ**.
3. Revise los detalles. Presione **Ⓜ**.
4. Confirme cantidad de bolus (cambie si es necesario). Presione **Ⓜ** para suministrar.

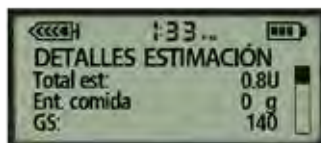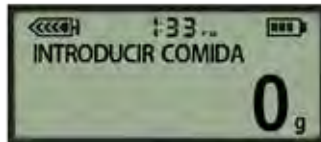




Suministrando un Bolus de comida (no GS):

1. Presione **Ⓟ**. Deje los guiones en la pantalla de **INTRODUCIR GS**. Presione **Ⓜ**.
2. Use **⬆** e ingrese gramos de carb. Presione **Ⓜ**.
3. Revise los detalles. Presione **Ⓜ**.
4. Confirme la cantidad de bolus (cambie si es necesario). Presione **Ⓜ** para suministrar.

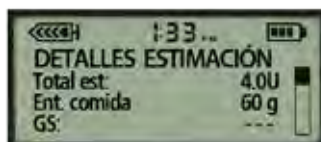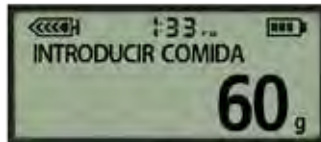



Para revisar el Historial de bolus:

1. Presione **Ⓜ**. Seleccione **Bolus**. Presione **Ⓜ**.
2. Desplácese a **Historial de Bolus** y Selecciónelo. Presione **Ⓜ**.
3. Use las flechas para revisar boluses suministrados.

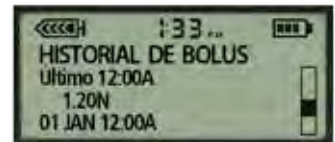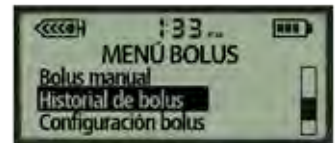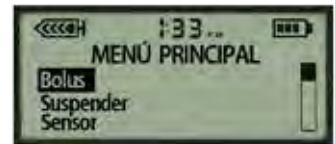



Para editar configuración de Bolus Wizard:

1. Presione **Ⓜ**. Seleccione **Bolus**. Presione **Ⓜ**.
2. Desplácese a **Configuración bolus**. Presione **Ⓜ**.
3. Seleccione **Conf. Bolus Wizard**. Presione **Ⓜ**.
4. Seleccione **Editar Config**. Presione **Ⓜ**.
5. Seleccione la configuración que quiera editar. Presione **Ⓜ**.
6. Cambie el valor. Presione **Ⓜ**.

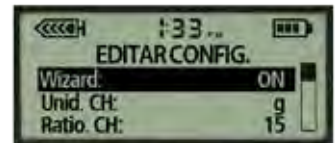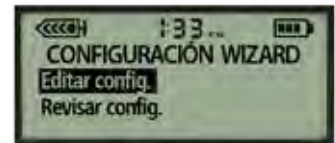


Para revisar configuraciones de Bolus Wizard

1. Presione **Ⓜ**. Seleccione **Bolus**. Presione **Ⓜ**.
2. Desplácese a **Configuración bolus**. Presione **Ⓜ**.
3. Seleccione **Conf. Bolus Wizard**. Presione **Ⓜ**.
4. Seleccione **Revisar config**. Presione **Ⓜ**.
5. Use las flechas para desplazarse y revisar las configuraciones.

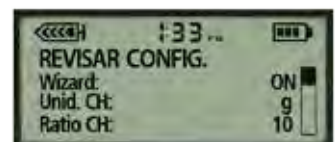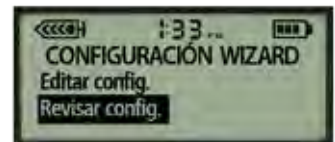

Nota: Las configuraciones mostradas son únicamente con propósito ilustrativo — sus configuraciones serán diferentes.





Para rebobinar el pistón de la bomba:

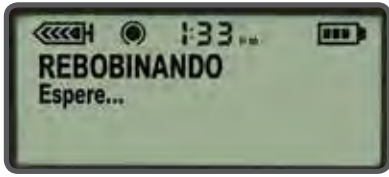


1. Lávese las manos. Remueva el equipo de infusión viejo de su cuerpo y el reservorio de la bomba.
2. Vaya a **Reservorio + Eq.Infus** en **MENÚ PRINCIPAL**, después elija **Config. reservorio** para abrir la pantalla de **REBOBINAR**. Presione **ACT** para rebobinar.

Para llenar el reservorio:


1. Remueva el reservorio del paquete.
2. Jale el émbolo hacia abajo para llenar el reservorio con aire.
3. Después de limpiar con alcohol la parte superior de la ampolleta de insulina, sostenga el guardia de transferencia azul y presiónelo en la ampolleta.
4. Use el pulgar para empujar el aire del reservorio en la ampolleta. Continúe empujando el émbolo hacia abajo.

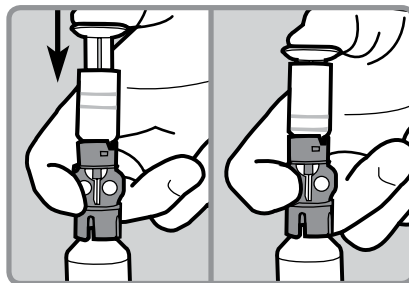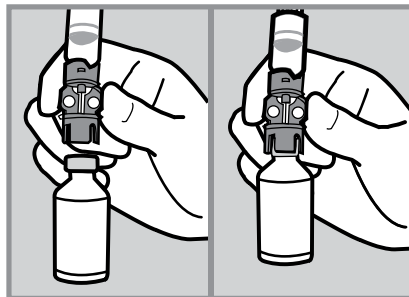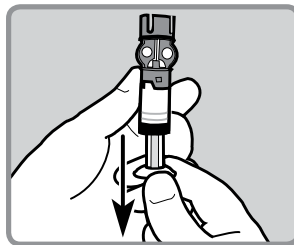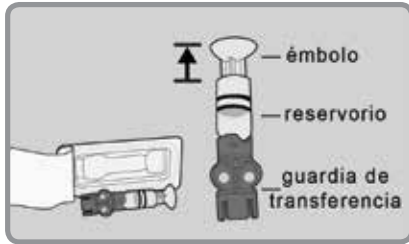


5. Siga empujando el émbolo mientras voltea la ampolleta (ampolleta arriba y reservorio abajo). Suelte el émbolo. Empuje lentamente el embolo para llenar el reservorio de insulina.

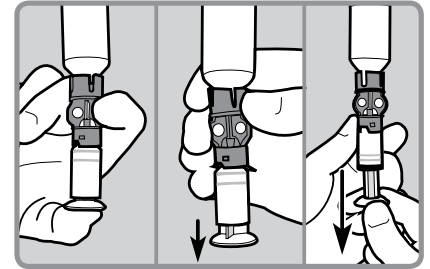


6. Revise la existencia de burbujas en el reservorio. Golpee ligeramente un lado del reservorio para forzar a las burbujas de aire que salgan a la parte de arriba del reservorio. Empuje el émbolo hacia arriba para sacar las burbujas de la ampolleta de insulina.

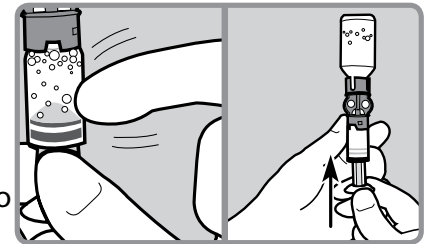


7. Después de remover las burbujas de aire, jale el émbolo de nuevo para llenar el reservorio con suficiente insulina para 2 a 3 días.

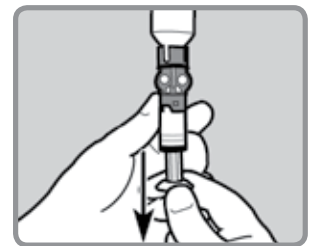


8. Voltee la ampolleta para que quede abajo. Sostenga el guardia de transferencia azul con una mano. Con la otra mano voltee el reservorio en dirección contra reloj y jálelo de forma recta hacia arriba hasta que lo desconecte del guardia de transferencia azul. Desconecte el guardia de transferencia azul y deséchelo en un recipiente de agujas.

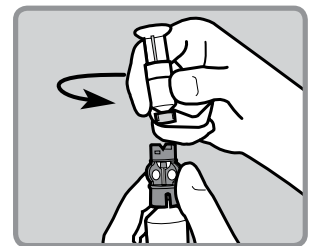


Para conectar el tubo:

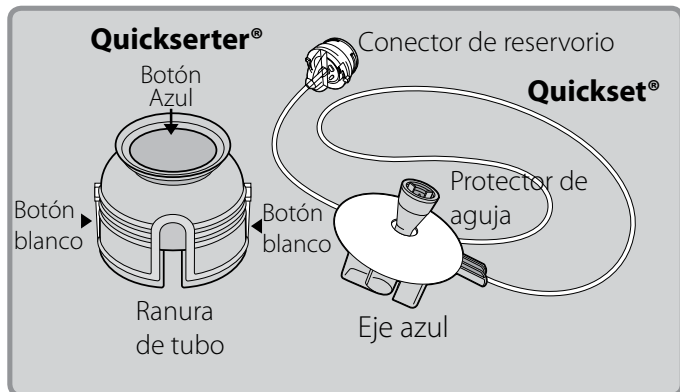



1. Remueva el Quickset del paquete. Sostenga el reservorio con una mano. Con la otra mano empuje sutilmente el conector en la parte de arriba del reservorio y de vuelta en dirección a las manijas del reloj hasta que se desplace y se ajuste en su lugar.

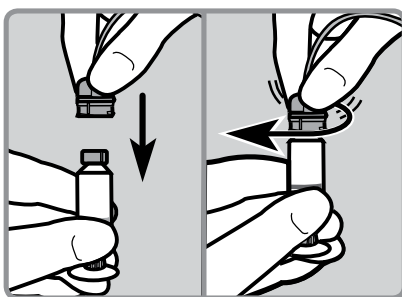

2. Golpee ligeramente un lado del reservorio para forzar a que cualquier residuo de burbujas de aire suban. Empuje el émbolo hasta que las burbujas se salgan y haya algo de insulina en el tubo.

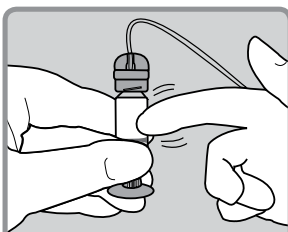


3. Voltee el émbolo en dirección en contra de las manillas del reloj hasta que se desenrosque del reservorio. Tenga cuidado de no sacar el émbolo del reservorio o la insulina se derramará.

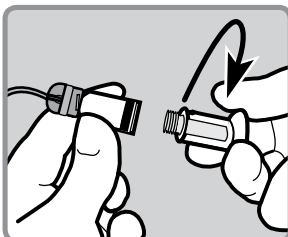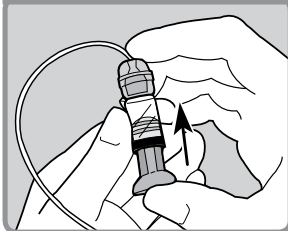


Para llenar el tubo:



1. Presione **ACT**, aparece **REBOBINANDO COMPLETO**. Inserte el reservorio nuevo en la bomba.

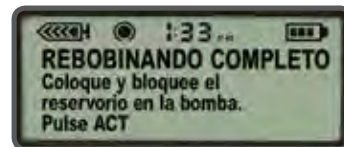


2. Dé vuelta a la derecha al reservorio para que se ajuste en su lugar.

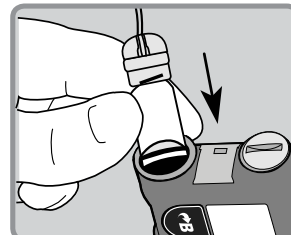


3. Presione **ACT** para ver la pantalla de **LLENAR TUBO**. Asegúrese que el equipo de infusión **NO** esté conectado a su cuerpo. Después seleccione **Sí** y presione **ACT**.

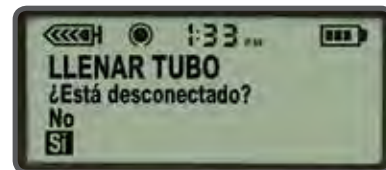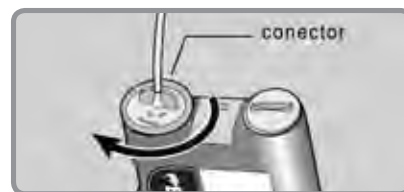



4. Presione y siga presionado **ACT** para llenar el tubo. La bomba pitará conforme se valla llenando el tubo. Suelte **ACT** cuando vea gotas en la punta del conector de la aguja. Después presione **ESC** una vez.

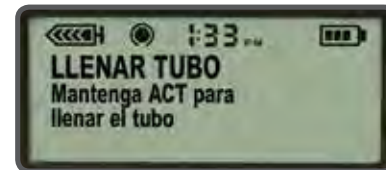

5. Si ve gotas al final de la aguja Quickset® y no hay burbujas de aire en el tubo, seleccione **Sí** y presione **ACT**.

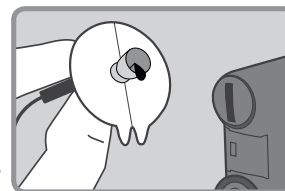


6. Cuando la pantalla de **LLENAR CÁNULA** aparezca, usted está listo para insertar el equipo de infusión Quickset®.

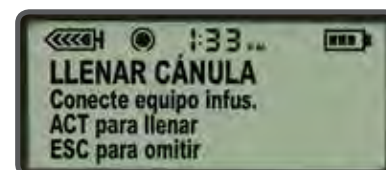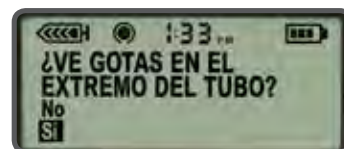

Para preparar el Quickserter®:


1. Coloque el eje azul del Quickset® en el dispositivo de inserción Quickserter®. La manija y el tubo deben de estar alineado con la ranura del Quickserter®.

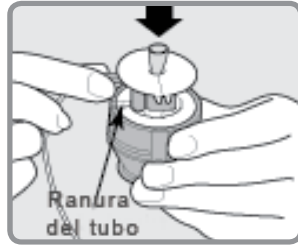

2. Use dos dedos para asegurar el Quickset® dentro del serter, pero no lo empuje hasta abajo. Tenga cuidado de no presionar el botón azul o el Quickset® no va a ajustarse dentro del serter.




3. Levante el papel adhesivo.

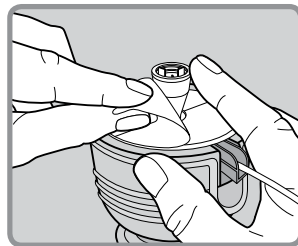

4. Jale el botón azul hacia abajo hasta que escuche clic. Tenga cuidado de no presionar los botones blancos a los lados del serter.




Elija una área de inserción:

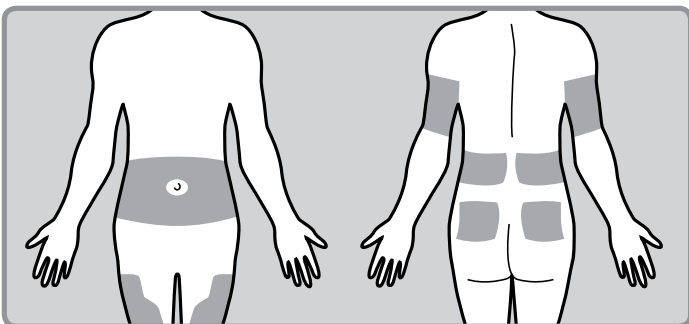


Las mejores áreas del cuerpo para el equipo de infusión son las áreas sombreadas en este dibujo.

Para insertar el equipo de infusión Quickset®:


1. Limpie el área de inserción con alcohol u otro antiséptico.

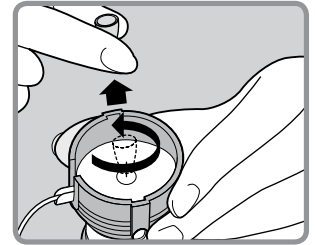


2. Remueva el protector de la aguja dando vueltas cuidadosamente para aflojarlo y levantándolo para que la aguja del Quickset® quede expuesta.

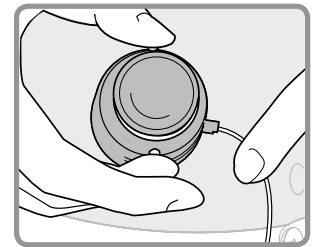


3. Sostenga el serter en el área del cuerpo que ha sido preparada y localice los dos botones blancos del serter.

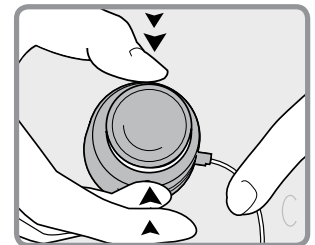


4. Presione los dos botones blancos al mismo tiempo. Si no se presionan al mismo tiempo el Quickset® no se insertará apropiadamente.

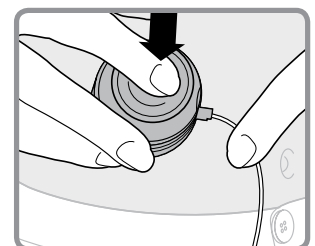

5. Presione hacia abajo la parte de arriba del botón azul del serter para desprender el Quickset® del serter.


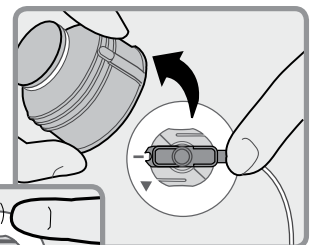


6. Retire el serter del cuerpo. Presione el adhesivo seguramente en la piel.

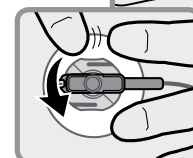


Para insertar el equipo de infusión Quickset®:

7. Con una mano, coloque los dedos en el Quickset®. Con la otra mano sostenga la manija azul y jale en forma recta para remover la aguja.

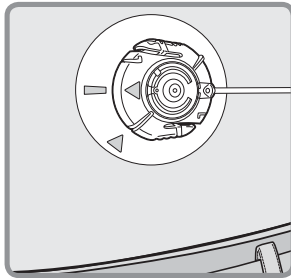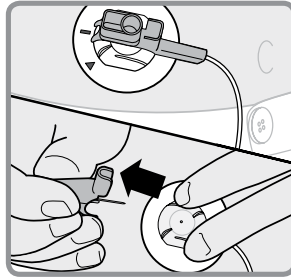


8. Doble la manija azul a la mitad hasta que se ajuste en su lugar. Deseche en un recipiente para agujas.

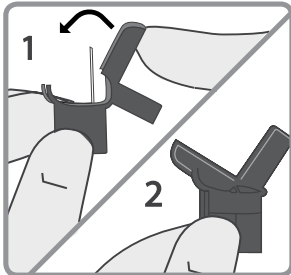


Para llenar la cánula:


1. Si la bomba ha regresado a la pantalla **INICIAL**, presione **ACT**. En la pantalla de **LLENAR CÁNULA**, presione **ACT**.

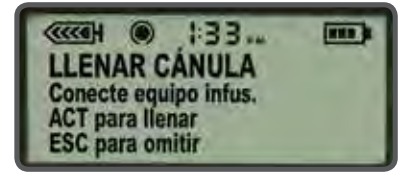

2. Para llenar una cánula vacía debajo de la piel presione **^** para introducir 0.3 unidades de insulina (si está usando una cánula de 6mm) ó 0.5 unidades (para una cánula de 9mm). Presione **ACT**.

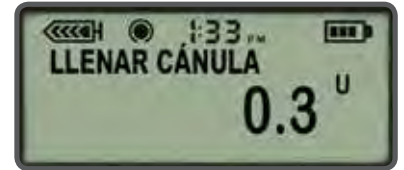

OR

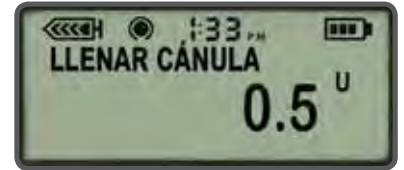

Monitoreo de glucosa

Horario para ajustar la programación de la bomba



Cuando primero empieza terapia de bomba o cada vez que la bomba necesite ajuste de programación:

- **Cheque su glucosa (GS).**
 - **Cuando despierte.**
 - **Antes de cada alimento.**
 - **2 horas después de cada alimento.**
 - **Al Acostarse.**
 - **A media noche o cada 3 a 4 horas durante la noche.**
- **No coma entre comidas.**

Revise su GS a estas horas provee la información necesaria para ajustar y afinar la programación.

Horario para monitoreo de rutina

Una vez que la programación de la bomba este ajustada correctamente y sus niveles de glucosa estén estables, establezca una rutina que incluya siempre revise su GS:

- **Cuando se despierte.**
- **Antes de cada comida.**
- **Al acostarse.**
- **Ocasionalmente a media noche.**
- **Cheque más frecuentemente cuando viaje, en momentos de estrés, y enfermedad.**



Tratando niveles de baja glucosa sanguínea

Como tratar niveles bajos/moderados

Regla de 15

Si su GS baja a menos de 70 mg/dL:

1. **Coma 15 gramos de carbohidrato de acción rápida.**
2. **Revise su GS en 15 minutos.**
3. **Si su GS está todavía más bajo de 70 mg/dL, repita pasos 1 y 2 cada 15 minutos hasta que su GS esté en rango.**

Artículos que contienen 15 gramos:

- 3 a 4 tabletas de glucosa.
- 5 jelly beans (dulces de goma).
 - 4 oz jugo o soda (no dieta).
 - 8 oz leche (baja en grasa o sin grasa).
 - 1 Cucharada de azúcar o miel.

Si su GS es más bajo de 50 mg/dL, empiece tratamiento comiendo 20 a 30 gramos de carbohidratos.

Como tratar bajos severos

Conserve un estuche de Emergencia con Glucagón a la mano en caso de que ocurra una baja severa. Glucagón se puede suministrar por inyección para aumentar los niveles de glucosa si usted no es capaz de comer o tomar o tratar una baja, o si está inconsciente.



Un miembro de la familia, compañero de trabajo, o amigo debe de estar instruido en cómo administrar glucagón.

Tratando altos niveles de glucosa sanguínea

La mayoría de los niveles altos se pueden bajar rápidamente dándose un bolus de corrección.

Si alta GS es más baja de 250mg/dL

1. Programe la lectura de GS en su bomba.
2. Permita que la característica Bolus Wizard® calcule la cantidad de bolus de corrección.
3. Confirme la cantidad de bolus y presione el botón de ACT para suministrar.
4. Verifique otra vez su GS en 1 hora para asegurarse que su GS está de nuevo en rango de objetivo.

Nunca ignore lecturas altas de GS. Siempre consulte el Bolus Wizard para ver si debe administrar bolus de corrección.

Si su GS es más alto de 250 mg/dL — REVISE SI HAY CETONAS

Si el examen de cetonas es negativo:

1. Programe GS en la bomba/consulte Bolus Wizard para ver si necesita dosis de corrección.
 - Use la bomba para darse dosis de corrección.
2. Verifique otra vez su GS en 1 hora
 - Si GS empieza a bajar, continúe monitoreando hasta que sea normal.
 - Si GS es el mismo o más alto:
 - Dése dosis de corrección usando una jeringa.
 - Cambie sitio de infusión, quipo de infusión, reservorio, e insulina.
 - Continúe checando su GS cada hora hasta que sea normal.

Si el examen de cetonas es positivo:

1. Tome su dosis de corrección usando una jeringa.
2. Cambie sitio de infusión, equipo de infusión, reservorio, e insulina.
3. Solucione problemas con la bomba.
4. Cheque su GS cada 1 ó 2 horas. Suministre bolus de corrección según sea necesario.
5. Tome líquidos sin carbohidratos.
6. Si su GS continúa en aumento o si tiene cetonas moderadas a altas, náusea, vómito, o dificultad al respirar, notifique a su médico o vaya a la sala de emergencia más cercana a usted.

Prevención de DKA (Cetoacidosis Diabética)

Guía para días que enferme

Enfermedad y/o infección generalmente causa que GS sea más alta de lo normal. Por lo tanto, el riesgo de desarrollar DKA aumenta cuando está enfermo.

Ya que los síntomas de DKA son similares a la gripa, catarro e infección estomacal, cheque su GS y revise por cetonas con frecuencia durante la enfermedad.

- **Cheque GS cada 2 horas.**
- **Cheque orina por cetona cada vez que orine.**
- **Nausea o vómito:**
Cheque cetonas inmediatamente.
- **Notifique al médico si cetonas son moderadas o altas.**

También, considere usar una taza basal temporal para incrementar temporalmente su insulina basal. Incrementar insulina basal ligeramente puede ayudar a mantener su GS en mejor control cuando esté enfermo.

Como checar cetonas

Las Cetonas son un desecho que se produce cuando el cuerpo es forzado a usar grasa en lugar de glucosa como fuente principal de combustible (debido a la falta de insulina).




Para checar cetonas:

1. Coleccione una muestra de orina.
2. Sumerja la tira de cetona en su orina.
3. Compare el color indicador en la tira con la guía de color en la botella.

Altas Inexplicables que no bajan con una corrección de bolus pueden ser causadas por equipo de infusión mal puesto o doblado o una ampollita de insulina débil. Vea el Apéndice en "Información básica sobre el tratamiento con bomba de insulina" para resolver problemas.


Alertas

Si la bomba está operando y administrando insulina usando una característica y condición especial tal como una programación basal temporal, pila baja, o bajo volumen de reservorio, hará un bip y vibrará para recordarle que está operando en una modalidad Especial (un círculo abierto aparecerá en la pantalla de la bomba).

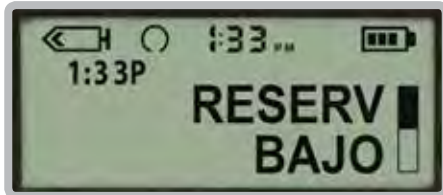

Reservorio bajo

LA INSULINA RESTANTE EN EL RESERVORIO ESTA BAJO. Cambie lo más pronto posible.

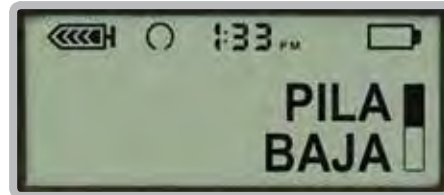


Pila baja

QUEDA MENOS DE 10% DE VIDA DE LA PILA Reemplace lo más pronto posible, siempre antes de irse a dormir.

Alarmas

Su bomba tiene una sofisticada red de chequeos de seguridad y sistemas. Si la bomba no está administrado insulina porque ha sido puesta en SUSPENDER u otra condición ha ocasionado que la bomba se detenga, la bomba sonará una alarma o vibrará periódicamente para notificarle que no está recibiendo insulina. Un círculo negro cerrado aparecerá en la pantalla como recordatorio de esta condición.

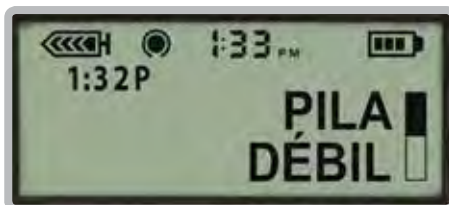

Pila débil

LA PILA NO ESTA CARGADA COMPLETAMENTE. La bomba operará, pero la vida de la pila será más corta de lo normal.



Reservorio vacío

CAMBIE EL RESERVORIO inmediatamente.



Prueba fallida de pila



PILA DEMASIADO DÉBIL PARA OPERAR LA BOMBA. Instale una pila nueva.



No hay infusión


BLOQUEO DETECTADO: administración de insulina detenida. Revise azúcar en la sangre y cetonas.

Aclarando Alertas y Alarmas

Cuando su bomba hace bip o vibra le notifica que una condición de alerta existe, lea y siga las instrucciones en la pantalla. Presione , luego  para silenciar una alerta. Revise la pantalla de ESTATUS para determinar que causó la alerta.

Posibles problemas con la pila

Problema	Solución
<p>Pantalla en blanco</p> 	<p>Revise y asegúrese que la pila esta puesta correctamente.</p> <p><i>Recuerde, el lado negativo (plano) debe estar en la parte de abajo de la bomba.</i></p>
<p>Pila débil</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Puede que haya instalado una pila que ha sido usada por un corto plazo de tiempo. • Puede aclarar este mensaje y continuar, pero es posible que la pila no dure tanto como una pila nueva. • Aclare la alerta presionando el botón de ESC, y después el botón de ACT. • La pantalla de INICIO debe aparecer. <p><i>Recuerde, si esto ocurre, la bomba aparecerá normalmente pero la vida de la pila puede ser más corta de lo esperado.</i></p>
<p>Prueba fallida de pila</p> 	<p>Reemplace la pila. Ocasionalmente las pilas nuevas están dañadas.</p> <p>Si todavía no ve la pantalla de INICIO, llame la línea de ayuda 24/7 de Medtronic, disponible en la mayoría de los países de América Latina. También puede contactar a su representante local o visitar nuestro sitio http://medtronicdiabeteslatino.com/contacto.php</p> <p><i>Recuerde, necesitará proveer su número de serie de la bomba. El número de serie de su bomba se encuentra en la pantalla de ESTATUS de la bomba o en la parte de atrás de la bomba.</i></p>

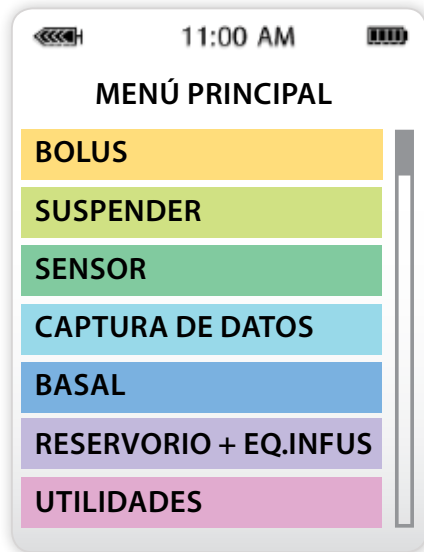

Navegación

Pulse el botón **ACT** del MENÚ PRINCIPAL para acceder a los submenús.

Pulse el botón **ESC** en una pantalla del submenú para volver al MENÚ PRINCIPAL.

Barra de desplazamiento (aparece si se dispone de más texto en la pantalla)


Pulse **▼** para desplazarse hacia abajo y visualizar el texto de pantalla adicional.

Pulse **▲** para desplazarse hacia arriba.


Nota: Todas las pantallas sólo son ejemplos. Las pantallas reales dependen de las funciones que estén activas. Las flechas azules (▶) indican submenús.

1. Sólo aparece si está desactivada la función Bolus Wizard®.

2. Sólo aparece si está activada la función Bolus Wizard®.



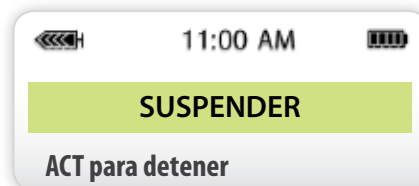


3. Sólo aparece si hay comunicación entre el sensor y la bomba y se ha inicializado el sensor.

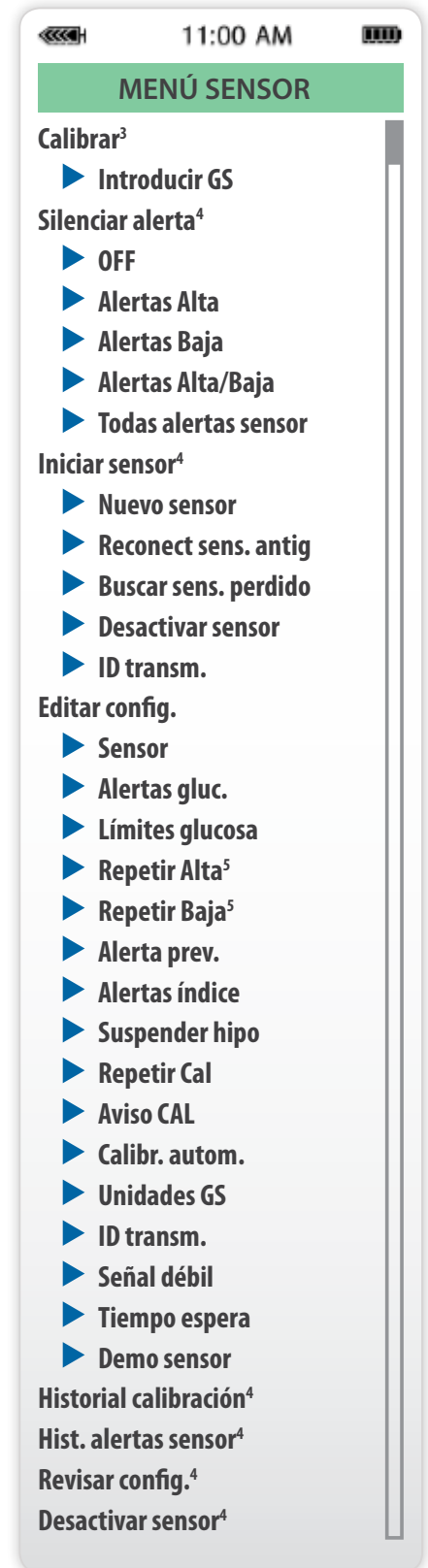


4. Aparece si el sensor está activado.

5. Aparece si está activada la función Alertas gluc.

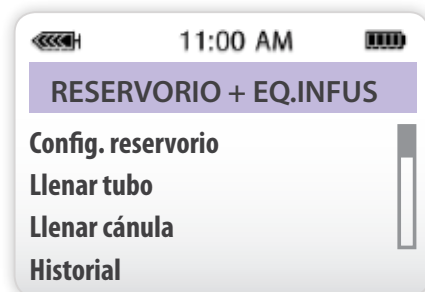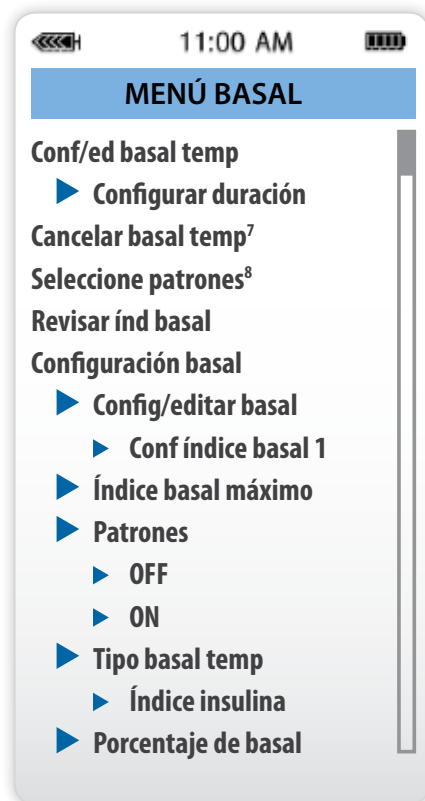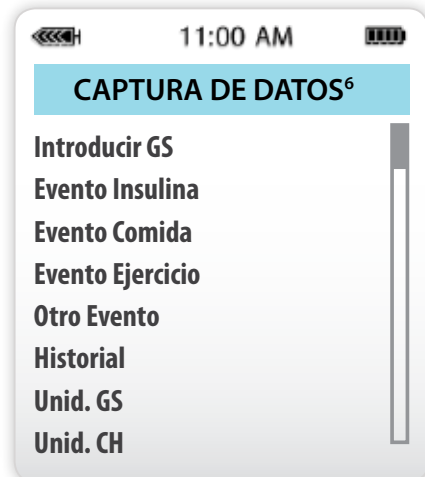

6. Aparece si está activada la Opción de captura de datos en el menú utilidades.

7. Sólo aparece tras ajustar una basal temporal.

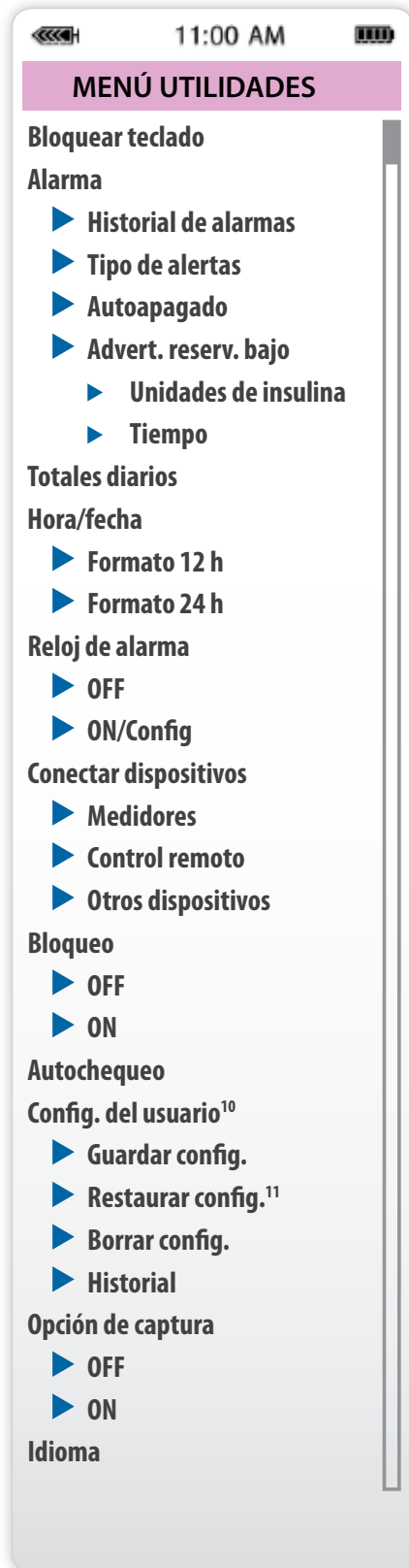


8. Sólo aparece si está activada la función Patrones.

9. Sólo aparece tras un rebobinado.


Pantallas de estado

Pulse el botón **ESC** para acceder a la pantalla ESTADO DEL SENSOR.

PANTALLA DE ESTADO DE LA BOMBA



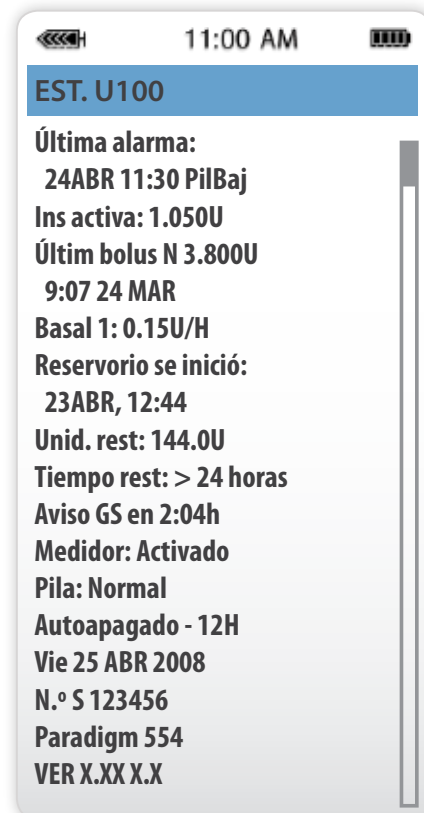



PANTALLA DE ESTADO DEL SENSOR

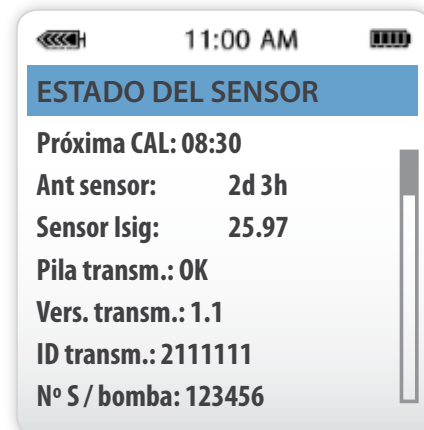

10. Sólo aparece si mantiene pulsado **⏪** y pulsa **ACT**.

11. Sólo aparece después de guardar los ajustes de los patrones.


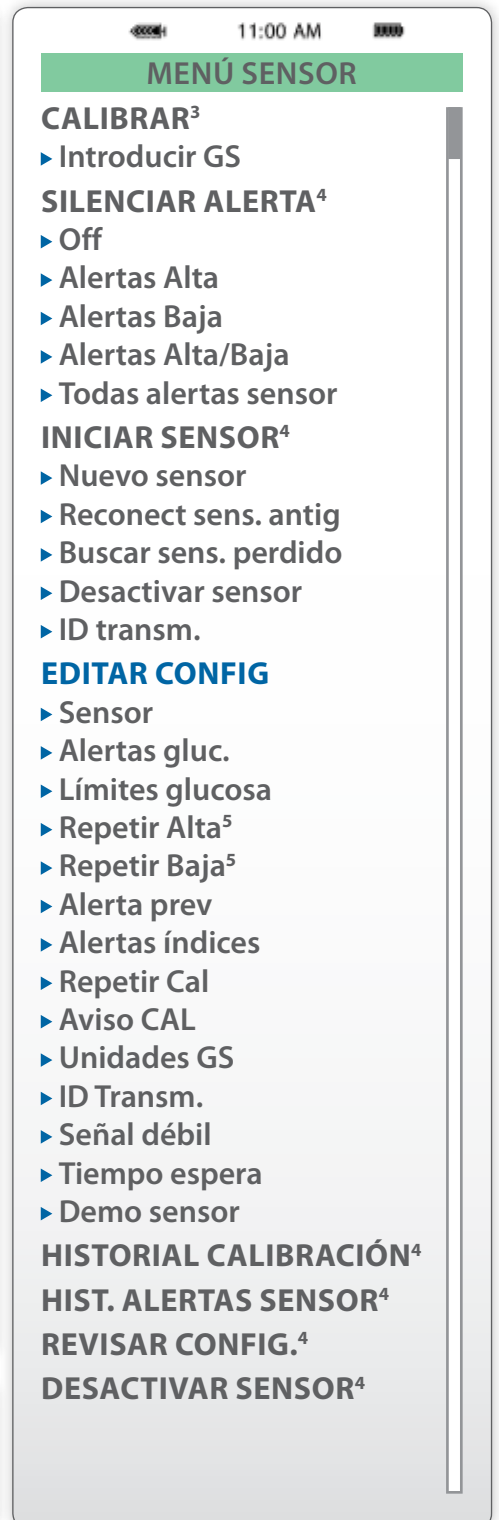
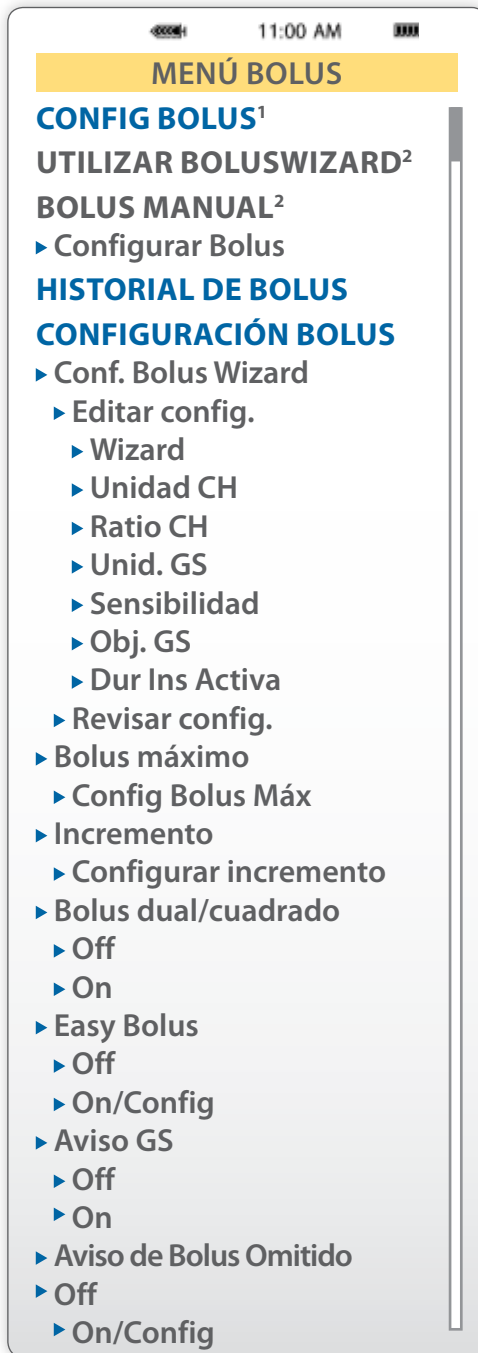
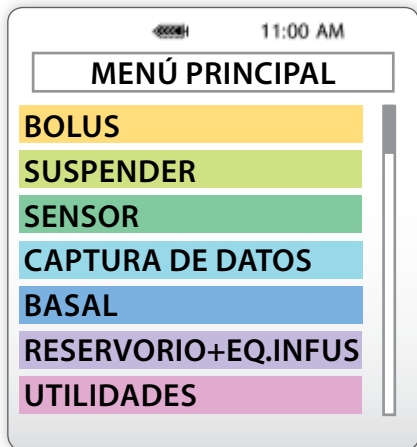


 **NOTA** Todas las capturas de pantalla son sólo ejemplos. Capturas actuales dependen de las funciones actuales activas. (▶) flechas azules indican submenús.




¹ Sólo se muestra cuando Bolus Wizard® está off.
² Sólo se muestra cuando Bolus Wizard® está on.


³ Sólo se muestra cuando el sensor se está comunicando con la bomba.
⁴ Sólo se muestra si Sensor está on.
⁵ Sólo se muestra si la opción de Alerta de Glucosa está on.

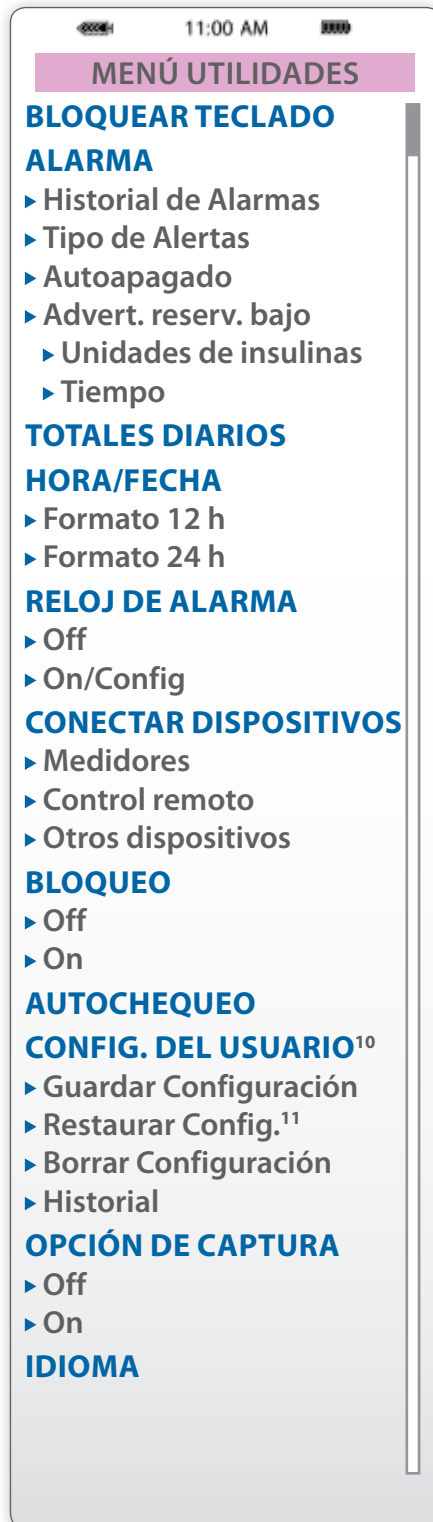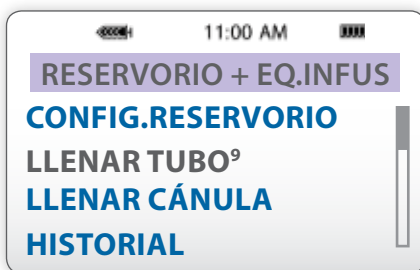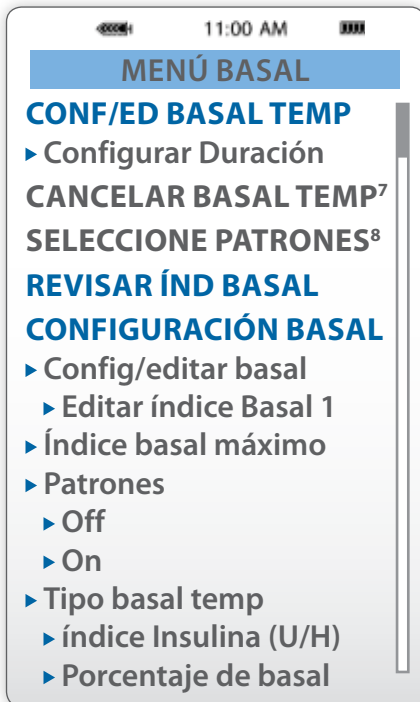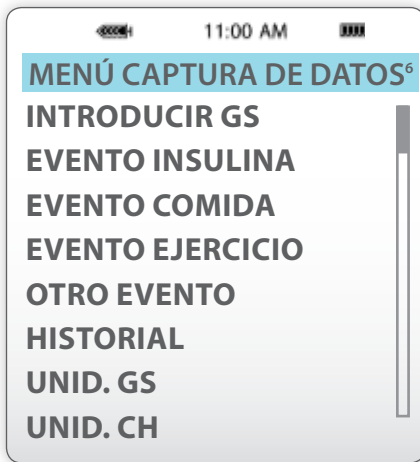


Pantalla de Estado

Presione  para ir a la pantalla de ESTADO DEL SENSOR.

Pantalla de Estado de la Bomba

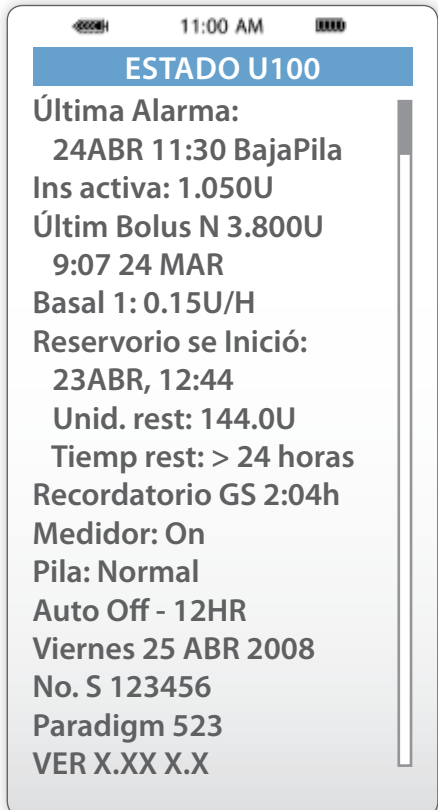

Pantalla de Estado de Sensor

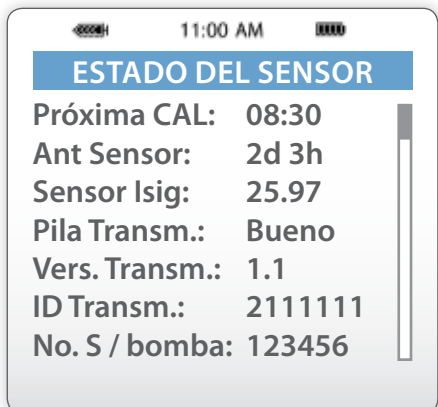

⁶ Se muestra si Opción de Captura está On en el Menú de Utilidades.

⁷ Se muestra sólo después de configurar Basal Temp.

⁸ Se muestra sólo cuando la característica de Patrones está On.

⁹ Se muestra sólo después de Rebobinar.

¹⁰ Se muestra sólo cuando usted presiona y sostiene  y presiona .

¹¹ Se muestra sólo después que las configuraciones del paciente han sido guardados.

Notas
