

BAYER

Glucofacts[®]

DELUXE

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LA DIABETES



- Visualización de las lecturas del medidor
- Visualización de diversos informes
- Personalización de la configuración del medidor

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para uso con el medidor CONTOUR USB[®] de Bayer

Informes de GLUCOFACTS[®] DELUXE

Tendencias de seguimiento



Conecte el medidor al puerto USB de su ordenador para visualizar los informes. Primero se mostrará el cuaderno de registro. Los vínculos que se encuentran en la parte superior de la pantalla le permitirán elegir uno de los varios estilos de informes disponibles.

Puntos destacados de los informes:

- Si pasa el ratón sobre una lectura del informe cuaderno de registro, podrá ver los detalles de dicha lectura.
- Puede ver **Día estándar** o **Semana estándar** (que muestran los resultados de días o semanas combinados).
- Puede ver las **Tendencias**.
- En la parte inferior de cada informe se muestran más análisis de datos. Los resultados se identifican por color según estén por encima, por debajo o dentro del intervalo objetivo.

Los resultados del análisis se mostrarán en colores.

= Por encima del intervalo objetivo

= Intervalo objetivo

= Por debajo del intervalo objetivo

Configurar su medidor CONTOUR[®] USB

- GLUCOFACTS[®] DELUXE realizará una verificación de Java, ya que funciona con este programa. Si es necesario, se le indicará que actualice su versión de Java[®] desde el sitio web de Java.
- Si no tiene conexión a Internet, vaya a la carpeta Java en el medidor CONTOUR[®] USB y haga doble clic en el archivo de esa carpeta para instalar la actualización de Java.
- Después de actualizar Java, desconecte el medidor y vuelva a insertarlo para reiniciar GLUCOFACTS DELUXE.
- La primera vez que utilice GLUCOFACTS DELUXE, deberá leer el Acuerdo del usuario final que se muestra en pantalla. Si está de acuerdo, haga clic en el botón "Acepto" para finalizar la instalación.

Para usuarios de Mac:

- En el escritorio podrá ver dos unidades: "Glucofacts" y "CONTOUR USB".**
- Haga clic en la unidad Glucofacts (se abrirá una ventana de buscador que mostrará el contenido o los archivos de la unidad).**
- Haga clic en el archivo Glucofacts para ejecutar el programa GLUCOFACTS DELUXE. La próxima vez que desee utilizar GLUCOFACTS DELUXE, lo encontrará en su carpeta de aplicaciones.**

Utilizar el programa GLUCOFACTS[®] DELUXE



Inicio rápido

El inicio rápido le permite comenzar a realizar análisis con muy pocos ajustes de configuración. Sólo necesita ajustar la fecha y la hora de su medidor. El medidor se pondrá en modo de "sólo carga" si no configura la fecha y la hora.

Siga las indicaciones de la pantalla de su ordenador para acceder rápidamente al programa GLUCOFACTS[®] DELUXE.

Informes de GLUCOFACTS[®] DELUXE

Ejemplo del informe cuaderno de registro

Mañana 0:00 - 8:00				Mediodía 8:00 - 16:00				Tarde 16:00 - 0:00			
Sin marca				Sin marca				Sin marca			
								83			
			219			119		146		100	
			86			195		130		171	
			63			103				111	
								82			


Imprimir informes

Si ha configurado GLUCOFACTS DELUXE en impresión automática, su informe se imprimirá automáticamente. Cuando esté visualizando un informe, puede hacer clic en el botón (Imprimir) de la pantalla del informe para que se imprima en su impresora de Windows[®].

Para crear un archivo de Adobe[®] Acrobat[®] (.pdf) para enviarlo de forma más sencilla a su profesional sanitario, haga clic en el botón (PDF).

Informes de GLUCOFACTS[®] DELUXE

Ejemplo de un gráfico circular de un informe resumen

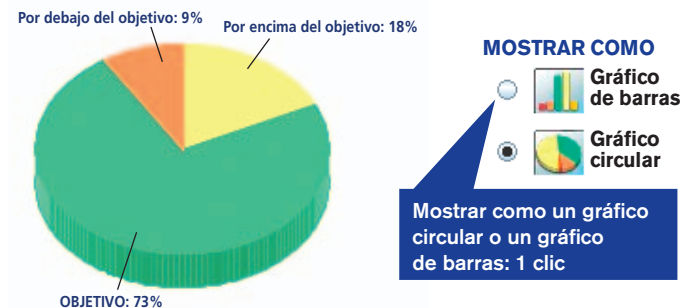

- Los intervalos objetivo pueden cambiarse en "Preferencias de configuración".
- Los resultados (en porcentaje) se muestran en un gráfico circular o de barras.
- A la izquierda, se muestra un Resumen de Datos con la cantidad de lecturas, las lecturas mínimas (mín.) y máximas (máx.), el promedio de análisis por día (promedio) y otra información.
- El Análisis de Datos que se encuentra en la parte inferior del informe incluye promedios, marcadores para antes de comer y después de comer, y lecturas registradas como dentro del intervalo objetivo o por encima o por debajo del intervalo objetivo.
- Para visualizar más datos, sólo debe hacer clic en el botón Cambiar intervalo de fechas que se encuentra en el lado derecho de la pantalla.

SCHAWK!		1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000	Art Production	<i>All Images/Codes are FPO</i>	FONTS Helvetica, Times, Berthold Azkidenz Grotesk	COLORS  PROCESS CYAN  PROCESS MAGENTA  PROCESS YELLOW  PROCESS BLACK
DATE:	April 13, 2010		New Layout - Glucofacts Deluxe QSG Alt#1 - 3.31.10 - Copy/Image changes Alt#2 - 4.8.10 - Copy/Image changes Alt#3 - 4.12.10 - Copy changes Alt#4 - 4.13.10 - Copy changes			
CLIENT:	Bayer Health Care					
PROJECT NAME:	Glucofacts Deluxe QSG - Spain					
SCHAWK JOB#:	488980C05					
BAN#:	82845268 Rev. 3/10					
SKU#:	N/A					
PAGE SIZE:	9.5" (H) x 11.25" (W)					
UPC CODE:	N/A					
V-4						
LANGUAGE(S): SPANISH			NOTE: THIS COLOR PROOF INDICATES COLOR BREAK ONLY AND MAY NOT ACCURATELY REFLECT ACTUAL PRODUCTION COLOR			

Configurar su medidor

Con GLUCOFACTS® DELUXE puede cambiar fácilmente la configuración de su medidor. Mientras esté visualizando sus informes, haga clic en las pestañas Información del medidor, Detalles de perfil o Preferencias de configuración que se encuentran cerca de la parte superior de la pantalla:

Personalice las vistas de sus tendencias de glucemia.

Información del medidor

- La configuración predeterminada de su medidor es de 14 días (promedio). Sin embargo, puede cambiarlo a 7 días o 30 días en la pantalla Información del medidor.
- Su medidor está preconfigurado con un valor de hipoglucemia (baja glucemia) de 70 mg/dL y de hiperglucemia (glucemia alta) de 250 mg/dL. Estos son valores predeterminados, pero usted y/o su profesional sanitario pueden personalizarlos en la pantalla Información del medidor.
- En esta pantalla también puede personalizar otras configuraciones del medidor, como el sonido, AutoLog, y la fecha y hora. Si AutoLog está activado, puede cambiar sus marcadores de antes y después de comer.

Personalizar informes


Detalles del perfil

- Ingrese su nombre y fecha de nacimiento (no es obligatorio).

Preferencias de configuración

- Personalice la configuración de sus informes de GLUCOFACTS® DELUXE.
- Puede cambiar sus intervalos objetivo, el número de períodos (de 2 a 5 períodos por día) y la hora de inicio y finalización de cada período.

Para ajustar los rangos, haga clic en el control deslizante y muévelo con el ratón o haga clic en los botones + o -.

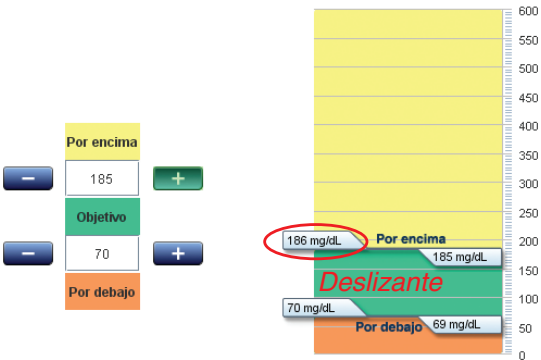

Ayuda ?

Haga clic en el botón ? desde cualquier pantalla para obtener ayuda en línea. Encontrará instrucciones paso por paso para muchas funciones. En www.diabetes.bayer.es también está a su disposición la Guía del usuario.

Si no encuentra la ayuda que necesita o si tiene alguna pregunta sobre su medidor, Bayer HealthCare Diabetes Care ofrece apoyo técnico para problemas con GLUCOFACTS® DELUXE de Bayer. Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Bayer Diabetes Care al 900 100 117.

Para visualizar o imprimir su informe después de guardarlo como PDF, necesitará Adobe Reader. No es necesario para visualizar o imprimir desde el programa GLUCOFACTS® DELUXE. Si no tiene Adobe Reader, puede descargarlo de www.adobe.com.

Sitio web de CONTOUR® USB

En la pantalla Inicio, haga clic en  para acceder al sitio web de CONTOUR USB.



Aproveche al máximo su medidor. ¡Regístrese hoy mismo!

- Actualizaciones del programa: descargue las últimas actualizaciones para su medidor.
- Todos los nuevos accesorios: sepa cuándo estarán disponibles los nuevos accesorios para su medidor.

Personalizar GLUCOFACTS® DELUXE

- Haga clic en el botón  para personalizar otras configuraciones de la aplicación:
- Puede detectar de forma automática si el medidor está conectado. La configuración predeterminada detectará el medidor y mostrará las lecturas. Puede configurar la impresión automática de sus informes.
 - Puede personalizar el número de días que desea incluir en sus informes impresos.
 - Puede cambiar el idioma de la aplicación GLUCOFACTS® DELUXE.
- Nota: No se modificará el idioma del medidor.

Bayer HealthCare

Distribuido por:
Química Farmacéutica Bayer, S.L.
Diabetes Care
Av. Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despi,
Barcelona / Espana
Tel.: 900 100 117
Web: www.diabetes.bayer.es

 Bayer Consumer Care AG
Postfach
4002 Basel, Switzerland



Bayer y la cruz de Bayer son marcas comerciales registradas de Bayer AG. CONTOUR y GLUCOFACTS son marcas comerciales de Bayer HealthCare LLC. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

Bayer

© 2010 Bayer
82845268 Rev. 03/10