

Familiarización con su Micro Voice Amp



Carga

Debe cargar completamente Micro Voice Amp antes de usarlo por primera vez. La batería tarda 6 horas en cargarse y durará alrededor de una semana si se utiliza 8 horas al día.

Conecte el cargador al puerto en el lateral de Micro Voice Amp y compruebe que el diodo de carga parpadee en verde (funcionamiento correcto).

- Guía para diodo de carga**
- Verde:** la batería está cargada.
 - Verde intermitente:** la batería se está cargando.
 - Naranja intermitente:** la batería tiene poca carga.
 - Rojo intermitente:** la batería se quedará sin carga en breve.



La versión en .pdf más reciente de esta Guía del usuario se puede descargar de www.toby-churchill.com

Micro Voice Amp

Guía del usuario



MMVAUSER1_ES

Bienvenido a Micro Voice Amp

Micro Voice Amp es para las personas con una voz débil o cansada, o que usan la voz de forma intensiva.

La caja contiene

- 1 Micro Voice Amp
- 2 Cargador
- 3 Clip para el cinturón y correa para la cintura ya montados
- 4 Guía del usuario
- 5 Micrófono (**micrófono de casco telefónico AVI**; **micrófono con clip para solapa** o **micrófono transdermal**).

Micrófono con clip para solapa



Micrófono de casco telefónico



Micrófono transdermal



Funcionamiento de su Micro Voice Amp

- 1 Antes de usarlo, decida cómo va a llevar Micro Voice Amp. Puede sujetarlo a la cintura utilizando el clip para el cinturón o la correa para la cintura.
- 2 Conecte el micrófono al puerto.
- 3 Si tiene el **micrófono con clip para solapa**, sujételo a la ropa, cerca de la boca. Si tiene el **micrófono de casco telefónico AVI**, ajuste el casco a la parte posterior de la cabeza con las curvas por encima de las orejas y acerque el micrófono a la boca. Si tiene el **micrófono transdermal**, cerciórese de que esté colocado plano contra la piel en la parte superior del cuello (más arriba que la línea de un cuello de camisa).



Micrófono con clip para solapa



Micrófono de casco telefónico



Micrófono transdermal

Consejo

Micrófono transdermal: si tiene un cuello pequeño, coloque un pequeño trozo de tela detrás de la pieza para el cuello para mejorar el ajuste. No debe quedar tan apretado que resulte incómodo.

Encendido

Para encender Micro Voice Amp, **pulse el botón de control** una vez y comience a hablar por el micrófono.



Volumen

El volumen se puede controlar mediante el **dial de volumen**. Si gira el dial en sentido de las agujas del reloj, subirá el volumen; en sentido contrario, lo bajará.



Silencio (en espera)

Si quisiera mantener una conversación privada, puede poner Micro Voice Amp en espera. Para ello **pulse el botón de control una vez**. El indicador de diodo **parpadeará en naranja** para indicar que se encuentra en **silencio**. Para regresar al funcionamiento normal **pulse el botón de control una vez**.

Apagado

Para apagar Micro Voice Amp pulse y **mantenga presionado el botón de control durante tres segundos** o hasta que el indicador de diodo se ponga en **rojo**.

Consejo

Evite acercar el altavoz y el micrófono para reducir el ruido de retroalimentación.