






IRIX 70, IRIX 708, NOVELIX 6510 ou ORAMATIC 558:

Guía de usuarios para identificar si su producto fue hecho entre Noviembre 1990 y Noviembre 1994 y, en este caso, si la modificación obligatoria fue hecha.

Cómo encontrar el año de fabricación

				
1985	1987	1989	Nov de 1990 > Set de 1997	Set de 1997

Desde Noviembre 1990 hasta Diciembre 1991, abajo se puede ver el número de serie que aparece en el generador:

Tipo de generador	Fecha de comienzo de fabricación	Fecha de terminación de fabricación
Irix	Inicio Noviembre 90 (EO3137)	Hasta finales de Noviembre 92 (EO3447)
Irix 708	Inicio Noviembre 90 (G8665)	Hasta finales de Noviembre 92 (G20315)
Oramatic 708	Inicio Noviembre 90 (105560)	Hasta finales de Noviembre 92 (113065)
Oramatic 558	Inicio Noviembre 90 (J7578)	Hasta finales de Noviembre 92 (J8734)
Irix 70		Hasta finales de Agosto 97

En Enero 1992 se ha hecho una identificación (2 letras) en la fundición gris, en la parte derecha o izquierda (aparece en la imagen 2). Las letras fueron aplicadas con la ayuda de un rotulador o de una perforadora que ha extendido la fundición. Para poder leer las letras hay que quitar la tapa de plástico blanco mediante la eliminación de una parte del metal gris empujándolo hacia atrás.



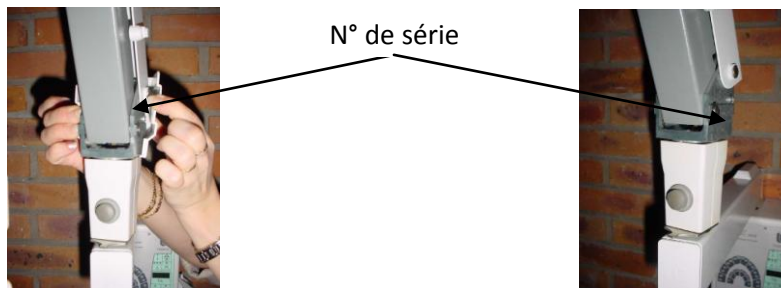


Fig. 2

La explicación de las 2 letras es:			
GK = Noviembre de 1992			
ID = Abril de 1994			
LI = Septiembre de 1997			
			
G	1992	A	Enero
H	1993	B	Febrero
I	1994	C	Marzo
J	1995	D	Abril
K	1996	E	Mayo
L	1997	F	Junio
		G	Julio
		H	Agosto
		I	Septiembre
		J	Octubre
		K	Noviembre
		L	Diciembre

Cómo verificar si se ha hecho la modificación

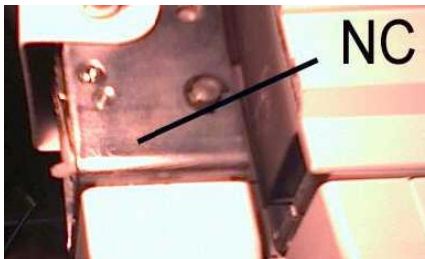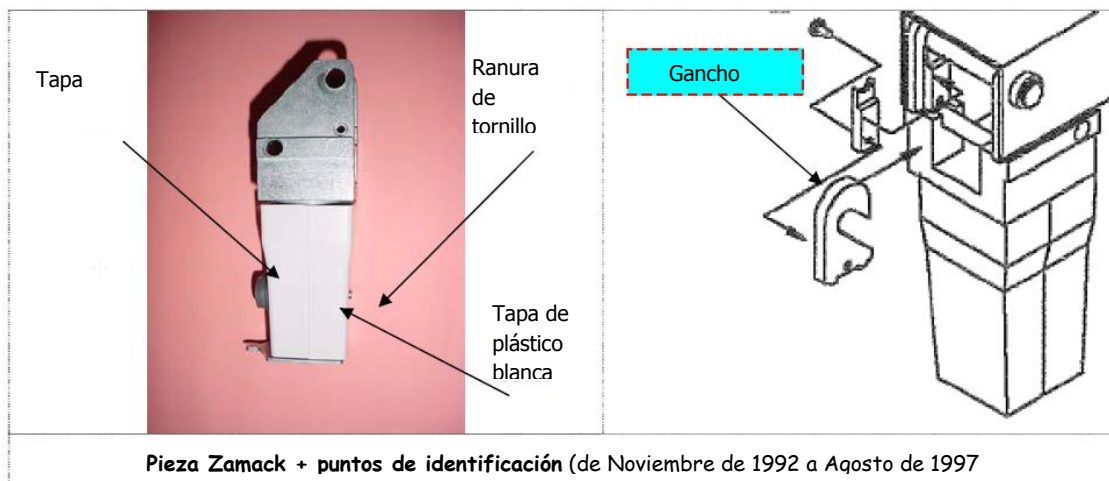

Si el gancho falta entonces la modificación no se ha hecho. Hay que contactar a Carestream Dental y, si hay dificultades, contactar a su distribuidor para completar la inspección o llamar a Carestream Dental.

Datos de contacto para cualquier tipo de información relacionada con este aviso:

Equipa de soporte técnico da Carestream Dental;

E-mail: europedental@carestream.com

Tel: 00 800 3456 6543