




Contour[®] next EZ
Sistema para la determinación de la glucemia

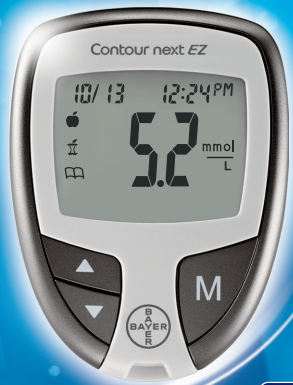

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

El medidor de glucemia **CONTOUR[®] NEXT EZ**

Pantalla

Botones de desplazamiento Arriba/Abajo


Orificio para tiras reactivas

Extremo gris:

Introduzca este extremo en el orificio para tiras reactivas.

Punta para la muestra:

Aquí se absorbe la muestra de sangre.

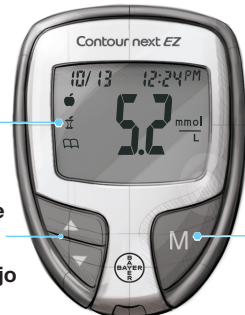

Botón de memoria
(Encender/Apagar, Recuperar memoria, Intro.)

Use únicamente la tira reactiva **CONTOUR[®] NEXT**



Análisis básico

Preparación para el análisis

1. Lávese y séquese bien las manos antes de hacer el análisis.



2. Introduzca el extremo gris de la tira reactiva en el orificio para tiras del medidor.

3. El medidor se encenderá y en la pantalla aparecerá una tira reactiva con una gota de sangre parpadeante, lo cual significa que el medidor está listo para realizar el análisis.

4. Retire la tapa del dispositivo de punción **MICROLET[®]2**.

5. Gire ¼ de vuelta la tapa protectora redonda de la lanceta para aflojarla, pero no la retire.


6. Introduzca la lanceta con firmeza hasta que haga tope y se reinicialice el dispositivo.

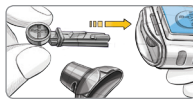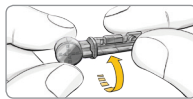


7. Desenrosque y retire la tapa de la lanceta.



8. Vuelva a colocar la tapa del dispositivo antes de obtener la gota de sangre.

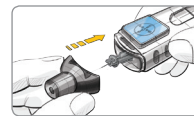


9. Ajuste el disco de la tapa para seleccionar la profundidad de punción que prefiera.

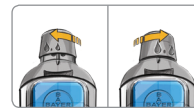

ATENCIÓN: el dispositivo de punción es para uso exclusivo de un solo paciente.

Cómo obtener la gota de sangre

1. Presione la tapa firmemente contra el sitio de punción y, con el pulgar, presione el botón disparador azul.

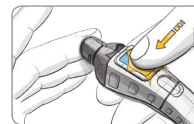

2. Realice un masaje de la mano y el dedo hacia el punto de punción para formar una gota de sangre.

Análisis de la sangre

1. Use solo las tiras reactivas **CONTOUR[®] NEXT** con el medidor **CONTOUR[®] NEXT EZ**.

2. Acerque la punta de la tira reactiva para que toque la gota de sangre. La sangre penetra en la tira reactiva.


3. Mantenga la tira en la gota de sangre hasta que el medidor emita un pitido.

4. El resultado* aparece luego de la cuenta regresiva de 5 segundos.


5. Para apagar el medidor, retire la tira reactiva. Deshágase de la tira reactiva como desecho de procedimiento médico.

*El medidor ha sido configurado y bloqueado para mostrar los resultados exclusivamente en mmol/L. Si los resultados aparecen en mg/dL, llame a la línea de atención al cliente 1-800-268-7200 de Bayer Diabetes Care.

See your **CONTOUR[®] NEXT EZ** User Guide and **MICROLET[®]2** insert for complete instructions.

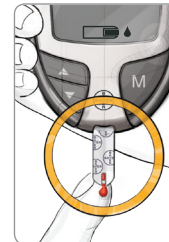


Análisis en la yema del dedo

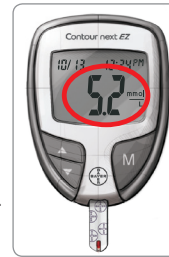


Cómo retirar la lanceta usada

1. Sostenga el dispositivo de punción colocando el pulgar en la marca de sujeción y en la tapa como aparece en la ilustración. Tire suavemente de la tapa para retirarla.

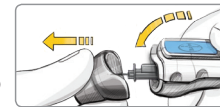

2. Coloque la tapa protectora redonda de la lanceta sobre una superficie plana con el logotipo de Bayer hacia abajo.

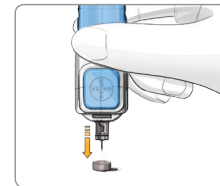

3. Estando todavía la lanceta usada en el dispositivo de punción, empuje la aguja de la lanceta completamente hacia el medio del lado expuesto de la tapa.

4. Expulse la lanceta siguiendo las instrucciones en el prospecto del dispositivo de punción.

5. Vuelva a colocar la tapa del dispositivo.

¿Necesita ayuda?

Línea de atención al cliente de Bayer Diabetes Care: 1-800-268-7200

www.bayerdiabetes.ca

Riesgo biológico potencial

Se considera que todos los sistemas para la determinación de la glucemia representan un riesgo biológico.

Los profesionales de la salud o las personas que usen este sistema con múltiples pacientes deben observar el procedimiento de control de infecciones aprobado por su institución.

Todos los productos u objetos que entren en contacto con sangre humana, incluso después de haberlos limpiado, deberán tratarse como si fueran capaces de transmitir enfermedades virales.

El usuario deberá observar las recomendaciones para la prevención de enfermedades transmisibles por la sangre en entornos de atención a la salud que se han establecido para las muestras humanas potencialmente infecciosas antes de efectuar servicios de reparación o investigación.

See your User Guide for complete instructions.

Uso del modo Avanzado

Configuración del medidor al modo Avanzado

Para configurar el medidor al modo Avanzado y aprovechar los marcadores de comidas y otras funciones disponibles:

1. Pulse **M** para encender el medidor.
2. Mantenga pulsado **▲** o **▼** por 3 segundos.
3. Parpadeará L-1.
4. Pulse **▲** o **▼** para cambiar a L-2.
5. Pulse **M** para ajustar.



Obtenga más información sobre la manera en que estas funciones adicionales pueden ayudarle a controlar la diabetes.

Visite el sitio web: www.bayerdiabetes.ca o llame a la línea de atención al cliente de Bayer Diabetes Care: 1-800-268-7200.

Luego de realizar el análisis y ver los resultados, use los marcadores en la pantalla:

Para marcar los resultados	Usted verá	Para establecer	Usted verá	Esto significa	Cómo usar la alarma de recordatorio
Antes de las comidas Marca el resultado de un análisis realizado antes de una comida. Pulse ▲ o ▼	(parpadeante)	Pulse M		El resultado se marca como análisis antes de una comida. Pulse M nuevamente para configurar una alarma de recordatorio para realizar un análisis después de una comida. →	Cuando suena la alarma de recordatorio, el medidor se enciende y usted verá el resultado del análisis realizado antes de la comida.
Después de las comidas Marca el resultado de un análisis realizado después de una comida. Pulse ▲ o ▼	(parpadeante)	Pulse M		El resultado se marca como análisis después de una comida.	
Cuaderno de registro Marca cualquier resultado que sea excepcional o diferente en cierto modo. Pulse ▲ o ▼	(parpadeante)	Pulse M		El resultado se marca en la memoria como excepcional. Esto se debe apuntar en su Cuaderno de registro.	Pulse cualquier botón una vez para silenciar la alarma de recordatorio y dos veces para apagar el medidor. Ejecute otro análisis y márkelo con un marcador después de las comidas (véase la tabla a la izquierda).



Configura una alarma de recordatorio (preconfigurada a un intervalo de 2 horas) para realizar un análisis después de una comida. See User Guide for complete instructions on how to use the markers and adjust the reminder times.

Códigos y símbolos de errores

Consulte su Guía del usuario para ver la lista completa de los Códigos de errores.

E1	La temperatura está fuera de rango.
E2	Ocurrió un problema al insertar totalmente la tira reactiva. Vuelva a realizar el análisis con una nueva tira reactiva.
E3	El medidor detecta una tira reactiva usada o que se ha usado una solución de control equivocada. Vuelva a realizar el análisis con una nueva tira reactiva.
E11	Resultado anormal. Vuelva a realizar el análisis con una nueva tira reactiva.



Bayer HealthCare

Fabricado por:
Bayer HealthCare LLC
Subsidiaria de Bayer Corporation
Mishawaka, IN 46544 EE.UU.

Distribuido por:
Bayer Inc.
Toronto, Ontario M9W 1G6
Canadá

Bayer

84310841
Rev. 02/12