

GUÍA DEL USUARIO

Documentos técnicos PEEK-PERSO^{MR}



OAXE



OABU1



OABU2

PEEK-PERSO^{MR} es un sistema de ligamentos de implantes crestaes o basales con prótesis fija insertas en el hueso o estructuras dentales circundantes a las estructuras maxilofaciales, con instalación instantánea o diferida.

Estas piezas PEEK-PERSO^{MR} se pueden utilizar :

- en caso de implantación original con implantación instantánea o diferida en el hueso o estructuras dentales maxilofaciales circundantes.
- para reparar implantes fracturados y para servir de enlace entre el resto del implante y la supraestructura protésica.
- para amortiguar fuertes molestias de flexión, torsión o escisión que pueden haber llevado a despegar puentes sellados o a fracturas de tornillo en caso de puentes atornillados.
- como stress-breaker para la conjunción de sistemas de implantes rígidos (tornillos, cilindros) con los dientes naturales.

Las piezas PEEK-PERSO^{MR} se pueden utilizar para realizar prótesis a implantes múltiples y se pueden acoplar con los dientes naturales.

PEEK-PERSO^{MR} puede ser utilizado únicamente por profesionales autorizados por el productor.

PEEK-PERSO^{MR} puede ser utilizado únicamente por profesionales capacitados por el productor o que hayan recibido las calificaciones de una institución educativa aprobada por el productor.

Materiales

Los ejes de conjunción son fabricados en PEEK Optima.

Las transferencias y los pilares abutments son fabricados en PEEK Classic.

Indicaciones

PEEK-PERSO^{MR} puede servir como pilares de prótesis.

Contra-indicaciones

Desconocidas

Efectos no deseados

Desconocidas

Almacenamiento

Las piezas PEEK-PERSO^{MR} deben ser limpiadas y esterilizadas como se indica en la descripción adjunta. Las piezas deben estar almacenadas en un lugar seco a temperatura ambiente.

Gestión de residuos

Los residuos producidos por este dispositivo médico deben ser tratados como potencialmente infecciosos y deben ser eliminados según las normativas gubernamentales vigentes.



Instrucción

Los ejes de conjunción se entregan sin ser esterilizados. Todas las partes deben esterilizarse y pueden volver a esterilizarse.

El implante PEEK-PERSO^{MR} se integrará en un cuerpo humano únicamente bajo la responsabilidad de un profesional que ha tomado cursos de perfeccionamiento para el uso de este tipo de implante, y que se encuentre en posesión de una autorización válida otorgada por el productor.


El profesional inserta la pieza seleccionada en la rosca existente y la personaliza según las necesidades pertinentes. Para ello se debe usar o una cortadora rotacional para micro-motor o una turbina.

¡El pilar es de uso único! ¡Se prohíbe su reesterilización! El fabricante declina toda responsabilidad en caso de reesterilización. La reesterilización podría provocar inflamaciones y rechazos.

SisoMM

Version 2015/02

C € 0499 - 2015

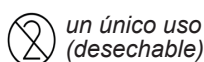

un único uso
(desechable)



no esterilizado



Atención!



Fabricante: SisoMM[®] Bvba, Genkersteenweg 470,
B-3500 Hasselt, BÉLGICA
www.sisomm.com

SisoMM.com
Made in Germany PEEK based implant system[®]

