



Step-by-Step

DESCRIPCIÓN

Step by step permite grabar un mensaje fragmentado en diferentes partes y después reproducirlos paso a paso. Adicionalmente permite la activación de un juguete o dispositivo a la vez que reproduce un mensaje. Además de las funciones del Bigmack también permite trabajar un mayor control en la comunicación e iniciar diálogos.

MODO DE EMPLEO

En primer lugar se graba el mensaje indicando los puntos de parada del mismo. Posteriormente, se reproduce un fragmento del mensaje con cada pulsación y se avanza en la secuencia del mismo. También es posible la repetición de un fragmento del mensaje.



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Con 120 segundos de tiempo de grabación podrá grabar tantos mensajes como precise.
- ▶ Medidas: 6,35 cm.
- ▶ Entrada para un comunicador alternativo.
- ▶ Salida de tipo relé para activación de juguetes.
- ▶ Comunicador con diferentes tapas intercambiables en colores vistosos.

SUGERENCIAS



- ▶ Permite grabar estrofas de una canción, de un poema, los pasos de una receta, pequeños textos, para estimular la conversación por etapas.
- ▶ El comunicador Step by Step dispone de una carátula transparente que le puede ser de utilidad para incorporar símbolos en el comunicador
- ▶ Puede utilizar la salida para el control de juguetes del comunicador con el fin de activar algún dispositivo a la vez que reproduce el mensaje.
- ▶ Mediante el producto BJ-181 Soporte para Jelly Bean, puede sujetar el comunicador Step-by-step a cualquiera de nuestros brazos.