



**RI.MOS.**  
Disponible  
Medical Products

RI.MOS. Srl - V.le Gramsci, 29 - Mirandola-MO Tel.+39 0535 25755 Fax +39 0535 25509

# HYPERmixvet®

PARA USO VETERINARIO

Para animales de compañía y caballos deportivos  
NO DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

## Coadyuva la terapia cicatrizante

Hypermixvet estimula la reparación de la piel en todas las lesiones externas. El producto repele los insectos. Puede aplicarse en las capas afectadas por la lesión, en las mucosas como boca, encías, ano y en el conducto auricular. Controla la cantidad y la calidad del exudado en la superficie de la herida.

## Modo de empleo

Aplicar Hypermixvet sobre la superficie lesionada bien limpia. El exudado seco debe eliminarse friccionando ligeramente la superficie lesionada con una gasa embebida con agua estéril o solución salina hipertónica. La escara debe eliminarse bien quirúrgicamente bien con la solución fisiológica hipertónica, mejor en solución hipersaturada. Las lesiones deben lavarse con agua estéril o con solución salina, utilizando si fuera preciso jabón no irritante (jabón de Marsella), y evitando utilizar desinfectantes especialmente si son a base de alcohol, yodo, clorhexidina o peróxido de hidrógeno. Los cuerpos extraños deberán retirarse mecánicamente. El vendaje en perros y gatos queda a discreción del veterinario, aunque se aconseja vender si se trata de gatos.

## Límites de uso

El producto es ineficaz en el tejido necrótico y en los casos de hiperqueratosis cutánea (psoriasis, espesamientos cutáneos, callos, etc.).

## Contraindicaciones

La aplicación prolongada del producto puede determinar la caída momentánea de la cobertura pilifera en el área perilesionada.

## Advertencias

En muchos casos evita el tratamiento local con antibióticos y reduce el tiempo de la terapia antibiótica sistémica.

Evítase utilizar desinfectantes, puesto que intervienen negativamente en el proceso de cicatrización.

Protéjase el producto del aire y de la luz (cerrar el envase después del uso y guardar en un lugar oscuro). No teme el calor hasta 40° aproximadamente. El producto solidifica a temperaturas inferiores a 16° sin que se alteren sus propiedades, también puede utilizarse en fase sólida, fluidifica inmediatamente a la temperatura corporal. Interrumpir la aplicación en caso de hipersensibilidad individual y/o alérgica a los componentes. No reutilizar las gasas impregnadas después del uso. Eliminar las gasas impregnadas y los recipientes según establecen las normas. Mantener lejos del alcance de los niños.

## Ingredientes

Extractos de Nim. Hypericum Perforatum.

## Envases disponibles

- Frasco de cristal de 250ml, formulación oleosa.
- Frasco de cristal de 100ml, formulación oleosa con boquilla spray.
- Frasco de cristal de 30ml, formulación oleosa con cuentagotas.
- Gel spray de 100 ml, con boquilla spray.

AGITAR BIEN ANTE DE USAR

La fecha de caducidad indicada en el envase se refiere al producto en su envase íntegro y correctamente conservado.

REV. Enero 2011



No abandonar en el ambiente



Atención: consulte las instrucciones para el uso

e-mail: [info@rimos.com](mailto:info@rimos.com) - web site: [www.rimos.com](http://www.rimos.com)