



PASTA PROFILACTICA ODAHCCAM

La Pasta Profiláctica Odahccam es indicada para el uso en procedimientos de limpieza y pulimento, como parte del tratamiento profesional de profilaxis de la caries y de la enfermedad periodontal.

COMPOSICIÓN

Piedra Poméz, Carbonato de Calcio, Glicerina, Agua, Sorbitol, Colorante, Espesantes, Aromatizantes, Edulcorante y Preservativos.

MODO DE EMPLEO

Remover del tubo y colocar en un pote dappen limpio la cantidad de pasta necesaria para una profilaxis. Cerrar inmediatamente el tubo después de la remoción del material, a fin de evitar alteración en la consistencia del producto. Con un motor de baja rotación, dirigir la taza de goma (o el cepillo de Robinson) contra la superficie de la pasta hasta rellenarla. Iniciar la profilaxis por vestibular y lingual, evitando excesiva presión y manteniendo la taza de goma en un ángulo de 90° en relación a la superficie del diente. Para oclusal, recomiendase el uso de un cepillo de Robinson para surcos profundos, cuidandose para no herir las margens de la encía. En los locales de difícil acceso, como en las caras proximales, recomiendase el uso de palillos interdentales o cuñas de madera con pequeña cantidad de pasta.

NOTA: Durante la limpieza y el pulimento, la taza de goma (o cepillo) debe contener siempre la pasta, para evitar calentamiento excesivo del diente. El control de la salivación debe ser hecho para evitar la dilución de la pasta y su deglución.

PRECAUCIONES

- 1 - Mantener siempre el tubo herméticamente cerrado para evitar alteración en la consistencia de la pasta.
- 2 - Evitar la ingestión de la pasta, lo que puede ocasionar náusea. En caso de ingestión excesiva, administrar copiosa cantidad de agua.

PRESENTACIÓN

Tubo conteniendo 50g de pasta con sabor Tutti-Frutti.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar al abrigo de calor y humedad.

PLAZO DE VALIDEZ:

3 años

USO PROFESIONAL

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervé, 86 - CEP 25665-010
Petrópolis - RJ - CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br
Central de Relacionamento: 0800 721 1200 - Registro ANVISA nº 10186370142
Resp. Técnico: Marcelle Cortezia - CRF-RJ Nº 7999 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido en Latino América por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661

CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección Técnica: Nora Canoura - Disposición ANMAT 2606/97

Dentsply Chile Comercial Ltda.

Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile

Dentsply Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 - Bogotá, D.C. - Colombia



"ECONOMIZE ENERGIA.
RECICLAR MATERIAIS
É PRESERVAR
O MEIO AMBIENTE".



PASTA PROFILÁTICA ODAHCCAM

A Pasta Profilática Odahccam é indicada para uso em procedimentos de profilaxia e polimento, como parte do tratamento profissional de prevenção da cárie e doença periodontal.

COMPOSIÇÃO:

Pedra Pomes, Carbonato de Cálcio, Glicerina, Água, Sorbitol, Corante, Aromatizantes, Espesantes, Edulcorantes e Preservativos.

MODO DE USAR:

Remover da bisnaga e colocar em um pote dappen limpo a quantidade necessária de pasta para uma profilaxia. Fechar imediatamente a bisnaga após a remoção do material, a fim de evitar a alteração na consistência do produto.

Com um motor de baixa rotação, dirigir a taça de borracha (ou escova de Robinson) contra a superfície da pasta até preenchê-la. Iniciar a profilaxia por vestibular e lingual, evitando pressão excessiva e mantendo a taça de borracha em ângulo de 90° com relação à superfície do dente.

Para oclusal, recomenda-se o uso de escova de Robinson para sulcos profundos, tomando cuidado para não ferir as margens gengivais. Nos locais de difícil acesso, como nas faces proximais, recomenda-se o uso de fio ou fita dental impregnados com pequenas quantidades de pasta.

NOTA: Durante a limpeza e o polimento, a taça (ou escova) deve conter sempre a pasta, para evitar aquecimento excessivo do dente. O controle da salivagem deve ser feito para evitar a diluição da pasta e sua deglutição.

PRECAUÇÕES:

- 1 - Manter sempre a bisnaga herméticamente fechada a fim de evitar alteração na consistência da pasta.
- 2 - Evitar a ingestão da pasta, o que pode ocasionar náuseas. Em caso de ingestão excessiva, administrar grande quantidade de água.

APRESENTAÇÃO:

Bisnaga contendo 50g de pasta no sabor Tutti-Frutti.

ARMAZENAMENTO:

Conservar ao abrigo de calor e umidade.

PRAZO DE VALIDADE:

3 anos

USO PROFISSIONAL

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervé, 86 - CEP 25665-010
Petrópolis - RJ - CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br
Central de Relacionamento: 0800 721 1200 - Registro ANVISA nº 10186370142
Resp. Técnico: Marcelle Cortezia - CRF-RJ Nº 7999 - Indústria Brasileira

Importado y Distribuido en Latino América por:

DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661

CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección Técnica: Nora Canoura - Disposición ANMAT 2606/97

Dentsply Chile Comercial Ltda.

Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile

Dentsply Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 - Bogotá, D.C. - Colombia



"ECONOMIZE ENERGIA.
RECICLAR MATERIAIS
É PRESERVAR
O MEIO AMBIENTE".