

Glutacide 88 Long Life

Solución Desinfectante y Esterilizante



Ventajas

- ▶ **Glutacide 88 Long Life** es una solución acuosa a base de glutaraldehído activable al 2%, para la desinfección de alto nivel y esterilización de accesorios e instrumental médico-quirúrgico, odontológico, y en general de todo el material hospitalario crítico y menos crítico que requiera de estos procedimientos.
 - ▶ No es agresivo contra materiales plásticos o de goma, contiene agentes reductores que protegen el material de la exposición continua a soluciones alcalinas.
 - ▶ Eficacia comprobada, 20 minutos de tratamiento aseguran una óptima desinfección de alto nivel, destruyendo bacterias vegetativas como *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia Marcescens*, *Acinebacter*, *Mycobacterium Tuberculosis*, hongos y virus lipofílicos (Influenza, Vaccinia, Herpex, etc.), virus no lipídicos (Enterovirus, Adenovirus, etc.) Virus Hepatitis B Y C, VIH. En el caso de esterilización en frío se requiere 10 horas de tratamiento destruyendo esporas patógenas resistentes de especies *Bacillus Subtilis* y *Clostridium Sporogenes*.
 - ▶ Activo aún en presencia de materia orgánica, como sangre, pus, tejidos necrosados, etc.
 - ▶ Máxima seguridad y economía, contiene activador líquido que permite activar la cantidad justa, utilizándolo hasta 28 días una vez activado.
 - ▶ Compatible con tiras reactivas Disintek, indicadoras de concentración de glutaraldehído.
-

Glutacide 88 Long Life

Modo de Empleo

- ▶ Limpieza previa: todo el material que va a ser sometido a desinfección de alto nivel o esterilización, debe estar rigurosamente lavado y seco, según indicaciones de la ficha técnica de Detergerm y Detergerm Enzimático.
- ▶ Una vez lavado el material, colocarlo en una bandeja plástica perforada, o en otro elemento semejante, evitando el contacto entre metales distintos.
- ▶ Verifique que los tubos estén completamente secos en su interior, luego sondas, cánulas y tubos goma/plásticos deben quedar ubicados en sentido horizontal ascendente (30°).
- ▶ Sumerja la bandeja con el material en un recipiente con la solución activa de Glutacide 88 Long Life, cuidando que todo el material permanezca sumergido en la solución. Evite material flotando o medio sumergido.
- ▶ Tapar el recipiente de la solución de Glutacide 88 Long-Life y dejar el tiempo requerido, 20 minutos para desinfección de alto nivel, 10 horas para esterilización.
- ▶ Una vez cumplido el tiempo, retire el material del recipiente levantando la bandeja perforada y dejando escurrir el exceso de solución.
- ▶ Sumerja la bandeja perforada con el material en un segundo recipiente plástico con agua destilada, agitando para enjuagar, lave cánulas, tubos de goma, y lúmenes de catéteres haciendo pasar agua destilada a presión por medio de la jeringa.

Información Técnica

Parámetro	Característica
Apariencia sin activar	Líquido cristalino incoloro
Apariencia activado	Líquido cristalino azul turqueza
pH sin activar	3,7 - 4,3
pH activador	8,1 - 8,4
pH activado	6,7 - 7,3
Activo germicida	glutaraldehído 2%
Estabilidad sin activar	2 años
Estabilidad activado	28 días

Importante

Evitar sumergir metales de diferente naturaleza por corrosión electrolítica. Si se utiliza recipiente de metal (acero inoxidable). Cubrir el fondo con plástico o grasa para evitar el contacto metal con metal. No diluir la solución de Glutacide 88 Long Life. Esta solución puede ser reutilizada durante 28 días, desde la fecha de activación.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, piel y mucosas. Manipular el producto en áreas ventiladas, con guantes de goma y anteojos de seguridad, si entra en contacto con los ojos, lavar con abundante agua en caso de ingestión accidental beber abundante leche o clara de huevo batida en agua. No provocar vómitos. En ambos casos solicitar atención médica.

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

Diversey de Argentina S.A.

Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel: 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.

Río Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

Diversey Perú S.A.C.

Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900

