

**Quelopatch Reductor de Cicatrices** está especialmente diseñado para ayudar a la cicatriz a recuperar su funcionalidad y aspecto, a volver a ser piel normal. Una cicatriz es una señal o marca que queda en los tejidos después de curada una herida o llaga. Cuando se produce una herida en la piel, se inicia un proceso de curación que, si no se realiza de forma correcta, dará lugar a una cicatriz visible.

En condiciones normales, una vez finalizado el proceso de curación, el aspecto de la zona no debe divergir del resto de la piel. No obstante, puede ocurrir que el resultado no sea correcto, ya sea por una formación insuficiente o excesiva de tejido cicatricial.

En ambos casos, la piel, además de perder un aspecto normal, pierde también funcionalidad, pues esta cicatriz no tiene la misma elasticidad que la piel sana y no tiene tanta movilidad.

**Quelopatch** recoge toda la experiencia en el tratamiento de la piel y las heridas para combatir las cicatrices de una forma cómoda y eficaz, ya que es un tratamiento que trata durante 24 horas, una aplicación imposible de conseguir con las cremas y tratamientos habituales.

**Quelopatch** es un apósito hidroactivo por lo que no se macera la piel, protege la cicatriz de la radiación solar y presentan un bajo riesgo de irritación cutánea.

El producto se presenta en dos láminas reutilizables y recortables a la medida de la cicatriz.



## INDICACIONES:

**Quelopatch** es la mejor opción para reducir cicatrices hipertróficas, recientes o antiguas.

También es útil en queloides producidos por quemaduras, heridas o intervenciones quirúrgicas.

Cualquier tratamiento de las cicatrices debe tener dos objetivos principales: mejorar el aspecto y la funcionalidad de la piel afectada.

Diversos estudios clínicos han mostrado que los apósitos como **Quelopatch** reducen efectivamente el color y el espesor de las cicatrices en un 95% de los casos.

## DESCRIPCIÓN ACTIVOS:

Buscando la máxima eficacia en todos nuestros productos, hemos incorporado al producto el activo patentado ácido hialurónico de bajísimo peso molecular y viscosidad zero [ialuzero®], una auténtica novedad.

**ÁCIDO HIALURÓNICO.** Es un componente natural de la piel, necesario para la reparación de la dermis, cuyo déficit se relaciona con la disposición anormal de fibroblastos, pérdida de hidratación, factores clave en la formación de cicatrices. El ácido hialurónico nos ayuda a mantener las condiciones óptimas de hidratación de la piel a reparar.

Avalados por nuestra dilatada trayectoria científica en el campo de la innovación y por el trabajo conjunto con dermatólogos expertos, donde el arte de conocer la piel adquiere máximo protagonismo, ofrecemos un producto novedoso y de calidad para el cuidado y el tratamiento de las cicatrices visibles.

## ■ MODO DE EMPLEO:

- ▼ Antes de aplicar el apósito asegúrese de que la zona a tratar está limpia y seca.
  - 1] Cortar el apósito a la medida deseada.
  - 2] Limpiar y secar cuidadosamente la zona de la cicatriz para facilitar la aplicación del apósito.
  - 3] Separar la capa protectora y colocar el apósito sobre la zona con estrías asegurándose, tras presionar leve y repetidamente, de que sus bordes se encuentran fijados en la piel.
- ▼ Se recomienda mantener fijado durante un mínimo de 8 horas y un máximo de 24 horas.
- ▼ Retirar para la higiene diaria y volver a adherir. Un mismo apósito se puede reutilizar mientras mantenga su adherencia. Es resistente al agua y por tanto, en caso necesario, puede estar varios días continuamente adherido. Repetir la aplicación hasta obtener los resultados deseados.
  
- ▼ **ADVERTENCIAS:** Uso externo. Utilizar solo sobre piel intacta, limpia y seca. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente las instrucciones de uso. Suspender el tratamiento en caso de fenómenos irritativos evidentes o de hipersensibilidad al producto.