



## Indicaciones:

Úlceras varicosas y por decúbito poco o moderadamente exudadas.

- Flexible.
- Heridas agudas y crónicas.
- Cicatrización en medio húmedo.
- Retirada sin dolor y no traumática.
- Proliferación de fibroblastos.

## Urgotul®

Acondicionado en estuches con apósitos esterilizados individuales en sobres.

TAMAÑOS	U/C	C.N.
5 x 5 cm	10	157041.3
10 x 12 cm	3	400126.6 ●
10 x 12 cm	10	157027.7
15 x 15 cm	3	494021.3 ●
15 x 15 cm	10	157028.4
10 x 40 cm	10	157029.1

● Financiado por la Seguridad Social sólo en úlceras varicosas y por decúbito.





## DESCRIPCIÓN

- Interfase lípido-coloide, esterilizada, no adhesiva y no oclusiva, procedente de la tecnología lípido-coloide, una novedad exclusiva patentada por Laboratorios Urgo.

### COMPOSICIÓN:

**Urgotul®** es un apósito lípido-coloide flexible, fabricado con un tejido de poliéster impregnado con partículas hidrocoloideas (carboximetilcelulosa) y vaselina.

### MODO DE ESTERILIZACIÓN:

Esterilizado por radiación ionizante.

## PROPIEDADES

- En contacto con el exudado de la herida, las partículas hidrocoloideas de **Urgotul®** reaccionan con la vaselina para formar una interfase lípido-coloide, creando un medio húmedo favorable para el proceso de cicatrización.
- Graso en su composición sin serlo al tacto, **Urgotul®** no se adhiere a la herida ni a la piel circundante. La eliminación del apósito no es dolorosa ni traumática para la herida.
- **Urgotul®** favorece una cicatrización rápida al estimular la proliferación de los fibroblastos.
- Flexible y adaptable, **Urgotul®** es apropiado para heridas de difícil localización.

## INDICACIONES

- **Urgotul®** está indicado para el control tanto de heridas agudas (quemaduras, abrasiones o raspaduras, heridas post operatorias), como de heridas crónicas (úlceras de la pierna, úlceras de pie diabético) en la etapa de granulación y epitelialización.
- **Urgotul®** está también indicado para el control de la epidermólisis bullosa.
- Al ser flexible, **Urgotul®** está particularmente indicado en el recubrimiento de lesiones anfractuosas o de difícil localización, y en el mechado de heridas cavitadas.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

### MODO DE EMPLEO:

#### 1. Preparación de la herida:

- Limpiar la herida con suero fisiológico.
- En caso de utilizar un antiséptico, de manera previa, aclarar cuidadosamente la herida con suero fisiológico antes de aplicar **Urgotul®**.

#### 2. Aplicación del apósito:

- Quitar la película protectora transparente.
- Aplicar **Urgotul®** a la herida en una sola capa.
- Con objeto de adaptar el tamaño de apósito a la lesión, **Urgotul®** puede recortarse utilizando material estéril.
- Cubrir **Urgotul®** con un apósito secundario adecuado para absorber el exudado de la herida.
- Mantener el apósito secundario con una venda extensible, un esparadrapo adhesivo o una venda tubular elástica.

#### 3. Renovación del apósito:

- **Urgotul®** puede ser cambiado cada 2 a 4 días y mantenerse colocado durante 7 días en función de la herida.
- En pacientes con epidermólisis bullosa, el apósito debería ser cambiado después de 1 a 3 días.

### PRECAUCIONES DE EMPLEO:

- **Urgotul®** puede adherirse a los guantes de látex. En tal caso, humedecer los guantes con solución salina, lo que facilitará la manipulación del apósito.
- Si aparecen signos de infección local, se puede continuar el tratamiento bajo supervisión médica, aunque en este caso es preferible usar **Urgotul® S.Ag** o **Urgotul® Ag**.
- En caso de heridas profundas, no es necesario aplicar **Urgotul®** en varias capas.
- En caso de lesiones profundas, anfractuosas o fistulosas, dejar una parte del apósito **Urgotul®** visible y accesible al exterior de la lesión.
- No reesterilizar.
- Almacenar **Urgotul®** en posición horizontal, y al abrigo de la humedad y el calor (temperatura inferior a 25°C).

## ESTATUS REGLAMENTARIO

- Producto sanitario de clase II b.