

# Dermatik



GRUPO-SANIGER

## CORRIENTE PULSANTE



## ¿QUÉ ES DERMATIK?

DERMATIK es un equipo que incorpora los adelantos tecnológicos en materia de perfección de emisión energética terapéutica, adaptándose de una forma sencilla y segura a todos los tratamientos faciales.

DERMATIK esta basado en la aplicación de las corrientes pulsantes, las cuales por sus características especiales, brinda óptimos resultados y una gran versatilidad de tratamientos. Y a diferencia de sus antecesores DERMATIK permite programar el trabajo específico sobre el tejido epidérmico o dérmico. Proporcionando así resultados jamás antes vistos en la terapéutica facial.

Una terapéutica sencilla agradable en su aplicación y de fácil programación, haciendo de este un tratamiento relajante y cómodo para el cliente.

## ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL DERMATIK?

DERMATIK, esta diseñado para tratamientos faciales donde presenta grandes bondades para funciones tales como:

- ☆ Nutrición
- ☆ Electroporación
- ☆ Mini-lifting
- ☆ pápulas
- ☆ Hidratación
- ☆ Tonificación cutánea
- ☆ Reafirmación
- ☆ Arrugas y líneas de expresión
- ☆ Estimulo del riego sanguíneo
- ☆ Cicatrices, etc.
- ☆ Afina los poros
- ☆ Da luminosidad a la piel
- ☆ Tonifica la epidermis en conjunto con la dermis
- ☆ Delinea el contorno del rostro

Realmente llevar a cabo estas funciones, resulta muy sencillo, simplemente programando oportunamente la frecuencia adecuada a cada una y aplicando los electrodos sobre la zona.



## ¿CÓMO TRABAJA DERMATIK?

DERMATIK es un aparato de corrientes pulsantes, diseñado para su aplicación en tratamientos faciales, es por eso que consideramos importante hacer mención de sus características especiales.

### PROGRAMACIÓN

Son todos esos elementos que se requieren en la terapéutica y la recepción de la piel para lograr el efecto esperado. Lo único que debe hacer es seleccionarlo en función de sus necesidades terapéuticas:

1. Melasma Epidérmico
2. Melasma Mixto
3. Reafirmación Cutánea
4. Fibrosis Dérmica
5. Arrugas y Flacidez
6. Hidratación Cutánea
7. Reestructuración Epidérmica

### .AMPLITUD

La amplitud controlada en este equipo varia entre 0.5V a 12V dependiendo del programa.

### TIEMPO

Para facilitar la aplicación, DERMATIK incorpora un selector de tiempo digital para un mejor control de los tratamientos, se recomienda utilizar en cada tratamiento aproximadamente 20 minutos.

**Su aparato DERMATIK debe de incluir lo siguiente:**

- 1 aparato DERMATIK
- 1 cable de para electrodo con dos salidas
- 1 cable de línea
- 2 electrodos de hongo
- 2 electrodos dérmicos

**Especificaciones Técnicas:**

Voltaje de alimentación: 120 VCA  $\pm$ 10%

Frecuencia de alimentación: 60 Hz.


Consumo máximo de potencia: 7 Watts

Consumo Efectivo de potencia: 4.2 Watts

Corrientes pulsantes: Modalidad bipolar

Amplitud Max. de salida: 12.7 Vpp.

Peso Aprox: 9 Kg

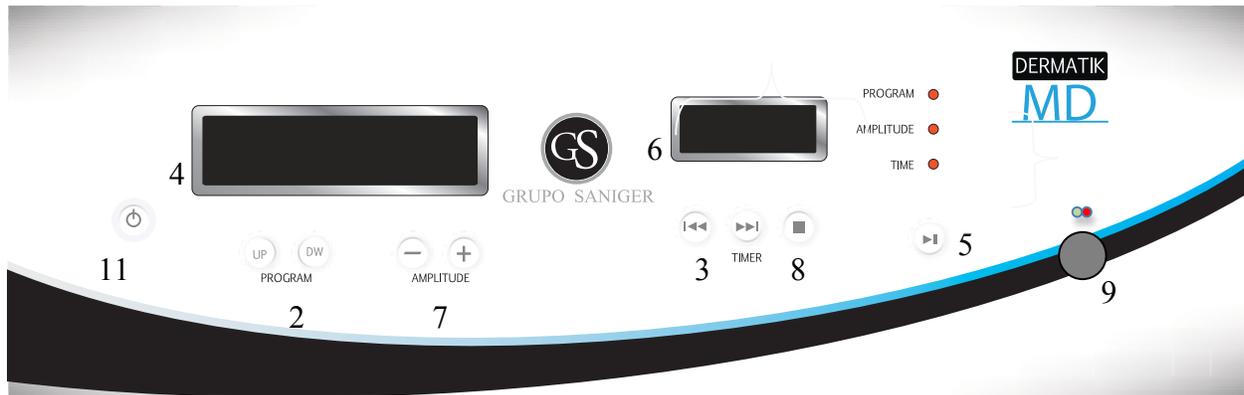

- 1) Interruptor de encendido y apagado en la parte POSTERIOR del aparato
- 2) Interruptores UP y DW para la selección de programas.
  - MELASMA EPIDERMICO
  - MELASMA MIXTO
  - REAFIRMACION CUTANEA
  - FIBROSIS DERMICA
  - ARRUGAS Y FLACIDEZ
  - HIDRATACION CUTANEA
  - REESTRUCTURACION EPIDERMICA
- 3) Interruptor para programar el tiempo deseado. El equipo siempre al ser prendido, va a dar el valor de 20:00 minutos.
- 4) Display Digital de asignación de programas.
- 5) Interruptor de inicio/pausa de emisión.
- 6) Display del tiempo.
- 7) Interruptores - y + para la selección de amplitud.
- 8) Interruptor para detener el programa.



- 9) Conector de cable de salida de electrodos
- 10) Indicador luminoso de emisión.
- 11) Interruptor de Stand By.

## MODO DE EMPLEO

- 1) Antes, de iniciar sobre todo después de un envío o viaje, haga una pequeña revisión del mismo, para cerciorarse de que no halla sufrido golpes o maltrato, que puedan interferir con su funcionamiento.
- 2) Conecte el cable de línea a la red de alimentación (120 va/60 Hz) insertándolo al aparato en la entrada que se encuentra en la parte posterior del mismo.
- 3) Conecte el cable de los electrodos en la salida respectiva (9) de forma que entre correctamente.
- 4) Conecte los electrodos deseados a los conectores del cable de salida.
- 5) Encienda el aparato presionando el interruptor general (1) que se encuentra en la parte posterior del equipo, con esto deberán de encenderse el LED indicador (programa, tiempo y amplitud) y los displays del programa (4) y tiempo (6).
- 6) Seleccione el programa presionando el interruptor UP DW (2) hasta llegar a la opción requerida.
- 7) Seleccione el tiempo presionando los interruptores del timer (3). El equipo asigna el valor de 20:00 minutos cada vez que es encendido o reiniciado.
- 8) Presione el interruptor de encendido/pausa (5), para iniciar la emisión.
- 9) Ya que el equipo empezó la emisión, seleccione la amplitud deseada con los interruptores - y + (7).



**NOTA: Grupo Saniger recomienda utilizar una amplitud entre 3 y 4. Es importante que siempre verifique el valor de la amplitud antes de aplicar los electrodos al paciente.**

10) En cualquier momento de la emisión, usted puede cambiar los valores del tiempo y amplitud sin necesidad de parar el programa.

**NOTA: Grupo Saniger recomienda utilizar el DERMATIK con un tiempo aproximado a 20 minutos por tratamiento.**

11) Cada vez que cambie de programa mientras el equipo tenga emisión, deberá de volver a presionar el interruptor de inicio/pausa (5).

**NOTA: En cualquier momento durante el tratamiento, usted podrá cambiar los valores de las opciones.**

12) Presione el interruptor de inicio/pausa (5) para pausar la emisión.

13) Si desea detener por completo el programa, deberá de presionar el interruptor de stop (8).

14) Para poner su equipo en stand by, deberá de presionar el interruptor (11).

15) Para apagar simplemente presione nuevamente el interruptor general (1) que se encuentra en la parte posterior del equipo.

**NOTA: Grupo Saniger recomienda que limpie sus electrodos después de cada tratamiento para su prolongación de vida útil.**



## APLICACIÓN Y OPERACIÓN EN DIVERSOS TRATAMIENTOS

Definitivamente en todos los casos siempre será la experiencia la que vaya determinando las mejores combinaciones para obtener los mejores resultados. Para poder aprovechar su aparato DERMATIK en toda su capacidad, lo más importante es ubicar la función de cada uno de los programas y así obtener los mejores resultados, para facilitar este manejo damos una pequeña gráfica de las mismas.

PROGRAMA	FUNCIÓN
<b>1</b> <b>Melasma</b> <b>Epidérmica</b>	Actúa sobre pigmentaciones que tengan menos de 3 años. Aplique un gel conductor. Conecte los electrodos dérmicos y capture la mancha. Sosteniendo el estímulo por 6 segundo. Continúe con este movimiento sobre toda la superficie de la mancha aproximadamente 5 minutos en cada una. <b>Electrodo Utilizado con este programa; DERMICOS.</b>
<b>2</b> <b>Melasma Mixto</b>	Actúa sobre las manchas que cuentan con 5 años o mas. Aplique un gel conductos. Conecte los electrodos dérmicos. Se aplica el estímulo sobre la mancha, capturándola con los electrodos y dejando cada captura por un lapso de 6 segundos. Cada mancha debe ser estimulada por 5 minutos. En este caso se recomienda pasar el programa epidérmico después de haber estimulado por 5 minutos cada una <b>Electrodo Utilizado con este programa; DERMICOS</b>
<b>3</b> <b>Reafirmación</b> <b>Cutánea</b>	Este es un programa para personas que presentan un tejido laxo. Aplique gel conductor en poca cantidad y conecte los electrodo de hongo. Deslice lentamente en líneas horizontales de la zona central al nacimiento del cabello. Tomando como guía a la estructura ósea. <b>Electrodo Utilizado con este programa; HONGOS</b>
<b>4</b> <b>Fibrosis Dérmica</b>	Aplique un gel conductor y con los electrodos dérmicos tome el tejido fibrosado o pápula en su caso. Estimule en

	<p>cada captura por 6 segundos y continúe por toda la zona a tratar.</p> <p><b>Electrodo Utilizado con este programa; HONGO</b></p>
<p><b>5</b> <b>Arrugas y Flacidez</b></p>	<p>Capture las arrugas con los electrodos dérmicos estimulando cada una de ellas por 3-5 minutos dependiendo de la longitud de la misma. Para trabajar Flacidez cambie a los electrodos de hongo. Aplique gel conductor y deslice tomando de referencia la estructura ósea de la parte media hacia el nacimiento del cabello en líneas horizontales. Iniciando desde el mentón e ir subiendo hasta el frontal.</p> <p>Electrodo Utilizado: DERMICO Y HONGO</p>
<p><b>6</b> <b>Hidratación Cutánea</b></p>	<p>Con los electrodos de Hongo aplique el producto que desea aplicar con electroporación. Solo vaya deslizando sobre todo el tejido en forma lenta.</p> <p>Electrodo a utilizar: HONGO</p>
<p><b>7</b> <b>Reestructuración Epidérmica</b></p>	<p>Aplique un gel conductor en poca cantidad y con los electrodos de hongo deslice de la zona central del rostro a la zona del nacimiento del cabello en líneas horizontales. Páselo sobre la zona que presenta poros abiertos.</p> <p>Electrodo a Utilizar: HONGO</p>

A partir de estas funciones se podrán diseñar fácil y prácticamente todo tipo de tratamientos. Sin embargo recomendamos seguir toda la secuencia permitida por el DERMATIK

## GRUPO-SANIGER

### Secuencia del tratamiento

1. Limpie la piel através de su limpiadora facial.
2. Puede aplicar un tonificante al igual que un exfoliante ligero. NO SE RECOMIENDA UTILIZAR DESPUES DE UN GLICÓLICO.
3. Aplique un gel conductor según el biotipo de piel.
4. Prenda su equipo, coloque los electrodos seleccionados y prográmelo. Recomendamos que siga la secuencia indicada por su equipo DERMATIK PORECAUCIÓN, NO SE RECOMIENDA APLICAR SOBRE PÚSTULAS, SIN EMBARGO SI SOBRE PAPULAS


5. En caso de Pápulas puede hacer hincapié con los electrodos dérmicos capturando con ellos cada una y dando una estimulación sobre la misma durante 4 segundos.
6. Después de haber realizado todos los pasos puede aplicar una emulsión de cierre.

**NOTA:** Para que la corriente circule por el cuerpo en forma adecuada, siempre deberán de estar ambos electrodos en contacto con el rostro, si esto no sucede, la corriente pulsada **NO** tendrá ningún tipo de efecto.


## ELECTRODOS

**Electrodo Dérmico.** Se utiliza para ir capturando la piel sin que se nos deslice, como en caso de estimularla para fortalecer su estructura de sostén, como pápulas y estimulación directa de las arrugas. Aún utilizando un gel conductor.

**Electrodo de Hongo.** Facilita el delineado sobre la estructura ósea y la penetración de producto cosmético por su superficie extensa, como los movimientos del drenaje linfático.

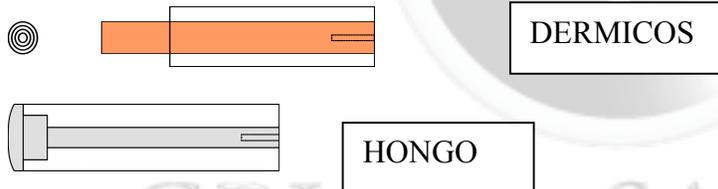


## PROGRAMA REESTRUCTURACIÓN EPIDERMICA, ARRUGAS Y FLACIDEZ, HIDRATACION CUTANEA

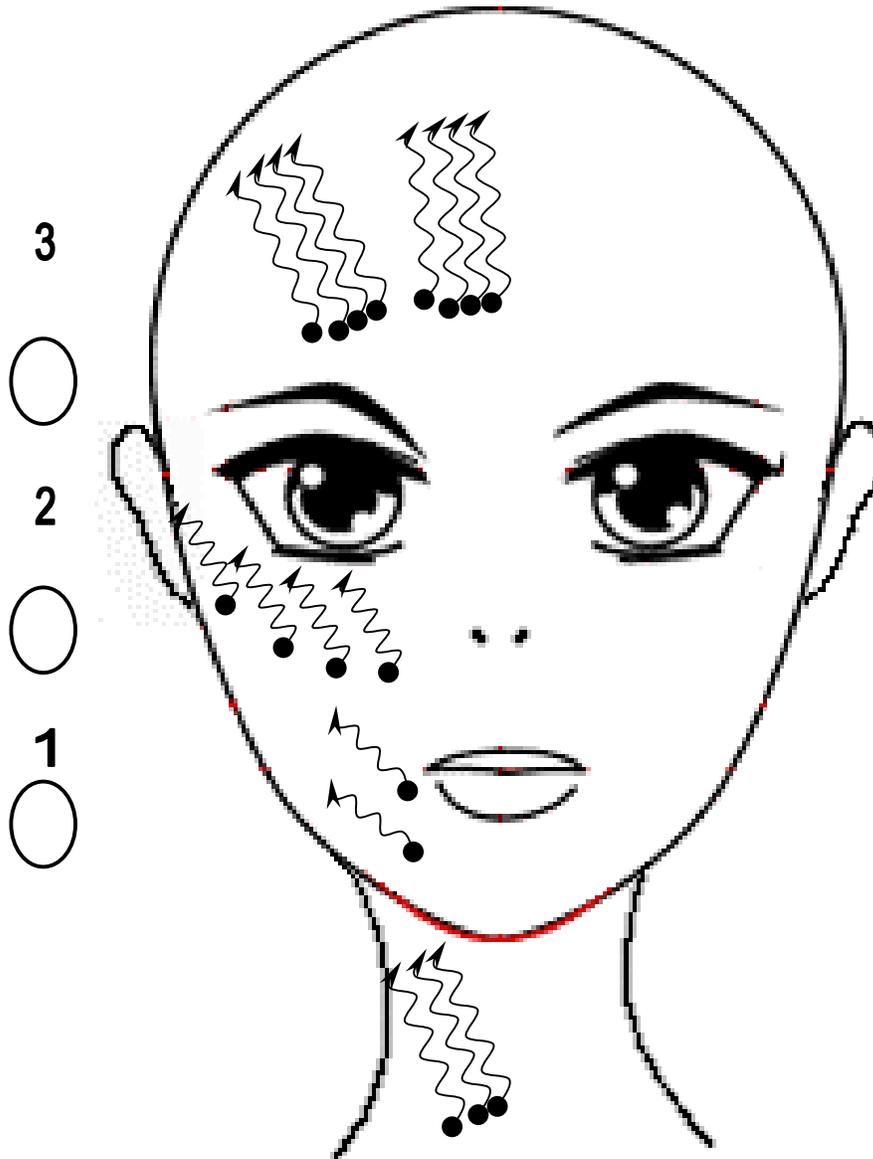

- ★ Utilizar los electrodos **dérmicos** capturando la piel firme pero suavemente sin lastimar con pellizcos suaves. Iniciando de la zona media hacia el nacimiento del cabello, jalando la piel suavemente en movimientos de líneas diagonales

- ☆ Iniciar zona 1 y terminar en zona 3
- ☆ Para trabajar las líneas de expresión y arrugas, tomar en forma específica a cada una estimulando sus cimientos para fortalecer el tejido y levantar su estructura. Su captura debe de levantar la arruga como si se quisiera sacarla.

### PROGRAMA REAFIRMACIÓN CUTANEA

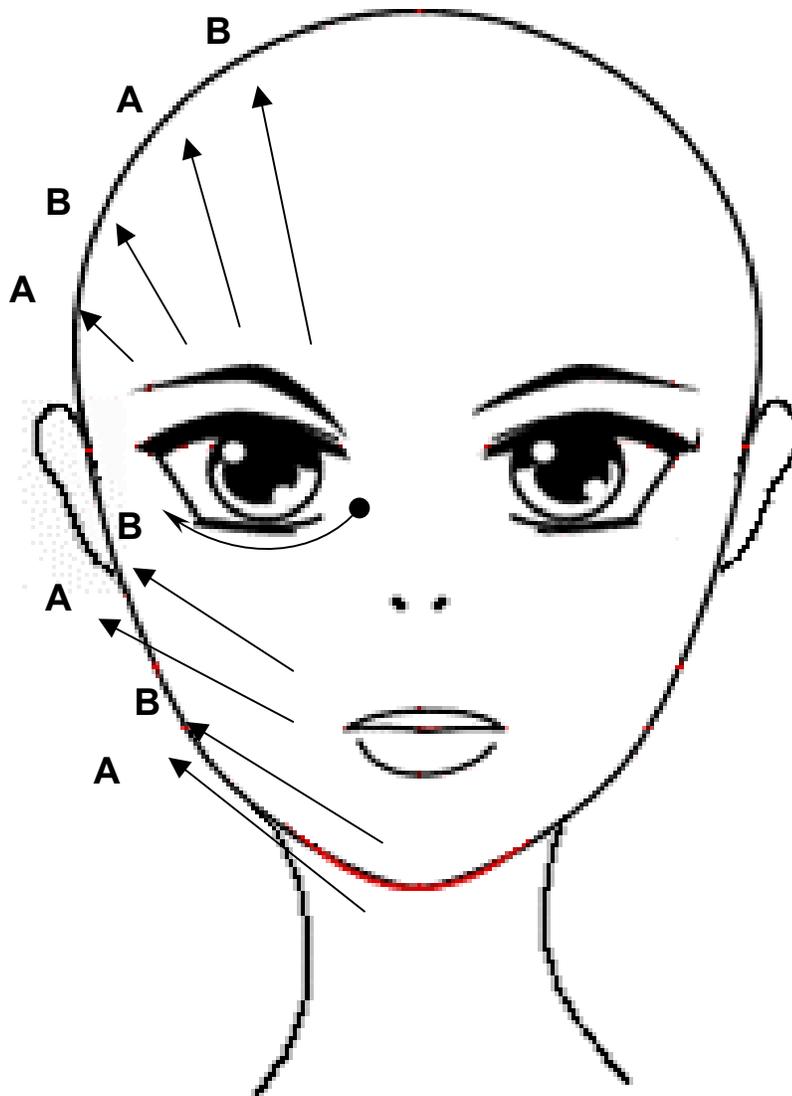

ER



- ★ Deslizar los dos electrodos de **hongo** en forma paralela SIN CHOCAR O TOCAR ENTRE ELLOS, delineando la estructura ósea. Sobre el maxilar un electrodo quedara debajo del mismo mientras que el otro sobre la parte superior. De igual manera de la zona central hacia el nacimiento del cabello delinee sobre la estructura ósea de los pómulos. En caso del frontal y la zona de ojos solo dirija

Para alguna duda o aclaración del funcionamiento del equipo DERMATIK, favor de comunicarse al teléfono 52 12 08 62 o puede escribirnos al la dirección electrónica [ventas@aparatologiasaniger.com.mx](mailto:ventas@aparatologiasaniger.com.mx).

#### Especificaciones Técnicas:

Voltaje de alimentación: 120 VCA  $\pm 10\%$   
Frecuencia de alimentación: 60 Hz.  
Consumo máximo de potencia: 7 Watts  
Consumo Efectivo de potencia: 4.2 Watts  
Corrientes pulsantes: Modalidad bipolar  
Amplitud Max. de salida: 12.7 Vpp.  
Peso Aprox: 9 kg

## También contamos con

GR

### Servicio y Mantenimiento

R



Tel. 52562492



GRUPO-SANIGER