



HISTERÓMETRO

REFERENCIAS :800.09



Denominación

Histerómetro para la medición de la profundidad del útero estéril y de un solo uso.

Conformidad

Producto de Clase I estéril

Certificación ISO : Oiarso S. Coop. (Bexen®) tiene implementado y mantiene un sistema de calidad conforme a las exigencias de las Normas ISO 9001.

Marcado CE según la Directiva Europea 93/42/CEE.

Utilización

Instrumento utilizado en ginecología y obstetricia que permite realizar mediciones de la profundidad del útero.

Características

Histerómetro ligeramente cónico fabricado con plástico deformable y con escala por centímetro. Su punta redondeada permite una introducción no traumática.

Materiales utilizados

Plástico maleable

Presentación

Unidad de empleo : Envase rasgable

Pedido mínimo : Caja de 150 unidades

Esterilización

Método : Óxido Etileno (EO)

Conservación : 5 años desde fecha de esterilización

Modo de empleo :

Introducir lentamente el histerómetro a través del orificio exterior hasta alcanzar el fondo del útero prestando la máxima atención para evitar riegos de perforación. Para obtener una correcta medición, leer la medida indicada en el mango serigrafiado con marcas de 1 centímetro. Extraer y desechar.

Advertencias :

Leer las instrucciones antes del uso. No reutilizar. Utilizar sólo si el envase se encuentra íntegro. Utilizar inmediatamente después de la apertura del envase. Eliminar después de su uso en conformidad con la legislación vigente. El dispositivo tiene que ser utilizado exclusivamente por personal médico especializado.



Distribuidor
OIARSO S. COOP. (Bexen®) B° Zikuñaga, N°57-F Polígono Ibarluze 20128 Hernani
Tel : 943 33 52 82
Fax : 943 33 52 10
E-mail : lasuen@oiarso.com