

Tegaderm HP

Apósito Transparente de Alta Adherencia

Ficha Técnica



■ Descripción

Apósito estéril adhesivo, desarrollado para reducir los cambios de apósitos no programados en situaciones complejas.

Se caracteriza por tener mayor fuerza de adhesión que el Tegaderm Estándar, lo que permite una adherencia más prolongada y segura en zonas anatómicas complejas o en pacientes sudorosos o febriles.

Constituye una excelente barrera contra la contaminación viral y bacteriana y es impermeable a líquidos desde el exterior.

Su transparencia permite monitorizar eficientemente el sitio de punción y la evolución de las heridas. Su adhesivo hipoalérgico reforzado adhiere incluso en presencia de humedad.

■ Usos

Utilice Tegaderm HP en situaciones que requieran una excelente fuerza de adhesión:

Fijación de catéteres centrales o periféricos en:

Pacientes febriles y diaforéticos

Sitios de punción problemáticos, ej. Yugular

Heridas cutáneas con drenaje escaso a moderado.

Ulceras por presión de etapas I.

Abrasiones y peladuras superficiales.

Incisiones quirúrgicas.

Quemaduras superficiales.

Protección de piel en riesgo, especialmente zona sacra (incontinencia, fricción, roce)

■ Modo de Empleo

La aplicación del apósito es rápida y conveniente y debe realizarse sobre piel limpia y seca.

Una vez abierto el envase se retira el apósito y luego se remueve la cubierta posterior protectora. Se aplica sobre el sitio de punción o herida, ejerciendo presión desde el centro hacia la periferia, se retira el marco del contorno, reforzando con presión la adherencia en la orilla, para obtener un sistema completamente hermético.

■ Precauciones

Este producto está contraindicado cuando la herida o el sitio de punción están infectados.

■ Empaque u otras referencias

Código	Descripción Producto	Medidas	Empaque
9534	Tegaderm HP	6 x 7 cms	10 unids / caja
9536	Tegaderm HP	10 x 12 cms	50 unids / caja