

Contenido:
1 Par

INDICACIONES: Ofrece una protección en helomas y roces interdigitales, disminuyendo la fricción y el dolor. Ayuda en la alineación de dedos, por problemas de uñas encarnadas o postoperatorios.

COMPOSICIÓN: Gel Polímero. Aceite mineral grado médico.

MODO DE EMPLEO: Colocar el separador entre los dedos a proteger o alinear. La parte más saliente del separador debe estar hacia arriba. Elegir la talla adecuada. Es recomendable lavar con agua y jabón neutro y espolvorear con talco

CONTRAINDICACIONES: Si se produce algún tipo de rechazo o irritación, o si su problema persiste, debe suspender el uso y consultar con su especialista. Mantener alejado de los niños.

Ref. 201510-S · T. S
Ref. 201510-M · T. M

Ref. 201510-L · T. L

Distribuidor:

EXPANDIX DESARROLLO COMERCIAL, S.L.U.

C/ Miñana, 3-bajo · 46002 · Valencia
B-98.658.602

Número de Registro Sanitario de Fabricante: 3.307-PS



INCLUYE
GEL POLÍMERO



LAVABLE



PROTECCIÓN PIEL
Y TEJIDO CUTÁNEO

Envase n° GS2015003

Conservar en un lugar fresco, seco
y protegido de la luz solar directa.



SEPARADOR DE DEDOS MEDIA LUNA GEL

