

 Laboratorios Clarben S.A.	FICHA TECNICA	
	SELLADOR DE FISURA	
REVISION: R1 Fecha: Marzo 2012		
CARACTERISTICAS El SELLADOR DE FISURAS Clarben posee una avanzada fórmula de resina BIS-GMA fotocurable, radiopaca y con una característica propia de brillo perlescente que facilita su visualización a simple vista o mediante rayos X. Su especial sistema de envasado le proporciona mayor duración y solidez y su viscosidad está diseñada para una óptima aplicación sobre superficie dental. Además el sellador de fisuras Clarben cuenta con un sistema dispensador que elimina las burbujas de aire frente a la aplicación con cepillo.		
FINALIDAD SELLADOR DE FISURAS Y OQUEDADES constituyen la medida profiláctica más efectiva frente a la caries dental, impidiendo que las bacterias y carbohidratos de la dieta creen condiciones ácidas. Está especialmente recomendado para superficies oclusales de molares primarios, premolares y molares, así como oquedades y fisuras en superficies linguales de incisivos maxilares permanentes, superficies bucales de molares mandibulares y en superficies linguales de molares maxilares.		
CLASIFICACION SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE Producto sanitario Clase IIA		
PRESENTACIÓN Sellador de fisuras (Ref: 04-003) - 4 Jeringas de Sellador de Fisuras - 8 Cánulas especiales de aplicación		
MODO DE EMPLEO 1. Eliminar completamente la placa bacteriana y limpiar la superficie del esmalte. 2. Lavar con abundante agua, eliminando totalmente la pasta limpiadora de oquedades y fisuras. 3. Aislar el área a tratar de la contaminación salival con algodón o un dique de goma y colocar al paciente en la posición adecuada. 4. Secar completamente con aire descontaminado y libre de grasa ó humedad. 5. Aplicar gel grabador ácido OCTACID a dicha superficie limpia y seca, durante 20 segundos. Lavar con abundante agua y no manipular sobre la zona tratada. 6. Reemplazar los rollos de algodón por otros secos evitando en todo momento la contaminación salival. 7. Secar completamente las superficies grabadas con aire descontaminado. Si las superficies tratadas no aparecen blanquecinas, repetir nuevamente el proceso de grabado. 8. Colocar el aplicador sobre la jeringa y con cuidado comenzar a hacer fluir el producto de forma controlada. Utilizar una aguja para cada paciente. El agente sellador debe ser aplicado de cúspide a cúspide sin cubrir las aristas marginales. 9. Fotopolimerizar durante 20 segundos o más, según la luz empleada. 10. Inspeccionar las superficies selladas y si se observa una cobertura incompleta		

añadir más producto. Si en este paso el diente ha sido contaminado, regrabar con ácido durante 10 segundos, lavar, secar y aplicar el sellador.

ADVERTENCIAS

- Para asegurar el éxito profiláctico del sellador de fisuras, es imprescindible partir de unas condiciones bucales lo más asépticas y secas posibles y el sellador debe ser aplicado de manera que minimice la formación de burbujas y contacto sellador-esmalte defectuoso. Para ello, el sellador de fisuras Clarben cuenta con el sistema Flo-rite TH de dispensación controlada.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Para más información consultar la Hoja de Seguridad.

