

[ES] Instrucciones de Uso

Dermatix® SILICONE SHEET with Silon® technology



Tratamiento de cicatrices

Disponible en dos presentaciones*:

DERMATIX® SILICONE SHEET CLEAR (Láminas de Silicona Clear)
Prácticamente invisible. Aplicar en las áreas expuestas. Ideal para cara y manos - incluso se puede aplicar maquillaje por encima.

DERMATIX® SILICONE SHEET FABRIC (Láminas de Silicona Fabric)
Con un soporte de tela sedosa para una óptima comodidad y conveniente para zonas bajo la ropa.

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción:

Dermatix® Silicone Sheet [Clear y Fabric] son láminas adhesivas transpirables y lavables, fabricadas usando novedosas y avanzadas siliconas.

Uso:

El uso constante de Dermatrix® Silicone Sheet [Clear o Fabric] puede reducir las cicatrices inmaduras prominentes hipertróficas y queloides o prevenir las cicatrices similares de reciente formación a la vez que ayuda a reducir el dolor, picor, enrojecimiento o altura de las mismas.

Modo de empleo:

PASO 1: Saque el producto de su embalaje. Si es necesario, utilice unas tijeras para cortar el producto a medida. Debe extenderse ligeramente más allá del área de la cicatriz.

PASO 2: Despegar el recubrimiento de papel protector y conservar este para su utilización posterior. Coloque el producto con el lado adhesivo hacia abajo directamente sobre el área de la cicatriz. Mantenga la aplicación del producto durante un mínimo de 12 horas y un máximo de 23 horas por día.

PASO 3: Por lo menos una vez al día, lave el área de la cicatriz y ambos lados del producto con jabón suave y agua. No utilice jabones que contengan en su composición humidificadores, lociones o aceites. Se aconseja un jabón neutro. Aclarar bien el producto para retirar cualquier resto de jabón.

Dejar secar la lámina al aire o séquelo con una toalla sin pelusa antes de volver a aplicarlo.

Entre cada aplicación, guarde el producto con el papel protector de recubrimiento.

Recomendaciones Especiales y precauciones:

No utilice cremas, lociones o pomadas con este producto ya que podría interferir con su acción y/o causar irritación de la piel.

Advertencia:

Tal como puede ocurrir con cualquier material de uso tópico aplicado directamente sobre la piel, puede producirse algún tipo de reacción (generalmente una ligera erupción). Si observa alguna reacción, interrumpa la utilización del producto. Una vez recuperado el aspecto normal de la piel, puede volver a aplicar el producto durante periodos cortos e incrementar gradualmente las horas de utilización. Vigile el área de la cicatriz por si aparecen signos de reacción. Continúe aumentando el tiempo de utilización hasta alcanzar un máximo confortable. Si continúa teniendo problemas, interrumpa el uso y consulte con su médico.

ADVERTENCIA! NO UTILIZAR EN HERIDAS ABIERTAS.

Silon® is a registered trademark of BioMed Sciences, Inc. © All rights reserved. This product is subject to US & Foreign Patents including US #'s 5,656,279, 5,980,923 & 7,087,135. Form ID: Dermatrix IFU-ESPT, REV 02/2011

*No todos los países comercializan todas las presentaciones

 **Bio Med Sciences, Allentown, PA 18106 USA**

 Meda Pharmaceuticals Ltd., Takeley,
Bishop's Stortford, CM22 6PU, UK



5609012153ESPT00

MEDA