

Dermis porcina

OsteoBiol® Derma

CARACTERÍSTICAS

Obtenida de la dermis de origen porcino mediante un procedimiento exclusivo de Tecnos®[®], la membrana Derma es completamente reabsorbible. Su fuerte consistencia y resistencia permiten una estabilización perfecta y una protección prolongada del injerto subyacente en los procedimientos de grandes regeneraciones, junto con una acción de fuerte barrera para guiar el crecimiento del tejido epitelial y previniendo su invaginación.

MODO DE EMPLEO

La membrana Derma puede ser modelada con tijeras estériles hasta alcanzar las dimensiones deseadas, tiene que ser hidratada durante 15 minutos con solución fisiológica estéril tibia.

Una vez conseguida la plasticidad deseada puede ser adaptada a la morfología del lugar del injerto. Es conveniente preparar una cavidad con un separador de periostio para obtener un cierre perfecto de la membrana después de suturar los bordes.

Si esto no fuera posible, la membrana se puede suturar con una sutura en bolsa que la sujete a los bordes gingivales.


NOTA: si la membrana Derma, por algún motivo, presentase dehiscencias (como en las laceraciones secundarias de los bordes) no se debe quitar, porque su plasticidad y consistencia son tales que permiten la completa curación de la herida por segunda intención gracias al deslizamiento fisiológico de los bordes.

INDICACIONES CLÍNICAS

Cirugía oral y traumatología: estabilización y protección de extensas regeneraciones con riesgo de exposición.

Implantología: protección de injertos en defectos a dos paredes.

Periodoncia: creación de espacio en el tratamiento de las recesiones gingivales (modelo Fina).

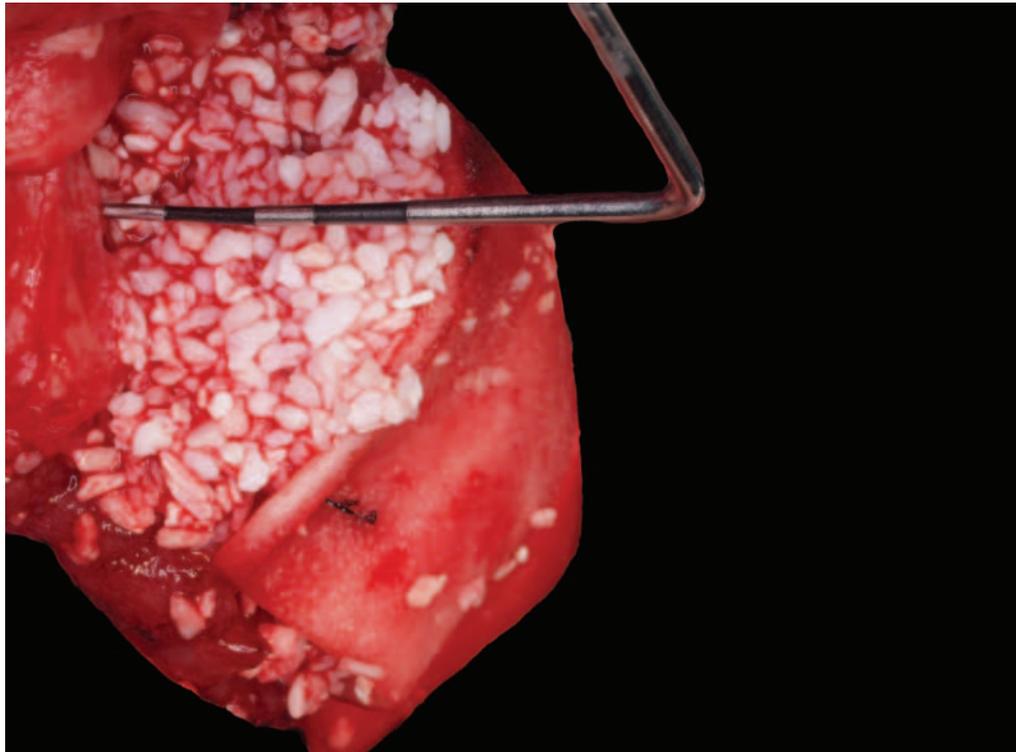

Regeneración horizontal con Derma y Apatos
Fuente: Cortesía del Dr. Antonio Murillo, Eibar, España.

PRODUCTOS

PRODUCTOS ESPECÍFICOS



Tejido de origen
Dermis porcina

Colágeno tisular
Preservado

Forma física
Membrana desecada

Composición
100% dermis

Espesor
Fina: 1.0mm
Standard: 2.0mm

Tiempos de reabsorción
Fina: aprox. 3 meses
Standard: aprox. 4 meses

Envases
Fina: 25x25mm; 50x50mm
Standard: 30x30mm; 50x50mm

Códigos producto
ED25FS | 1 Blíster | Fina | 25x25x(1)mm | Porcina
ED05FS | 1 Blíster | Fina | 50x50x(1)mm | Porcina
ED03SS | 1 Blíster | Std | 30x30x(2)mm | Porcina
ED05SS | 1 Blíster | Std | 50x50x(2)mm | Porcina