

ALMOHADILLAS PARA CALLOS Y DUREZAS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **Almohadilla protectora para Durezas y Callos**, se compone de un disco de espuma extra-suave, transpirable y elástico con forma de anillo u ovalado, con una lámina de adhesivo hipoalergénico que va en contacto con la piel para fijar la almohadilla.

INDICACIONES

- Las almohadillas de espuma reducen la presión y la fricción en las durezas u otras zonas dolorosas y alivian el dolor de inmediato.
- La forma de anillo de la almohadilla es adecuada para durezas duras y callos interdigitales.
- Gracias al adhesivo hipoalergénico, las almohadillas de espuma son ideales para las pieles sensibles.
- La capa más externa de PE protege la almohadilla de espuma de la suciedad y la humedad, al igual que la capa sin trama, además de ser cómoda y suave para la piel.
- Callos y durezas producidos principalmente por un calzado inadecuado o deformidades de los dedos.

Indicado para:

Callos. La formación de callos es causada por una acumulación de células muertas de la piel que se endurecen y se espesa en un área del pie. Este es el mecanismo de formación de callo como defensa del cuerpo para proteger el pie contra la presión excesiva y la fricción.

Los callos se encuentran normalmente en la planta del pie, el talón, y / o el interior del dedo gordo del pie y la palma de la mano.

Durezas. Las durezas se desarrollan a partir una acumulación de células muertas de la piel en el pie, formando pequeñas áreas gruesas y endurecidas. Contienen un núcleo en forma de cono con un punto que puede ejercer presión sobre un nervio, causando dolor.

Las durezas generalmente se forman en la parte superior de los dedos del pie [en el área de la articulación]. Las durezas suaves se desarrollan entre los dedos de los pies debido a la transpiración o la acumulación de sudor.

MODO DE EMPLEO

- 1] Asegúrese que la piel esté limpia y seca.
- 2] Retire la almohadilla de la lámina de soporte, retire la parte circular interior y coloque el orificio central justo encima de la dureza o el punto sensible.
- 3] Presione para que la almohadilla se adhiera a la piel.

ALMOHADILLAS PARA CALLOS Y DUREZAS



PRESENTACIÓN

Las almohadillas se presentan en láminas de PET y pueden contener dos, tres o nueve almohadillas por lámina.

CATEGORÍA DEL PRODUCTO

Producto Sanitario clase I