

Tegapore

Material de Contacto para las Heridas

Ficha Técnica



■ Descripción

Apósito primario no adherente, estéril y poroso, compuesto principalmente de nylon.

■ Usos

Diseñado específicamente para proteger el lecho de granulación de traumas cotidianos en heridas limpias o infectadas, como el cambio frecuente del apósito secundario o la aplicación de agentes tópicos. Indicado en quemaduras de 1er y 2do grado, úlceras venosas, úlceras por presión, heridas traumáticas, zonas dadoras de injerto y alteraciones dermatológicas.

■ Modo de Empleo

Desbridar, limpiar e irrigar la herida y áreas circundantes, según protocolo de la institución.

Humedezca el Tegapore con suero fisiológico y aplíquelo sobre la herida, luego, pase por encima del material, una gasa húmeda para distribuir homogéneamente la humedad sobre toda la extensión del Tegapore.

Si desea hacer algún tratamiento tópico, proceda a aplicar la solución, crema, pasta, ungüento o gránulos sobre el material, en cantidad suficiente para dejar una capa fina del medicamento, luego, cubra la herida con un apósito absorbente adecuado. En caso de usar un apósito de gasa algodón, éste debe cambiarse cada 24-48 horas.

Cada vez que cambie el apósito absorbente, se recomienda volver a humedecer Tegapore.

La remoción se hace con pinzas y si se ha mantenido un ambiente húmedo, al no adherirse, se retirará prácticamente sin dolor. Si la superficie está seca, irrigue con suero fisiológico en forma abundante.

La remoción se hace con pinzas y si se ha mantenido un ambiente húmedo, al no adherirse, se retirará prácticamente sin dolor. Si la superficie está seca, irrigue con suero fisiológico en forma abundante.

■ Beneficios

Material de contacto no adherente que protege la integridad del tejido de granulación contra situaciones de daño cotidiano. Facilita la migración celular en el lecho de la herida y apoya el proceso de cicatrización. Sobre él pueden ser aplicados tratamientos tópicos en forma de crema, pomada, gel o solución. En heridas limpias, generalmente se cambia cada 5-7 días. Su remoción es atraumática. Requiere de un apósito secundario absorbente para su fijación. Producto libre de látex y con 3 tamaños diferentes disponibles.

■ Empaque u otras referencias

Código	Descripción Producto	Medidas	Empaque
5634	Tegapore	7,5 x 10 cms	25 unids/caja
5638	Tegapore	7,5 x 20 cms	25 unids/caja
5640	Tegapore	20 x 20 cms	10 unids/caja