

 <p>Laboratorios Clarben S.A.</p>	FICHA TECNICA TOALLITAS LACLEDIN WIPES
	REVISION: R3 Fecha: Julio 2013
<p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Toallitas desinfección de superficies de productos sanitarios no invasivos, con un amplio espectro de acción activo frente a Staphylococcus aureus resistente a la Meticilina, Virus Influenza tipo A H1N1, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Mycobacterium tuberculosis (TB), Clostridium difficile (C-Diff) formas vegetativas de organismos Gram positive, Virus HIV-1, Virus Influenza Humana tipo B, Staphylococcus aureus, Virus Hepatitis C, Aspergillus niger, Candida albicans.</p> <p>Tiene un agradable olor, evitando el olor a desinfectante.</p> <p>La solución concentrada que impregna la toallita contiene: Etanol, Propan-2-ol, hidrocloreuro de biguanida polimérica, aroma Dentomint</p>	
<p>FINALIDAD</p> <p>Toallitas para desinfección de la superficie de productos sanitarios no invasivos. Especialmente para ambientes médicos y dentales.</p>	
<p>CLASIFICACION SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE</p> <p>Producto sanitario Clase IIA</p>	
<p>PRESENTACIÓN</p> <p>Toallitas Lacleidin Wipes. Bote con 100 Toallitas (Ref: 07-011) Toallitas Lacleidin Wipes refill recambio de toallitas (Ref: 07-017)</p>	
<p>MODO DE EMPLEO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quitar la tapa. 2. Cortar la bolsa y sacar la primera toallita a través del orificio. 3. Volver a colocar la tapa. 4. Tirar de la toallita con un ángulo de 45 °. 5. Utilizar una nueva toallita para cada aplicación. 6. Humedecer completamente la superficie a desinfectar y esperar hasta su evaporación. 	
<p>ADVERTENCIAS</p> <p>Precauciones conforme a la Directiva de Sustancias Peligrosas (aplicable a la solución concentrada)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fácilmente inflamable, • Manténgase fuera del alcance de los niños. • Manténgase el recipiente bien cerrado • Protéjase de fuentes de ignición - No fumar. • No respirar los vapores • Evítese el contacto con los ojos • En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico. • No tirar los residuos por el desagüe. • No utilizar después de la fecha de caducidad • No utilizar sobre superficies sensibles al alcohol 	

- No usar conjuntamente con productos clorados ya que se puede producir una coloración de la superficie a desinfectar.
- Para más información consultar la Hoja de seguridad.

FOTO