

## **GINEASPIR**

(ref. 03010000)

### Descripción y uso:

GINEASPIR es un equipo totalmente desechable para la obtención de muestras de endometrio para su diagnóstico histo-citológico utilizando la técnica del legrado en combinación con la aspiración.

### Componentes:

- 1 cánula de aspiración Karman nº 4 con adaptador para la jeringa
- 1 jeringa de aspiración con cono Luer de 20cc con freno
- 1 tubo de 12ml para recogida de muestra con etiqueta identificativa

### Modo de empleo:

Antes de empezar el procedimiento de extracción, es necesario hacer una histerometría.


La cánula Karman tiene un diámetro exterior de 4mm y está redondeada en su extremo distal para una mayor facilidad de introducción y para evitar perforaciones. Esta cánula tiene unas bandas transversales de orientación histerométrica y una banda longitudinal que indica la posición de la legra.

Para la obtención de la muestra, basta conectar la jeringa a la cánula e introducirla a través del canal cervical hasta el fundus, utilizando la legra para obtener tejido endometrial.

Tras haber tomado la muestra de tejido, efectuar una presión negativa constante tirando del émbolo hasta que la jeringa quede frenada.

La muestra de tejido será aspirada hacia la cánula y la jeringa.

Retirar el equipo e introducir la muestra de tejido endometrial obtenida en el tubo recolector para su posterior análisis.

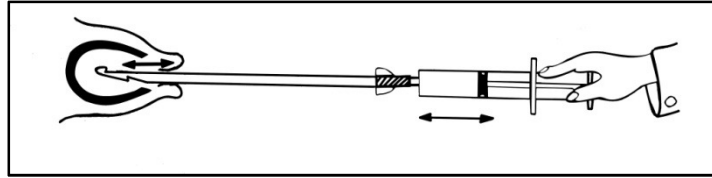

**ATENCIÓN:** no sobrepasar la medida obtenida con la histerometría para evitar riesgos de perforación. Usar inmediatamente una vez abierto. No reutilizar. No usar si la bolsa no está íntegra. Usar por profesionales cualificados.