



AMNIOSCOPIO ESTÉRIL DE UN SÓLO USO

REFERENCIAS : 750.01 / 750.02 / 750.03

CE 0318

Denominación

Amnioscopio estéril de un sólo uso.

Conformidad

Producto de Clase IIa estéril

Certificación ISO : Oiarso S. Coop. (Bexen®) tiene implementado y mantiene un sistema de calidad conforme a las exigencias de las Normas ISO 9001.

Marcado CE según la Directiva Europea 93/42/CEE.

Utilización

Instrumento utilizado en obstetricia para verificar :

- El color del líquido amniótico a través de la visualización de la membrana amniótica en contacto con el orificio interno del cuello uterino,
- La presencia o ausencia de elementos flotantes en el líquido amniótico,
- La presencia o ausencia (ruptura) de la membrana amniótica en los alrededores del orificio interno del cuello uterino.

Características

- Los Amnioscopios Bexen® son fabricados en una pieza que simplifica y disminuye el tiempo de examen
- Fácil introducción gracias a paredes sin aristas vivas
- Terminación en cúpula redonda transparente con el fin de evitar cualquier lesión eventual de los bordes del cuello uterino, de la membrana amniótica o posible riesgo para el especialista en caso de ruptura de la bolsa amniótica.
- La ranura del extremo proximal permite la adaptación de todo tipo de fuente de luz.
- Las paredes anti-reflectantes no modifican el color del líquido amniótico y facilitan el examen.
- **Longitud: 200 mm.**
- **Diámetro extremo proximal: 25 mm.**
- **Diámetro extremo distal: VER TABLA.**

Materiales utilizados

Poliestireno de color diferente según el tamaño

Presentación

Unidad de empleo : Envase rasgable


Pedido mínimo : Caja de 50 unidades

Esterilización

Método : Óxido Etileno (EO)

Conservación : 5 años desde fecha de esterilización

Esterilizado por : OIARSO S. COOP.

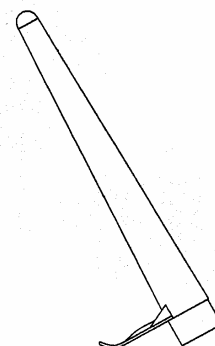

Modo de empleo :

- Rasgar el envase a la altura de la muesca de apertura ;
- Asirlo con la mano por la ranura proximal – No sujetarlo por la cúpula distal ;
- Introducir el amnioscopio en la vagina de la paciente ;
- Proceder al examen obstétrico ;
- Después de su utilización depositar el dispositivo y su embalaje en un recipiente dedicado especialmente a tal efecto.

Ref.	Tamaño	Color	Pedido mínimo	Código EAN
750.01	« Pequeño » 12 mm Ø	Blanco	50 unidades	8427860750012
750.02	« Mediano » 16 mm Ø	Gris	50 unidades	8427860750029
750.03	« Grande » 21 mm Ø	Verde	50 unidades	8427860750036

Ventajas :

Para la paciente :

- Mayor confort gracias a paredes sin aristas vivas ;
- Reducción de riesgo eventual de lesiones en los bordes del cuello uterino y en la membrana amniótica;
- Menor impacto psicológico debido a la utilización de un dispositivo de un sólo uso.

Para el especialista :

- Examen simple y rápido ;
- Menor riesgo en caso de ruptura de la bolsa amniótica ;
- Adaptabilidad a la morfología de la paciente ;
- No modifica el color del líquido amniótico ;
- Posibilidad de adaptar una fuente de luz ;
- El código de colores permite identificar rápidamente los diferentes tamaños disponibles ;
- Práctico y sin necesidad de acondicionamiento, utilización económica.

Fabricante
OIARSO S. COOP. (Bexen®)
B° Zikuñaga, N°57-F Polígono Ibarluze
20128 Hernani
Tel : 943 33 52 82
Fax : 943 33 52 10
E-mail : lasuen@oiarso.com