

BACTIDINA

FICHA TÉCNICA

DETERGENTE DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS
REGISTRO SANITARIO INVIMA 2011DM-0008317
CLASIFICACIÓN INVIMA: Dispositivo médico Clase IIa

BACTIDINA® ES UN BACTERICIDA, FUNGICIDA, DESINFECTANTE, DESODORIZANTE, SANITIZANTE.

BACTIDINA®, AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN, es Dioctyl dimethyl ammonium chloride and alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride; glutaraldehyde; excipientes C.S.P. 100 ml.

Color: Translúcido.

Olor: Sin fragancia.

BACTIDINA® se adhiere a las membranas de los microorganismos provocando una apertura incontrolada del citoplasma, ocasionando pérdida de fósforo y potasio, y permitiendo el ingreso de las cadenas de carbono del radical alquilo, causando destrucción del núcleo y la membrana celular, asegurando la muerte del microorganismo.

BACTIDINA® posee un extraordinario poder bactericida frente a las bacterias Gram positivas y Gram negativas exterminándolas con soluciones considerablemente diluidas de materia activa.

El efecto bactericida frente a las bacterias Gram negativas (por ejemplo, E. coli, Ps. aeruginosa) queda notablemente reforzado por la adición del aldehído.

USOS DE BACTIDINA®

BACTIDINA® es usada para la desinfección efectiva de dispositivos médicos en áreas quirúrgicas, pre quirúrgicas, salas de urgencias, consultorios médicos y odontológicos, especialmente en dispositivos médicos que no pueden ser sumergidos y en los cuales se desea desinfectar o bajar la carga bacteriana. Estos son equipos tales como endoscopios, sondas, catéteres, bronquioscopios, equipos de reanimación, máscaras de anestésicos, fibras ópticas y aspiradoras endobronquiales, o en odontología las piezas de mano, piezas de alta, y en general todos los implementos que necesiten una desinfección a fondo.

Gracias a su sistema de aspersion directa BACTIDINA® es fácil de usar y puede llegar a los sitios menos accesibles distribuyendo diminutas partículas del material en los elementos a desinfectar.

MODO DE EMPLEO:

Lavar los implementos preferiblemente con un detergente enzimático asegurándose de retirarlo.

Aplicar el producto BACTIDINA® con su válvula aspersora, llegando a todos los lugares a desinfectar. Si prefiere utilice el producto abrazando el implemento con una toalla de papel absorbente.

Usar generosamente para mayor efectividad. Dejar en la superficie por 3 minutos y después retirar (si se desea) con un paño completamente limpio.

BACTIDINA® no mancha ni es corrosiva.

VIDA ÚTIL

2 Años.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un sitio fresco y seco, mantener a temperatura inferior a 30 °C.

DISPOSICIÓN FINAL

Por ser biodegradable este producto puede desecharse por el desagüe; hacerlo vertiendo abundante agua.

PRODUCTO UNA VEZ ABIERTO

Debe mantenerse a temperatura inferior a 30 °C y manipularse con las condiciones de higiene y asepsia contempladas en los protocolos de bioseguridad.

PRECAUCIONES

Utilice implementos de seguridad.

No deje al alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Frasco aspersor de 500 mL o 750 mL

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2011DM-0008317

CLASIFICACIÓN INVIMA: DISPOSITIVO MÉDICO CLASE IIa

PRODUCTO BIODEGRADABLE