

ABILAR® Pomada de resina 10 %

Lea todo el prospecto detenidamente antes del uso del producto. El producto está indicado para el cuidado personal y puede ser usado como medicina.



= Caducidad 12 meses abierto

La pomada de resina Abilar® 10% ha sido fabricada con la resina del abeto (*Picea abies*) mezclando la resina refinada con un ungüento graso. Tradicionalmente, en Finlandia se han utilizado pomadas de resina en el cuidado doméstico de enfermedades de la piel (heridas cutáneas, infecciones de la piel, erupciones cutáneas). La pomada de resina Abilar® 10% está fabricada con una base de pomada comprobada y consistente. Se examinan las propiedades biológicas y antimicrobianas, el efecto y la limpieza de la pomada de cada lote producido.

Los ingredientes activos:

La resina refinada del tronco del abeto (*Picea abies*). La proporción de resina en la pomada es del 10% de los ingredientes usados. Tiene un olor fuerte a la resina y un color marrón uniforme.

INCI:

Resina refinada de abeto (*Picea abies*), vaselina, aceite de parafina, alcohol desnaturalizado, oleato de sorbitán, ácido esteárico, aceite de ricino, cera de abejas, cera micro cristalina.

Indicaciones:

La pomada está indicada para el cuidado de heridas de la piel agudas y crónicas, quemaduras, úlceras de presión, desgarros y abrasiones, tratándose de una pomada antimicrobiana (de bacterias y hongos de la piel), favorece la curación de las heridas en personas.

Modo de empleo:

Se tiene que limpiar y secar la zona de la piel afectada antes de aplicar la pomada (o el apósito mojado con la pomada). Se aplica una capa de 1-2 mm entre las capas de una gasa estéril y se coloca el apósito encima de la zona de piel a tratar. Se debe cambiar el apósito diariamente o cada dos días. También se puede aplicar una capa fina de pomada directamente a la piel (sin frotar). Debe evitarse contacto con las mucosas, los ojos y la boca.

Conservación / caducidad:

Debe conservarse en un lugar limpio. Una vez abierto, el producto se conserva durante un año. El producto sin abrir se conserva durante cuatro años.

Uso durante el embarazo y la lactancia:

No debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia. No existen datos sobre posibles contraindicaciones durante el embarazo o la lactancia.

Interacciones:

No se han descrito interacciones clínicas importantes.

Efectos sobre la capacidad de conducción:

No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducción de coches o máquinas.

Contraindicaciones:

Las personas alérgicas a colofonia no deben utilizar la pomada. La resina contiene colofonias y por esta razón, la pomada puede causar reacciones alérgicas en personas alérgicas a colofonia. No se conocen otros efectos secundarios. El ungüento usado como la base de la pomada de resina Abilar® 10% no tiene efectos secundarios. Si el uso de la pomada causa irritación o reacciones alérgicas, se debe suspender su uso inmediatamente y comenzar otro tipo de tratamiento.

Otro:

Se está investigando el uso y la efectividad de la pomada. Se ruega informar al fabricante inmediatamente sobre posibles efectos secundarios, interacciones etc.

CE 0537

Fabricante:

Repolar S.A.,
Päiväperhontie 5, FI-02210 ESPOO, FINLAND
Caja postal 26, FI-02101 ESPOO, FINLAND
www.repolar.com
Email: asiakaspalvelu@repolar.com

03/2013