

GASA ESTÉRIL CUIDADO OCULAR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **GASA PERIOCULAR** es una gasa estéril de algodón, embebida en una solución de extractos vegetales y ácido hialurónico, indicada para la limpieza y mantenimiento del área periocular.

Su acción hidratante y purificante mantienen en condiciones óptimas la zona, que dada su naturaleza es de extremada delicadeza. Asimismo el efecto calmante y refrescante ayudan a restablecer el equilibrio en los casos en los que este balance se ve alterado.

INDICACIONES

La **GASA PERIOCULAR** es efectiva para el higiene de las pestañas, párpados y áreas circundantes de adultos y niños.

Puede usarse a lo largo del año como mantenimiento, pero su uso está especialmente indicado asociado a terapias oculares derivadas de alergias, inflamaciones, flogosis y otras alteraciones de las condiciones normales perioculares.

LOS ACTIVOS

La **GASA PERIOCULAR** está embebida en una solución que contiene activos específicamente pensados para actuar en sinergia y conseguir un alto grado de limpieza y confort en la zona:

- **ÁCIDO HIALURÓNICO:** un activo muy reconocido por sus propiedades hidratantes y reparadoras que consigue restablecer el ambiente idóneo.
- **COMBINACIÓN DE EXTRACTOS VEGETALES:** con elevado poder calmante, descongestionante, purificante, refrescante y lenitivo. Entre estos activos podemos encontrar extractos de Camomila o Manzanilla, Equinácea [conocido por sus propiedades antisépticas y anti bacterianas], extracto de Piña, Regaliz y Eufrasia.

Su fórmula ha sido diseñada para permitir el uso en niños a partir de 2 años y personas con ojos y piel sensible. También hay una variación de la fórmula, apta para bebés.

MODO DE EMPLEO

Lavar las manos y abrir el sobre de aluminio para extraer la **GASA PERIOCULAR**.

Aplicar la gasa sobre párpados y pestañas, frotar suavemente para impregnar todo el área y eliminar las secreciones oculares o eventuales residuos.

En caso de secreciones abundantes y persistentes u oclusiones del conducto lacrimal, se aconseja atemperar, introduciendo el sobre, sin abrir, durante unos minutos en agua caliente [a unos 40°C].

GASA ESTÉRIL CUIDADO OCULAR



En caso de flogosis, por el contrario, se recomienda aplicar la gasa con efecto frío, por lo que es aconsejable introducir el sobre sin abrir en la nevera unas horas antes y aplicar la gasa dejándola sobre el ojo unos minutos a modo de paño frío para conseguir un efecto calmante y descongestionante.

No usar si el sobre de aluminio está abierto o dañado.

CATEGORÍA DEL PRODUCTO

Producto Sanitario clase IIa