

# Actimove® Mitella Comfort



## Descripción del producto:

Funda que proporciona un apoyo vertical efectivo al brazo.

## Indicación:

- Después de lesión por traumas, por condiciones crónicas ó neurológicas relevantes.
- Como apoyo de descanso en lesiones que tengan como tratamiento la colocación de un yeso o férula.

## Características y beneficios:

- Almohadilla acolchada a nivel del cuello que proporciona una mayor comodidad al paciente.
- Soporte para el dedo pulgar dentro de la funda para una mayor comodidad de la mano.
- Fácil sistema de colocación y retiro.
- Larga funda para el brazo.
- Hecho de material liviano.

Descripción	Talla	Circunferencia de la muñeca
Actimove Mitella Comfort	S	34 – 38cm
Actimove Mitella Comfort	M	37 – 43cm
Actimove Mitella Comfort	L	42 – 48cm
Actimove Mitella Comfort	XL	+ 48cm

Propiedades	Actimove Bolsa Cabestrillo Azul tiene un almohadillado adicional para el cuello, mayor confort. Banda del cuello ajustable, con un sistema de sujeción en “Y” que garantiza seguridad terapéutica. Ligero, comodidad de uso. Soporte para el pulgar, evita el deslizamiento.
Modo de empleo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situar el codo dentro del bolsillo del cabestrillo y colocar la tira del cuello por encima del hombro ileso de manera que cruce la espalda.</li> <li>2. Pasar el extremo de la tira de cierre por la anilla y fijar el cierre.</li> <li>3. Ajustar, a la longitud deseada, la tira del cuello. Fijar el sistema de sujeción en “Y” para mantener la posición.</li> <li>4. Para una óptima colocación del cabestrillo, la mano debe encontrarse ligeramente elevada por encima del codo. Colocar el pulgar en el lazo si es necesario.</li> <li>5. Colocar la almohadilla para el cuello en la posición deseada.</li> </ol>
Advertencias	No contiene látex. Mantenerlo lejos de la luz y la humedad. Ajustar los cierres. Lavar a máquina a 30°C (fibras delicadas) o a mano en agua tibia y jabón suave. Dejar secar al aire a temperatura ambiente. Asegurarse de que el cabestrillo está completamente seco antes de volverlo a aplicar.
Características	Ajustable, Ajustable con velcro, Espuma resistente, Soporte pulgar
Adecuado para	Hombre, Mujer
Forma de producto	Caja