



## El sistema OneTouch Verio®

Obtenga más información de forma automática\*

\*Más que solo un número

Consulte el Manual del propietario para obtener más detalles. Como su socio en el cuidado de la diabetes, lo invitamos a comunicarse con nosotros (los 7 días de la semana, de 8 a. m. a 10 p. m., hora del Este) llamando al 1-888-567-3003 (en inglés), llamando al 1-888-567-3010 (en español) o visitando [www.OneTouch.com](http://www.OneTouch.com).

### Conocimiento de su sistema

#### OneTouch Verio® Tira Reactiva

El diseño del canal lateral le permite aplicar una gota de sangre a ambos lados de la tira reactiva.

Es la única tira reactiva que funciona con su medidor OneTouch® Verio®.

#### OneTouch Verio® Medidor

La pantalla grande hace que sea fácil ver sus resultados.

El indicador de intervalo con códigos de colores ayuda a entender sus resultados.

Los botones laterales hacen que el medidor sea fácil de usar.

#### OneTouch® Delica® Dispositivo de Punción

Diseñado para pruebas cómodas

#### Símbolos de la pantalla


- Tendencia alta
- Tendencia baja
- Por encima del intervalo
- Dentro del intervalo
- Por debajo del intervalo
- Solución de control

#### Botones laterales

- Mantenga presionado para encender/apagar el medidor; presione y suelte para confirmar una selección
- Desplácese hacia arriba entre las selecciones en la pantalla
- Desplácese hacia abajo entre las selecciones en la pantalla
- Presione y suelte para regresar; mantenga presionado para ir al menú principal



## Comienzo de las pruebas

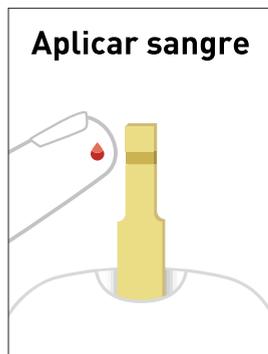

Inserte una tira reactiva y espere a que aparezca el mensaje **Aplicar sangre** en la pantalla.

Obtenga una gota de sangre y aplíquela a cualquiera de los dos lados de la tira reactiva.

Espere a que el medidor comience la cuenta regresiva y muestre el resultado de su análisis de glucosa.



Los mensajes aparecerán automáticamente para ayudarlo a entender los resultados.


Su **Promedio de 7 días** aparecerá automáticamente cuando se realiza dos o más pruebas en los últimos 7 días.

## Saber si está dentro del intervalo o fuera del intervalo

- Por encima del intervalo
- Dentro del intervalo
- Por debajo del intervalo

Aparecen un punto de color y un mensaje debajo de su resultado para hacerle saber si está dentro, por debajo o por encima de los límites del intervalo.

Los límites del intervalo son los que ha establecido en el medidor.

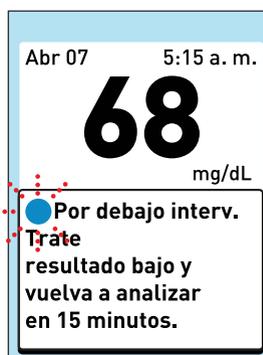

Cuando su resultado está por debajo del límite bajo de su intervalo, el medidor le indicará que se trate y vuelva a analizar


Mensaje Trate resultado bajo

## Saber cuándo está logrando progresos



Mensaje de coherencia

Un **Mensaje de coherencia** le indica con qué frecuencia sus resultados han estado dentro del intervalo en los últimos 7 días.

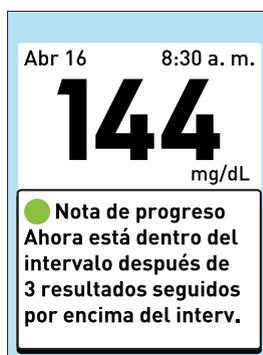


Mensaje de logro

Un **Mensaje de logro** le indica cuando su resultado actual se encuentra dentro del intervalo después de que tres o más resultados consecutivos han estado por encima del límite alto de su intervalo.

**NOTA:** El mensaje **Nota de progreso** (coherencia y logro) deberá estar activado para que estos mensajes aparezcan.

## Saber cuándo ha desarrollado un patrón

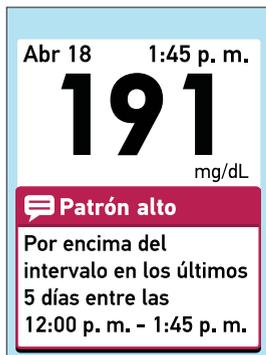

Mensaje de patrón alto

**Patrón alto** le indica cuando sus resultados están constantemente por encima del límite alto de su intervalo a la misma hora del día.



Mensaje de patrón bajo

**Patrón bajo** le indica cuando sus resultados están constantemente por debajo del límite bajo de su intervalo a la misma hora del día.

**NOTA:** Los mensajes de tendencias deberán estar activados para que se muestren estos mensajes.

## Conozca sus niveles de glucosa pasados

Resultados	
	mg/dL
Abr 30 11:52 a. m.	<b>182</b>
Abr 29 10:45 p. m.	<b>98</b>
Abr 29 7:30 a. m.	<b>115</b>
Abr 28 10:12 a. m.	<b>444</b>

Revise los resultados individuales de glucosa en la pantalla Registro de Resultados.

Promedios	
	mg/dL
<b>7 días</b> 57 Resultados	<b>115</b>
<b>14 días</b> 133 Resultados	<b>160</b>
<b>30 días</b> 242 Resultados	<b>190</b>
<b>90 días</b> 500 Resultados	<b>130</b>

Revise sus promedios de glucosa durante diferentes períodos en la pantalla Promedios.