


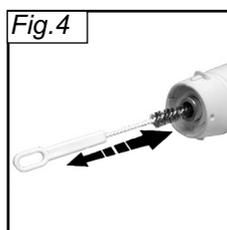
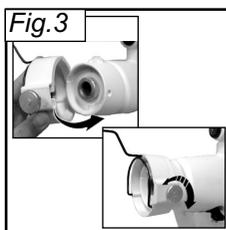


CE

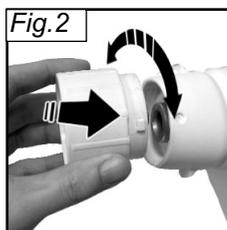

KIT SANI SYSTEM POLTI

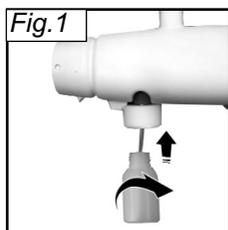

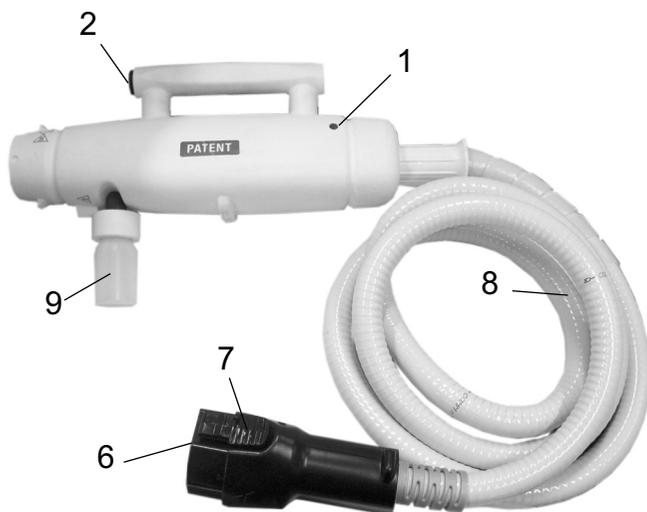

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.

LEYENDA

- 1) Luz indicadora del pulverizador
- 2) Botón de salida del vapor
- 3) Adaptador para chorro de vapor concentrado
- 4) Distanciador
- 5) Cepillo
- 6) Enchufe de monobloque
- 7) Botón de bloqueo del enchufe mono bloque
- 8) Monotubo (vapor - cable de alimentación)
- 9) Frasco monouso HPMD

CE Este aparato está conforme con la *directiva 2004/108/CE (EMC)* y con la *directiva 2006/95/CE (baja tensión)*.

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

ADVERTENCIAS

CONSERVAR ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

- El aparato ha sido diseñado y realizado para su uso en entornos cerrados y nunca al aire libre.
- **ANTES DE SANEAR LAS SUPERFICIES SE RECOMIENDA EXPULSAR EL PRIMER CHORRO DE VAPOR DURANTE UNOS 30 SEGUNDOS SOBRE UN TRAPO O HACIA ABAJO SIN CONECTAR EL EMPALME PARA FRASCO MONOUSO (9). ESTA OPERACIÓN SIRVE PARA QUE ALCANCE LA TEMPERATURA Y LA PRESIÓN DE RÉGIMEN ÓPTIMAS.**
- Antes de tratar superficies delicadas o especiales, recomendamos consultar las instrucciones del fabricante en cuestión y, en cualquier caso, hacer siempre una prueba en una parte que quede escondida o en una muestra. Dejar secar la parte tratada para comprobar que no se hayan producido variaciones de color ni deformaciones.
- Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.
- La conexión eléctrica a la que se conecte el aparato deberá estar realizada de acuerdo con las leyes vigentes.
- No toque nunca el aparato con las manos o los pies mojados cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No use el aparato con los pies descalzos.
- No utilice el aparato demasiado cerca de lavabos, bañeras, duchas y recipientes llenos de agua.
- No sumerja nunca el aparato, el cable o los enchufes en el agua o en otros líquidos.
- Está prohibido el uso del aparato en lugares donde exista riesgo de explosión.
- No utilice el producto en presencia de sustancias tóxicas.
- No deje nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.
- No deje el aparato expuesto a los agentes climatológicos.
- No ponga el aparato cerca de hornillos encendidos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de calor.
- No exponga el aparato a temperaturas extremas.
- No permita que el aparato sea utilizado por niños o personas que no conozcan su funcionamiento.
- No pulse con demasiada fuerza los botones y evitar usar objetos con punta como por ejemplo bolígrafos y otros.
- Apoye siempre el aparato sobre superficies estables.
- En el caso de una caída accidental del aparato, es necesario que lo revise un Servicio Técnico Autorizado, ya que se podría haber producido algún tipo de avería interna que limite la seguridad.
- En caso de daños en el aparato o mal funcionamiento del mismo, apagarlo y no intentar nunca desmontarlo. Acudir a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
- Para no comprometer la seguridad del aparato, en caso de reparaciones o para la sustitución de accesorios utilizar solo recambios originales.
- No enrollar el cable de alimentación alrededor

USO CORRECTO DEL PRODUCTO

del aparato ni de ninguna manera cuando el aparato está caliente.

- No dirigir el chorro de vapor sobre aparatos eléctricos y/o electrónicos.
- Dejar enfriar el aparato antes de proceder a la limpieza del mismo.
- Antes de guardar el aparato, asegurarse de que se haya enfriado completamente.
- Este aparato está dotado de dispositivos de seguridad para cuya sustitución es necesaria la intervención de un servicio técnico autorizado.
- No dirigir el chorro de vapor sobre detritos, personas o animales.
- No acercarse nunca las manos al chorro de vapor.



ATENCIÓN:
¡Peligro de quemadura!

- Este aparato no es apto para su uso por parte de personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean limitadas, o que no cuenten con la experiencia o conocimientos necesarios para hacerlo, a no ser que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El aparato no se puede utilizar si ha sufrido una caída, si tiene marcas visibles de daños o si tiene pérdidas.



ATENCIÓN: alta temperatura.
¡Peligro de quemadura!
No tocar las partes indicadas en el producto

ATENCIÓN: no utilizar productos químicos distintos de los recomendados por el fabricante del aparato.

Polti S.p.a. garantiza el correcto funcionamiento de la máquina sólo si el aparato se utiliza en combinación con HPMed.

En caso de que se utilicen productos distintos de HPMed, Polti rechaza toda responsabilidad y la garantía queda invalidada.

Este aparato está destinado al uso profesional, según las descripciones e instrucciones que figuran en este manual.

Emite vapor saturado a alta temperatura en combinación con sanificante HPMed. El sistema reduce la carga bacteriana, fúngica y viral de las superficies a las que se aplica. Ello permite reducir la posibilidad de infecciones cruzadas. Se recomienda leer atentamente estas instrucciones y conservarlas para futuras consultas.

Polti S.p.A. rechaza toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de este aparato no conforme con las presentes instrucciones de uso.

ATENCIÓN

Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE): información para el usuario. Este producto es conforme con la Directiva EU 2002/96/CE.



El símbolo de la papelera tachada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos.

El usuario es responsable de la entrega del aparato, al final de su vida útil, a los centros de recogida autorizados. El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su eliminación de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está formado el producto.

La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

HPMED

HPMed es, por sus características, el coadyuvante ideal para la acción de saneamiento del vapor saturado sobrecalentado suministrado por Sani System Polti.

El sistema logra sanear todas las superficies

que pueden tener riesgo de contaminación por parte de organismos patógenos como bacterias, hongos y virus.

En combinación con el vapor de Sani System Polti, HPMed también logra reducir los olores.

Modo de empleo: Conectar el frasco monouso al vaporizador tal como se describe en el párrafo "FRASCO MONOUSO HPMED".

Encender la máquina siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez listo para el uso, suministrar vapor y sanificante HPMED. Normalmente, el producto mezclado con el vapor se seca en un tiempo comprendido entre los 30 segundos y un minuto, dependiendo de las condiciones ambientales.

Advertencias: Mantener lejos del alcance de los niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos, lavarse abundantemente con agua y consultar con un médico.

Ficha de seguridad a disposición de los usuarios profesionales.

Exclusivamente para uso profesional.

HPMED es un detergente sanificante para superficies duras.

Contiene 5% tensoactivos no iónicos. (Reg. CEE 648/2004)

PREPARACIÓN PARA EL USO

- Conectar el monobloque (6) al generador de vapor, tal y como se describe en el manual de instrucciones.
- Conectar el frasco monouso al vaporizador tal como se describe en el párrafo "FRASCO MONOUSO HPMED".

INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE: si el generador de vapor cuenta con la función detergente, ésta no se debe activar durante el uso del KIT SANI SYSTEM POLTI.

- Encender el generador de vapor como se describe en el manual de instrucciones.
- Regular el caudal de vapor del generador de vapor a un nivel medio, **no utilizar la pistola con la vaporización de vapor ajustada al máximo.**
- **Esperar hasta que el piloto del vaporizador (1) se apague.** Esto indica que la resistencia dentro del vaporizador ha alcanzado la temperatura de funcionamiento.

- Pulsar el botón de suministro de vapor (2), para obtener la emisión de vapor por parte del vaporizador.

El botón de suministro de vapor (2) se encuentra en "posición de seguridad", para evitar el suministro accidental de vapor.

Notas:

- Durante el uso, la luz indicadora del vaporizador (1) se ilumina y se apaga. Esto indica que la resistencia eléctrica entra en funcionamiento para mantener constante la temperatura del vaporizador. Por tanto, se puede continuar el saneamiento con normalidad, ya que se trata de un fenómeno normal.
- **ANTES DE SANEAR LAS SUPERFICIES SE RECOMIENDA EXPULSAR EL PRIMER CHORRO DE VAPOR DURANTE UNOS 30 SEGUNDOS SOBRE UN TRAPO O HACIA ABAJO SIN CONECTAR EL EMPALME PARA FRASCO MONOUSO (9). ESTA OPERACIÓN SIRVE PARA QUE ALCANCE LA TEMPERATURA Y LA PRESIÓN DE RÉGIMEN ÓPTIMAS.**

MODO DE USO

Antes de tratar con el sistema de saneamiento SANI SYSTEM POLTI superficies delicadas o especiales, consultar las instrucciones del fabricante y efectuar siempre una prueba en una parte que quede escondida o en una muestra.

Dejar secar la parte tratada para comprobar que no se hayan producido variaciones de color ni deformaciones.

Antes de sanear, hay que asegurarse de que la superficie que se va a tratar esté limpia. En caso de suciedad visible, limpiar la superficie antes de sanearla.

Dejar salir vapor durante 2 segundos hacia abajo, para que todos los componentes de la máquina recuperen la temperatura adecuada, evitando así la formación de fenómenos de condensación. Colocar el vaporizador en posición perpendicular respecto a la superficie a tratar y mantener una distancia de 10 cm., que es la que proporciona el distanciador, evitando que este último toque directamente la superficie. Hacer salir el vapor, realizando repetidos movimientos como "pinceladas" sobre la superficie a tratar.

Los tratamientos repetidos permiten lograr una mayor eficiencia de saneamiento de las superfi-

cies tratadas.

SANI SYSTEM POLTI suministra vapor saturado sobrecalentado que, junto con HPMED, seca, normalmente, sin dejar residuos, en un plazo de entre 30 segundos y 1 minuto, dependiendo de las condiciones ambientales.

Para el saneamiento de tuberías, desagües, etc., conectar al vaporizador el adaptador (3), que permite tener en la salida un chorro de vapor concentrado. Asegurarse antes del uso de que el material tratado sea resistente a las altas temperaturas.

FRASCO MONOUSO HPMED

- Desenroscar el tapón del frasco monouso.
- Enroscar el frasco (9) al vaporizador de SANI SYSTEM POLTI (fig.1).

Cuando el nivel de HPMED del frasco monouso baje del nivel mínimo indicado en la etiqueta, proceder a su sustitución con un nuevo frasco.

Una vez abierto e introducido el frasco monouso en el vaporizador, se garantiza la eficacia de saneamiento durante 7 días.

Por tanto, se recomienda, después de ese tiempo, quitar el frasco eventualmente utilizado parcialmente y sustituirlo con otro nuevo.

No llenar de nuevo el frasco monouso.

MONTAJE DE LOS ACCESORIOS

Se pueden montar en el pulverizador los siguientes accesorios:

Distanciador (3): el distanciador ayuda a mantener la distancia correcta para el saneamiento de la superficie a tratar.

Para montarlo, introducir la punta del pulverizador en el anillo del distanciador, primero por la parte contraria a la de los tornillos de fijación, y luego hacer coincidir el anillo del distanciador con la punta del pulverizador, y fijarlo enroscando el tornillo de fijación (fig.2)

Adaptador para chorro de vapor concentrado (4): este accesorio permite contar con un chorro de vapor concentrado en la salida del pulverizador. Para montar este accesorio, hacer coincidir los dientes del adaptador con el alojamiento de la punta del pulverizador. Insertar el accesorio en el pulverizador empujándolo hasta que encaje y girarlo en el sentido de las agujas del reloj (fig.3)

GUARDAR EL APARATO

Una vez finalizada la utilización del aparato, colocarlo en un lugar seco y limpio, desconectado de la red eléctrica y lejos de fuentes de calor y de agentes atmosféricos. No dejar el aparato sometido a temperaturas extremas.

MANTENIMIENTO

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufar siempre el enchufe de alimentación de la red eléctrica y dejar enfriar el aparato.

En caso de que el monotubo esté deteriorado, hay que cambiarlo en un centro de asistencia técnica autorizado.

Limpieza de boquilla vaporizadora

Efectuar la limpieza de la boquilla vaporizadora cada 10-15 horas de uso.

Proceder a la limpieza de la boquilla vaporizadora con el cepillo (5) incluido en los accesorios, haciéndolo pasar por el interior del tubo, eliminando los eventuales residuos calcáreos del interior (fig.4)

Limpieza externa

Para la limpieza externa del aparato, se recomienda utilizar simplemente un paño húmedo. Evitar el uso de disolventes o detergentes que podrían causar daños en las superficies.

Cuidar especialmente la limpieza externa del aparato si se pasa de un entorno a otro, limpiando también las ruedas.

ATENCIÓN: para cualquier otro procedimiento de mantenimiento y cuando así se indique, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado. No intentar, por ningún motivo, desmontar el aparato o abrirlo.