



AIIDent

equipamiento medico - odontológico




AIIDent

equipamiento medico - odontológico

NEGATOSCOPIO PARA ORTODONCIA A LED

MANUAL DE INSTRUCCIONES

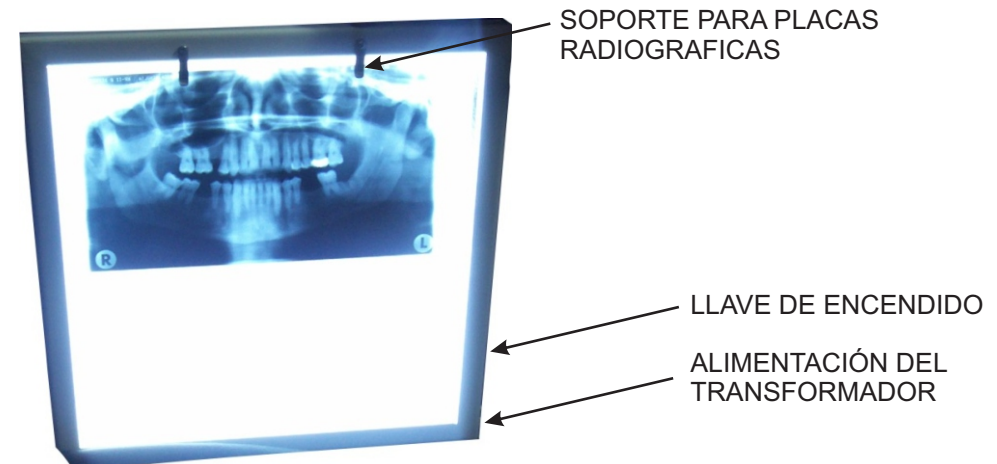

EL NEGATOSCOPIO A LED ANTE UNA EVENTUALIDAD COMO ACTUAR		
PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No Enciende	El transformador del negatoscopio puede no estar conectado bien o quemado. La llave no acciona.	Controlar que este bien conectado el transformador tanto a la red de 220 V como al negatoscopio. Revisar la llave que no este rota.
Se corta la fuente de luz	Se ha producido una falla en el circuito eléctrico	Enviar al servio técnico.
No encienden todos los leds correspondientes	Se encuentra que algún led este quemado para lo cual hay que cambiarlo.	Enviarlo al servicio técnico para la reparación.

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR FAVOR LEA EL MANUAL

Advertencias



Para reducir el riesgo de descargas eléctricas no retire la cubierta posterior.
Ante cualquier inconveniente remitase al servicio técnico.



El Negatoscopio a Led es de bajo voltage. Su alimentación es de 12 volts.
Si tenga precaución al enchufar el transformador a 220 V.



Esta unidad esta provista con dos perforaciones en su parte posterior para ser colgado.
Utilizar tornillos fisher del 6 u 8.



AIIDent

equipamiento medico - odontológico

Procedimiento de Uso.

- 1) Conecte el transformador al negatoscopio y a la unidad de 220v. de la parte edilicia.
- 2) Encienda el negatoscopio a traves de la llave de encendido.
- 3) Coloque la placa radigrafica y sujetela por medio de los sujeta placa del negatoscopio.