



Manual de Instrucciones de

Calcium Chloride Solution (0.02M)

I. Uso previsto

Pacific Hemostasis® Calcium Chloride Solution 0,02 M (CaCl₂) se utiliza con activadores de ácido elálgico para realizar pruebas de tiempo de tromboplastina parcial activada (con ATTP-LS y APTT-XL).

Consulte los números de referencia 100402 y 100403 (APTT-XL)

Consulte los números de referencia 100300 y 100303 (APTT-LS)

II. Reactivo

Para uso diagnóstico *in vitro*.

Composición: Cloruro de calcio al 0,222 %, azida sódica al 0,1 %, y estabilizantes.

Advertencia: Calcium Chloride Solution (0,02 M) contiene azida sódica. En un medio ácido, la azida sódica produce ácido hidrazóico, un compuesto muy tóxico. Diluir con agua corriente antes de desechar, y luego aclarar con agua abundante. Se recomienda seguir estas precauciones a fin de evitar la acumulación de residuos en las tuberías de metal, que pueden generar condiciones explosivas.

Conservar este producto a 2–8 °C.

Material suministrado: CaCl₂ (0,02 M), 10 x 10 mL

Información para pedidos

Nº de ref.	Descripción	Contenido
100304	CaCl ₂ (0,02M)	10 x 10 mL
100300	APTT-LS	10 x 4 mL
100303	APTT-LS	10 x 10 mL
100402	APTT-XL	10 x 4 mL
100403	APTT-XL	10 x 10 mL

GARANTÍA LIMITADA DE FISHER DIAGNOSTICS®

Fisher Diagnostics (FD) garantiza al comprador que sólo los productos de Fisher Diagnostics funcionarán tal y como se describe en sus etiquetas y documentación. El comprador debe determinar si los productos de Fisher Diagnostics son idóneos para sus aplicaciones específicas. La única obligación de Fisher Diagnostics será, a su elección, la sustitución de un producto defectuoso o que no cumpla con las especificaciones, o bien la devolución del precio de compra. FD RECHAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO INDIVIDUAL. Ni FD ni sus afiliados podrán ser considerados responsables, en ningún caso, por las pérdidas o daños incidentales o consecuentes.

Pacific Hemostasis® es una marca registrada de Fisher Scientific Company L.L.C.

Fisher Diagnostics® es una marca registrada de Fisher Scientific Company L.L.C.

[Nota : se presentan las claves de los símbolos utilizados en los rotulos] :

Clave de los símbolos para:



Pacific Hemostasis®

(símbolo grafico)	Fabricante
IVD	Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i>
LOT	Numero de lote
(símbolo grafico)	Fecha de caducidad
(símbolo grafico)	Limite de temperatura
CE	Marca CE
REF	Numero de catalogo
(símbolo grafico)	Consultar instrucciones de uso
PD	Fecha del envase
EC/ REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea

Fisher Diagnostics®

Fisher Scientific Company L.L.C.
8365 Valley Pike
Middletown, VA 22645-0307, EE.UU.
1-(800) 528-0494 sólo en EE.UU.

EC REP

MDCI Ltd.
Arundel House
1 Liverpool Gardens
Worthing, West Sussex BN11 1SL
R.U.