



Alldent

equipamiento medico - odontológico




Alldent

equipamiento medico - odontológico

GABINETE DE REVELADO DE ACERO INOXIDABLE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

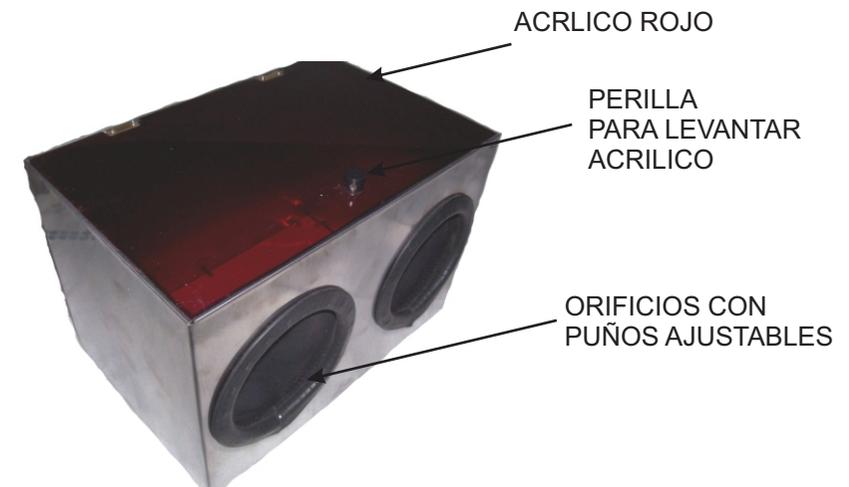

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR FAVOR LEA EL MANUAL

Advertencias



No coloque el gabinete debajo de una fuente de luz muy fuerte ya que eso puede provocar que vea la placa radiográfica.



No coloque el gabinete en lugar que este al alcance de los niños ya que los líquidos son tóxicos, no por el aparato en si si no por los líquidos que se utilizan.



Es aconsejable siempre colocarse guantes.



AIIDent

equipamiento medico - odontológico

Procedimiento de Uso.

- 1) Es aconsejable no colocar el gabinete debajo de la iluminación de un tubo fluorescente, ya que esa potencia de luz puede velar las placas radiográficas en el proceso de revelado.
- 2) Introduzca las manos a través de los orificio con puño ajustable. Esto es para que quede la mano en el interior y esta ajustado para que no entre luz al interior.
- 3) Cuando introduzca las manos lleve consigo la placa radiográfica a revelar.
- 4) Ahora proceda a sacar la placa de su envoltorio protector para poder realizar el proceso de revelado.
- 5) Agarre la placa con las pinzas especiales para revelar.
- 6) Una vez que tenga la placa sola sumerjala en el vaso que coloco el revelador. Al cabo de 30 a 50 segundos, dependiendo de la concentración del revelador y del tiempo que tiene en el vaso ya que el liquido revelador tiene un proceso de oxidación en donde pierde su poder de revelado.
- 7) Al retirar la placa del revelador antes de introducirla en el fijador le recomendamos que haga un lavado de la misma en el vaso que contiene agua.
- 8) Recien ahora coloquelo en el vaso del fijador durante 50 segundos y vuelva a enjuar en agua.
- 9) Ahora podra abrir el acrilico rojo desde la perilla para levantar el acrilico para ver la placa radiográfica.
- 10) Por último recomendamos que una vez finalizado el proceso lava bien bajo la canilla de agua a la placa y tape los vasos de revelador y fijador.