

## MANUAL DE INSTRUCCIONES DE BTM INJECTOR PLUS

**PRECAUCIÓN: Antes de usar, asegúrese que el auto-inyector está en perfecto estado de Conservación y funcionando perfectamente**

1) Cargar el Autoinyector:

**Introducir lado transparente** del segmento delgado, **dentro del lado gris** del segmento ancho hasta obtener un “Click”.

- 2) Introducir la jeringa por la parte posterior del segmento delgado.
- 3) Atornillar uniendo los dos segmentos.
- 4) Colocar el seguro en “Rojo”.
- 5) Retirar la tapa naranja.
- 6) Previo al uso colocar el seguro en “Verde”
- 7) Tomar el Autoinyector con el dedo pulgar hacia arriba.
- 8) Presionar el botón disparador con el pulgar, con el Autoinyector en posición oblicua.
- 9) Esperar 6 a 10 segundos hasta que ingrese todo el medicamento.
- 10) Presionar el punto de inyección entre el pulgar y el índice por 10 segundos
- 11) Masajear para distribuir el medicamento.
- 12) **Desarmar el autoinyector**, colocar la tapa a la jeringa y desecharla.

**PRECAUCIÓN: En caso de sangrado continuar ejerciendo presión hasta que se detenga.**

### **Conservación y mantenimiento**

Guarde el autoinyector en su estuche para protegerlo del polvo y daño accidental por caídas,

Para la limpieza, use un algodón empapado en detergente suave. Para evitar daños, no lavarlo, ni lubrique o sumerja en alcohol.

Limpie la suciedad y el polvo con un cepillo de dientes suaves.

El autoinyector debe ser utilizado según como se describe en las instrucciones de uso.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados por el uso o mal uso de la misma.

**Precauciones de seguridad**

No intente reparar el autoinyector defectuoso.

No utilice en el vacío el autoinyector sin jeringa, esto podría dañar el mecanismo de acoplamiento del pistón.

No use el autoinyector sin conocer su forma de uso correcto.