### **Bischoff & Bischoff**

Manual de instrucciones

### Certificado de garantía

(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: Silla de ducha Trinidad

Número de serie:\*

(debe anotarlo el comercio especializado)

**Distribuidor:** 

Fecha y sello

#### **MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.**

C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1

Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat

Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423

www.bischoff-bischoff.com







## Silla de ducha Trinidad (con respaldo)

#### Estimado cliente,

Con la adquisición de este accesorio de asistencia para la ducha B+B obtiene un producto alemán de primera calidad que le facilitará el cuidado en casa. Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del accesorio de asistencia para la ducha B+B y así sentirse más seguro.

Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

#### 1. Declaración de conformidad

En calidad de fabricante del producto, B+B declara que la silla de ducha Trinidad cumple íntegramente los requisitos de la directiva 93/42/CEE.

# 2. Información para la utilización del producto

La silla de ducha Trinidad está exclusivamente diseñada para sentarse durante la ducha.

#### 3. Finalidad de uso - Indicaciones

Inestabilidad/incapacidad de mantenerse en pie por una menor utilización o una falta de funcionalidad de las extremidades inferiores (p. ej., por la pérdida de fuerza a causa de enfermedades malignas, así como enfermedades pulmonares y cardiovasculares avanzadas y crónicas) combinado con una debilidad postural del tronco.


### 4. Atención: indicaciones de seguridad, análisis de riesgo según DIN EN ISO 13485

- Se requiere la ayuda de otra persona para sentarse y levantarse.
- 120 kg de capacidad de carga máxima.
- Ajuste las 4 bases de la silla a la misma altura.
- Asegúrese de la correcta colocación de los botones de bloqueo.
- Tenga cuidado de no aplastarse los dedos al fijar la superficie de asiento en el armazón del asiento.
- La superficie de asiento solo sirve para sentarse.







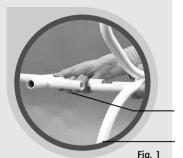


# 5. Cómo ensamblar y montar el asiento

Introduzca la pieza lateral en el armazón del asiento y fíjelo desde abajo con los tornillos autorroscantes (véanse las figuras 1 y 2).

Armazón del asiento

Armazón lateral

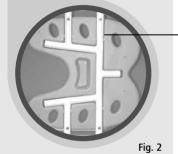

Tornillo autorroscante



Para poder sentarse correctamente, tanto las curvaturas de los asideros como el hueco del asiento deben estar orientados hacia delante (véase la fig. 3).

El asiento encaja a presión en el armazón (véase la fig. 3).

Para extraer el asiento, sujételo firmemente por el armazón lateral y extraiga el asiento del armazón.

### 6. Cómo montar el respaldo

El respaldo se coloca sobre elemento del armazón lateral correspondiente (véase la fig. 4) y se fija con botones de fijación en los orificios previstos del armazón y el respaldo (véase la fig. 5)



Fig. 4




# 7. Cómo ajustar la altura del asiento

Es posible ajustar la altura de ambas bases en 5 niveles (intervalo de ajuste de 10 cm). Para ello tire hacia fuera del dispositivo de bloqueo y ajuste la posición deseada.

Una vez ajustada la altura deseada, bloquee la pinza en el orificio previsto (véanse las figuras 6 y 7). Las cuatro bases deben ajustarse a la misma altura.



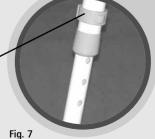

Pinzas de bloqueo -



## 8. Limpieza y desinfección de la silla de ducha

Limpie y desinfecte la silla solo con productos convencionales.

#### 9. Datos técnicos

• 120 kg de capacidad de carga máxima

• An./al./pr. (en mm): 510/580/800-900

• Peso: 4,7 kg

• Altura del asiento: 455-555 mm

en 5 niveles mediante la pinza

 Anchura/profundidad de la superficie de asiento: 400/400 mm

• Resistencia al calor: hasta 125 °C

Color: azul o blanco

# 10. Herramientas de ajuste y reparación

1 × destornillador de cruz

 $1 \times$  llave angular de cabeza hexagonal n.º 5

### 11. Identificación del producto

El armazón del producto lleva un adhesivo identificativo en el que figura el nombre del producto, el número de serie, el peso máximo del usuario y la dirección de la empresa.

#### 12. Garantía

Solo se asumirá la garantía si el producto ha sido utilizado en las condiciones indicadas y para los fines previstos.

El producto debe devolverse en el embalaje original.

# 13. Suministro del equipamiento de serie

1/1 × armazón lateral izquierdo/derecho

1 × armazón del asiento

1 × superficie de asiento B+B (plástico)

1 × respaldo B+B (plástico)

 $4 \times barra telescópica$ 

 $4 \times pasador de seguridad$ 

1 × juego de tornillos

2 × remache ciego (de plástico, blanco)