

# Cone Indicator Esterilización Química

\*PELÍCULA RADIOGRÁFICA NO INCLUIDO



- Durabilidad
- Radiografía con precisión
- Encuadramiento perfecto
- Fácil posicionamiento
- Practicidad
- Conjunto previamente montado

**CONE INDICADOR ESTERILIZACIÓN QUÍMICA:** Permite la ejecución de periapical e interproximal con rapidez y precisión.

**INDICACIÓN:** En las diversas áreas de la odontología donde existe la necesidad de ejecutar tomadas radiográficas para diagnóstico o durante los tratamientos clínicos.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Enganchar la película radiográfica en la aleta de presión; Poner el posicionador en la boca del paciente de manera que el diente en cuestión se quede en el centro de la película radiográfica; El paciente debe cerrar la boca para estabilizar el posicionador;

En las radiografías periapicales alinear el Cono del aparato de rayo-X en el anillo del posicionador.

En las radiografías interproximales la varilla de indicación del posicionador Bite Wings debe pasar fuera del cono del aparato de rayo-X, se quedando en paralelo al mismo y el Cono del aparato de rayo-X debe constar en el índice del posicionador.

\*Consulte el prospecto

**PRESENTACIÓN:** 1 PIEZA A para dientes posteriores (superior izquierdo y inferior derecho); 1 PIEZA B para dientes posteriores (superior derecho y inferior izquierdo); 1 PIEZA C para dientes anteriores (superiores e inferiores); 1 BITE WINGS para dientes posteriores (superiores e inferiores)

3 Dispositivos para mordedura

1 Pote

ATENCIÓN: No incluye la película radiográfica

**LIMPIEZA:** La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar los residuos a través de limpieza manual.

**DESINFECCIÓN:** Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez minutos.

**ESTERILIZACIÓN:** Después de la inspección visual, comprobar la eficacia del proceso de limpieza, desmontar el anillo y acondicionar todas las piezas del conjunto de posicionadores en un envase estéril (grado quirúrgico de tamaño compatible para que el anillo no sufra deformación) o dentro del pote exclusivo Indusbello, que debe ser colocado en el autoclave con el dispositivo de la tapa abierto y sólo después de la esterilización, debe cerrarse. La esterilización deberá realizarse en autoclave a una temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para cada uso.

**ACONDICIONAMIENTO:** Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo e insectos.

**COMPOSICIÓN:** Poliestireno, pigmento y silicona no tóxica.

**PRECAUCIÓN:** Esterilizar antes del uso. No permita que el producto toque las paredes interiores del autoclave.

**PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO:** Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto antes de cada uso y compre un nuevo caso pueda observar fatiga excesiva o presenten riesgo de quiebra.

Código

Descripción

Presentación

ANVISA

107588200004  
107588100007  
107588200011  
107588100013

Cone Indicador Adulto  
Bite Wings  
Cone Indicador P/ Dientes Anteriores  
Dispositivo para Mordedura

1 Caja  
16 Unidades  
6 Unidades  
30 Unidades

1 80213420035

 Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

 Indústria Brasileira