



Abritec Tortuga



- *Material atóxico y esterilizable, con gran durabilidad*
- *Disponible en diseños y colores variados*
- *Más seguridad y facilidad de remoción*
- *Tiene orificio central para uso de hilo dental*



INDICACIONES: Indicado para mantener la boca del paciente abierta, facilitando y proporcionando confort durante los procedimientos odontológicos.

INSTRUCCIONES DE USO: Llevar a La boca, mantener en posición por los dientes de las hemi-arcadas (superior e inferior), siendo que la hemi-arcada debe ser del lado opuesto al diente que será tratado. El lado más grande del trapecio debe quedarse para las vestibulares de los dientes.

LIMPIEZA: La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar residuos través de limpieza manual.

DESINFECCIÓN: Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez minutos.

ESTERILIZACIÓN: Deberá realizarse en autoclave a una temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para cada uso.

ACONDICIONAMIENTO: Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.

COMPOSICIÓN: Silicona no toxica y pigmento.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes del uso. No permita que el producto toque las paredes interiores del autoclave.

PLAZO DE PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto antes de cada uso y compre un nuevo caso pueda observar fatiga excesiva o presenten riesgo de quiebra.

Código	Descripción	Presentación	ANVISA
101052100907	Abritec Tortuga	1 Unidad	I 80213420037

REP Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

Industria Brasileira



SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

/indusbello

/indusbello

/indusbello