

Indicaciones uso:

Destinado a utilizarse como sonda intra-vaginal en el tratamiento de la incontinencia urinaria de "esfuerzo", "urgencia" y "mixta" para la estimulación muscular y equipo de bioinformación y aprobado por EN60601-01.

SÓLO PARA UN ÚNICO PACIENTE – puede ser utilizado por el mismo paciente varias veces. Utilícese bajo supervisión médica.

Contraindicaciones:

NO SE DEBE UTILIZAR EN:

Estimulación eléctrica si va equipado con un marcapasos cardíaco • En caso de embarazo • Si el precinto del envoltorio no está intacto • En caso de infección, herida o cicatriz reciente • Durante la menstruación • No se debe utilizar estimulación eléctrica en pacientes con historial de carcinoma en la zona pélvica • Interrumpa el uso de la PERIFORM®+ si aparece irritación o molestia y consulte con su médico.

Precauciones:

Cuando se aplique estimulación eléctrica en paciente con sensación tisular alterada o reducida • Durante la estimulación eléctrica si el usuario tiene un historial de epilepsia (consultar asesoramiento médico) • Utilizar la PERIFORM®+ con equipos capaces de emitir salidas con exceso de $2\text{mA}/\text{cm}^2$. En caso de duda contacte con el fabricante del equipo o con su asesor médico.


Limpieza:

- Limpie la PERIFORM®+ con agua jabonosa templada.
- Enjuáguela bien y séquela.
- Repetir después de cada uso y secar correctamente antes de guardarla en su funda plástica.
- NO UTILIZAR AGUA HIRVIENDO.

Eliminación:

Límpiala cuidadosamente y deséchela según las regulaciones locales.

Figura 1

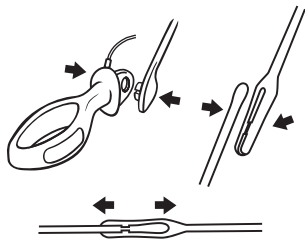

Instrucciones de Uso:

IMPORTANTE:

- Antes de la primera utilización y cada una de las siguientes utilizaciones, lávela y séquela según indicado anteriormente.
- Aplique una ligera cantidad de KY Gel o gel lubricante similar en el cuerpo y partes metálicas de la sonda para una fácil introducción y una buena conductividad.
- Si se utiliza con la Indicación de Contracción conectarla juntas como indica la Figura 1.
- Introduzca la sonda en posición "Este/Oeste", p.e. superficies metálicas del electrodo encaradas a las caderas; No la coloque demasiado dentro de la vagina. La brida externa debe quedar cómodamente apoyada entre los labios.
- Antes de conectar los cables de la sonda asegúrese de que el equipo está desactivado.
- Utilícelo según las indicaciones de su médico. Después de utilizarlo, apague el equipo y desconecte los cables. Para desconectar la sonda no lo haga tirando de los cables.
- Lave y seque la sonda según instrucciones.

Indicador de Contracciones:

Si está conectada la sonda al Indicador de Contracciones le proporcionará información valiosa sobre el estado de los músculos del suelo pélvico. Puede utilizarse para uso propio o cuando se utiliza con equipo de Estimulación y Bioinformación. Cuando los músculos del suelo pélvico se contraen correctamente el indicador se inclinará de manera descendente (✓). Una flexión ascendente indica una contracción incorrecta (X), como aparece en la Figura 2.

Beneficios del Indicador:

- Cuantifica la fuerza y duración de las contracciones voluntarias e involuntarias (estimuladas). Las contracciones voluntarias se pueden utilizar para reforzar las contracciones estimuladas.
- Indica la necesidad de utilizar la estimulación para refuerzo de un suelo pélvico débil – p.e. poco o nulo movimiento.
- Enseña técnicas vigorizantes que ayudan a evitar fugas al toser, estornudar, realizar esfuerzos etc.
- Demuestra el resultado positivo de un programa de ejercicios destinado al suelo pélvico.

