


# OMRON®

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

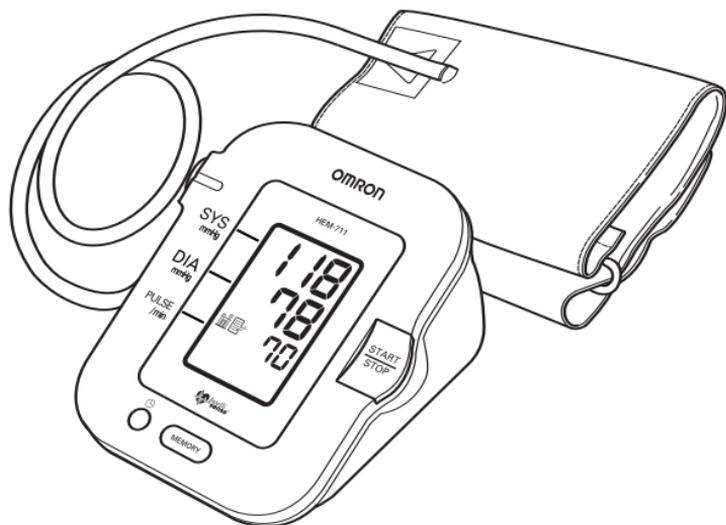

### Monitor Automático de la Presión Arterial con Brazaletes de Brazo Modelo HEM-711AC



ESPAÑOL

ENGLISH

# ÍNDICE

## Antes de usar el monitor

Introducción .....	2
Notas de seguridad importantes .....	3
Antes de medir la presión arterial .....	4

## Instrucciones de operación

Conozca su unidad .....	5
Pantalla de la unidad .....	6
Símbolo de latidos irregulares del corazón .....	6
Instalación de las pilas .....	7
Uso del adaptador de CA .....	8
Ajuste de la fecha y la hora .....	9
Colocación del brazalete .....	12
Cómo medir la presión arterial .....	15
Uso de la función de memoria .....	17

## Cuidado y mantenimiento

Cuidado y mantenimiento .....	19
Indicadores de error .....	20
Sugerencias para la resolución de problemas .....	21
Guía de referencia rápida .....	22
Declaración de la FCC .....	24
Información sobre la garantía .....	25
Especificaciones .....	26

# INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el monitor automático de la presión arterial HEM-711AC IntelliSense® de Omron.

*Llenar para futura referencia.*

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

NUMERO DE SERIE: \_\_\_\_\_

*Engrape su recibo de compra aquí*

Su nuevo monitor digital de la presión arterial usa el método oscilométrico de medición de la presión arterial. Esto significa que el monitor detecta el movimiento de la sangre a través de la arteria braquial y convierte el movimiento a una lectura digital. Un monitor oscilométrico no necesita estetoscopio, por lo tanto el monitor es fácil de usar.

La unidad HEM-711AC viene con los siguientes componentes:

- Monitor
- Brazaletes estándar para adulto
- Adaptador de CA
- Manual de instrucciones impreso en inglés y español
- Estuche de almacenamiento

El monitor de la presión arterial de inflado automático HEM-711AC IntelliSense® está diseñado para uso domiciliario.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## NOTAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para asegurar el uso correcto del producto, deben tomarse medidas de seguridad básicas, entre ellas las precauciones listadas a continuación:

- ☑ Antes de usar la unidad, lea toda la información descrita en el manual de instrucciones y cualquier otra documentación incluida en la caja.
- ☑ Comuníquese con su médico para obtener información específica acerca de su presión arterial. Siga las instrucciones de su proveedor de atención médica.
- ☑ Use la unidad sólo según lo indicado. No la use para ningún otro propósito.
- ☑ La unidad está diseñada para medir la presión arterial y frecuencia del pulso en pacientes adultos. No use la unidad en bebés ni en personas que no pueden expresar sus intenciones.
- ☑ No utilice un teléfono celular cerca de la unidad. Esto puede causar una falla de funcionamiento.
- ☑ No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación eléctrica con las manos húmedas.
- ☑ Los cambios o modificaciones no aprobados por Omron Healthcare anularán la garantía del usuario. No desarme ni trate de reparar la unidad ni los componentes.

# ANTES DE MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL

Para asegurar una lectura confiable, siga estas recomendaciones:


1. Evite comer, fumar y hacer ejercicios los 30 minutos anteriores a la medición. Descanse por lo menos 15 minutos antes de la medición.
2. El estrés aumenta la presión arterial. Evite realizar mediciones durante momentos de estrés.
3. Las mediciones deben realizarse en un lugar tranquilo.
4. Quítese la ropa apretada del brazo izquierdo.
5. Siéntese en una silla con los pies en el suelo. Coloque su brazo izquierdo sobre una mesa de manera que el brazaletes esté al mismo nivel que su corazón.
6. Permanezca quieto y no hable durante la medición.
7. Mantenga un registro de las lecturas de su presión arterial y frecuencia del pulso para su médico. Una sola medición no proporciona una indicación precisa de su verdadera presión arterial. Es necesario tomar y anotar varias lecturas durante un período de tiempo. Trate de medir su presión arterial a la misma hora cada día.
8. Espere 2 a 3 minutos entre mediciones. El tiempo de espera permite que las arterias vuelvan al estado en que estaban antes de la medición de tensión arterial. Es posible que necesite aumentar el tiempo de espera, según sus características fisiológicas individuales.

# CONOZCA SU UNIDAD


## Unidad principal:



## Componentes:

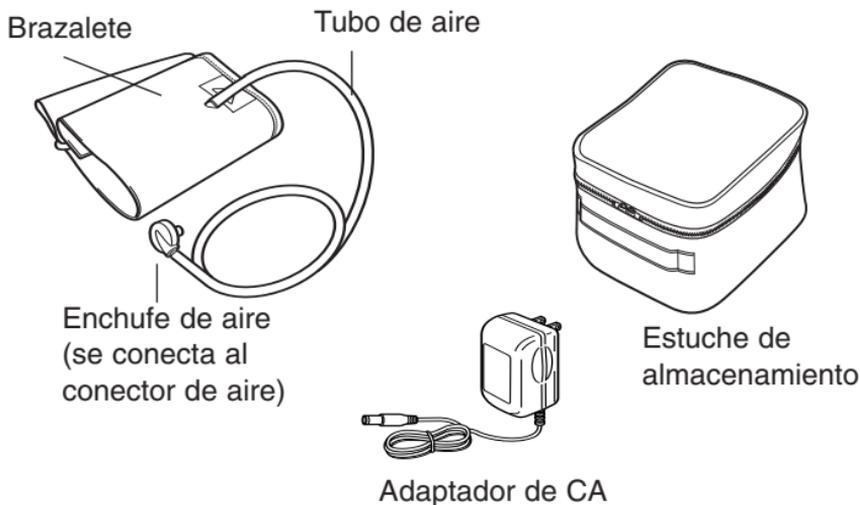

# PANTALLA DE LA UNIDAD

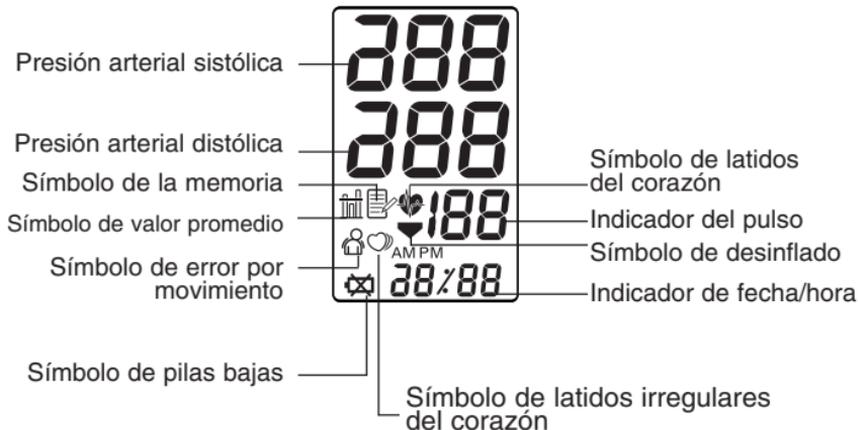


## SÍMBOLO DE LATIDOS IRREGULARES DEL CORAZÓN

Cuando un monitor detecta un ritmo irregular dos o más veces durante la medición, el símbolo de latidos irregulares del corazón (♡) aparecerá en la pantalla con los valores de medición.

Se denomina ritmo irregular de los latidos del corazón a un ritmo que varía por más del 25% con respecto al ritmo promedio detectado mientras el monitor mide la presión arterial sistólica y diastólica.

Si el símbolo de latidos irregulares del corazón (♡) aparece con sus resultados de medición, recomendamos que se comunique con su médico. Siga las instrucciones de su médico.

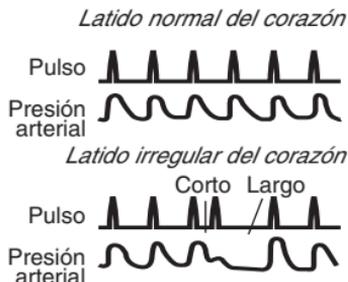


# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Presione el indicador ▼ situado en la cubierta de las pilas y deslice la cubierta en dirección de la flecha para extraerla.



2. Instale 4 pilas “AA” de manera que las polaridades + (positiva) y - (negativa) coincidan con las polaridades indicadas en el compartimiento de las pilas.

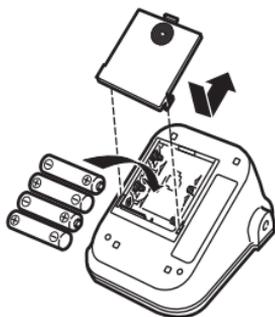

3. Vuelva a colocar la cubierta de las pilas.

## REEMPLAZO DE LAS PILAS

 Indicador de pilas bajas

Cuando aparezca en la pantalla el indicador de pilas baja, quite todas las pilas. Reemplácelas con cuatro pilas nuevas.

Se recomienda el uso de pilas alcalinas de larga duración.

**NOTA:** Los valores de medición almacenados en la memoria no se eliminarán durante el reemplazo de las pilas.


Después de reemplazar las pilas, reajuste la fecha y la hora.

Consulte la página 10, Ajuste de la fecha y hora.

# USO DEL ADAPTADOR DE CA

Use sólo el adaptador de CA Omron autorizado, número de modelo HEM-ADPT1, con este monitor. El uso de cualquier otro adaptador puede causar daño al monitor y anulará la garantía del usuario.

## Para conectar el adaptador de CA

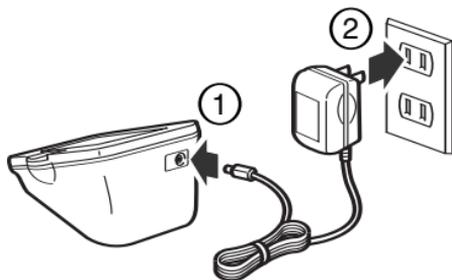

- ① Inserte el enchufe del adaptador de CA en el conector del adaptador de CA situado en la parte trasera del monitor, tal como se ilustra.
- ② Enchufe el adaptador de CA en una toma de corriente de 120 VCA (60 ciclos).

Para desconectar el adaptador de CA, primero extraiga el adaptador de CA de la toma de corriente y luego quite del monitor el enchufe del adaptador de CA.

**NOTA:** El monitor está diseñado para no consumir alimentación de las pilas cuando se utiliza el adaptador de CA.

# AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA


El monitor de la presión arterial automáticamente almacena hasta 60 valores de medición con la fecha y hora. El monitor también calcula una lectura promedia basada en los últimos tres valores de medición.

Ajuste el monitor con la fecha y hora actual antes de realizar la primera medición. Si no se ajusta la fecha y la hora, aparecerá en la pantalla una fecha y hora predeterminadas.

## 1. PARA COMENZAR EL AJUSTE

Presione el botón de Ajuste de fecha/hora para ajustar la fecha y la hora.

El año parpadea en la pantalla.

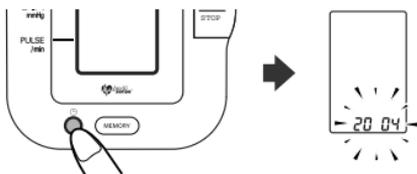

## 2. AJUSTE DEL AÑO


El año puede fijarse entre 2004 y 2030.

Cuando la pantalla llegue al año 2030, regresará al año 2004.

Presione el botón de MEMORIA para hacer avanzar los dígitos uno a la vez.

Presione el botón de Ajuste de fecha/hora para fijar el año actual.

El mes parpadea en la pantalla.

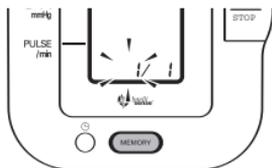


# AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA

## 3. AJUSTE DEL MES

Presione el botón de MEMORIA para avanzar en incrementos de un mes.

Presione el botón de Ajuste de fecha/hora para fijar el mes actual.

El día parpadea en la pantalla.

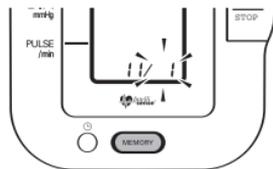

## 4. AJUSTE DEL DÍA

Presione el botón de MEMORIA para avanzar en incrementos de un día.

Presione el botón de Ajuste de fecha/hora para fijar el día actual.

La hora parpadea en la pantalla.




## 5. AJUSTE DE LA HORA

La hora se ajusta usando AM o PM.

Presione el botón de MEMORIA para avanzar en incrementos de una hora.

Presione el botón de Ajuste de fecha/hora para fijar la hora actual.

Los minutos parpadean en la pantalla.

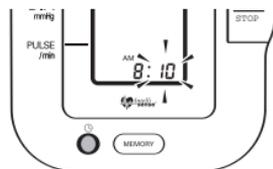

# AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA

## 6. AJUSTE DE LOS MINUTOS

Presione el botón de MEMORIA para avanzar en incrementos de un minuto.

Presione el botón de Ajuste de fecha/hora para fijar los minutos.


El año parpadea en la pantalla.




7. Presione el botón START/STOP (inicio/paro) para apagar la pantalla.

# COLOCACIÓN DEL BRAZALETE


1. Asegúrese de que el enchufe de aire esté insertado firmemente en la unidad principal.

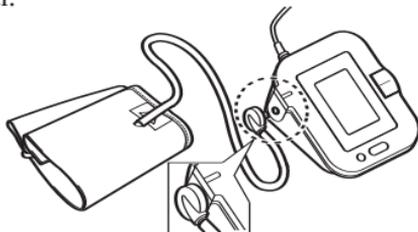

2. Quítese la ropa apretada de la parte superior del brazo.

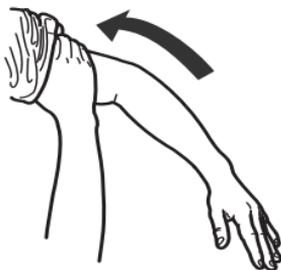


3. Siéntese en una silla con los pies en el suelo. Coloque su brazo sobre una mesa de manera que el brazalete quede a nivel de su corazón.

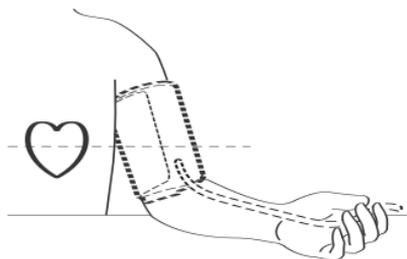

## COLOCACIÓN DEL BRAZALETE

4. Coloque el brazaletе en la parte superior de su brazo izquierdo, de manera que la flecha azul esté centrada en el interior de su brazo y alineada con su dedo medio. El tubo de aire pasa por el lado interior de su brazo. La parte inferior del brazaletе debe estar aproximadamente 1/2 pulgada arriba de su codo.

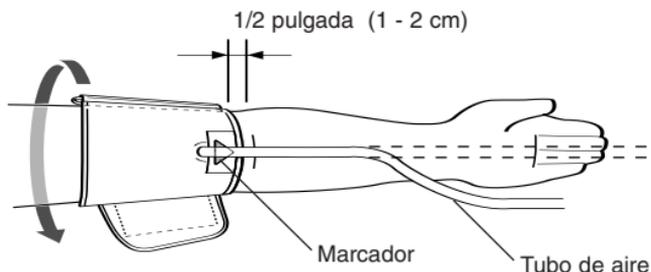

5. Envuelva firmemente el brazaletе alrededor de su brazo usando la tira de cierre.




# COLOCACIÓN DEL BRAZALETE

## COLOCACIÓN DEL BRAZALETE EN EL BRAZO DERECHO

Cuando realice una medición usando el brazo derecho, emplee la instrucción del Paso 5.

Coloque el brazalete en la parte superior de su brazo derecho de manera que la flecha azul y el tubo de aire queden al interior de su codo. La parte inferior del brazalete debe estar aproximadamente 1/2 pulgada arriba de su codo.

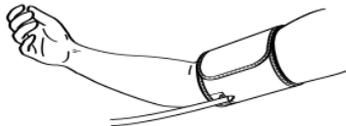

**NOTA:** Tenga cuidado de no apoyar su brazo sobre el tubo de aire. Esto restringirá el flujo de aire al brazalete


# CÓMO REALIZAR UNA MEDICIÓN

El monitor determina automáticamente el nivel de inflado ideal. En raras circunstancias, cuando puede ser necesario un mayor nivel de inflado, el monitor automáticamente vuelve a inflar el brazalete a un valor 30 mmHg más alto que el nivel de inflado inicial y reinicia la medición.

## 1. Presione el botón START/STOP (inicio/paro).

Aparecen todos los símbolos en la pantalla. El brazalete comienza a inflarse automáticamente.

A medida que se infla el brazalete, el monitor automáticamente determina su nivel de inflado ideal. Puesto que este monitor detecta el pulso incluso durante el inflado, no mueva su brazo y permanezca quieto hasta que todo el proceso de medición haya concluido.

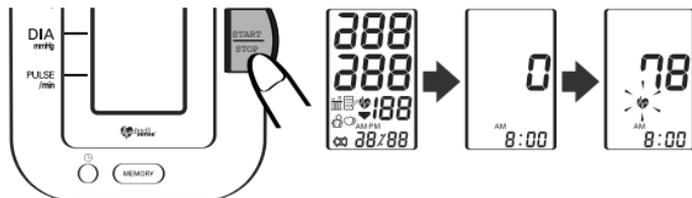

**NOTA:** Para detener el inflado o la medición, presione el botón START/STOP. El monitor detendrá el inflado, iniciará el desinflado y se apagará.

## 2. El inflado se detiene automáticamente y comienza la medición.

A medida que se desinfla el brazalete en la pantalla aparecen números de conteo regresivo. El símbolo del corazón (❤) parpadea con cada latido del corazón.




# CÓMO REALIZAR UNA MEDICIÓN

3. Cuando termina la medición, el brazalete del brazo se desinfla completamente. Aparece en la pantalla su presión arterial y frecuencia de pulsos.



4. Presione el botón **START/STOP** (**inicio/paro**) para apagar el monitor.

**NOTA:** El monitor se apagará automáticamente después de cinco minutos.

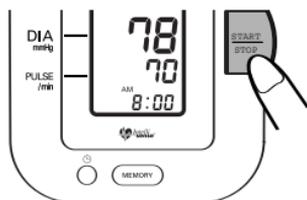

## INSTRUCCIONES PARA CONDICIONES ESPECIALES

Si sabe que su presión sistólica es más de 220 mmHg, presione y mantenga presionado el botón **START/STOP** (**inicio/paro**) hasta que el monitor se infle a un valor 30 a 40 mmHg mayor que su presión sistólica sospechada.



**NOTAS:** • No aplique más presión que la necesaria.

- El monitor no se inflará a más de 299 mmHg.

# USO DE LA FUNCIÓN DE MEMORIA

Cada vez que usted realiza una medición, el monitor almacena los valores de presión arterial y frecuencia de pulsos en la memoria. El monitor de presión arterial automáticamente almacena hasta 60 valores de medición. Cuando se han almacenado 60 conjuntos de valores de medición en la memoria, el registro más antiguo se elimina para guardar el registro más reciente.


El monitor también calcula una lectura promedio basada en los valores de las tres mediciones más recientes. Si no se han ajustado la fecha y la hora, los valores de medición no se guardarán correctamente en la memoria.

## PARA MOSTRAR EL VALOR PROMEDIO



Símbolo de valor promedio

1. Presione el botón de MEMORY (memoria). El símbolo de valor promedio aparecerá en la pantalla con la lectura promedia.

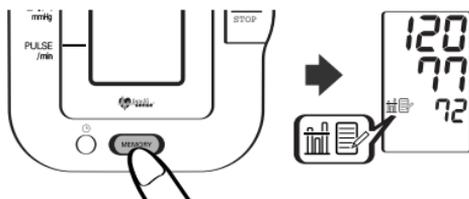


# USO DE LA FUNCIÓN DE MEMORIA

## PARA MOSTRAR LOS VALORES DE MEDICIÓN

La fecha y hora se muestran alternativamente con los valores de medición.

1. **Presione el botón de MEMORY (memoria)** para mostrar en la pantalla los valores de medición más recientes.

**Presione el botón de MEMORY (memoria) repetidamente** para mostrar los valores de medición más antiguos.

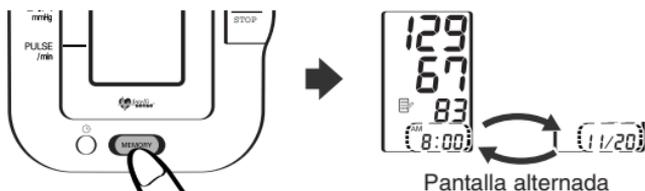


- NOTAS:**
- Presione el botón repetidamente para mostrar los siguientes valores.
  - Presione y mantenga el botón presionado para mostrar los valores más rápidamente.

2. **Presione el botón START/STOP (inicio/paro)** para desconectar la alimentación.

## PARA ELIMINAR LOS VALORES ALMACENADOS EN LA MEMORIA.

Usted no puede eliminar parcialmente los registros almacenados en la memoria. Se eliminarán todos los registros.


1. **Presione y mantenga presionado el botón de MEMORY (memoria) y el botón START/STOP (inicio/paro)** simultáneamente durante más de 2 segundos.

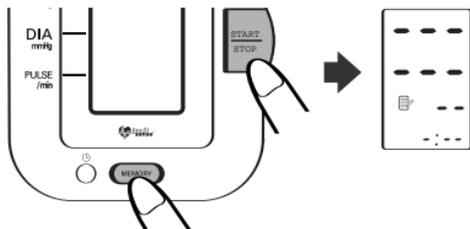

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

*Para mantener su monitor digital de presión arterial en buen estado y proteger la unidad contra daño, siga las instrucciones siguientes:*

**Guarde el monitor en su estuche de almacenamiento** cuando no lo use. Asegúrese de que el adaptador de CA esté colocado debajo de la unidad principal para no dañar la pantalla.

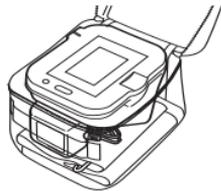

**No doble a la fuerza el brazalete** ni el tubo de aire. No los doble ajustadamente.

**Limpie el monitor con un paño suave seco.** No use limpiadores abrasivos ni volátiles. No trate de limpiar el brazalete. Nunca sumerja el monitor ni ninguno de los componentes en agua.

**Guarde el monitor en un lugar seguro y seco.** No exponga el monitor a temperaturas extremas, ya sean calientes o frías, a la humedad ni a la luz solar directa.

**Evite exponer el monitor a impactos fuertes,** como dejar caer la unidad al suelo.

**Quite las pilas** si la unidad no se va a usar por tres o más meses. Siempre reemplace todas las pilas simultáneamente con pilas nuevas.

**Use la unidad de acuerdo con las instrucciones descritas en este manual.** Use sólo piezas y accesorios autorizados.

# INDICADORES DE ERROR

SÍMBOLO	CAUSA	CORRECCIÓN
	El monitor no detectó la frecuencia de pulsos	Quítese el brazalete. Consulte la sección “Colocación del brazalete.” Espere 2 a 3 minutos. Realice otra medición.
	Brazalete inflado insuficientemente	Quítese el brazalete. Lea la sección “Cómo realizar una medición” en la página 16.
	Brazalete inflado excesivamente	
	Las pilas están gastadas	Reemplace las cuatro pilas. Consulte la sección “Instalación de las pilas”.
	Movimiento durante la medición.	Quítese el brazalete. Espere 2 a 3 minutos. Realice otra medición. Permanezca quieto durante la medición.

## SUGERENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSAS Y SOLUCIONES</b>
No hay alimentación.  No aparece ninguna pantalla en la unidad.	Reemplace las pilas.  Verifique la instalación de las pilas para asegurar la correcta ubicación de las polaridades de las pilas.
Los valores de medición aparecen demasiado altos o demasiado bajos.	La presión arterial varía constantemente. Muchos factores, entre ellos, el estrés, la hora del día, cómo se coloca el brazalete, pueden afectar la presión arterial. Repase las secciones “Antes de medir la presión arterial” y “Cómo realizara una medición”.


# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Para asegurar una lectura confiable, evite comer, fumar y hacer ejercicios los 30 minutos anteriores a la medición. Debe tratar de medir la presión arterial a la misma hora cada día. Evite realizar mediciones durante momentos de estrés.

1. Quítese la ropa apretada de la parte superior del brazo.



2. Siéntese en una silla con los pies sobre el piso y coloque su brazo sobre la mesa de manera que el brazalete quede al mismo nivel que su corazón.
3. Coloque el brazalete en la parte superior de su brazo izquierdo, de manera que la flecha azul esté hacia el interior de su brazo y alineada con su dedo medio. El tubo de aire pasa por el lado interior de su brazo. La parte inferior del brazalete debe estar aproximadamente 1/2 pulgada arriba de su codo.
4. Envuelva firmemente el brazalete alrededor de su brazo usando la tira de cierre.

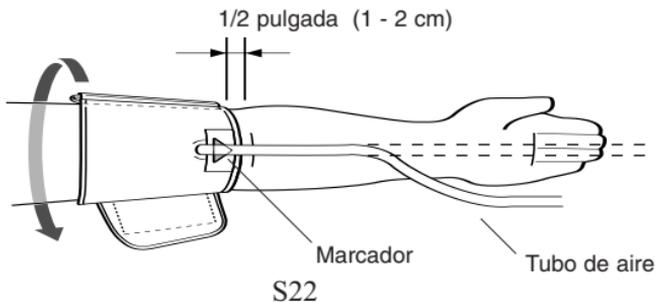


# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

5. Presione el botón START/STOP (inicio/paro).

Aparecen símbolos indicadores. El brazalete comienza a inflarse automáticamente.

Permanezca quieto y no hable durante la medición.

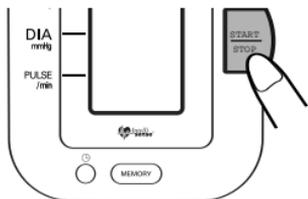

**NOTA:** Para detener el inflado o la medición, presione el botón START/STOP. El monitor detendrá el inflado, iniciará el desinflado y se apagará.

6. Cuando termina la medición, el brazalete del brazo se desinfla completamente. Aparece en la pantalla su presión arterial y frecuencia de pulsos.



**NOTA:** Espere 2 a 3 minutos entre mediciones.

El tiempo de espera permite que las arterias vuelvan al estado en que estaban antes de la medición de tensión arterial. Es posible que necesite aumentar el tiempo de espera, según sus características fisiológicas individuales.

# DECLARACIÓN DE LA FCC

## **Nota:**

### POSIBILIDAD DE INTERFERENCIA EN RADIO / TELEVISIÓN (para los EE.UU. únicamente)

Las pruebas a las que se sometió este producto comprobaron que cumple con las limitaciones establecidas para dispositivos digitales Clase B, de conformidad con la sección 15 de las Normas de la FCC.

El propósito de estas limitaciones es brindar protección razonable contra interferencias perjudiciales en el hogar. Este producto genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia radioeléctrica y, si no se lo instala y emplea según las instrucciones correspondientes, puede provocar interferencias en las comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantía alguna de que no vayan a producirse interferencias en alguna instalación en particular. Si el producto produjera algún tipo de interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y volviendo a encender el producto, se recomienda que el usuario realice alguna de las siguientes operaciones para intentar corregir la interferencia:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la distancia que separa el producto del receptor.
- Conecte el producto a un tomacorriente que integre un circuito diferente de aquél donde está conectado el receptor.
- Solicite asistencia al vendedor o a un técnico de radio/TV experimentado.

### POSIBILIDAD DE INTERFERENCIA EN RADIO / TELEVISIÓN (para Canadá únicamente)

Este aparato digital no excede las limitaciones de Clase B para emisiones de ruido de radio provenientes de aparatos digitales de conformidad con la norma para equipos que causan interferencia titulada “Digital Apparatus”, ICES-003 del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Los cambios o las modificaciones no aprobados por el partido responsable de conformidad, podrían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

# INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Su monitor automático de presión arterial IntelliSense, modelo HEM-711AC, sin incluir el brazaletes, está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra que surjan en un período de 5 años contados a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se lo utilice según las instrucciones suministradas con el monitor. El brazaletes está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra que surjan en el período de un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando el monitor sea utilizado según las instrucciones suministradas. Las garantías anteriormente descritas sólo se extienden al comprador original.

Nos comprometemos a reparar o reemplazar sin cargo y según nuestro criterio cualquier monitor o brazaletes cubierto por dichas garantías. La reparación o el reemplazo es nuestra única responsabilidad y su único recurso bajo las garantías mencionadas.

Para obtener servicios cubiertos por la garantía, comuníquese con el Servicio al Cliente de Omron Healthcare llamando al **1-800-634-4350** para obtener la dirección del local de reparación así como información sobre los gastos por envío de retorno y tramitación. La información sobre servicio cubierto por la garantía está disponible en nuestro sitio web: [www.omronhealthcare.com](http://www.omronhealthcare.com).

Incluya el comprobante de compra. Incluya una carta con su nombre, dirección, número de teléfono y descripción del problema específico. Embale cuidadosamente el producto para evitar que se dañe durante el transporte. Debido a la posibilidad de pérdida durante el transporte, recomendamos asegurar el producto y pedir acuse de recibo.

**TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE FIGURAN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA PROPÓSITOS PARTICULARES, QUEDAN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA CORRESPONDIENTE DESCRITA.** Algunas provincias no permiten limitaciones respecto al plazo de las garantías implícitas, por lo tanto la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

**OMRON NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS DEBIDO A LA PÉRDIDA DE USO NI POR NINGÚN OTRO DAÑO, GASTO O COSTO INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE.** Algunos estados no permiten la exclusión o restricción de daños resultantes o incidentales, por lo tanto, las exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, además, usted puede tener otros derechos que pueden variar según el estado de residencia.

## PARA SERVICIO AL CLIENTE

Visite nuestro sitio web:

[www.omronhealthcare.com](http://www.omronhealthcare.com)

Llame sin cargo:

1-800-634-4350

# Especificaciones

Modelo:	HEM-711AC
Pantalla:	Pantalla LCD digital
Espectro de medición:	Presión: 0 a 299 mmHg, Pulso: 40-180/min.
Memoria:	60 mediciones con fecha y hora
Precisión/calibrado:	Presión: $\pm 3$ mmHg o 2% de la medición Pulso $\pm 5\%$ de la medición
Inflado:	Automático mediante bomba eléctrica
Desinflado:	Válvula de liberación automática de presión
Liberación rápida de aire:	Válvula de escape automático
Detección de presión:	Sensor capacitivo de presión
Método de medición:	Método oscilométrico
Detección de la onda de pulso:	Sensor capacitivo de presión
Fuente de alimentación:	Adaptador de CA (o 4 pilas "AA")
Duración de las pilas:	300 usos aproximadamente, cuando se usa una vez al día durante 2 minutos con 4 pilas nuevas de manganeso estándar
Temperatura de operación/Humedad:	10°C a 40°C (50°F a 104°F) /30 a 85% humedad relativa
Temperatura de almacenamiento/Humedad:	-4°F a 140°F (-20°C a 60°C) /10 a 95% de humedad relativa
Peso de la unidad principal:	Aproximadamente 12 1/2 oz. (355 g)
Dimensiones de la unidad principal:	Aprox. 6 3/32 pulg. (largo) x 5 5/32 pulg. (ancho) x 3 5/16 pulg. (alto) (155 mm x 131 mm x 84 mm)
Tamaño del brazalete:	Aproximadamente 5 fi pulg. (ancho) x 19 pulg. (largo) (140 mm x 483 mm) Tubo del brazalete 23 5/8 pulg. (largo) (600 mm)
Circunferencia del brazalete:	Se ajusta a circunferencias de brazos de 9 pulg. a 13 pulg. (229 mm a 330 mm)
Incluye:	Unidad principal, brazalete, adaptador de CA, Manual de instrucciones y estuche de almacenamiento.
Código UPC:	0 73796 07115 8

**NOTA: Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.**

Fabricado para:  
**OMRON HEALTHCARE, INC.**  
1200 Lakeside Drive  
Bannockburn, Illinois 60015  
[www.omronhealthcare.com](http://www.omronhealthcare.com)

Hecho en China  
© 2005 Omron Healthcare, Inc.  
711ACNINST Rev