



AIIDent

equipamiento medico - odontológico



AIIDent

equipamiento medico - odontológico

CAJA MICRO MOTOR DE MESA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

EL MICRO MOTOR DE MESA ANTE UNA EVENTUALIDAD COMO ACTUAR		
PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No Enciende	No esta conectado bien a la red 220v. Fusible quemado.	Controlar que este bien conectado el cable a la red de 220 V. Revisar el fusible, sustituirlo en caso de quemado.(F2A - 20mm)
Fusible quemado	Micro Motor en corto. Cable en corto.	Enviar al servio técnico.
No funciona el Micro Motor.	Se encuentra el pedal que no acciona.	Enviarlo al servicio técnico.
No regula la velocidad del Micro Motor.	Puede estar dañado la plaqueta electrónica.	Enviar al servicio técnico.


LLAVE DE CAMBIO DE GIRO

MICRO MOTOR

REGULADOR DE VELOCIDAD

INDICADOR DE GIRO

PEDAL

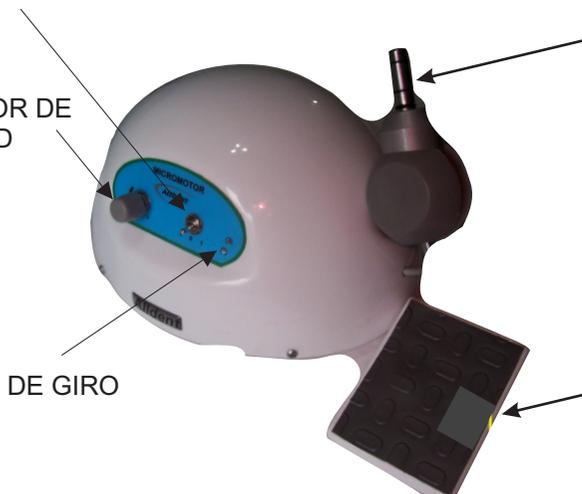

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR FAVOR LEA EL MANUAL

Advertencias



Para reducir el riesgo de descargas eléctricas no retire la cubierta inferior.
Ante cualquier inconveniente remítase al servicio técnico.



La Caja Micro Motor de Mesa funciona a 220 volts.
Tenga precaución al enchufar el Aparato a 220 V.



Esta unidad está provista con un fusible de 2A - 250V.
20 mm.



AIIDent

equipamiento médico - odontológico

Procedimiento de Uso.

- 1) Conecte el aparato a 220v. de la parte edilicia.
- 2) El Micro Motor de mesa funciona pisando el pedal.
- 3) Tenga también en cuenta que Micro Motor de mesa contiene una llave de cambio de giro con posición neutra y si se encuentra en esa posición no encenderá.
- 4) El Micro Motor de mesa gira en sentido horario y antihorario. Esto lo selecciona usted a través de la llave de cambio de giro.
- 5) Para colocar el contraángulo siempre es aconsejable que el Micro Motor no esté en funcionamiento.