

Conlight – Manual de instrucciones

Descripción del producto

Conlight es un material prefabricado en forma de gel fotopolimerizable que fue desarrollado para la cualquier modelación directa en boca. Se puede aplicar directamente desde la jeringuilla, se vacía después de repasarlo y se cuela en metal o cerámica. Es calcinable y no deja residuos. Su polimerización se hace sin tener que aplicar vacío. Conlight no está desarrollado para mantener permanentemente en boca.

Composición

Dimetacrilato de diuretano, tetrahidrofurfurilmetacrilato, sustancias tixotropicas, iniciadores foto.

Color

Amarillo, efecto fluorescente

Campos de indicación

- Para la modelación de pernos de forma directa
- Bloqueo intraoral de trabajos a colar
- Fijación intraoral de piezas a colar
- Elaboración de topes

Propiedades y ventajas

Conlight se aplica de forma líquida y sin embargo es estable. Por ejemplo, el material se puede introducir en la incrustación del canal radicular preparada y el perno puede ser modelado libremente. Debido a las propiedades del material se gasta poco en material y tiempo. Conlight no tiene sabor ni olor. Se puede repasar después de la fotopolimerización con las maquinas de luz comunes.

La modelación terminada es muy estable, precisa y se puede levantar sin deformaciones. Conlight se quema sin dejar residuos y garantiza un perfecto ajuste del trabajo colado.

Observaciones para el uso

Tras retirar la tapa de la jeringuilla es recomendable colocar la cánula de un solo uso para una aplicación exacta. Después del uso se debe volver a cerrar la jeringuilla. Para limitar la contracción durante la polimerización se deben modelar capas de Conlight de un máximo de 2 mm y seguidamente fotopolimerizar. La polimerización de capas superiores a 2 mm pueden causar la liberación de temperaturas altas y produce tensiones. Por lo tanto, un ajuste exacto no esta garantizado. Polimerizar cada capa con la lámpara halógena durante 10 segundos. Una vez terminado se procede a la fotopolimerización final de 40 segundos.

Importante: Al modelar con varias capas no se debe quitar la capa de inhibición de la superficie puesto que ella garantiza una unión óptima entre las capas y evita tensiones.

Correcciones: En caso de tener que corregir un trabajo endurecido y repasado con instrumentos rotativos éste debe de estar exento de grasas y suciedad antes de volver a aplicar el Conlight.

No quitar la capa de inhibición con acetona antes de haber terminado completamente el trabajo.

Información para el colado

El objeto se vacía y se cuela como se realiza con los materiales habituales del mercado.

Aviso de precaución

Conlight no debe estar en contacto con la mucosa o estar permanentemente en boca. En personas sensibles se puede producir una sensibilización por el producto. En este caso recomendamos no seguir usándolo.

Instrucciones para la conservación

Almacenar entre 4 y 25 °C.

Proteger las jeringuillas del calor y la luz directa del sol.

No usar después de la fecha de caducidad.

Forma de presentación

3 x 3 gramos de Conlight en jeringuillas.

9 cánulas en una caja de plástico.

Fecha de la ultima modificación: 29.05.2005

Fabricante

DeltaMed GMBH

D-61169 Friedberg

CE 0124

Este producto fue diseñado para la aplicación en el sector dental y debe ser usado según las indicaciones de uso. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por un mal uso. Además el usuario queda obligado a comprobar el material antes de su utilización, si es el adecuado para sus fines y si sobre todo si dichos fines están indicados en las instrucciones.

Legenda:

	Descripción del lote		Temperatura de almacenaje recomendada
	Consumir antes de		Xi, Irritante
	Respetar Observaciones		